

Los cojines Aero-tech son productos médicos de clase I

Uso previsto

Invacare Aero-tech Uno es un cojín de aire de una sola válvula que ha sido específicamente diseñado para aquellos pacientes que presentan un "Riesgo muy alto" de desarrollar úlceras por presión.

Restricciones en el uso

El peso mínimo del usuario para este cojín es de 20 kg, el peso máximo del usuario es de 150 kg.

El Aero-tech Uno está totalmente desprovisto de alérgenos presentes en el látex (BGFA, Bochum menor a 0). Se debe realizar una evaluación del riesgo antes del primer uso.

Tiempo de vida útil

El cojín Aero-tech Uno tiene un tiempo de vida útil de aproximadamente 3 años.



Declaración CE:

Los cojines Aero-tech están diseñados de conformidad con todos los requisitos relativos a productos médicos establecidos en la directiva 93/42/CEE de la Comunidad Europea.

Producido por:

Wolff Kunststoffe GmbH



Aero-tech
Uno

INSTRUCCIONES DE USO



Yes, you can.®

Manual del usuario del Invacare Aero-tech Uno

Instrucciones de uso

- Retire el embalaje del cojín Invacare Aero-tech.
- Piezas incluidas: cojín, cubierta de nailon, inflador, manual del usuario y kit de reparación.
- Opción adicional: cubierta protectora (se compra por separado).
- Si recibe el producto en malas condiciones, comuníquese con el proveedor.

Instalación

1. Gire la válvula de aire en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.
2. Conecte el tubo del inflador a la válvula del cojín.
3. Infle el cojín hasta que comience a arquearse.
4. Cierre la válvula de aire. Para ello, gire el inflador en el sentido de las agujas del reloj. Quite el inflador.

Ajuste

Siente al individuo sobre el cojín Aero-tech Uno. Abra la válvula de aire para desinflar el cojín a fin de que la persona se hunda cómodamente; sin embargo, asegúrese de que su parte inferior no toque la base del cojín.

Introduzca su mano entre la parte inferior del individuo y la base del cojín para asegurarse de que se encuentre correctamente posicionado.

La distancia entre el punto más profundo de una persona sentada (generalmente las tuberosidades isquiáticas) y la base del cojín debe ser aproximadamente 2 cm.




Cojín y cubierta



Inflador

Kit de reparación

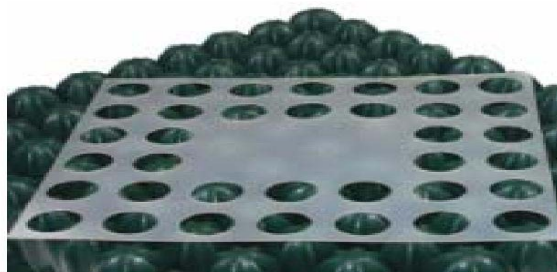

Placa adicional

Limpieza y mantenimiento

Invacare recomienda el uso de la funda Aero-tech para el cojín Aero-tech.

Tanto el cojín como la funda pueden lavarse en una lavadora. La funda puede lavarse en la lavadora con una temperatura de entre 40° C y 60° C.

El cojín puede lavarse en la lavadora con una temperatura de entre 30° C y 40° C.

Asegúrese de que las válvulas del cojín estén cerradas durante este proceso.



Los cojines Invacare Aero-tech son resistentes al agua salada.

El cojín está fabricado con goma natural; por lo tanto, no debe ser expuesto a la luz del sol (rayos ultravioletas), ya que podría ocasionar el desgaste prematuro del material.

Los requisitos de almacenamiento, limpieza y mantenimiento han sido establecidos de conformidad con la norma DIN 7716.

Garantía

Los cojines Invacare Aero-tech tienen una garantía de fabricación de 2 años.