

# Rea® Focus™

Rea®Focus™, Rea®Focus™150



sv **Manuell rullstol**  
**Bruksanvisning**



Den här bruksanvisningen måste ges till användaren.  
Innan du använder produkten måste du läsa denna bruksanvisning  
och spara den för framtida behov.

**rea**



**Yes, you can.**

©2023 Invacare Corporation

Med ensamrätt. Innehållet får inte ges ut på nytt, mångfaldigas eller förändras helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Invacare. Varumärken betecknas med ™ och ®. Samtliga varumärken tillhör eller är licensierade till Invacare Corporation eller dess dotterbolag om ingenting annat anges.

# Innehållsförteckning

<b>1 Allmänt</b> . . . . .	<b>4</b>	5.2 Leveranskontroll . . . . .	29
1.1 Inledning . . . . .	4	5.3 Montera drivhjulen . . . . .	29
1.2 Symboler som används i manualen . . . . .	4	5.4 Montera sitsen . . . . .	29
1.3 Information om garanti . . . . .	4	5.5 Montera ryggstödsbygeln . . . . .	29
1.4 Ansvarsbegränsning . . . . .	4	5.6 Sätta fast armstöden . . . . .	29
1.5 Överensstämmelse . . . . .	4	5.7 Sätta fast benstöden . . . . .	30
1.5.1 Produktspecifika standarder . . . . .	4	5.7.1 Fasta benstöd . . . . .	30
1.6 Produktlivslängd . . . . .	4	5.7.2 Vinkeljusterbara benstöd . . . . .	30
<b>2 Säkerhet</b> . . . . .	<b>6</b>	<b>6 Använda rullstolen</b> . . . . .	<b>31</b>
2.1 Säkerhetsinformation . . . . .	6	6.1 Safety information . . . . .	31
2.2 Säkerhetsutrustning . . . . .	7	6.2 Bromsa under färd . . . . .	31
2.3 Etiketter och symboler på produkten . . . . .	7	6.3 Flytta till/från rullstolen . . . . .	32
<b>3 Produktöversikt</b> . . . . .	<b>8</b>	6.4 Köra och styra rullstolen . . . . .	32
3.1 Produktbeskrivning . . . . .	8	6.5 Manövrera rullstolen över trappsteg och trottoarkanter . . . . .	33
3.2 Avsedd användning . . . . .	8	6.6 Köra upp- och nedför trappor . . . . .	34
3.3 Rullstolens huvuddelar . . . . .	8	6.7 Manövrera rullstolen på ramper och lutande underlag . . . . .	34
3.4 Manuella hjulbromsar . . . . .	9	6.8 Stabilitet och balans när du sitter i rullstolen . . . . .	34
3.5 Ryggstöd . . . . .	9	<b>7 Transport</b> . . . . .	<b>36</b>
3.6 Justera ryggstöds höjden . . . . .	9	7.1 Säkerhetsinformation . . . . .	36
3.6.1 Fast ryggstöd och ryggstöd med justerbar spänning . . . . .	9	7.2 Fälla ned ryggstödsbygeln . . . . .	36
3.6.2 Ryggstöd med dubbla vinklar . . . . .	10	7.3 Ta bort armstöden . . . . .	36
3.6.3 Luta ryggstödet . . . . .	10	7.4 Fälla ihop sitsen . . . . .	36
3.7 Justera formen – ryggstöd med justerbar spänning . . . . .	11	7.5 Fasta benstöd . . . . .	36
3.8 Justera ryggstöds vinkeln . . . . .	11	7.6 Vinkeljusterbara benstöd . . . . .	36
3.8.1 Justera ryggstöds vinkeln . . . . .	12	7.7 Bromsspak . . . . .	36
3.8.2 Ryggstöd med dubbla vinklar . . . . .	12	7.8 Ta bort drivhjulen . . . . .	36
3.8.3 Luta ryggstödet . . . . .	12	7.9 Lyfta rullstolen . . . . .	37
3.9 Justera körhandtagen . . . . .	13	7.10 Transportera elrullstolen utan brukare . . . . .	37
3.10 Armstöd . . . . .	13	7.11 Transportera rullstolen i ett fordon när brukaren sitter i den . . . . .	37
3.10.1 Uppfällbara armstöd . . . . .	14	<b>8 Underhåll</b> . . . . .	<b>41</b>
3.10.2 Löstagbara armstöd . . . . .	14	8.1 Säkerhetsinformation . . . . .	41
3.10.3 Höjdjusterbara armstöd . . . . .	14	8.2 Underhållsschema . . . . .	41
3.11 Justera sittdjupet . . . . .	14	8.3 Åtdragningsmoment . . . . .	42
3.12 Justera sittbredden . . . . .	14	8.4 Rengöring och desinfektion . . . . .	43
3.13 Justera sitsen . . . . .	15	8.4.1 Allmän säkerhetsinformation . . . . .	43
3.14 Benstöd . . . . .	15	8.4.2 Rengöringsintervall . . . . .	43
3.14.1 Svängbara, vinkelfasta benstöd . . . . .	15	8.4.3 Rengöring . . . . .	43
3.14.2 Svängbara, vinkeljusterbara benstöd . . . . .	15	8.4.4 Desinfektion . . . . .	43
3.14.3 Justera amputationsbenstödet . . . . .	17	<b>9 Felsökning</b> . . . . .	<b>44</b>
3.14.4 Justera fotstöd i en del . . . . .	17	9.1 Säkerhetsinformation . . . . .	44
3.15 Sittdyna . . . . .	17	9.2 Identifiera och åtgärda problem . . . . .	45
<b>4 Tillval</b> . . . . .	<b>18</b>	<b>10 Återanvändning</b> . . . . .	<b>46</b>
4.1 lläggsdyna till sits . . . . .	18	10.1 Förvaring . . . . .	46
4.2 Svängbart bälstöd . . . . .	18	10.2 Rekonditionering . . . . .	46
4.3 Fast arm till bälstödet . . . . .	18	10.3 Kassering . . . . .	46
4.4 Huvudstöd/nackstöd . . . . .	19	<b>11 Teknisk Data</b> . . . . .	<b>47</b>
4.4.1 Ryggstöd med dubbla vinklar . . . . .	19	11.1 Mått och vikt . . . . .	47
4.4.2 Lutbart ryggstöd . . . . .	19	11.1.1 Maxvikt för borttagbara delar . . . . .	48
4.5 Tramprör . . . . .	23	11.2 Däck . . . . .	48
4.6 Brickbord . . . . .	23	11.3 Material . . . . .	48
4.6.1 Fästen för brickbordet . . . . .	23	11.4 Miljöförhållanden . . . . .	49
4.6.2 Justering av djup . . . . .	24	11.5 Tabeller med sitthöjder . . . . .	49
4.6.3 Lås brickbordet . . . . .	24	11.5.1 Rea Focus hög – 515 x 35 mm (20 x 1 3/8 tum) . . . . .	49
4.7 Dyna för brickbord . . . . .	24	11.5.2 Rea Focus hög – 560 x 35 mm (22 x 1 3/8 tum) . . . . .	50
4.8 Tippskydd . . . . .	24	11.5.3 Rea Focus hög – 560 x 25 mm (22 x 1 tum) . . . . .	50
4.8.1 Montera det svängbara tippskyddet . . . . .	25	11.5.4 Rea Focus hög – 610 x 35 mm (24 x 1 3/8 tum) . . . . .	51
4.8.2 Svängbart tippskydd . . . . .	25	11.5.5 Rea Focus hög – 610 x 25 mm (24 x 1 tum) . . . . .	51
4.8.3 Ordinarie tippskydd . . . . .	26	11.5.6 Rea Focus låg – 515 x 35 mm (20 x 1 3/8 tum) . . . . .	52
4.9 Hemiplegi-armstöd . . . . .	26	11.5.7 Rea Focus låg – 560 x 35 mm (22 x 1 3/8 tum) . . . . .	53
4.10 Lateralastöddynor (endast för justerbart ryggstöd) . . . . .	26	11.5.8 Rea Focus låg – 560 x 25 mm (22 x 1 tum) . . . . .	53
4.11 Höftbälte . . . . .	27	11.5.9 Rea Focus låg – 610 x 35 mm (24 x 1 3/8 tum) . . . . .	54
4.11.1 Montera höftbältet . . . . .	28	11.5.10 Rea Focus låg – 610 x 25 mm (24 x 1 tum) . . . . .	54
4.12 Luftpump . . . . .	28		
4.13 Reflexer . . . . .	28		
4.14 Käpphållare . . . . .	28		
<b>5 Inställningar</b> . . . . .	<b>29</b>		
5.1 Säkerhetsinformation . . . . .	29		

# 1 Allmänt

## 1.1 Inledning

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hantering av produkten. Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsinstruktionerna för att försäkra dig om att du använder produkten på ett säkert sätt.

Använd endast den här produkten om du har läst och förstått den här handboken. Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal som känner till dina medicinska tillstånd och rådgör med personalen om korrekt användning och nödvändig justering.

Observera att det kan finnas avsnitt i den här bruksanvisningen som inte gäller för din produkt eftersom bruksanvisningen avser alla tillgängliga modeller (vid tidpunkten för tryckning). Om inget annat anges hänvisar varje avsnitt i den här bruksanvisningen till alla modeller av produkten.

De modeller och konfigurationer som är tillgängliga i ditt land återfinns i de landsspecifika försäljningsdokumenten.

Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan ytterligare meddelande.

Kontrollera att du har den senaste versionen av det här dokumentet innan du läser det. Du hittar den senaste versionen som PDF-fil på Invacares webbplats.

Om du tycker att teckensnittstorleken i den tryckta versionen av bruksanvisningen är svår att läsa kan du ladda ned PDF-versionen från webbplatsen. Du kan sedan förstora PDF-filen på skärmen till en teckensnittstorlek som passar dig bättre.

Kontakta en Invacare-distributör om du vill ha mer information om produkten, till exempel produktsäkerhetsmeddelanden och produktåterkallelser. Adresser finns i slutet av det här dokumentet.

Om en allvarlig incident inträffar med produkten bör du informera tillverkaren och den behöriga myndigheten i ditt land.

## 1.2 Symboler som används i manualen

Symboler och signalord som används i denna manual och gäller för faror eller farliga förfaranden som kan leda till personskador eller materiella skador. Symbolerna definieras nedan.



### VARNING

Anger en riskfylld situation som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.



### FÖRSIKTIGT

Anger en riskfylld situation som kan leda till lättare skada om den inte undviks.



### OBS

Anger en riskfylld situation som kan leda till skada på egendom om den inte undviks.



### Råd

Ger användbara råd, rekommendationer och information för en effektiv och problemfri användning.



### Verktyg

Identifierar vilka verktyg, komponenter och föremål som behövs för att utföra visst arbete.

## Andra symboler

(Gäller ej alla bruksanvisningar)



### Ansvarig person i Storbritannien

Anger om en produkt inte tillverkas i Storbritannien.



### Triman

Anger regler för återvinning och återvinning (gäller endast Frankrike).

## 1.3 Information om garanti

Vi tillhandahåller en tillverkargaranti för produkten i enlighet med våra allmänna affärsvillkor i respektive land.

Garantianspråk kan endast göras genom den leverantör som tillhandahöll produkten.

## 1.4 Ansvarsbegränsning

Invacare ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av

- att bruksanvisningen inte följs
- felaktig användning
- normalt slitage
- felaktig montering eller inställning som utförs av köparen eller tredje part
- tekniska ändringar
- obehöriga ändringar och/eller användning av olämpliga reservdelar.

## 1.5 Överensstämmelse

Kvalitet är absolut grundläggande för företagets verksamhet, och vi arbetar i enlighet med standarden ISO 13485.

Den här produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen (MDR) 2017/745 klass 1.

Vi arbetar ständigt på att se till att företaget påverkar lokal och global miljö så lite som möjligt.

Vi använder endast material och komponenter som följer REACH-direktivet.

### 1.5.1 Produktspecifika standarder

Rullstolen har testats i enlighet med EN 12183. Ett antändlighetstest ingår.

Kontakta din lokala representant för Invacare om du vill ha mer information om lokala standarder och bestämmelser. Adresser finns i slutet av det här dokumentet.

## 1.6 Produktlivslängd

Denna produkts förväntade livslängd är fem år när den används dagligen i enlighet med de säkerhetsinstruktioner, underhållsintervall och korrekt användning som anges i

denna bruksanvisning. Den faktiska livslängden kan variera beroende på hur mycket och intensivt produkten används.

## 2 Säkerhet

### 2.1 Säkerhetsinformation

Det här kapitlet innehåller viktig information om säkerhet för rullstolsanvändaren och dennes eventuella assistent samt information för en säker och problemfri användning av rullstolen.



#### **VARNING!**

##### **Risk för dödsfall eller allvarlig skada**

Vid brand eller rök utsätts rullstolsbrukare för en särskilt stor risk för dödsfall eller allvarlig skada, då de inte kan förflytta sig bort från källan till elden eller röken. Tända tändstickor, tändare och cigaretter kan orsaka öppna lågor kring rullstolen eller på kläderna.

- Undvik att använda eller förvara rullstolen i närheten av öppna lågor eller brännbara produkter.
- Rök inte under användning av rullstolen.



#### **VARNING!**

##### **Risk för olyckor och allvarlig skada**

Olyckor som medför allvarliga skador kan uppstå om rullstolen är feljusterad.

- Justeringar på rullstolen måste alltid utföras av en behörig tekniker.



#### **VARNING!**

##### **Risk för att du välter**

Förhållandet mellan den longitudinella positionen på rullstolens drivhjulsaxel och positionen på ryggstödet kan påverka rullstolens stabilitet.

- En position mer framåt gör rullstol mindre stabil och ökar risken för att tippa bakåt, men förbättrar manövrerbarheten genom ett bättre greppläge för styrningarna och en kort vändradie.
- På samma sätt gör en position på drivhjulaxeln som är mer bakåt att rullstolen blir mer stabil och svårare att luta, men manövrerbarheten minskar.
- Beroende på brukarens förmåga och de specifika säkerhetsgränserna kan minskningen av rullstolens stabilitet kompenseras med installation av ett tippskydd.



#### **VARNING!**

##### **Risk vid lutning**

Drivhjulaxelns läge och rullstolens ryggstödsvinkel är två viktiga justeringar som kan påverka stabiliteten när du sitter i rullstolen.

- Dessa ändringar och eventuella justeringar av framhjulens lägen och/eller gaffelvinkeln på din rullstol får endast utföras enligt direktiv från en behörig tekniker som fullständigt har riskbedömt konsekvenserna av ändringar av rullstolens konfiguration. Rådgör därför med din auktoriserade leverantör.



#### **VARNING!**

##### **Risk för olycka om inte körstilen anpassas till omständigheterna**

Det finns risk för sladd på vått underlag, grus eller ojämn terräng.

- Anpassa alltid hastigheten och körstilen till omständigheterna (väder, underlag, körförmåga osv.).



#### **VARNING!**

##### **Risk för personskador**

Vid en kollision riskerar du att skada kroppsdelar som befinner sig utanför rullstolen (t.ex. fötter eller händer).

- Undvik obromsade kollisioner.
- Kör aldrig rakt in i föremål.
- Kör försiktigt genom smala passager.



#### **VARNING!**

##### **Risk för att tappa kontrollen över rullstolen**

I hög hastighet finns det risk för att du tappar kontrollen över rullstolen och välter.

- Kör aldrig fortare än 7 km/h.
- Undvik kollisioner i allmänhet.



#### **FÖRSIKTIGT!**

##### **Risk för att du bränner dig**

Rullstolens delar kan bli mycket varma om de utsätts för yttre värmekällor.

- Utsätt inte rullstolen för starkt solljus före användning.
- Innan du använder rullstolen ska du känna efter om delar som kommer i kontakt med huden är varma.



#### **FÖRSIKTIGT!**

##### **Risk för att du klämmer fingrarna**

Det finns alltid en risk för att t.ex. fingrar eller armar fastnar i rullstolens rörliga delar.

- Se till att inget fastnar när du aktiverar fäll- eller införingsmekanismerna på rörliga delar såsom drivhjulets löstagbara axel, ryggstödet eller tippskyddet.



#### **FÖRSIKTIGT!**

##### **Tipprisk**

Ytterligare belastning (ryggsäck eller liknande) som hängs på rullstolens ryggstödsrör kan påverka rullstolens stabilitet bakåt, särskilt när den används i kombination med vinklingsbara ryggstöd.

- Invacare rekommenderar starkt att tippskydd används (finns som tillval) när ytterligare belastning hängs över ryggstödsrören.



#### **FÖRSIKTIGT!**

##### **Risk för personskador**

- Om du har ett trycksår eller skadad hud ska du skydda din skada så att den inte kommer i direkt kontakt med enhetens klädsel. Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal för medicinska råd.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för personskador**

När rullstolen används i kombination med en annan enhet gäller båda enheternas begränsningar för kombinationen. Exempelvis kan brukarens maxvikt för enheten vara lägre.

- Använd endast i kombinationer med andra enheter som är tillåtna enligt Invacare. Kontakta en auktoriserad leverantör för mer information.
- Innan användning ska du läsa bruksanvisningen för varje enhet och kontrollera begränsningarna.

## 2.2 Säkerhetsutrustning

**WARNING!****Olycksrisk**

Säkerhetsutrustning som är felaktigt inställd eller som inte längre fungerar (bromsar, tippskydd) kan orsaka olyckor.

- Kontrollera alltid att säkerhetsutrustningen fungerar innan du använder rullstolen och se till att den kontrolleras regelbundet av en behörig tekniker. Förskrivare eller annan person med relevant utbildning.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för personskador**

Delar som ej är original eller som är felaktiga kan påverka produktens funktion och säkerhet.


- Använd endast originaldelar för den produkt som används.
- På grund av regionala skillnader ska du kontrollera din lokala Invacare-katalog eller webbplats för tillgängliga tillval eller kontakta din lokala Invacare-representant. Adresser finns i slutet av det här dokumentet.

Säkerhetsutrustningens funktioner beskrivs i kapitel 3 *Produktöversikt, sida 8*.

## 2.3 Etiketter och symboler på produkten

### Serienummeretikett

Serienummeretiketten sitter på rullstolens ram och innehåller följande information:

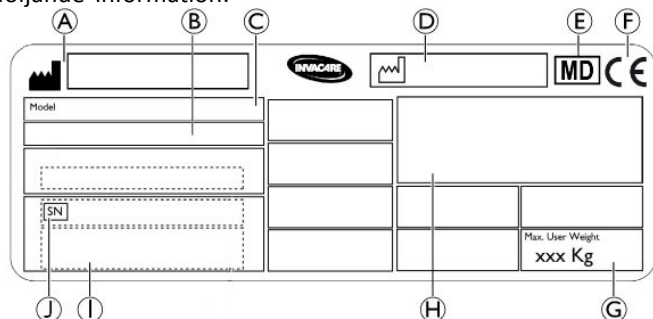

- (A) Tillverkarens adress
- (B) Sittbredd
- (C) Produktbeskrivning
- (D) Tillverkningsdatum
- (E) Medicinteknisk produkt
- (F) Europeisk överensstämmelse
- (G) Brukarens maxvikt
- (H) EAN/HMI-streckkod
- (I) Streckkod för serienummer
- (J) Serienummer

	Läs bruksanvisningen
	Indikerar en riskfylld situation som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.

### Varningsetikett för ej låsbara sidostöd

	Lyft inte rullstolen med hjälp av de ej låsbara sidodelarna.
--	--

### Informationsetikett om höftbälte

	Höftbältet sitter korrekt när det finns precis tillräckligt med utrymme så att du kan föra in handen mellan kroppen och bältet.
--	---

### Karbinhakesymboler

Beroende på utförande kan vissa rullstolar användas som sits i ett motorfordon, andra inte.

	Fästpunkter där fastspänningsremmar ska fästas om rullstolen transporteras i ett motorfordon medan brukaren sitter i den. Den här symbolen finns bara på rullstolar som beställs med en transportsats som tillval.
--	--

	<b>VARNINGSSYMBOL</b> Denna rullstol är inte utformad för persontransport i ett motorfordon. Denna symbol sitter på ramen nära serienummeretiketten.
--	---

## 3 Produktöversikt

### 3.1 Produktbeskrivning

Detta är en aktivrullstol, medium, med horisontell fällmekanism, fast fällbar sittplatta och svängbara benstöd.

- !** **OBS!**  
Rullstolen tillverkas och konfigureras individuellt enligt specifikationerna i beställningen. Specifikationen måste upprättas av vårdpersonal i enlighet med brukarens krav och hälsotillstånd.
- Kontakta vårdpersonal om du vill anpassa rullstolens konfiguration.
  - Eventuell anpassning ska utföras av behörig tekniker.

### 3.2 Avsedd användning

Den medelaktiva rullstolen är avsedd att ge rörlighet till personer som är begränsade till sittande ställning och som ofta själva kör fram rullstolen.

Rullstolen får användas inomhus och utomhus på plan mark och tillgänglig terräng.

#### Avsedda användare

Rullstolen är avsedd för personer från 12 år och uppåt

(ungdomar och vuxna). Vikten på den rullstolsburna får inte överstiga den maximala användarvikten som anges i avsnittet Tekniska data och på identifieringsetiketten.

Den avsedda användaren är den som sitter i rullstol och/eller en assistent.


Användaren ska fysiskt och mentalt kunna använda rullstolen på ett säkert sätt (t.ex. för att driva, styra, bromsa).

#### Indikationer/ kontraindikationer

- Avsevärd för fullständig försämring av rörligheten på grund av strukturella och/eller funktionella skador på nedre extremiteter.
- Tillräcklig styrka och greppfunktion hos armar och händer för att driva rullstolen.

Det finns inga kända kontraindikationer när rullstolen används på avsett sätt.

### 3.3 Rullstolens huvuddelar

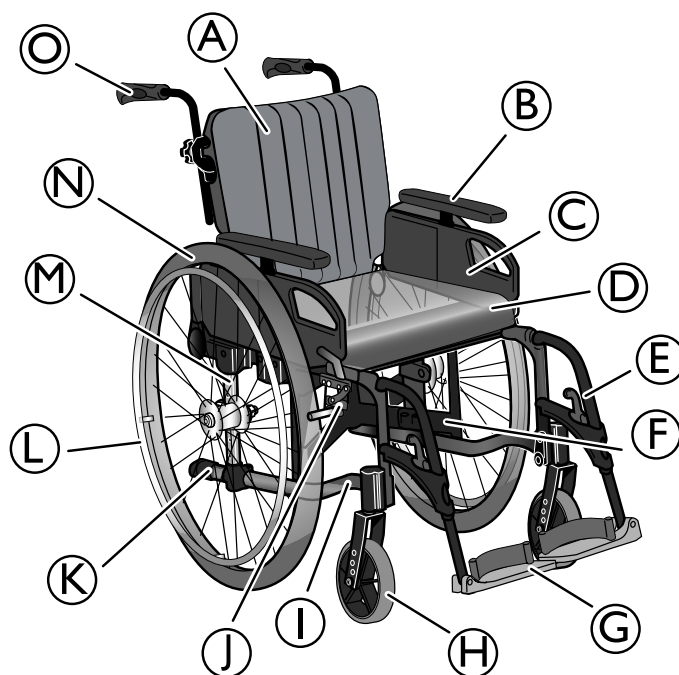

- Ⓐ Ryggstödsklädsel
- Ⓑ Armstöd
- Ⓒ Sidoskydd
- Ⓓ Sits
- Ⓔ Benstöd, svängbara
- Ⓕ Krysstag
- Ⓖ Fotstöd
- Ⓗ Länkhjul
- Ⓘ Ram
- Ⓝ Parkeringsbroms
- Ⓚ Tippskydd
- Ⓛ Drivring
- Ⓜ Drivhjulsfäste
- Ⓝ Drivhjul
- Ⓞ Körhandtag

**i** Rullstolens utrustning kan skilja sig från bilden eftersom varje rullstol tillverkas separat enligt de beställda specifikationerna.



### 3.4 Manuella hjulbromsar

Parkeringsbromsen används för att låsa rullstolen när den är stillastående för att hindra att den rullar iväg.



#### **WARNING!**

##### **Risk för att välta vid kraftig inbromsning**

Om du aktiverar parkeringsbromsarna medan du befinner dig i rörelse finns det risk för att du tappar kontrollen över rullstolens riktning. Den kan då stanna mycket plötsligt, vilket kan leda till att du kolliderar med något eller trillar ur rullstolen.

- Aktivera aldrig parkeringsbromsarna när du befinner dig i rörelse.



#### **WARNING!**

##### **Risk för att tappa kontrollen över rullstolen**

- Parkeringsbromsarna måste användas samtidigt.
- Försök inte bromsa rullstolens fart med parkeringsbromsarna.



#### **WARNING!**

##### **Risk för att du välter**

Parkeringsbromsarna fungerar inte som de ska om det är för lite luft i däcken.

- Kontrollera att däcktrycket är korrekt, 11.2 Däck, sida 48.



#### **FÖRSIKTIGT!**

##### **Klämrisk**

Det kan finnas ett litet mellanrum mellan drivhjulet och parkeringsbromsen där det finns risk för att fastna med fingrarna.

- Akta fingrarna för rörliga delar när du använder bromsen, håll alltid handen på bromsspaken.



Avståndet mellan bromsbacken och däck kan justeras. Justeringen måste utföras av en behörig tekniker.

För att använda bromsen, se stycket Använda rullstolen, avsnitt 6.2 Bromsa under färd, sida 31.

### 3.5 Ryggstöd

Det finns tre typer av ryggstöd (fast, vinkeljusterbar och assistent manövrerad ryggvinkling) tillgängliga.



#### **WARNING!**

##### **Risk för allvarlig skada**

Om rullstolen lutar uppåt med en användare som väger mer än 125 kg kan ryggstöd utsättas för utmattning, krökas eller gå sönder.

- Luta inte rullstolen uppåt med en användare som väger mer än 125 kg.

### 3.6 Justera ryggstödshöjden



#### **WARNING!**

##### **Tipprisk**

Ytterligare belastning (ryggsäck eller liknande) som hängs på rullstolens ryggstödsstolpe kan påverka rullstolens stabilitet bakåt. Det finns en risk för att rullstolen tippas bakåt vilket kan leda till skada.

- Invacare rekommenderar därför starkt att tippskydd används (finns som tillval) när ytterligare belastning (ryggsäck eller liknande) hängs på ryggstödsstolpen.




Ryggstödsklädselns höjd kan justeras på ryggstödsrören. Justeringen måste utföras av en behörig tekniker.



#### **WARNING!**

##### **Säkerhetsrisk**

- Se alltid till att ryggstödet sitter ordentligt fast.

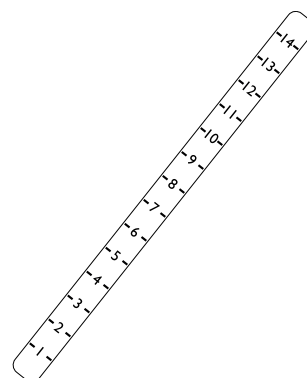

Etiketten som sitter på ryggrören hjälper dig ställa in samma höjd på båda sidor. Etiketten har olika storlek beroende på typen av ryggstöd.

#### 3.6.1 Fast ryggstöd och ryggstöd med justerbar spänning




#### **WARNING!**


##### **Tipprisk**

Om ryggstödsklädseln av standardmått blir lös försämras rullstolens balanspunkt.


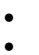
- Lös ryggstödsklädsel av standardmått måste bytas ut av en behörig tekniker.

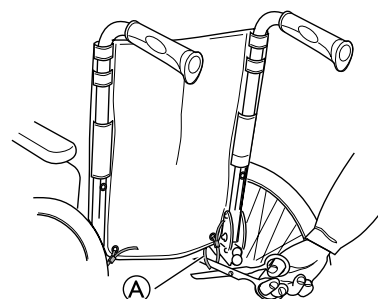

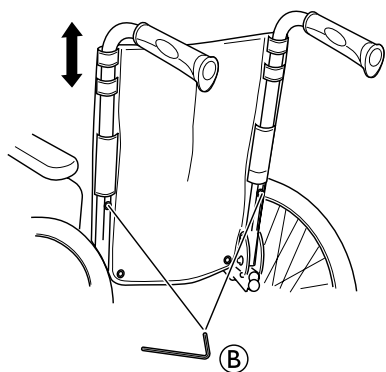

1. Ta bort buntbanden ① längst ned på ryggsstödsklädseln.




2. Lossa skruvarna ② på ryggrören.
3. Sänk eller höj ryggsstödet till önskad position.
4. Dra åt skruvarna ② igen.



-  • 5 mm insexnyckel  
 • En sax

 Justera ryggsstödsklädseln så att den täcker så mycket som möjligt av ryggsstödet.

 Fäst ryggsstödsklädseln med nya buntband när du har justerat ryggsstödet och dra åt ordentligt.
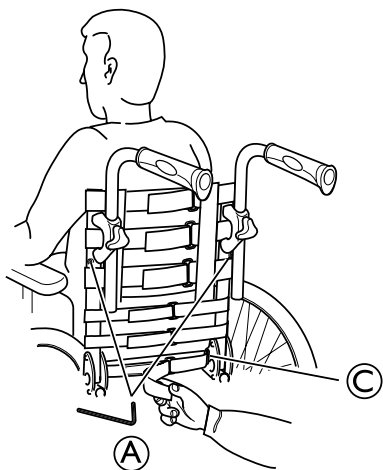
### 3.6.2 Ryggsstöd med dubbla vinklar



1. Lossa skruvarna ①.
2. Justera ryggsstödet till önskad position.
3. Dra åt skruvarna ①.
  -  När du justerar höjden på ryggsstödet kan det hända att de nedre kardborrebanden behöver justeras.
4. Vid behov kan du vika ned kardborreklädseln och ta bort de band som du inte använder.
  -  Det nedre kardborrebandet måste föras genom öppningen på framsidan av ryggsstödsfästet ③. Det förhindrar att klädseln glider framåt.

### 3.6.3 Luta ryggsstödet



#### VARNING!

#### Tipprisk

Flytta inte rullstolen när ryggsstödet är i bakåtlutat läge.

– Invacare rekommenderar starkt att tippskydd används (finns som tillval) när ryggsstödet är i bakåtlutat läge.




#### VARNING!

#### Risk för personskador

Ryggsstödet sitter inte fast


– Det lutbara ryggsstödet har två säkerhetsklämmor som håller fast ryggsstödet i ryggsstödsrören. Se till att ryggsstödet sitter fast i sitt läge och att säkerhetsklämmorna sitter ordentligt efter varje justering.

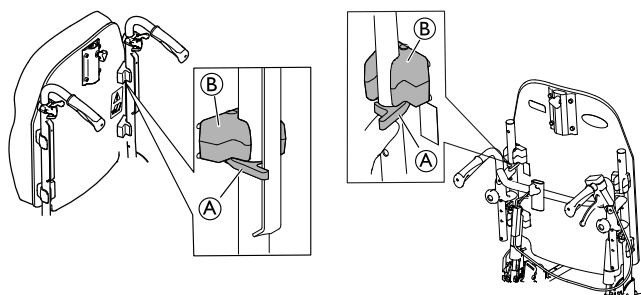


Lutbart ryggsstöd utan gasfjäder

Lutbart ryggsstöd med gasfjäder


1. Lossa de två säkerhetsklämmorna ① från ryggsstödsrören.

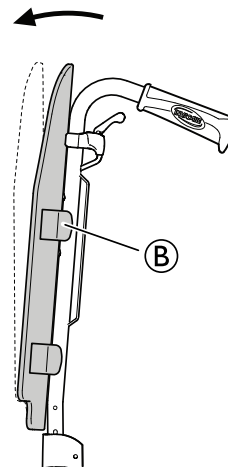


2. Lossa de två övre fästena ② från ryggsstödsrören.

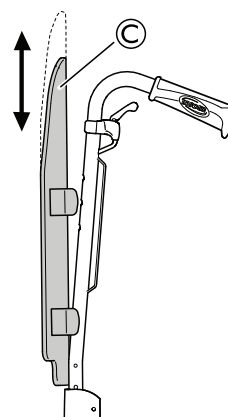


- Justera till önskad höjd genom att skjuta ryggstödet © uppåt eller nedåt på ryggstödsrören.
  - Det lutbara ryggstödet utan gasfjäder kan justeras till tre fasta lägen (0, 40 och 80 mm).
  - Det lutbara ryggstödet med gasfjäder kan justeras till två fasta lägen (0 och 40 mm).

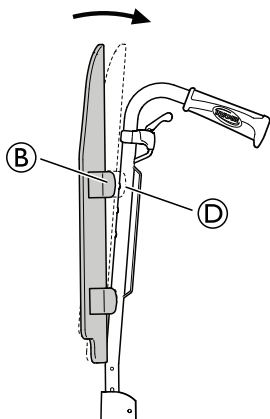

- Passa in stiften på de övre fästena B i hålen på ryggstödsrören D.

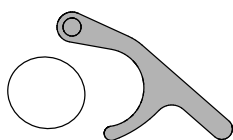

Säkerhetsklämma A har lossats

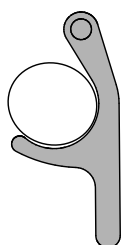


Säkerhetsklämma A har satts fast

- Sätt fast de två säkerhetsklämmorna A igen.

### 3.7 Justera formen – ryggstöd med justerbar spänning

**i** Formen på ryggstödet med justerbar spänning kan justeras med kardborrebanden. Till exempel kan remmarna i ländryggen dras åt så att de ger det svängbara stödet ett bra stöd och brukaren en mer upprätt sittställning.

- Vik bort ryggstödsklädseln från ryggstödet med kardborrebanden.

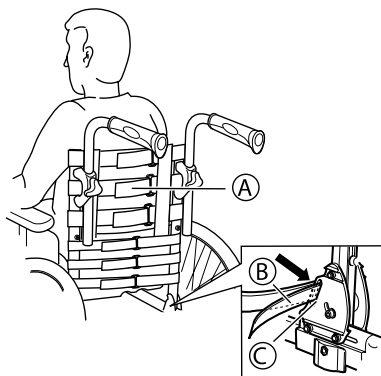

- Justera kardborrebanden A till önskad form.

**i** Brukaren måste sitta i rullstolen för att ryggstödet ska kunna justeras efter brukarens behov av stöd och komfort.

- Fixera det lägsta kardborrebandet i ryggstödsfästet © efter justeringen. Detta fixerar ryggstödet med kardborreband.
- Vik tillbaka ryggstödsklädseln och sätt fast klädseln med kardborrebandet.



#### **VARNING!**

##### **Tipprisk**

Om banden sitter för löst får rullstolen sämre balanspunkt.  
– Kontrollera att banden är ordentligt åtdragna.



#### **OBS!**

– Spänn inte åt banden för hårt eftersom det kan ändra rullstolens mått.



#### **OBS!**

– Dra endast åt banden när rullstolen är uppfälld.

### 3.8 Justera ryggstödsvinkeln



#### **VARNING!**

##### **Säkerhetsrisk**

– Se alltid till att ryggstödet sitter ordentligt fast.



Justering av ryggstödsvinkeln måste utföras av en behörig tekniker.



#### **VARNING!**

##### **Tipprisk**

Flytta inte rullstolen när ryggstödet är i bakåtlutat läge.

– Invacare rekommenderar starkt att tippskydd används (finns som tillval) när ryggstödet är i bakåtlutat läge.



#### **VARNING!**

##### **Risk för personskador**

– Invacare rekommenderar starkt att tippskydd används (finns som tillval) i kombination med alla drivhjulslägen när du använder ryggstödet med en vinkel som är 12° eller större



#### **FÖRSIKTIGT!**


##### **Risk för en obekväm sittställning**

En vinkel på mindre än 90° mellan sitsen och ryggstödet är obekväm för vissa användare.

– Denna justering måste utföras av en behörig tekniker efter överenskommelse med en förskrivande läkare. Rådgör med leverantören.


### 3.8.1 Justera ryggstödsvinkeln

1.

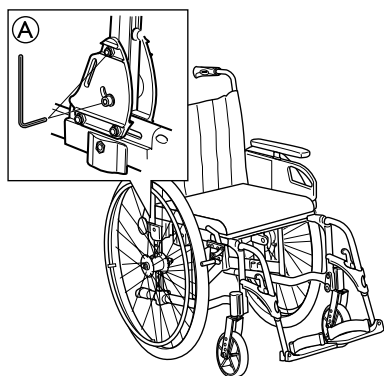


Lossa skruven **A** på ryggstödsfästets insida.

2.

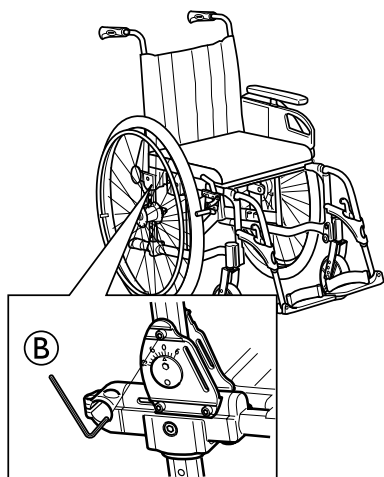


Lossa skruven **B** på ryggstödsfästets utsida.

3.

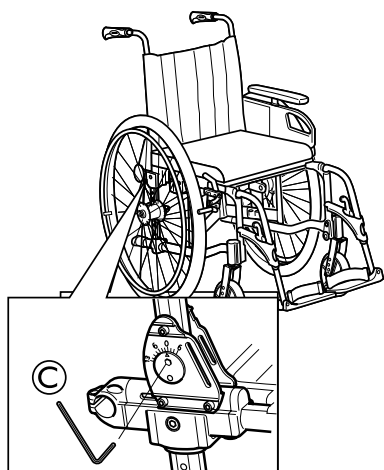


Justera vinkeln genom att vrida på ratten **C**.

 Vinkeln kan justeras 6 grader framåt och 13 grader bakåt.

4. Dra åt skruvarna på nytt med 10 Nm.


5. Upprepa samma sak på andra sidan.

 5 mm insexnyckel

### 3.8.2 Ryggstöd med dubbla vinklar


Ryggstödet med dubbla vinklar kan justeras i två vinklar:


- Vinkeljustering av den övre leden
- Vinkeljustering av den nedre leden

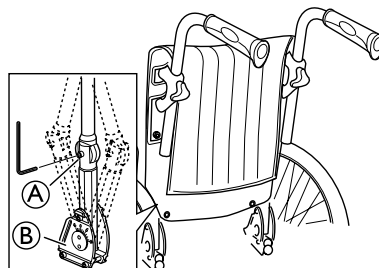1. Lossa skruven **A**.

2. Justera den övre leden till önskad vinkel.

3. Dra åt skruven **A** med 10 Nm.

 I avsnittet "Vinkeljusterbar rygg" finns anvisningar för hur du justerar vinkeln på den nedre leden **B**.

 5 mm insexnyckel

### 3.8.3 Luta ryggstödet

Ryggstödet vinkel kan justeras i fyra steg (0° till 30°) på rullstolar med mekanisk justering, och steglöst på rullstolar med gasfjädrad justering.



#### **VARNING!**

##### **Risk för personsador**

- Utför alltid dessa justeringar innan användaren sätter sig tillrätta i rullstolen så att inga skador uppstår.
- Invacare rekommenderar starkt att tipskydd används (finns som tillval) i kombination med alla drivhjulslägen när du använder ryggstödet med en vinkel som är 12° eller större



#### **FÖRSIKTIGT!**

##### **Det finns risk för att fingrar kläms eller krossas**

- Det finns alltid en risk att fingrar kläms i mekaniska delar av rullstolen.
- Var försiktig när du aktiverar manöverspakarna på det lutningsbara ryggstödet.



#### **OBS!**

- Tryck på ryggstödsrören innan du använder spakarna så att det automatiskt låsta säkerhetssystemet i den mekaniska versionen frigörs.




#### **VARNING!**

##### **Tipprisk bakåt**


- Justera drivhjulen för att få en stabil ställning och använd tipskyddet.

### Ryggstöd mekanisk version:

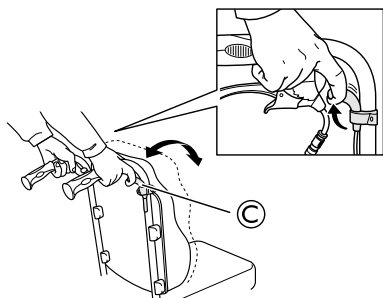


1. Frigör det automatiskt låsta systemet genom att trycka på ryggstödsrören.
2. Dra samtidigt i manöverspakarna B för att få samma vinkel på båda sidorna.
3. Släpp spakarna när du når önskad vinkel.

### Ryggstöd gasfjädderversion:

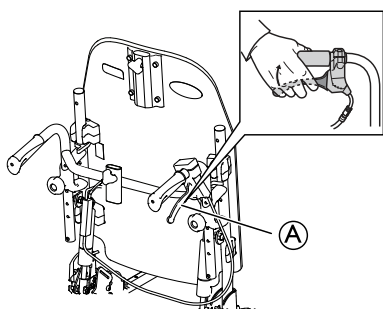


1. Tryck på spaken A och justera ryggstödet till önskad vinkel.

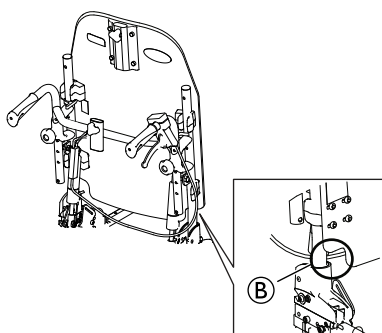


#### **VARNING!** **Klämrisk**

- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du lutar ryggstödet. Håll aldrig fingrarna eller andra kroppsdelar i det markerade området B.

### 3.9 Justera körhandtagen

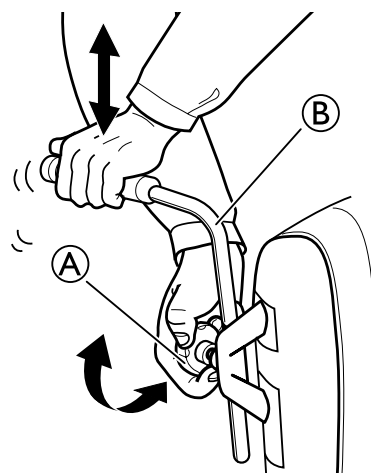

1. Lossa på vredet A.
2. Justera körhandtaget B till önskad höjd.
3. Dra åt vredet på nytt.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.

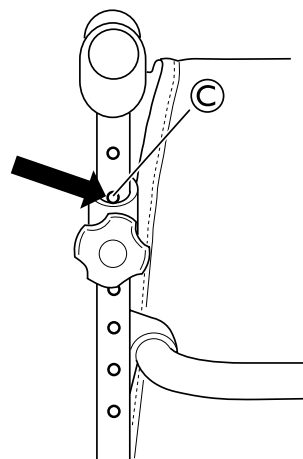

Om du vill låsa körhandtaget i ett visst läge ska närmaste hål uppåt C synas som på bilden ovan.

### 3.10 Armstöd



#### **VARNING!**

#### **Risk för personskador**

- Sidostöden är inte låsta och kan enkelt dras ur uppåt.
- Använd inte sidostöden för att lyfta eller flytta på rullstolen.
- Använd inte sidostöden för att bära rullstolen upp eller ner för trappor.




#### **FÖRSIKTIGT!**


#### **Klämrisk**

- Håll dina fingrar borta från rörliga delar när armstödet tas bort, monteras eller justeras.


### 3.10.1 Uppfällbara armstöd

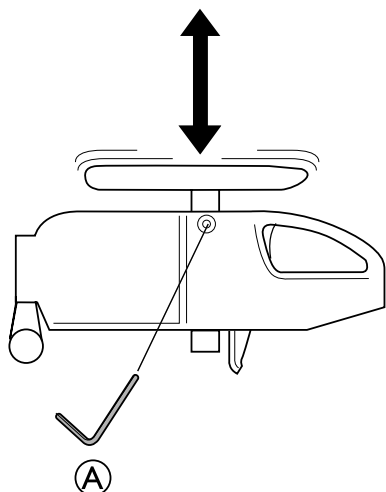


1. Lossa skruven **A**.
2. Justera armstödet höjd till önskat läge.
3. Dra åt skruven.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.

 5 mm insexnyckel


1. Lossa skruven eller handhjulet **B** beroende på vilken typ av armstöd du använder.
2. Justera armstödet höjd till önskat läge.
3. Dra åt skruven/handhjulet.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.

 5 mm insexnyckel


#### Djupjustering:

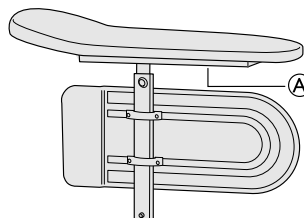


1. Lossa skruven eller handhjulet **A** beroende på vilken typ av armstöd du använder.
2. Justera armstödet höjd till önskat läge.
3. Dra åt skruven/handhjulet.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.

 5 mm insexnyckel

### 3.10.2 Löstagbara armstöd

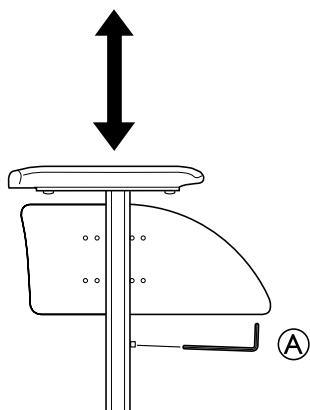


1. Lossa skruven **A**.
2. Justera armstödet höjd till önskat läge.
3. Dra åt skruven.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.

 Verktyg: 5 mm insexnyckel

### 3.10.3 Höjdjusterbara armstöd

#### Höjdjustering:

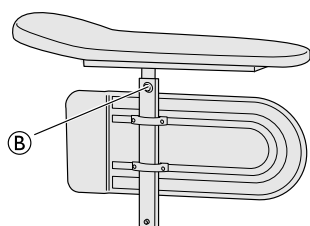


### 3.11 Justera sittedjupet




#### VARNING!

#### Tipprisk

– När sittedjupet justeras bakåt ska även drivhjulen justeras bakåt för att minska tipprisken.

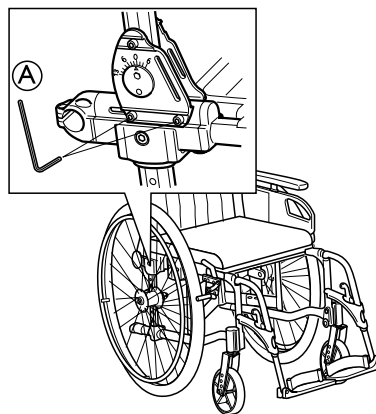


1. Ta bort armstöden.
2. Lossa de två skruvarna **A**.
3. Justera till önskat sittedjup.
4. Dra åt skruvarna.
5. Upprepa samma sak på andra sidan.

 5 mm insexnyckel

### 3.12 Justera sittbredden




Sittbredden kan ökas med 25 mm.

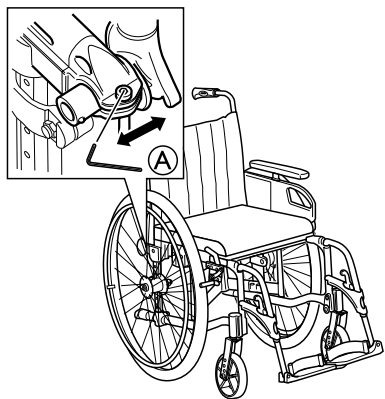


1. Ta bort armstöden och sittdynan.
2. Lossa de två skruvarna A.
3. Justera sittbredden.
4. Dra åt skruvarna.


Om rullstolen är utrustad med uppfällbara armstöd måste även följande göras:

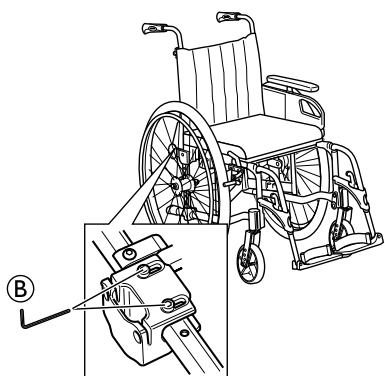



1. Lossa skruvarna B.
2. Dra åt både skruvarna A och skruvarna B


 5 mm insexnyckel
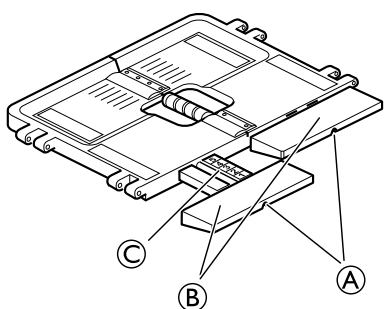
### 3.13 Justera sitsen





1. Lossa skruven A.
2. Justera sitsfronten B till önskat läge.  
 Justera endast sitsfronten inom det markerade området C. Max justering 5 cm
3. Dra åt skruvarna igen.
4. Upprepa samma sak på andra sidan om det behövs.


 Sitsfronten B kan även tas bort helt om det behövs.

 Skruvmejsel


### 3.14 Benstöd

 **VARNING!**  
**Risk för personskador**  
 – Lyft aldrig rullstolen i fotstöden eller benstöden.

 **FÖRSIKTIGT!**  
**Det finns risk för att fingrar kläms eller krossas**  
 Det finns vridmekanismer där du fastnar med fingrarna.  
 – Var försiktig när du använder, vrider, monterar isär eller justerar dessa mekanismer.

 **OBS!**  
 Risk för skador på benstödsmechanismen  
 – Du får inte placera tunga föremål på benstödet eller låta barn sitta på det.

#### 3.14.1 Svängbara, vinkelfasta benstöd

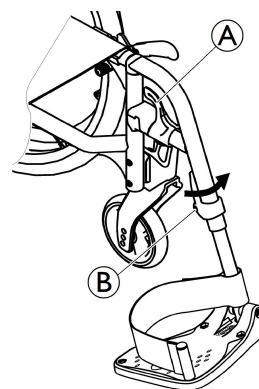

##### Svänga utåt

1. Aktivera frigöringsspaken A och sväng ut benstöden.

##### Svänga tillbaka

1. Sväng benstödet innåt tills det hakar fast.


##### Haka av

1. Aktivera frigöringsspaken A.
2. Dra upp benstödet.

##### Haka på

1. Haka på benstödet framtill på ramen och sväng det innåt tills det hakar fast.

#### 3.14.2 Svängbara, vinkeljusterbara benstöd

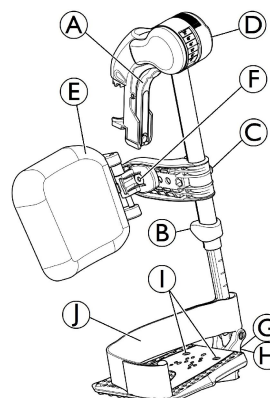

## Svänga utåt

1. Aktivera frigöringsspaken Ⓐ och sväng ut benstöden.

## Svänga framåt

1. Sväng benstödet framåt tills det hakar i.


## Haka av

1. Aktivera frigöringsspaken Ⓐ, sväng ut benstöden.
2. Dra upp benstödet.

## Haka på

1. Tryck ner benstödet in i dess mottagare och sväng det framåt tills det hakar i.

## Justera vinkeln

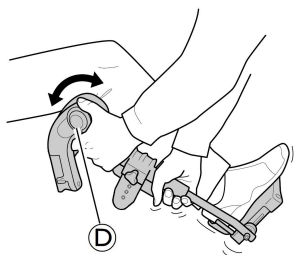


Det finns sex förinställda lägen tillgängliga för justering av vinkeln.


1. Rotera vredet Ⓓ med ena handen medan du håller i benstödet med den andra.
2. När vinkeln är lämplig släpper du vredet så att benstödet låser sig i önskat läge.

## Svänga vaddyna och justeringar


- Svänga vaddyna framåt (1) eller bakåt (2):

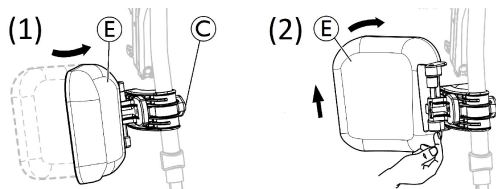


1. Sväng vaddyna Ⓔ framåt (1).
  2. Dra upp vaddynan Ⓔ och sväng den bakåt (2).
- Låsa svängning av vaddyna bakåt:

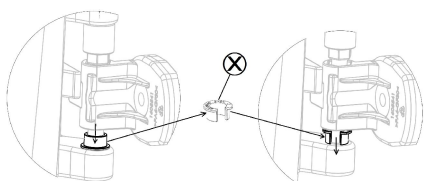

1. Avlägsna den grå distansringen ⊗ från sin plats.
2. Vänd på den grå distansringen.
3. För in den grå distansringen ⊗ så som det visas på bilden ovan.


 Gör denna procedur i omvänd ordning för att låsa upp svängningen av vaddynan bakåt.

- Justera vaddynans höjd:

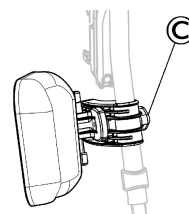

1. Lossa på vredet Ⓒ.
2. Justera till önskad höjd och dra åt vredet ordentligt.

- Justera vaddynans djup

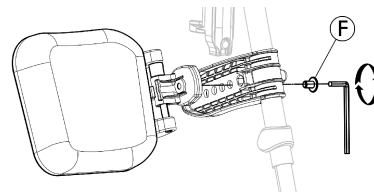


Vaddynan har fyra djupjusteringsalternativ:

1. Ta bort fästskruven Ⓕ med en 5 mm insexnyckel.
2. Justera till ett av de fyra lägena och dra åt fästskruven ordentligt Ⓕ (3 – 5 Nm).


## Justera fotplattan

Det finns tre olika uppfällbara fotplattor att välja på.


- Höjdjusterbara fotplattor av standardtyp:

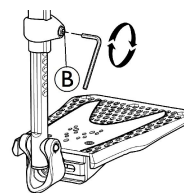

1. Lossa på fästskruven Ⓑ med en 5 mm insexnyckel.
2. Justera höjden och låt skruven haka i en av försänkningarna på fotplattans rör.
3. Dra åt fästskruven Ⓑ (3 – 5 Nm) i önskat läge.


 Avståndet mellan fotstödet's nedersta del och marken måste vara minst 50 mm.

- Djup-, vinkel- (1) och breddjusterbara (2) fotplattor:

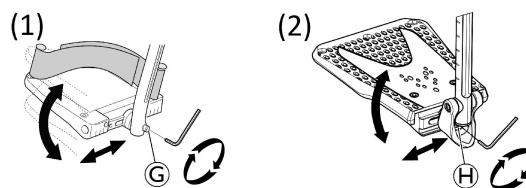

1. Lossa på fästskruven Ⓒ eller Ⓓ med en 5 mm insexnyckel.
2. Justera djup- och vinkelläget och dra sedan åt fästskruven Ⓒ (12 Nm) eller Ⓓ (8–9 Nm) ordentligt i önskat läge.

- Breddjusterbara fotplattor (2):

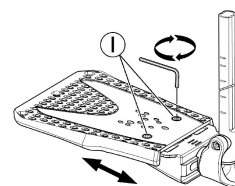

1. Lossa de två fästskruvarna med en 5 mm insexnyckel.
2. Justera bredden och dra sedan åt de två fästskruvarna (3–5 Nm) ordentligt i önskat läge.



Invacare rekommenderar att justering av fotplattor utförs av en behörig tekniker.

- i** Det finns två typer av band att välja mellan för att säkerställa ett bra läge för fötterna: hälbandet ① (ingår) och vadbandet (tillval) som är fäst vid benstödet. Båda kan justeras med hjälp av kardborreband.

### 3.14.3 Justera amputationsbenstödet



#### **VARNING!**


#### **Tipprisk**

Tipprisken är större för brukare med amputerat ben.

- Använd tippskyddet och/eller stabilisera rullstolen genom att rulla drivhjulen bakåt när amputationsbenstödet används. Du kan använda passivt eller dubbelt amputationsläge för drivhjulsfästet.

Se avsnitt "Justera drivhjulen" för mer information.

### Justera höjd, djup och vinkel

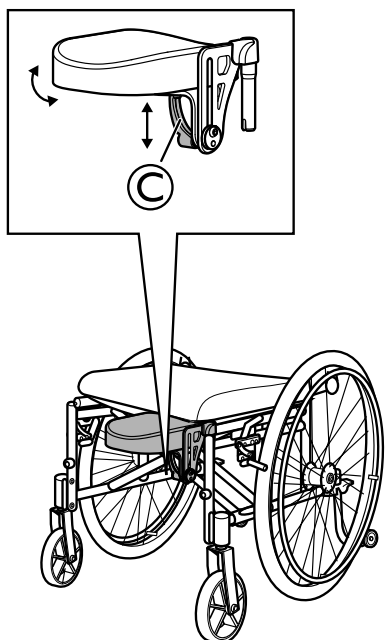

1. Lossa handtaget ©.
2. Justera till önskad höjd, djup och/eller vinkel.
3. Dra åt handtaget igen.

### 3.14.4 Justera fotstöd i en del




#### **VARNING!**

#### **Risk för att du klämmer fingrarna**

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan fotplattan och fotplattans fäste.

- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan fotplattan och fotplattans fäste när du viker ned den.

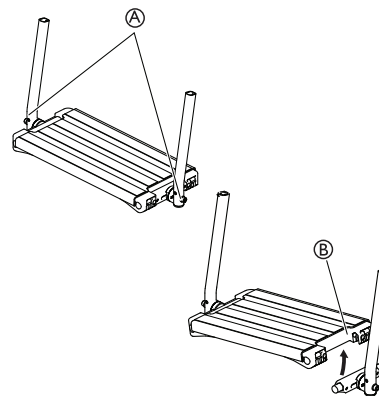

1. Justera vinkel och läge genom att lossa på de två skruvarna A på fotplattans fäste.

**i** 5 mm insexnyckel

2. Justera fotplattan till korrekt läge.
3. Dra åt skruvarna igen med 10 Nm.

**i** Fotplattan kan fällas upp. Lyft fotplattan B uppåt som på bilden ovan.

**i** Placera inte något på fotplattan när skruvarna är lösa.

### 3.15 Sittdyna

En lämplig sittdyna rekommenderas för att vikten ska fördelas jämnt över sitsen.



#### **FÖRSIKTIG!**

#### **Risk för instabilitet**


När en sittdyna används på sitsen kommer du högre upp över marken vilket kan påverka din stabilitet åt alla håll. Om en dyna ändras kan den också ändra brukarens stabilitet.

- Om dynans tjocklek ändras måste en fullständig inställning av rullstolen utföras av en behörig tekniker eller annan person med adekvat utbildning.

- Vi rekommenderar att du använder en Invacare- eller Matrx-dyna med glidskydd på undersidan för att förhindra att dynan glider.

## 4 Tillval


### 4.1 Iläggsdyna till sits

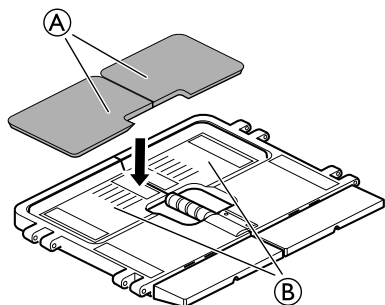


1. För att få en platt sits ska iläggsdynan **A** placeras på sittplattan.
2. Sätt fast iläggsdynan baktill på sittplattan **B**.

### 4.2 Svängbart bålstöd

#### Höjjustering:

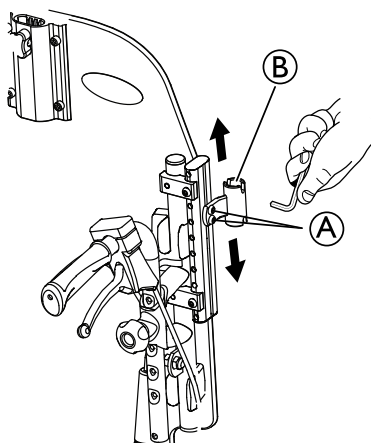

1. Lossa skruvarna **A**.
2. Skjut bålstödshållaren **B** uppåt eller nedåt till önskat läge.
3. Dra åt skruvarna.

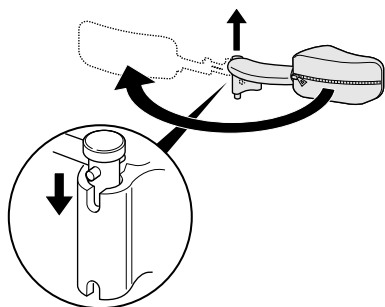


**i** Det svängbara bålstödet kan vridas åt sidan för att inte vara i vägen när brukaren tar sig i och ur rullstolen.



#### **FÖRSIKTIGT!** **Klämrisik**

– Överdraget på bålstödsarmen måste alltid vara på när rullstolen används.

#### Justering av vinkeln:

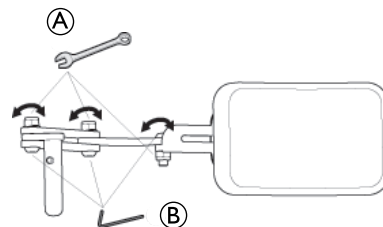


1. Vinkeln kan justeras genom att lossa skruvarna **B** och bultarna **A** på bålstödsarmen.
2. Håll med insexnyckeln och dra åt med den fasta nyckeln.
3. Kom ihåg att dra åt skruvarna och bultarna när önskat vinkelläge har nåtts.



5 mm insexnyckel/13 mm fast nyckel.

#### Djupjustering:

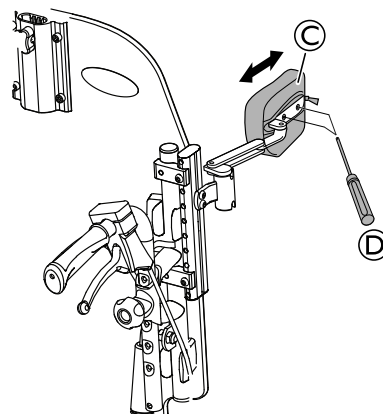

1. Öppna dragkedjan på överdraget **C**.
2. Lossa skruvarna **D**.
3. Justera bålstödet till önskat djup.
4. Dra åt skruvarna **C**.
5. Stäng dragkedjan på överdraget.



Skruvmejsel




#### **FÖRSIKTIGT!** **Klämrisik**

– Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan bålstödet och hjulet när rullstolen körs.

### 4.3 Fast arm till bålstödet

#### Höjjustering:

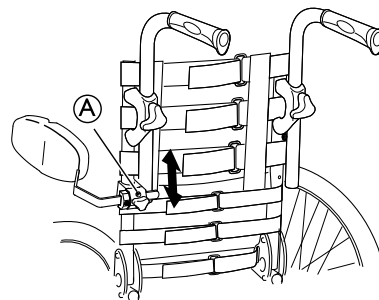


1. Lossa skruven **A**.
2. Justera fästet uppåt eller nedåt till önskad höjd.
3. Dra åt skruven **A**.




Skruvmejsel

**FÖRSIKTIGT!****Klämrisk**


– Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan bålstödet och hjulet när rullstolen körs.

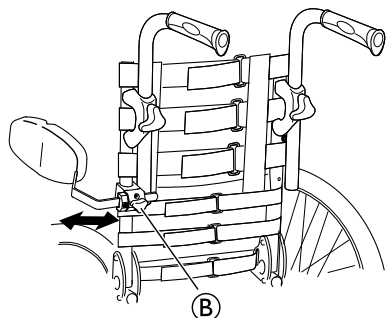**Djupjustering:**

1. Lossa handhjulet ②.
2. Justera djupet på bålstödet.
3. Dra åt handhjulet.

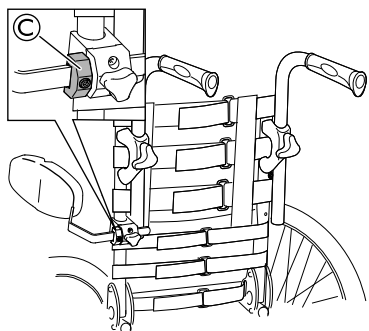**Minnesfunktion för djupjusteringen:**


1. Lägg till minnesblocket ③ på bålstödet.
2. Montera bålstödet i fästet.
3. Justera bålstödet till önskat djup och fixera djupet.
4. Placera minnesblocket ③ framför fästet.
5. Dra åt skruven på minnesblocket.


 Minnesfunktionen gör det lättare att behålla djupinställningarna när bålstödet tas bort från rullstolen.


**4.4 Huvudstöd/nackstöd****VARNING!****Instabil rullstol**

– Om huvudstödet eller nackstödet monteras bakom ryggstödet kan det påverka rullstolens stabilitet. Kontrollera rullstolens stabilitet och justera drivhjulen bakåt om det behövs för att göra rullstolen stabilare.


**4.4.1 Ryggstöd med dubbla vinklar**


 Det dubbelvinklade ryggstödet kan utrustas med ett huvudstöd eller ett nackstöd. Huvudstödet eller nackstödet monteras på körbygeln.

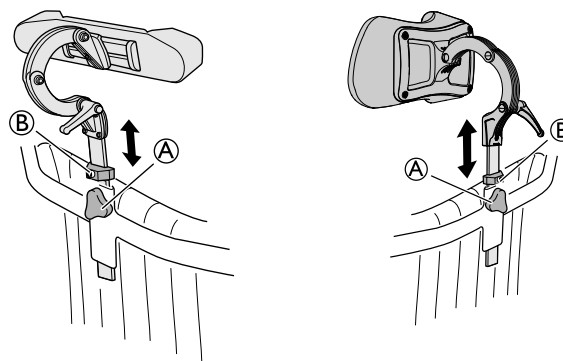
**Höjdjustering**

 Höjdjusteringen och borttagningen sköts med handhjulet. Bågen har ett justerbart stoppblock.


1. Lossa skruven i stoppblocket ②.
2. Lossa handhjulet ①.
3. Justera huvud- eller nackstödet till önskad position.
4. Dra åt handhjulet ①.
5. För stoppblocket ② ned till den övre delen av huvud-/nackstödsfästet.
6. Dra åt skruven.


 5 mm insexnyckel


 Nu kan du ta bort huvud-/nackstödet och sätta tillbaka det i önskad position utan andra justeringar.

 Mer information om djup- och vinkeljustering av huvud-/nackstödet och om hur du sätter tillbaka huvud-/nackstödet finns i de följande avsnitten.

**4.4.2 Lutbart ryggstöd**

 Det lutbara ryggstödet kan utrustas med ett huvudstöd eller ett nackstöd. Huvudstödet eller nackstödet monteras i fästet på ryggstödet.

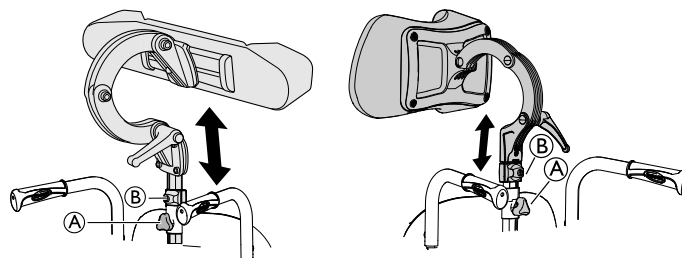**Höjdjustering**

 Höjden liksom borttagande av huvudstödet sker med handvredet. Röret är utrustad med en "minnesring".

1. Lossa först skruven i minnesringen ②.
2. Lossa handvredet ①.
3. Justera huvudstödet till önskad position.
4. Dra åt handvredet igen ①.
5. För nu minnesringen ② ner till fästet.
6. Dra åt skruven igen.

 Det är nu möjligt att avlägsna huvudstödet och sätta tillbaka det med förinställd höjd.

## Justera drivhjulen



### VARNING! Säkerhetsrisk

– När du har monterat hjulen i rätt läge ska du kontrollera att muttrarna och skruvarna är ordentligt åtdragna med ett åtdragningsmoment på 40 Nm. Det är viktigt för din egen säkerhet.



### VARNING! Säkerhetsrisk

– Kom ihåg att alltid justera bromsarna efter att drivhjulets position har ändrats.




### FÖRSIKTIGT! Skador på produkten


När du justerar drivhjulets position kan klämmorna dras åt ojämnt så att drivhjulen skrapar mot armstöden.

– Dra åt fästskruvarna växelvis så att klämmorna sitter jämnt.

## Höjjustering

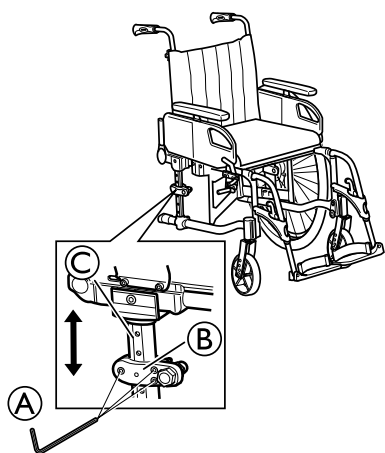

1. Lossa skruven (A).
2. Skjut klämman (B) uppåt eller nedåt till önskat läge.
  - i En plugg på insidan av klämman passar in i hålen på bygeln (C).
3. Dra åt skruvarna.

 5 mm insexnyckel



### FÖRSIKTIGT! Skador på produkten

Klämmorna (B) kan dras åt ojämnt och leda till att drivhjulen skrapar mot armstöden.

– Dra åt skruvarna växelvis för att få klämmorna jämna och hindra hjulen från att bli sneda.

## Djupjustering




### VARNING! Tipprisk

– Placera inte drivhjulen framför ryggstödet eftersom det ökar tipprisken avsevärt.




Drivhjulsstången kan placeras i fyra olika läge för att kunna ändra hjulets balans. Dessutom kan drivhjulet placeras framför eller bakom drivhjulsstången.


## Fram- och bakläge:

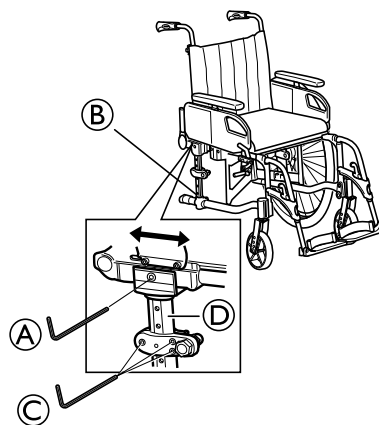


1. Lossa skruvarna (A) och (B).
  - i Skruvhuvudena ska vara synliga innan drivhjulsstången flyttas.
2. Tryck eller dra drivhjulsstången (D) till det främsta eller det bakersta läget.
3. Dra åt den övre skruven (A) först och sedan den nedre skruven (B).
  - i Den övre skruven (A) låser sig ordentligt först när den är helt igenom.

 5 mm insexnyckel


## Mellanlägen:

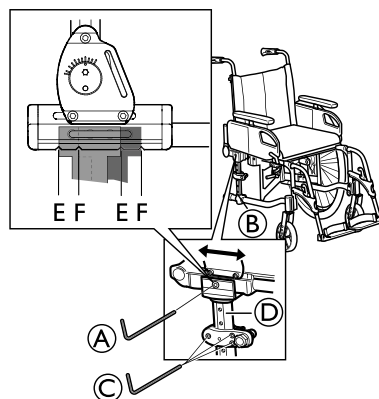


1. Lossa skruvarna (A) och (B).
  - i Skruvhuvudena ska vara synliga innan drivhjulsstången flyttas.
2. Tryck eller dra drivhjulsstången (D) till läget mellan markeringarna (E) eller (F) på fästet.
3. Dra åt den övre skruven (A) först och sedan den nedre skruven (B).
  - i Den övre skruven (A) låser sig ordentligt först när den är helt igenom.


 5 mm insexnyckel

## Placering av drivhjulet:

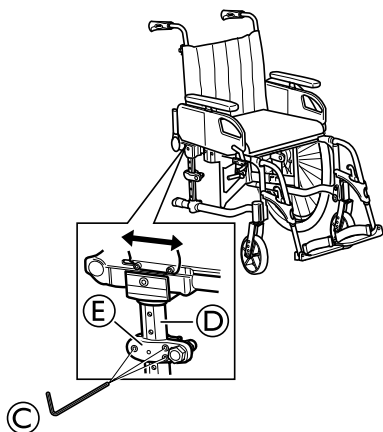



1. Lossa skruvarna ©.
2. Vrid runt drivhjulsklämmorna © för att placera drivhjulet bakom drivhjulstången ©.
3. Dra åt skruvarna ©.

 5 mm insexnyckel

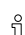
 Om drivhjulen placeras framför drivhjulstången © blir rullstolen mer instabil. Om drivhjulen placeras längre bak ökar stabiliteten.

### Camber

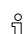
 Beroende på drivhjulsfästet kan den här produkten ha 0 eller 2 camber. För att uppnå 2 camber måste drivhjulsfästet bytas ut.

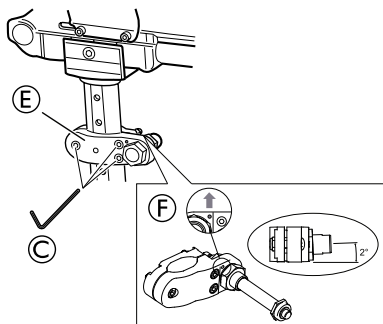

1. Lossa skruvarna ©.
2. Ta bort drivhjulsfästets klämmor ©.
3. Montera camber-drivhjulsfästet ©.

 2 camber-drivhjulsfästet har en rund markering på utsidan av klämman. Se till att markeringen placeras uppåt för att få rätt vinkel.

4. Dra åt skruvarna.

 5 mm insexnyckel

### Justera länkhjulen



#### WARNING!

#### Tipprisk


Länkhjulet kan lossna  
– Kontrollera alltid att länkhjulen är ordentligt fastlåsta efter varje justering.




#### WARNING!

#### Säkerhetsrisk


– Se till att länkhjulshöjlet sitter ordentligt fast efter varje justering.

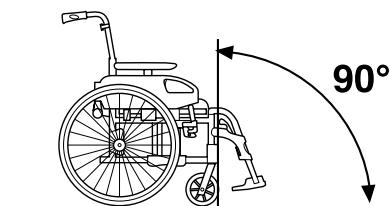

 När du har hittat en sitthöjd och ett sittdjup som passar måste du kontrollera att vinkeln mellan länkhjulsfästet och marken är så nära 90 grader som möjligt. Vinkeln kan påverka rullstolens körförmåga.


### Länkhjuls vinkel

- 1.

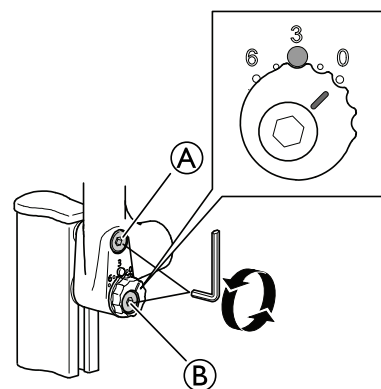


Lossa skruven ©.

2. Lossa skruven © två varv.
- 3.

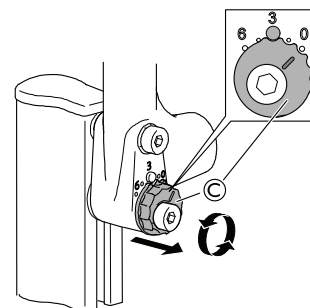

Dra ut justeringssskruven ©.

- 4.

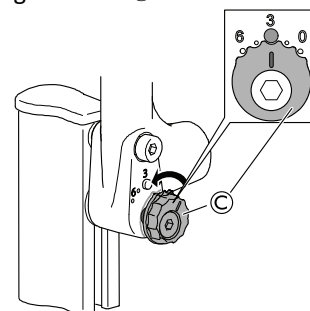


Vrid justeringssskruven © till önskat vinkelläge.




Länkhjulen kan vinklas i 5 olika lägen från 0° till 6°.


5.

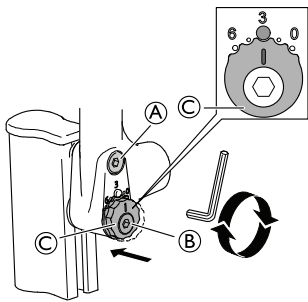


Tryck tillbaka justeringskruven © i sitt läge efter justeringen.

6. Dra åt skruvarna (A) och (B).


 Skruvarna ska dras åt med ett åtdragningsmoment på 20+/-2 Nm.

 5 mm insexnyckel

### Höjd på länkhjulen

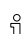 Notera att endast höjdversionen (89,4 mm) av länkhjulsfästet går att höjjustera.


1.

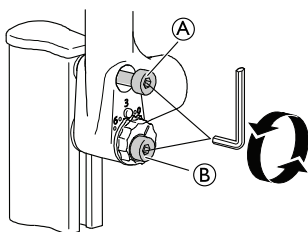


Lossa skruven (A) cirka 7 varv.

2. Lossa skruven (B) cirka 2 varv.


3.

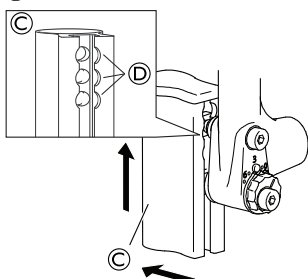

Dra ut länkhjulshöljet © och justera det till önskad höjd.


 Det finns tre möjliga fasta höjder (D).


4.

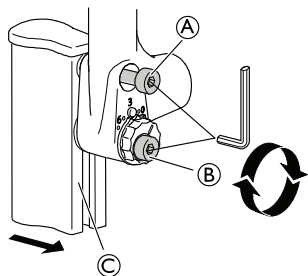

Tryck tillbaka länkhjulshöljet © i sitt läge efter justeringen.

5. Dra åt skruvarna (A) och (B) igen.

 Skruvarna ska dras åt med ett åtdragningsmoment på 20+/-2 Nm.

 5 mm insexnyckel


### Justera bromsarna



#### VARNING!

#### Minskad bromseffekt


– Felaktiga justeringar av bromsen kan minska bromsens verkan.

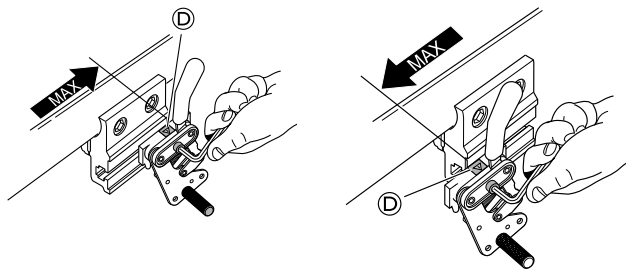


#### VARNING!

#### Risk för minskad bromseffekt

– Bromsarna får inte flyttas längre framåt eller bakåt än vad som anges på varningsetiketten (D).

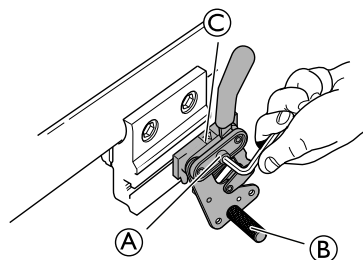


1. Kontrollera att däcken har rätt lufttryck.

 Det finns information om lufttrycket på däckets.


2. Lossa skruven (A).

3. Skjut bromsen (C) framåt eller bakåt till önskat läge.

4. Dra åt skruven.

 Avståndet mellan bromsaxeln (B) och däckets ska vara ca 15 mm.


Om ytterligare justeringar av bromsarna är nödvändiga kan även bromsfästet justeras framåt eller bakåt:

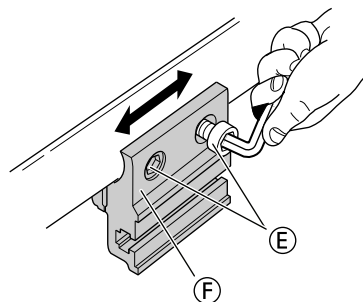


1. Lossa skruvarna (E) på bromsfästet (F).

2. Skjut bromsfästet (F) framåt eller bakåt till önskat läge.

3. Dra åt skruvarna.

 5 mm insexnyckel


## Djup / vinkeljustering

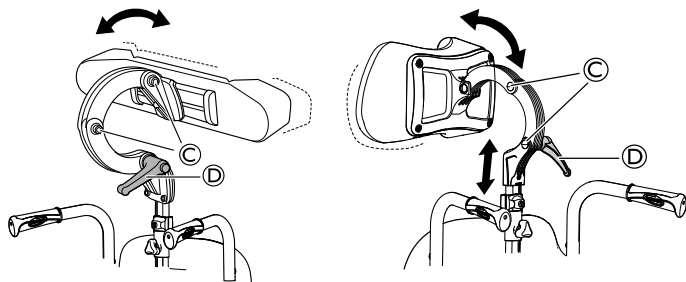

1. Lossa handtaget ④.
2. Lossa skruvarna ③.
3. Justera djupet och vinkeln på huvudstödet.
4. Dra åt handtaget och skruvarna igen.

## Flytta fram huvudstödet/nackstödet

**i** Med denna extra djupjustering placeras huvudstödet ytterligare 7 cm längre fram.

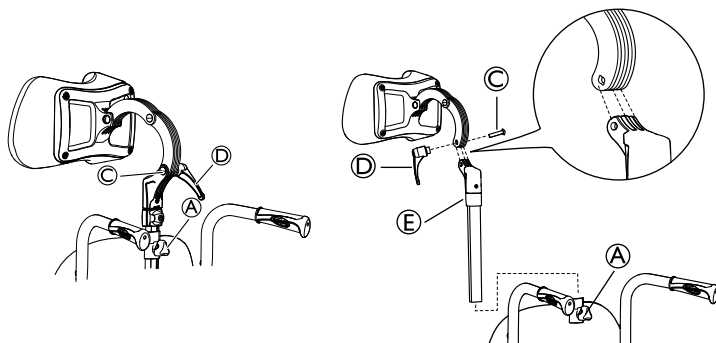

**i** Du kan också justera vinkeln och djupet genom att vrida på huvudstödet/nackstödet fäste.

1. Lossa handhjulet ①.
2. Ta bort huvudstödet/nackstödet.
3. Lossa handtaget ④.
4. Ta bort skruven och handtaget.
5. Roter huvudstödet/nackstödet fäststång inklusive fästet ⑤.
6. Sätt tillbaka huvudstödet/nackstödet i fästet.

**i** Observera att skruven i huvudstödet/nackstödet fäste ③ och handtaget ④ måste monteras på den motsatta sidan på grund av gängorna i skruvhålet.

7. Sätt tillbaka huvudstödet/nackstödet i fästet på ryggstödet.
8. Dra åt handtaget ④ och handhjulet ①.


## 4.5 Tramprör

Med trampröret kan en assistent tippa rullstolen enklare, till exempel för att kunna manövrera rullstolen i trappor.



### **WARNING!** Risk för att du välter

– Se till att trampröret inte sticker ut utanför drivhjulets ytterdiameter.

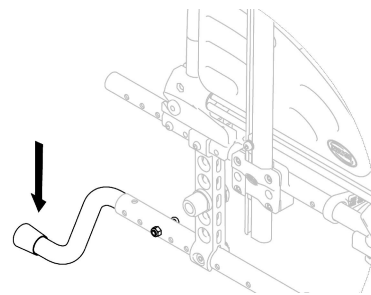

1. Håll i rullstolens körhandtag.
2. Tryck på trampröret med foten och håll rullstolen i det tippade läget tills du har kommit över hindret.

## 4.6 Brickbord



### **WARNING!**

#### Fallrisk/risk för personskador

– Bordet får aldrig användas som ersättning för höftbältet.



### **WARNING!**

#### Tipprisk/risk för personskador

– Maximal belastning på bordet: 8 kg



### **FÖRSIKTIG!**


#### Risk för obehag/blåmärken

– Se till att brukarens armbågar vilar på bordet när rullstolen körs. Om armbågarna sticker ut från bordet när rullstolen körs finns det en risk för obehag eller blåmärken.

Bordet kan justeras både i djup och bredd. I följande avsnitt visar vi de olika möjligheterna.


### 4.6.1 Fästen för brickbordet

1.

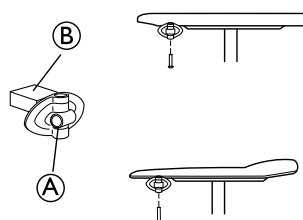

Montera bordsfästet ① med själva fästdelen utåt. Den omöstrade ytan ② på fästet ska vara uppåt när du använder bordet på smala armstöd.


2.

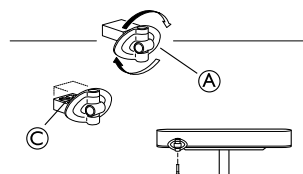

När du ska montera bordsfästet ① på breda armstöd, vänder du på fästet så att den möstrade ytan ③ är uppåt.


## 4.6.2 Justering av djup

1.

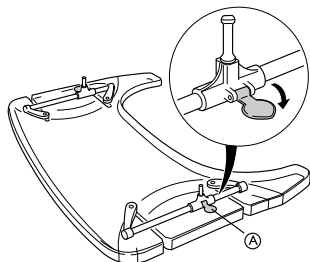


Öppna säkerhetsspärren när djupet ska justeras (A).

2.

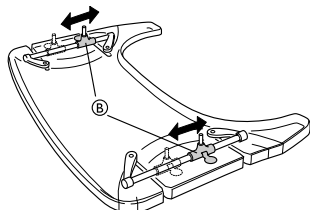

Justera bordsfästena (B) framåt eller bakåt till önskat djup.

3.

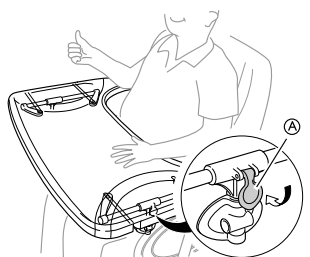

Lås säkerhetsspärren (A) igen för att låsa bordets position.




### FÖRSIKTIGT!

#### Säkerhetsrisk/risk för obehag

Bordet är inte fixerat.

- Glöm inte att låsa spärren igen efter att du har justerat djupet.

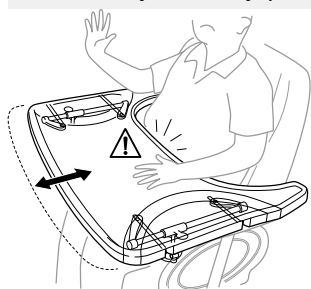

### FÖRSIKTIGT!

#### Risk för obehag

- Se till att inte trycka bordet mot användarens mage när du justerar djupet.


## 4.6.3 Lås brickbordet



### VARNING!

#### Risk för personskador

- Brukaren är låst i en fast position och kan inte tas ur rullstolen utan att bordet låses upp.
- Användning av en låsanordning för brickbordet måste ordinerats av auktoriserad personal.

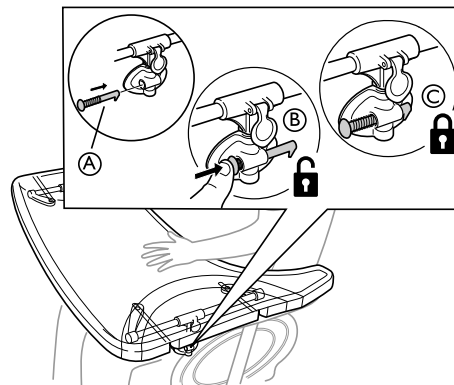

1. Placera låssprinten (A) i brickfästet.


2. Tryck in låssprinten (A) för att låsa upp bordet (B).

 Fortsätt trycka in låssprinten för att hålla bordet upplåst.

3. Släpp låssprinten (A) för att låsa bordets (C) läge.

## 4.7 Dyna för brickbord

En dyna kan placeras på brickbordet för att få en mjukare yta för armar och armbågar.

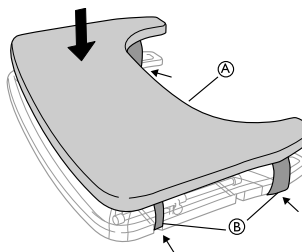

Placera dynan (A) på bordet och fäst remmarna (B) runt bordet.

## 4.8 Tippskydd



### VARNING!

#### Risk för att du välter

Tippskydd som inte är korrekt inställda eller som inte längre fungerar kan göra att du välter.

- Kontrollera alltid att tippskyddet fungerar innan du använder rullstolen och se till att få det inställt eller justerat av en behörig tekniker om det behövs.
- I vissa konfigurationer kan rullstolens statiska stabilitet vara lägre än 10°. Invacare rekommenderar starkt att tippskydd används (finns som tillval).



### VARNING!

#### Risk för att du välter

- På ojämnt eller mjukt underlag kan tippskyddet sjunka ned i gropar eller direkt i marken, så att säkerhetsfunktionen begränsas eller helt uteblir.
- Använd endast tippskyddet vid transport på ett jämnt och fast underlag.



### OBS!

#### Risk för skador

- Trampa aldrig på tippskyddet och använd det aldrig som ett tramprör.



**VARNING!****Tipprisk**

Ett aktiverat tippskydd kan fastna på ett trappsteg eller en kant.


- Inaktivera alltid tippskyddet innan du kör över ett trappsteg eller en trottoarkant.

**VARNING!****Risk för att du välter**


- Meddela alltid användaren om du har inaktiverat tippskyddet.



Det finns en röd etikett på tippskyddets hölje. Etiketten visar när tippskyddet är inaktiverat. När tippskyddet är aktiverat på rätt sätt är den röda etiketten dold.

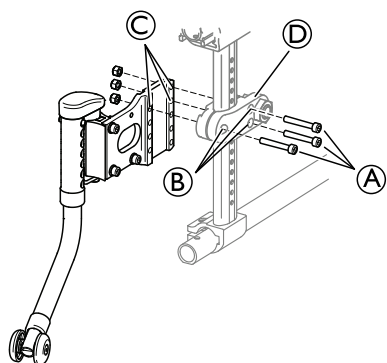**4.8.1 Montera det svängbara tippskyddet**

1. Sätt in de tre skruvarna **A** i hålen **B** på drivhjulsfästet **D**.
2. Sätt i skruvarna i hålen på tippskyddsfästet **C**.

 Tippskyddet kan monteras i olika höjdlägen, beroende på skruvarnas placering.


3. Dra åt skruvarna ordentligt.




Avståndet mellan hjulet på tippskyddet och drivhjulet ska vara ca 50 mm.



5 mm insexnyckel/10 mm fast nyckel

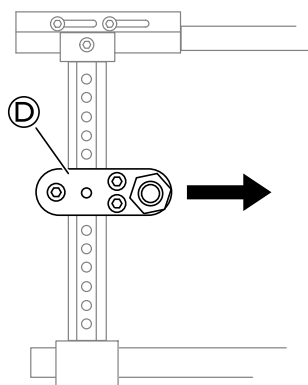

Drivhjulsfästet **D** måste monteras så det är riktat framåt för att tippskyddet ska fungera ordentligt.

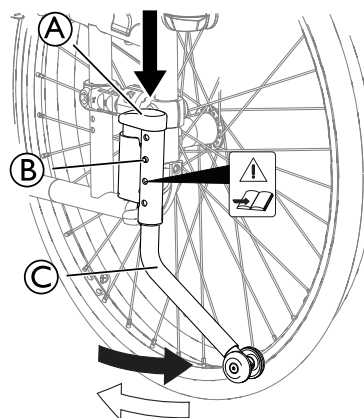**4.8.2 Svängbart tippskydd****Höjjustering/uppställning:**

1. När du ska justera höjden trycker du in de två knapparna **B** på vardera sidan om höljet.
2. Justera tippskyddsroret **C** till önskad höjd.



Se till att tippskyddet är korrekt monterat, de två knapparna **B** måste låsas på plats.

3. För att fälla ihop tippskyddet, tryck höljets överdel **A** nedåt.
4. Tryck tippskyddet åt sidan.




Använd inte knapparna **B** för att fälla ihop/upp tippskyddet.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för att du klämmer fingrarna**

– Fäll ihop tippskyddet med foten, annars finns det risk för att du klämmer fingrarna mellan tippskyddets hölje och tippskyddsroret.

5. För att aktivera tippskyddet, tryck tippskyddet bakåt till dess ursprungliga position. Det låses på plats automatiskt.

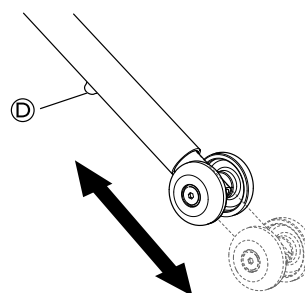**Djupjustering:**

1. Tryck in knoppen **D**.
2. Justera innerroret till önskat läge.




Se till att röret är korrekt monterat på båda sidor (om tillämpligt), knappen **D** måste låsas på plats.



Denna justering krävs med avseende på drivhjulets läge och diameter samt omständigheter som rör användaren och dennes särskilda säkerhetsbegränsningar.

**VARNING!****Risk för att du välter**


– Justeringarna av tippskyddet måste utföras av en behörig tekniker.

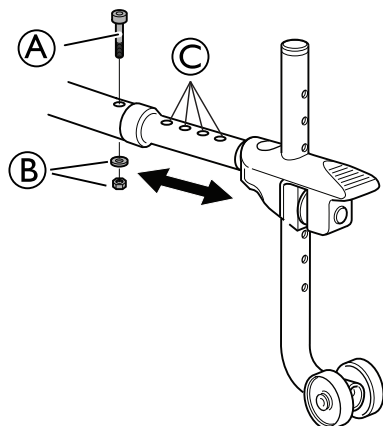**4.8.3 Ordinarie tippskydd****Montering och djupjustering:**


1. Byt ut plastpluggarna på ramrörets båda sidor mot de medföljande pluggarna.
2. Montera tippskyddet på ramröret.
3. Fäst tippskyddet med skruven (A), brickan och muttern (B).
4. För djupjustering, lossa skruven (A) och muttern (B).
5. Justera djupet och sätt skruven (A) i något av hålen (C).
6. Dra åt skruven.




5 mm insexnyckel/10 mm fast nyckel

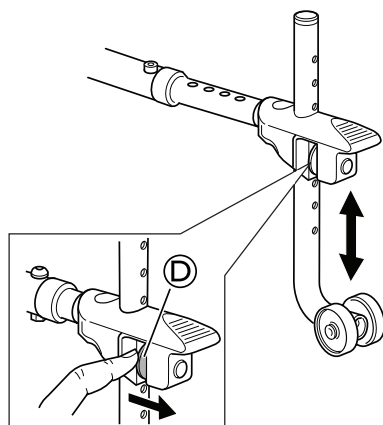**Höjdjustering:**


1. Släpp upp den fjäderförsedda knappen (D).
2. Ställ in tippskyddet till önskad höjd.
3. Se till att tippskyddet snäpper fast i det nya läget.

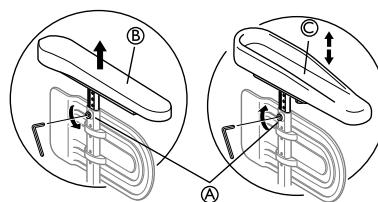**4.9 Hemilegi-armstöd**

1. Lossa skruven (A).
2. Tta bort det befintliga armstödet (B).
3. Montera hemiarmstödet (C) i armstödsstolpen.
4. Dra åt skruven igen (A).

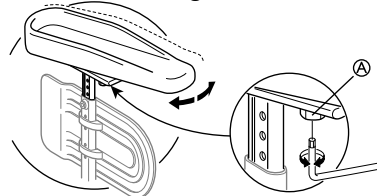

5. Hemiarmstödet är vinkeljusterbart. Man kan justera skruven (A) för att minska/öka motståndet.

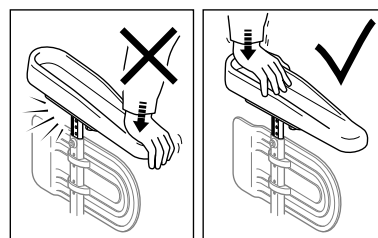**VARNING!****Risk för skada**

Skada på armstödet

– Belasta inte armstödet i framkant, då trycket på armstödet kan orsaka skada på konstruktionen.

**4.10 Lateralastöddynor (endast för justerbart ryggstöd)****VARNING!****Klämrisk**

– Var försiktig så att du inte klämmer överkroppen mellan de två laterala stöddynorna när du förflyttar dig framåt eller åt sidan i rullstolen.


**FÖRSIKTIGT!****Risk för obekväm hållning**

För lite mellanrum mellan de laterala stöddynorna kan vara obekvämt för vissa användare.


– Denna justering måste utföras av en behörig tekniker eller annan person med adekvat utbildning efter överenskommelse med en förskrivande läkare.  
– Rådgör med leverantören.



De laterala stöddynorna kan justeras i höjdlid och sidled.

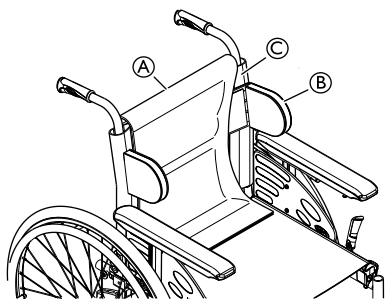

1. Ta bort ryggytan (A).
2. Justera de laterala stöddynorna (B) i höjdlöd och sidled till önskad position med hjälp av kardborrebanden på ryggstödsklädseln (C).
3. Kontrollera att de två kardborrebanden (på dynorna och ryggstödsklädseln) är ordentligt fastgjorda.
4. Sätt tillbaka ryggytan (A).

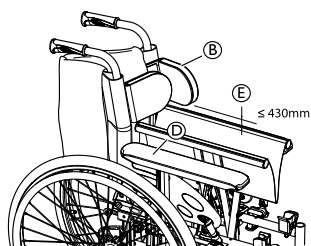

- i** De laterala stöddynorna (B) måste sitta ovanför armstödet (D) så att det går att fälla ihop rullstolen.
- i** Om sittbredden är större än 430 mm (E) måste de laterala stöddynorna (B) tas bort innan rullstolen fälls ihop.

## 4.11 Höftbälte

Rullstolen kan utrustas med ett höftbälte. Det hindrar användaren från att glida nedåt i rullstolen eller trilla ur den. Höftbältet är inte ett positioneringshjälpmedel.




### **VARNING!**


#### **Risk för allvarlig skada/strykning**

Ett löst bälte kan göra att användaren halkar ner och skapar risk för strykning.

- Hållningsbältet ska monteras av en kvalificerad tekniker och monteras av en sjukvårdspersonal.
- Se alltid till att hållningsbältet sitter tätt över det nedre bäckenet.
- Varje gång kroppsbeläet används, kontrollera att det sitter ordentligt. Att ändra sits och/eller ryggstödsinkel, dynan och även dina kläder påverkar bältets passform.

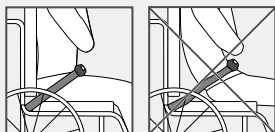

## Stänga och öppna höftbältet

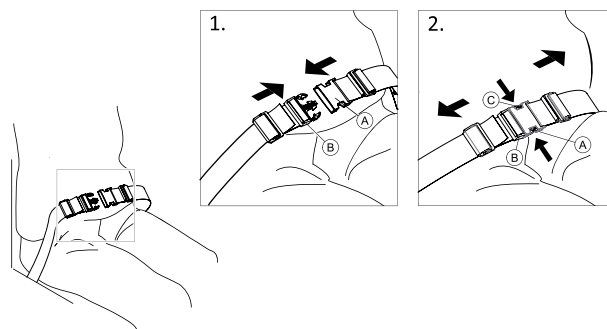


Se till att du sitter helt bakåt i sätet och att bäckenet är så upprätt och symmetriskt som möjligt.

1. Tryck in spärren (A) i spännet (B) för att stänga.
2. Tryck på knappen (C) och dra ut spärren (A) ur spännet (B) för att öppna.

## Justera längden



Höftbältet sitter korrekt när det finns precis tillräckligt med utrymme så att du kan föra in handen mellan kroppen och bältet.

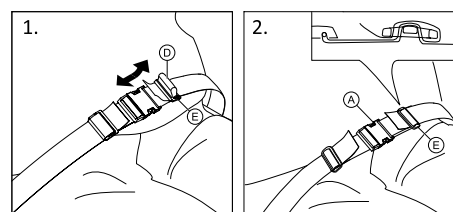


1. Förkorta eller förläng ögla (D) efter behov.
2. Trä ögla (D) genom spärren (A) och plastspännet (E) tills ögla är platt.
3. Se till att ögla (D) sitter perfekt i plastspännet (E).
4. Säkra justeringen med remmens ytterkant monterad i spännet (E).




### **VARNING!**

#### **Risk för glidning och strykning / Risk för fall**

- Gör justeringarna på båda sidor lika, så att spännet förblir i ett centralt läge.
- Se till att båda remmens extremiteter träas in två gånger i spännet (E) för att undvika att bältet lossnar.
- Se till att remmarna inte fastnar i ekrarna på ett bakhjul.

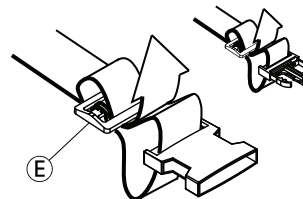

### 4.11.1 Montera höftbältet

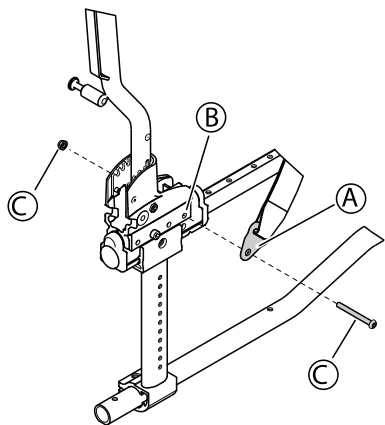

1. Sätt fast höftbältet (A) på ramen (B).
2. Sätt dit skruven och muttern (C) och dra åt.

### 4.12 Luftpump

Luftpumpen har en inbyggd universalventiladapter. Vilken ventiladapter som ska användas beror på innerslangens ventil.

1. Ta bort dammskyddet från ventiladaptern.
2. Tryck på ventiladaptern på den öppna hjulventilen och pumpa upp däcket.



Det finns två typer av pumpar att välja på:


- Lågt tryck <6 bar
- Högt tryck >6 bar

Bruksanvisning finns på förpackningen.

### 4.13 Reflexer

Du kan sätta fast reflexer på drivhjulen.

### 4.14 Käpphållare

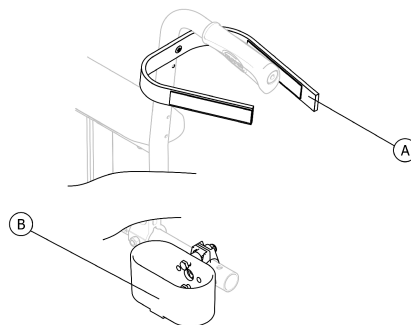

#### **WARNING!**

#### **Risk för att du välter**

– Se till att käpphållaren inte sticker ut utanför drivhjulets ytterdiameter.

1. Placera käppen i hållaren (B).
2. Sätt fast toppen på käppen i ryggestödet (A).

## 5 Inställningar

### 5.1 Säkerhetsinformation



#### FÖRSIKTIG! Risk för personskador

- Innan du använder rullstolen ska du kontrollera dess allmänna skick och huvudfunktionerna, 8.2 Underhållsschema, sida 41 .

Din auktoriserade leverantör levererar din rullstol färdig för användning. Din leverantör förklarar de viktigaste funktionerna och ser till att rullstolen uppfyller dina behov och krav.


Justeringar av axelpositionen och framhjulstöden måste utföras av en behörig tekniker.

Om rullstolen levereras ihopfälld läser du avsnitt 5.4 Montera sitsen, sida 29.

### 5.2 Leveranskontroll

En eventuell transportskada ska genast anmälas till transportbolaget. Tänk på att behålla förpackningen tills dess att transportbolaget kontrollerat godset och en uppgörelse kommit till stånd.

### 5.3 Montera drivhjulen

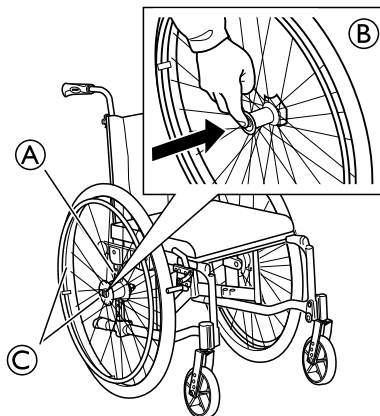


1. Tryck och håll in snabbupplåsningsskruven (B) i mitten på navet.
2. Sätt drivhjulet och drivhjulsskruven (C) i drivhjulsfästet (A).
3. Dra hjulet utåt för att kontrollera att det sitter fast ordentligt.



#### VARNING! Risk för personskador

- Kontrollera att drivhjulet sitter fast ordentligt! Det ska inte gå att ta bort hjulen när snabbupplåsningsskruven inte är intryckt.

### 5.4 Montera sitsen

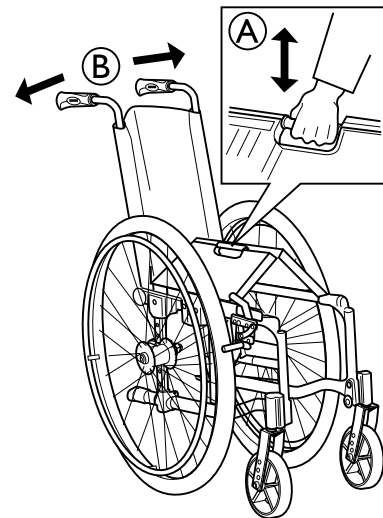

Det finns två sätt att fälla ut sitsen:

- Tryck ned handtaget som sitter i mitten av sittplattan (A).
- Lyft upp drivhjulet något och tryck körhandtagen (B) utåt. När sittplattan är i rätt läge hörs ett klick.




#### VARNING!

#### Risk för att du fastnar med fingrarna

- Var försiktig så du inte fastnar med fingrarna eller handen när du skjuter sittplattan på plats.

### 5.5 Montera ryggstödsbygeln

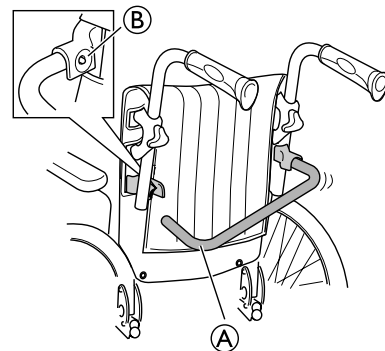


1. Fäll upp ryggstödsbygeln (A).
2. Sätt fast ryggstödsbygeln i fästet med snabbupplåsningsskruven (B).



Se till att snabbupplåsningsskruven (B) är fastlåst ordentligt.


### 5.6 Sätta fast armstöden

Uppfällbara armstöd:

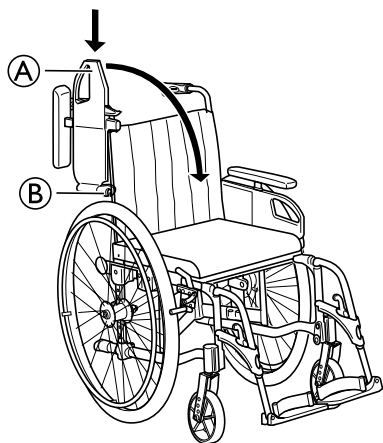

1. Sätt in armstöden (A) i fästet (B) på ryggstödet ram.
2. Fäll ned armstödet (A) för att ställa in det i rätt läge.

#### Löstagbara armstöd:

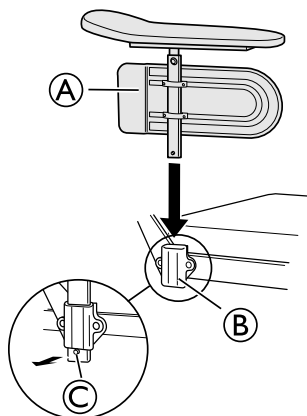

1. Placera armstödet (A) i armstödsfästet (B).
2. Se till att snabbupplåsningknappen (C) är uttryckt.



#### **WARNING!**

**Risk för att du klämmer fingrarna**

– Lägg inga fingrar på sittramen medan du trycker in armstöden i fästet.

## 5.7 Sätta fast benstöden



Bromsspakens handtag kan användas med viss frihet. När du för benstödet till ytterläget fälls spaken upp automatiskt utan att bromsen aktiveras. När du ska aktivera bromsen trycker du spaken framåt.

### 5.7.1 Fasta benstöd

För installera eller ta bort de svängbara, fasta benstöden, se → 3.14.1 Svängbara, vinkelfasta benstöd, sida 15.

### 5.7.2 Vinkeljusterbara benstöd

För installera eller ta bort de svängbara, vinkeljusterbara benstöden, se → 3.14.2 Svängbara, vinkeljusterbara benstöd, sida 15.

## 6 Använda rullstolen

### 6.1 Safety information


**WARNING!**
**Risk of accidents**

Uneven tyre pressure can have a huge effect on handling.

- Check the tyre pressure before each journey.


**WARNING!**
**Risk of falling out of the wheelchair**

When using front wheels that are too small, the wheelchair could get stuck at curbs or in floor grooves.

- Make sure that the front wheels are suitable for the surface you're driving on.


**FÖRSIKTIGT!**
**Risk of crushing**

There may be a very small gap between the rear wheel and the mudguard or armpad with the risk that you could trap your fingers.

- Ensure that you always propel your wheelchair using the handrims only.


**FÖRSIKTIGT!**
**Risk of crushing**

There may be a very small gap between the rear wheel and the parking brake with the risk that you could trap your fingers.

- Ensure that you always propel your wheelchair using the handrims only.

### 6.2 Bromsa under färd

När du befinner dig i rörelse kan du bromsa genom att trycka händerna mot drivringarna.


**WARNING!**
**Risk för att du välter**

Om du aktiverar parkeringsbromsarna medan du befinner dig i rörelse finns det risk för att du tappar kontrollen över rullstolens riktning. Den kan då stanna mycket plötsligt, vilket kan leda till att du kolliderar med något eller trillar ur rullstolen.

- Aktivera aldrig parkeringsbromsarna när du befinner dig i rörelse.


**WARNING!**
**Risk att trilla ur rullstolen**

Om rullstolen bromsar in snabbt på grund av att en assistent drar i körhandtagen kan brukaren trilla ur rullstolen.

- Använd alltid höftbältet om ett sådant finns.
- Se till att din assistent är kvalificerad för förflyttning av rullstolar där brukaren sitter i.
- Säkerställ optimal kontroll över rullstolens styrning genom att slå till de två bromsarna samtidigt och inte köra i lutningar som överstiger 7°.
- Använd alltid parkeringsbromsarna för att säkra rullstolen under korta eller långa stopp.



**FÖRSIKTIGT!**
**Risk för att du bränner dina händer**

Om du bromsar en längre stund genereras mycket friktionsvärme på drivringarna (särskilt drivringar med glidskydd).

- Använd lämpliga handskar.

1. Ta tag i drivringarna och tryck med båda händerna tills rullstolen stannar.

#### Brukarstyrd broms

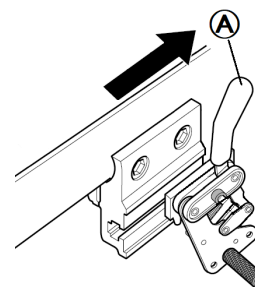

Börja med att kontrollera att däcken har rätt lufttryck (tryckt på sidan av däck).



Brukarbromsen ska användas när rullstolen inte rör sig och är inte tänkt att användas för att bromsa rullstolen i rörelse.

1. För att aktivera bromsen för du spaken **A** bakåt (mot dig).
2. För lossa bromsen, för spaken **A** framåt.


**FÖRSIKTIGT!**
**Risk för att du fastnar med fingrarna**


- Var noga med att inte fastna med fingrarna mellan bromsskon och drivhjulet

#### Använda enhandsbromsen

Rullstolen kan utrustas med en enhandsbroms istället för den brukarstyrd standardbromsen. Enhandsbromsen används på samma sätt som den brukarstyrd standardbromsen. Skillnaden mellan de två bromsarna är att bromshandtaget bromsar båda hjulen samtidigt. Enhandsbromsen är tillgänglig för rullstolens högra eller vänstra sida.


## Assistentstyrd broms

1.

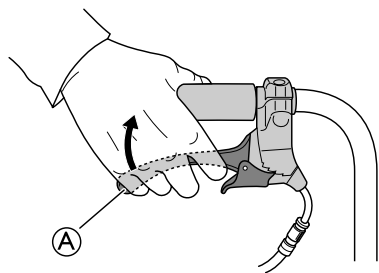


Dra båda bromshandtagen uppåt när du ska aktivera bromsen.


2.

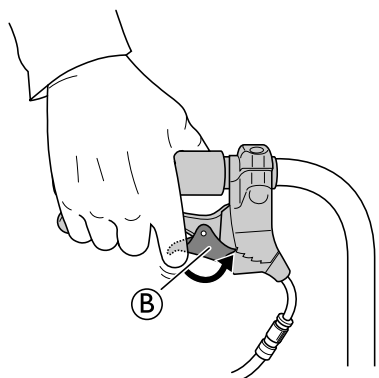


Dra bromshandtaget uppåt och tryck bromsspärren **B** nedåt så att bromsen spärras.

 Släpp bromshandtaget när bromsspärren är låst.

3.

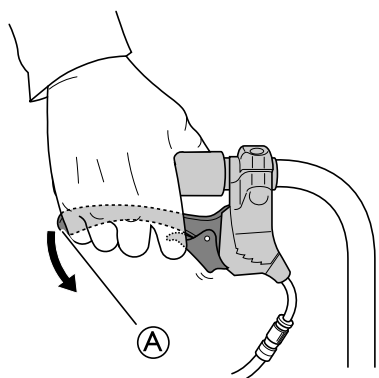

Rör på bromshandtaget **A** när du ska frigöra bromsspärren.

 Bromsspärren frigörs automatiskt när du rör på bromshandtaget.

## 6.3 Flytta till/från rullstolen



### WARNING!

#### Risk för att du välter

Det finns stor risk för att rullstolen välter när man förflyttar sig till och från rullstolen.

- Ta dig endast i och ur rullstolen utan hjälp om du är fysiskt kapabel att göra det.
- Placera dig själv så långt bak på sitsen som möjligt vid förflyttning till eller från rullstolen. Detta förhindrar att polstringen skadas och att rullstolen välter framåt.
- Kontrollera att båda styrhjulen pekar rakt fram.



### WARNING!

#### Risk för att du välter

Rullstolen kan välta framåt om du står på fotstödet.

- Stå aldrig på fotstödet när du tar dig i och ur rullstolen.



### FÖRSIKTIGT!

Om du lossar eller skadar bromsarna kan rullstolen rulla iväg utan kontroll.

- Stöd dig inte på bromsarna när du tar dig i och ur rullstolen.



### OBS!

Stänkskydden och armstöden kan skadas.

- Sitt aldrig på stänkskydden eller armstöden när du tar dig i och ur rullstolen.



1. Kör rullstolen så nära intill sitsen som möjligt som du vill flytta till.
2. Aktivera parkeringsbromsarna.
3. Ta bort armstöden eller flytta dem uppåt ur vägen.
4. Ta loss benstöden eller sväng dem utåt.
5. Sätt fötterna på marken.
6. Håll i rullstolen och om det behövs kan du även hålla i ett fast objekt i närheten.
7. Rör dig långsamt från rullstolen.

## 6.4 Köra och styra rullstolen

Du kör och styr rullstolen med drivringarna.

Innan du kör utan en assistent måste du hitta rullstolens balanspunkt.



### WARNING!

#### Tipprisk

Rullstolen kan välta bakåt om den inte är utrustad med ett tippskydd. När du försöker hitta balanspunkten ska en assistent stå precis bakom dig för att kunna fånga rullstolen om den välter över.

- Montera ett tippskydd för att förhindra att rullstolen välter.



### WARNING!

#### Tipprisk

Rullstolen kan välta framåt.

- När du ställer in rullstolen ska du testa hur lätt den välter framåt och justera din körstil enligt det.



**FÖRSIKTIGT!**

Om något tungt hänger på ryggstödet kan rullstolens tyngdpunkt påverkas.

– Anpassa körstilen vid behov.

**Hitta balanspunkten**

1. Frigör bromsen.
2. Rulla bakåt en kort bit, ta tag i båda drivringarna och gör ett snabbt ryck framåt.
3. Att ändra viktfördelningen och styra åt motsatt håll med drivringarna hjälper dig att hitta balanspunkten.

**6.5 Manövrera rullstolen över trappsteg och trottoarkanter****VARNING!****Risk för att du välter**

När du manövrerar rullstolen över trappsteg finns det risk för att du tappar balansen och välter.

- Närma dig alltid trappsteg och trottoarkanter långsamt och försiktigt.
- Gå inte upp- eller nedför trappsteg som är högre än 25 cm.

**FÖRSIKTIGT!**


Ett aktiverat tipskydd förhindrar att rullstolen välter bakåt.

- Inaktivera tipskyddet innan du förflyttar dig upp- eller nedför ett trappsteg eller en trottoarkant.

**VARNING!****Risk för personskador på assistenten och skador på rullstol**

Att luta rullstolen med en tung brukare sittande i den kan skada assistentens rygg och orsaka skador på rullstolen.

- Se till att du säkert kan kontrollera rullstolen med en tung brukare innan du utför en lutningsmanöver.

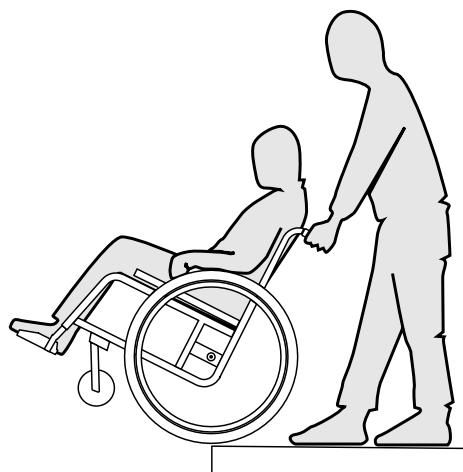**Ta dig nedför ett trappsteg tillsammans med en assistent**

1. Ställ rullstolen precis intill trottoarkanten och håll i drivringarna.
2. Assistenten ska hålla i båda körhandtagen, placera en fot på tipskyddet (om monterat) och luta rullstolen bakåt så att länkhjulen lyfts upp från marken.
3. Assistenten ska sedan hålla rullstolen i den här positionen, försiktigt föra den nedför kanten och sedan luta den framåt tills länkhjulen når marken igen.

## Ta dig uppför ett trappsteg tillsammans med en assistent



### VARNING!


#### Risk för allvarliga personskador

Om man ofta kör uppför trappsteg och trottoarkanter kan det leda till att rullstolens ryggstöd slits ut tidigare än förväntat. Brukaren kan trilla ur rullstolen.

– Använd alltid ett tramprör när du kör uppför trappsteg eller trottoarkanter.

1. Förflytta rullstolen bakåt så att drivhjulen står precis intill trottoarkanten.
2. Assistenten ska luta rullstolen med hjälp av båda körhandtagen så att länkhjulen lyfts upp från marken och sedan dra upp drivhjulen över trottoarkanten tills länkhjulen kan sättas ned på marken.

## Ta dig nedför ett trappsteg utan en assistent

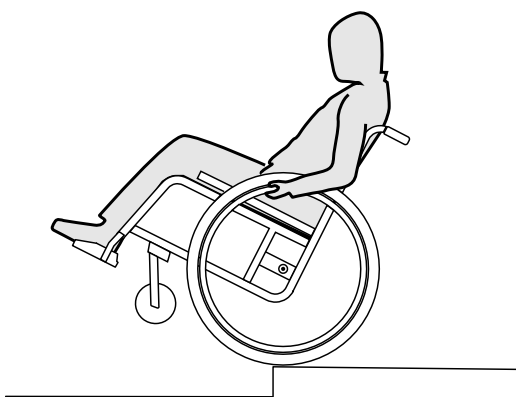

### VARNING!

#### Tipprisk

När du förflyttar dig nedför ett trappsteg utan en assistent finns det risk att du välter om du tappar kontrollen över rullstolen.

– Lär dig först hur du tar dig nedför ett trappsteg tillsammans med en assistent.  
– Lär dig hur du balanserar på drivhjulen, 6.4 *Köra och styra rullstolen, sida 32.*

1. Ställ rullstolen precis intill trottoarkanten, lyft upp länkhjulen och håll rullstolen i balans.
2. Rulla sedan de båda drivhjulen sakta över trottoarkanten. Under tiden håller du stadigt i drivringarna med båda händerna tills länkhjulen befinner sig på marken igen.

## 6.6 Köra upp- och nedför trappor




### VARNING!

#### Risk för att välta

När du manövrerar rullstolen i trappor finns det risk för att du tappar balansen och välter med rullstolen.

– Använd alltid 2 assistenter när du ska förflytta dig i trappor med mer än ett trappsteg.

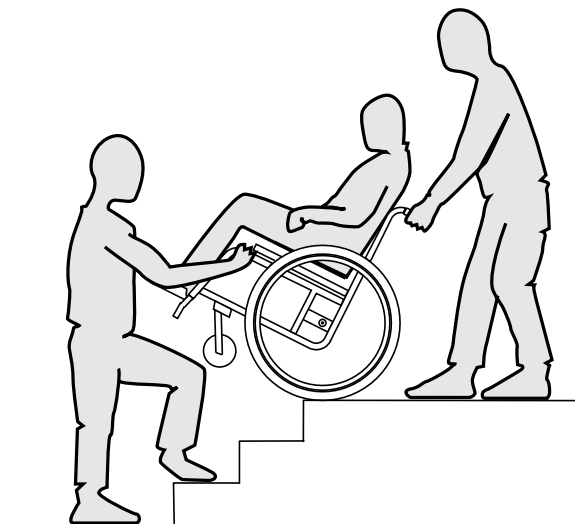

1. Du kan förflytta dig i trappor genom att ta dig an ett trappsteg i taget enligt beskrivningen ovan. Den ena assistenten ska stå bakom rullstolen och hålla i körhandtagen. Den andra assistenten ska hålla i någon av framramens massiva delar för att stödja rullstolen framifrån.

## 6.7 Manövrera rullstolen på ramper och lutande underlag



### VARNING!

#### Risk för att tappa kontrollen över rullstolen

När du kör på lutande underlag finns det en risk för att rullstolen välter bakåt, framåt eller åt sidan.

– Ha alltid en assistent bakom rullstolen när du närmar dig långa backar.  
– Undvik att köra på tvären i backar.  
– Undvik lutningar över 7°.  
– Undvik hastiga rörelser när du byter riktning i en backe.




### FÖRSIKTIGT!

Rullstolen kan rulla iväg även på svagt lutande underlag om du inte kontrollerar den med drivringarna.

– Använd parkeringsbromsarna när rullstolen står still på lutande underlag.

## Köra uppför backar


För att köra uppför en backe måste du ta lite sats, behålla farten och samtidigt kontrollera riktningen.

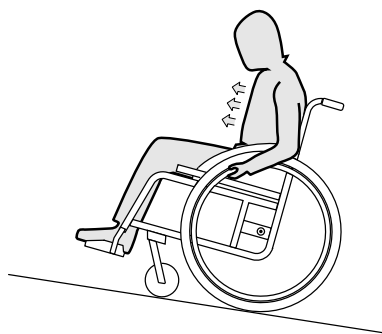

1. Böj överkroppen framåt och förflytta dig med snabba kraftfulla drag i båda drivringarna.

## Köra nedför backar

När du kör nedför backar är det viktigt att du har kontroll över riktningen och i synnerhet hastigheten.

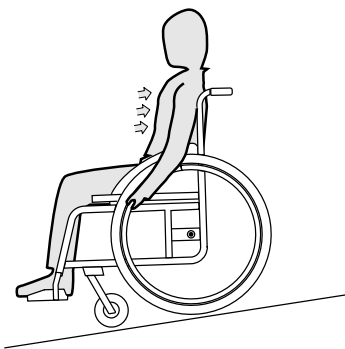


1. Luta dig bakåt och låt drivringarna röra sig långsamt genom händerna. Du bör kunna stanna rullstolen när som helst genom att gripa tag i drivringarna.



### FÖRSIKTIGT!

#### Risk för att du bränner dina händer.

Om du bromsar en längre stund genereras en stor mängd värme av friktionen som uppstår vid drivringarna (särskilt drivringar med glidskydd).  
– Använd lämpliga handskar.

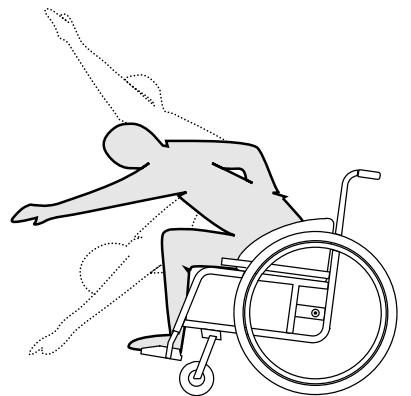

1. Se till att länkhjulen pekar framåt. (Du gör detta genom att flytta rullstolen en bit framåt och sedan flytta tillbaka den igen.)
2. Aktivera båda parkeringsbromsarna.
3. När du sträcker dig framåt måste överkroppen vara kvar ovanför länkhjulen.

### Sträckning bakåt



### VARNING!

#### Risk för att du trillar ur

Om du sträcker dig för långt bakåt kan rullstolen välta.

- Luta dig inte bakåt över ryggstödet.
- Använd ett tippskydd.

## 6.8 Stabilitet och balans när du sitter i rullstolen

Vissa vardagsaktiviteter och rörelser gör att du måste sträcka dig framåt, åt sidan eller bakåt och ut från rullstolen. Detta har stor påverkan på rullstolens stabilitet. Gör följande för att alltid hålla balansen:

### Leaning forwards




### VARNING!

#### Risk för att du trillar ur

Om du sträcker dig framåt kan du falla ur rullstolen.

- Sträck dig aldrig för långt fram och hoppa aldrig framåt på sitsen för att nå ett objekt.
- Böj dig inte framåt mellan knäna för att plocka upp något från golvet.

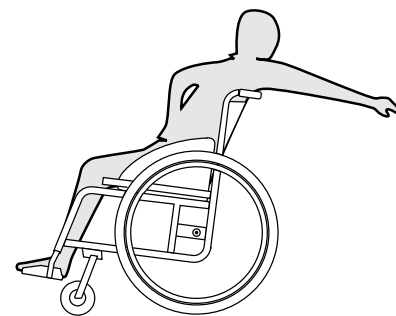

1. Se till att länkhjulen pekar framåt. (Du gör detta genom att flytta rullstolen en bit framåt och sedan flytta tillbaka den igen.)
2. Använd inte parkeringsbromsarna.
3. Sträck dig inte så långt bakåt att du måste ändra sittposition.

## 7 Transport

### 7.1 Säkerhetsinformation



#### VARNING!

Risk för personskador om rullstolen inte är ordentligt fastgjord

I händelse av en olycka, inbromsning eller liknande kan du få allvarliga skador av delar till rullstolen som kastas iväg.

- Ta alltid av drivhjulen när rullstolen ska transporteras.
- Sätt fast alla rullstolens delar ordentligt vid transport för att förhindra att de lossnar under färden




#### OBS!

För stort slitage och överdriven nötning kan påverka de viktbärande delarnas styrka.

- Dra inte rullstolen över skrovliga ytor utan att hjulen är monterade (t.ex. dra inte ramen över grov asfalt).


### 7.2 Fälla ned ryggstödsbygeln

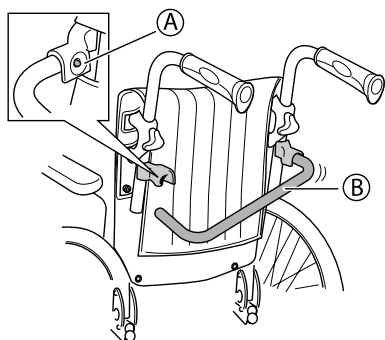

1. Frigör fjäderknappen A.
2. Fäll ryggstödsbygeln B nedåt.

### 7.3 Ta bort armstöden

#### Uppfällbara armstöd:

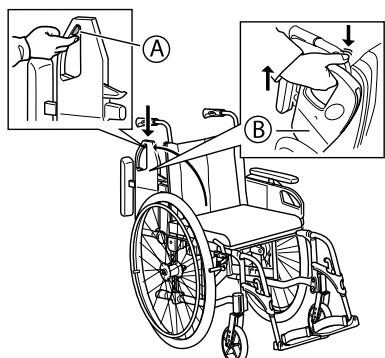

1. Tryck på knappen A.
2. Lyft armstödet B rakt upp och ta bort det.




Luta armstödet något framåt för att göra det enklare att ta bort.

#### Löstagbara armstöd:

Lyft armstöden rakt upp och ta bort dem.

### 7.4 Fälla ihop sitsen

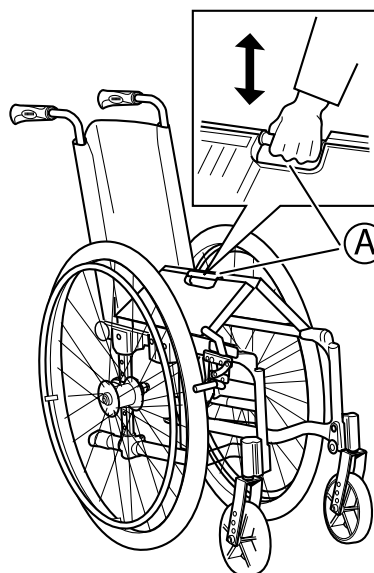

1. Dra handtaget på sitsen A rakt upp.
2. Fäll ihop sitsen.



#### VARNING!

Risk för att du fastnar med fingrarna

- Var försiktig så du inte fastnar med fingrarna när du fäller ihop sitsen.

### 7.5 Fasta benstöd

För installera eller ta bort de svängbara, fasta benstöden, se → 3.14.1 Svängbara, vinkelfasta benstöd, sida 15.

### 7.6 Vinkeljusterbara benstöd

För installera eller ta bort de svängbara, vinkeljusterbara benstöden, se


→ 3.14.2 Svängbara, vinkeljusterbara benstöd, sida 15.


### 7.7 Bromsspak




Bromsspakens handtag har ett visst frispel. När benstödet har flyttats till sitt ytterläge fälls spaken upp automatiskt utan att aktivera bromsen. Aktivera bromsen genom att trycka spaken framåt.

### 7.8 Ta bort drivhjulen

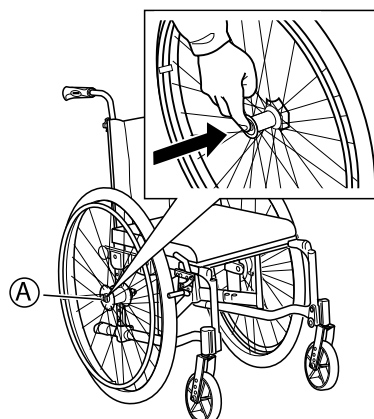

1. Tryck in upplåsningsknappen  och håll den intryckt.
2. Dra drivhjulet rakt utåt.
3. Ta bort drivhjulet.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.

## 7.9 Lyfta rullstolen

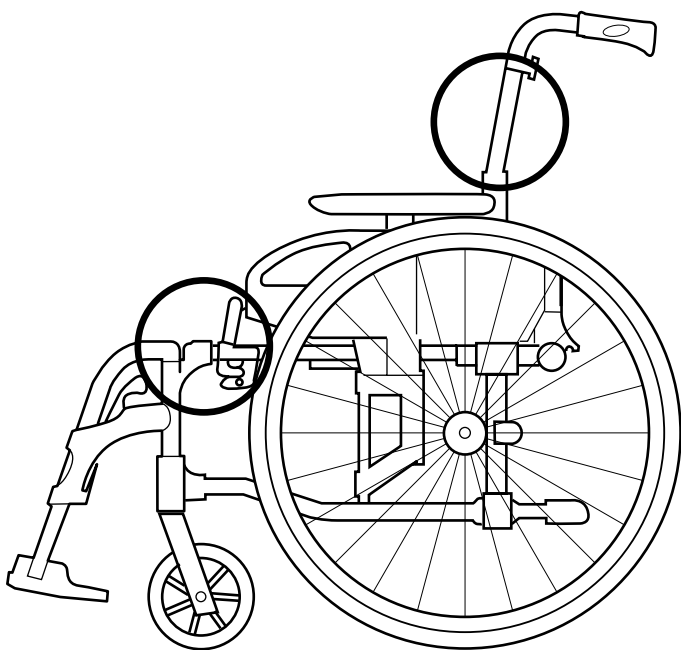


- Lyft alltid rullstolen genom att hålla ramen på de ställen som visas på bilden.
- Se till att ryggstödet och körhandtagen sitter fast ordentligt.
- Läs kapitlet "Säkerhetsinstruktioner/framdrivningstekniker".

 Lyft aldrig rullstolen i ryggstödsbygeln.

## 7.10 Transportera elrullstolen utan brukare

 **FÖRSIKTIGT!**  
**Risk för personskador**

- Om det inte går att späanna fast elrullstolen i det transporterande fordonet på ett säkert sätt är Invacares rekommendation att den inte transporteras.

 Du kan ta bort bakhjulen när du transporterar rullstolen.

- !** **OBS!**  
Överdrivet slitage och nötning kan påverka hållfastheten hos bärande delar.
- Dra inte din rullstol över slipmedel ytor utan att hjulen är monterade (t.ex. dra ramen över asfalten).



**FÖRSIKTIGT!**  
**Risk för skada**

- Om du inte kan fästa din rörlighet enheten säkert i ett transportfordon, rekommenderar Invacare att du inte transporterar den.

Din rullstol kan transporteras utan begränsningar, vare sig det är på väg, järnväg eller med flyg. Enskilda transportföretag har dock riktlinjer som eventuellt kan begränsa eller förbjuda vissa transportförfaranden. Fråga transportföretaget i varje enskilt fall.

- Invacare rekommenderar starkt att du fäster elrullstolen i golvet i det transporterande fordonet.

## 7.11 Transportera rullstolen i ett fordon när brukaren sitter i den

Även när rullstolen är ordentligt fastspänd och följande regler följs kan passageraren råka ut för en skada vid en kollision eller ett plötsligt stopp. Därför rekommenderar Invacare starkt att rullstolsanvändaren flyttas över till bilsätet. Ändra eller byt inte ut delar på rullstolen (struktur, ram eller komponenter) utan skriftligt godkännande från Invacare Corporation. Rullstolen har godkänts i test enligt kraven i ISO 7176-19 (frontalkrock).



**WARNING!**  
**Risk för allvarig skada eller dödsfall**

- Om rullstolen ska användas som säte i ett fordon måste ryggstöds höjden vara minst 400 mm.

Om rullstolen ska transporteras i ett fordon när rullstolsanvändaren sitter i den måste ett fastspänningssystem installeras i fordonet. Rullstolens och brukarens fastspänningssystem måste vara godkända enligt ISO 10542-1. Kontakta din lokala auktoriserade Invacare-leverantör för mer information om hur du skaffar och installerar ett godkänt och kompatibelt fastspänningssystem.



**WARNING!**

- Om det av någon anledning är omöjligt att flytta över rullstolsanvändaren till ett fordonssäte kan rullstolen användas som ett säte i fordonet om följande regler och förfaranden följs. En transportsats (tillval) måste monteras på stolen för detta ändamål.
  - Rullstolen måste spännas fast i fordonet med ett fastspänningssystem med fyra fästpunkter.
  - Brukaren måste använda ett trepunktsbälte som är förankrat i fordonet.
  - Brukaren måste därutöver vara fastspänd med ett höftbälte i rullstolen.



**WARNING!**

- Säkerhetsbälten får endast användas om rullstolsanvändaren väger minst 22 kg (ISO-7176-19).
  - Använd inte rullstolen som ett säte i ett fordon om brukarens vikt är mindre än 22 kg.

**WARNING!**

- Kontakta transportföretaget före resan för information om möjligheterna att tillhandahålla den nedan angivna utrustningen.
- Se till att det finns tillräckligt mycket fritt utrymme kring rullstolen och brukaren så att inte brukaren kommer i kontakt med andra passagerare, bildelar som inte är vadderade, tillval till rullstolen eller fästpunkter för fastspänningssystemet.

**WARNING!**

- Se till att fästpunkterna på rullstolen inte är skadade och att parkeringsbromsarna är fullt funktionsdugliga.
- Punkteringssäkra däck bör användas under transporten för att undvika problem med bromsarna på grund av minskat lufttryck i däcken.

**WARNING!**

- Person- eller saksador kan uppkomma om delar eller tillval till rullstolen lossnar vid en kollision eller ett plötsligt stopp.
- Se till att alla löstagbara delar och extra tillval plockas bort från rullstolen och förvaras säkert i fordonet.
  - Koppla bort manöverdosan (endast elektrisk version) från anslutningen till elektronikboxen och förvara den säkert i fordonet.
  - Det är mycket viktigt att du lämnar in rullstolen för besiktning av en behörig tekniker efter en olycka, kollision eller liknande.

**Ramper och lutande underlag:****WARNING!****Risk för personskador**

Rullstolen kan röra sig okontrollerat framåt eller bakåt av misstag.

- Lämna aldrig brukaren utan uppsyn när rullstolen ska köras upp eller nerför ramper eller lutande underlag.




Därför rekommenderar Invacare starkt att rullstolsanvändaren flyttas över till bilsätet och använder höftbälte.

**OBS!**

- Se de bruksanvisningar som medföljer fastspänningssystemet.
- Följande bilder kan skilja sig åt beroende på leverantören av fastspänningssystemet.



Valet av rullstolskonfiguration (sittbredd och djup, hjulbas) påverkar manövrerbarhet och åtkomst till motorfordon.

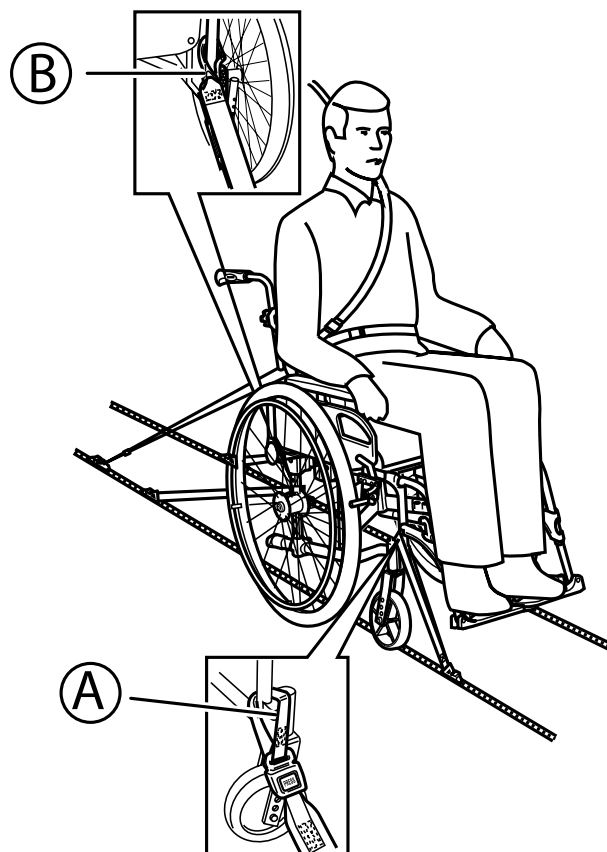
**Spänna fast rullstolen med ett fastspänningssystem med fyra fästpunkter.****WARNING!**

- Ställ rullstolen med brukaren framåtvänd i fordonets färdriktning.
- Aktivera rullstolens parkeringsbromsar.
- Aktivera tippskyddet (om sådant finns).

Rullstolens fästpunkter där fastspänningssystemet ska fästas är markerade med en symbol med en karbinhake (se följande bilder och avsnittet 2.3 *Etiketter och symboler på produkten, sida 7*).

1. Spänn fast rullstolen vid fordonets installerade fästskena med hjälp av de främre och bakre remmarna på fastspänningssystemet med fyra fästpunkter. Se den bruksanvisning som följer med fastspänningssystemet med fyra fästpunkter.

### Främre fästpunkter för karbinhakarna:

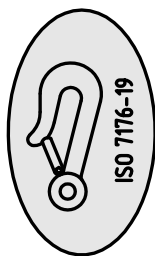

1. Fäst de främre remmarna ovanför styrhjulstöden **A** enligt bilden ovan (se etiketternas placering).
2. Fäst de främre remmarna vid fästskenan enligt instruktionerna om rekommenderad bästa praxis från säkerhetsbältestillverkaren.
3. Frigör parkeringsbromsarna och sträck de främre remmarna genom att dra rullstolen bakåt bakifrån.
4. Aktivera parkeringsbromsarna på nytt.

### Bakre fästpunkter för karbinhakarna:

1. Fäst karbinhakarna på de bakre remmarna **B** på ramen precis ovanför drivhjulsfästena enligt figuren ovan (se etiketternas placering).
2. Fäst de bakre remmarna vid fästskenan enligt instruktionerna om rekommenderad bästa praxis från säkerhetsbältestillverkaren.
3. Dra åt remmarna.



#### OBS!


– Se till att karbinhakarna är försedda med halkskydd så att de inte glider åt sidan på axeln.

### Anpassa höftbältet




#### VARNING!

Höftbältet kan användas som tillägg till, men aldrig istället för, ett godkänt fastspänningssystem (trepunktsbälte).

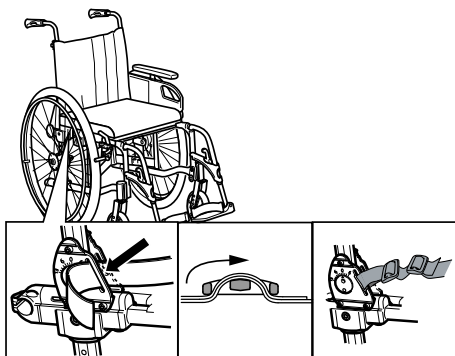


1. Justera höftbältet så att det passar rullstolens brukare, se avsnitt 4.11 *Posture belt*, sida 27.

### Montera nackstöd (om sådant finns)

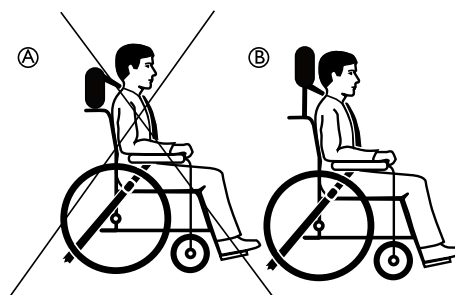

- A** Felaktig placering av nackstödet  
**B** Korrekt placering av nackstödet

### Fästa trepunktsbältet

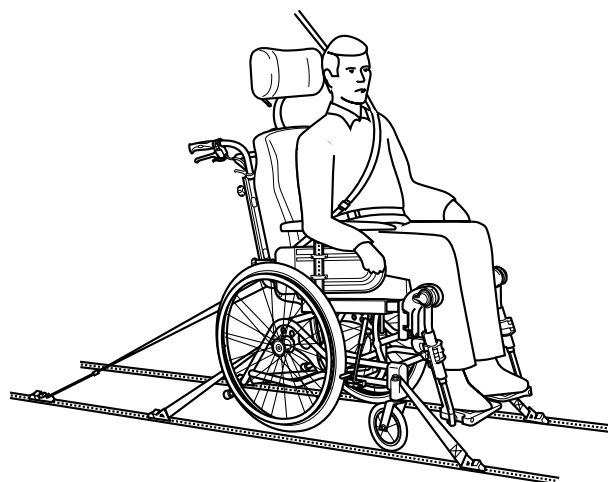


#### OBS!

Bilden ovan kan skilja sig åt beroende på leverantören av rullstolen och fastspänningssystemet.



#### VARNING!


- Se till att trepunktsbältet sitter så nära kroppen som möjligt på brukaren utan att orsaka obehag och se till att det inte är vridet.
- Se till att inga av rullstolens delar, t.ex. armstöd eller hjul, sitter mellan trepunktsbältet och brukarens kropp.
- Se till att säkerhetsbältet löper fritt från brukaren till förankringspunkten och att inga delar av fordonet, rullstolen, sitsen eller valfria tillbehör sitter i vägen.
- Se till att bäckenbältet sitter åt ordentligt över brukarens höfter och att det inte kan åka upp till bukområdet.
- Se till att brukaren kan nå frigöringsmekanismen utan hjälp.

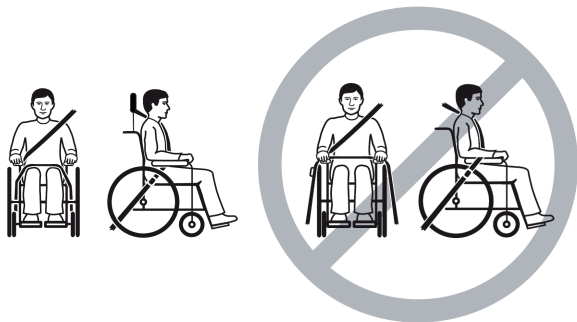

1. Fäst trepunktsbältet enligt instruktionerna i den bruksanvisning som tillhandahålls med trepunktsbältet.
2. Inga av rullstolens delar får sitta mellan trepunktsbältet och brukarens kropp, t.ex. armstöd eller hjul.

**!** **OBS!**

- Fäst fastspänningssystemets (trepunktsbältet) bäckenbälte så långt ned över bäckenet att vinkeln på bältet ligger inom det rekommenderade området (A) på 30 till 75 grader mot horisontalplanet. En skarp vinkel är att föredra, men den ska aldrig överstiga 75 grader.

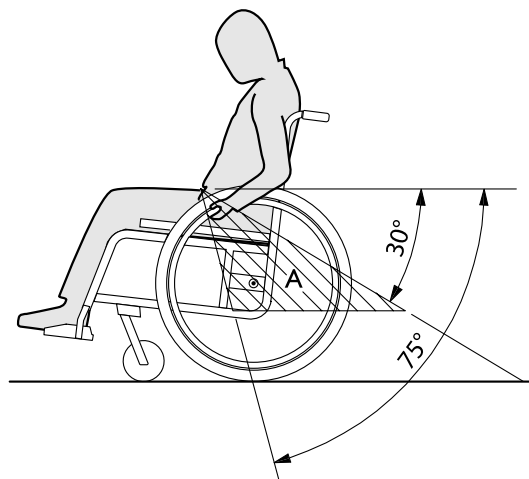



## 8 Underhåll

### 8.1 Säkerhetsinformation



#### **VARNING!**

Vissa material försämras naturligt med tiden. Detta kan leda till skador på vissa av rullstolens delar.

- Rullstolen bör besiktigas av en behörig tekniker eller annan person med adekvat utbildning minst en gång om året eller när den inte har använts under en längre tid.



Emballage vid retur

När rullstolen skickas till en auktoriserad leverantör måste den förpackas på lämpligt sätt så att den inte skadas under frakten.

### 8.2 Underhållsschema

Utför följande visuella inspektioner och underhållsåtgärder regelbundet, eller se till att de utförs av någon annan, så att rullstolen alltid är säker och tillförlitlig att använda.

	varje vecka	varje månad	varje år
Kontrollera däcktrycket	x		
Kontrollera att drivhjulerna sitter fast som de ska	x		
Kontrollera höftbältet	x		
Kontrollera fällmekanismen		x	
Kontrollera framhjulen		x	
Kontrollera skruvar		x	
Kontrollera ekrar		x	
Kontrollera parkeringsbromsarna		x	
Låt en behörig tekniker kontrollera rullstolen			x

#### Allmän visuell inspektion

1. Kontrollera om rullstolen har lösa delar, sprickor eller andra defekter.
2. Om du hittar något fel ska du omedelbart sluta använda rullstolen för kontakta en auktoriserad leverantör.

#### Kontrollera däcktrycket

1. Kontrollera däcktrycket, se avsnittet "Däck" för mer information.
2. Pumpa däcken till erforderligt tryck.
3. Kontrollera samtidigt däckmönstrets djup.
4. Byt ut däcken vid behov.

#### Kontrollera att drivhjulerna sitter fast som de ska

1. Dra i drivhjulet för att kontrollera att den löstagbara axeln sitter fast ordentligt. Hjulet ska inte lossna.
2. Om drivhjulerna inte sitter som de ska kan du ta bort smuts och eventuella ansamlingar. Om problemet kvarstår kan de löstagbara hjulaxlarna monteras om av en behörig tekniker.

#### Kontrollera höftbältet

1. Kontrollera att höftbältet är rätt justerat.



#### **OBS!**

- Lösa höftbälten ska justeras av en auktoriserad leverantör.
- Skadade höftbälten måste bytas ut av en behörig tekniker.

#### Kontrollera fällmekanismen

1. Kontrollera att fällmekanismen fungerar och rör sig obehindrat.

#### Kontrollera framhjulen

1. Kontrollera att framhjulen kan svänga fritt.
2. Avlägsna smuts och hår från framhjulslagren.
3. Felaktiga eller slitna framhjul måste bytas ut av en behörig tekniker.

#### Kontrollera skruvar

Det kan hända att skruvarna lossnar vid konstant användning.

1. Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna och inte kan röra sig (på fotstödet, framhjulet, framhjulsskyddet, sitsklädseln, sidorna, ryggstödet, ramen, sittmodulen).
2. Dra åt alla lösa skruvar med lämpligt åtdragningsmoment, se 8.3 avsnittet *Om åtdragningsmoment, sida 42*.



#### **OBS!**

- Självvåsande skruvar, muttrar eller bindemedel för gänglåsning används för flera anslutningar. Om dessa lossas måste de ersättas med nya självvåsande skruvar eller muttrar eller säkras med bindemedel för gänglåsning på nytt.
- Självvåsande skruvar/muttrar måste bytas ut av en behörig tekniker.

#### Kontrollera att ekrarna är spända

Ekrarna ska inte vara lösa eller böjda.

1. Lösa ekrar måste dras åt av en behörig tekniker.
2. Trasiga ekrar måste bytas ut av en behörig tekniker.

#### Kontrollera parkeringsbromsarna

1. Kontrollera att parkeringsbromsarna har rätt position. Bromsen är korrekt inställd om bromsbacken trycker ned däckets några millimeter när bromsen slås till.
2. Om du upptäcker att bromsen inte är korrekt inställd ska den justeras av en behörig tekniker.



#### **OBS!**

- Parkeringsbromsarna måste ställas in igen efter att du byter ut drivhjulerna eller ändrar deras position.


## Kontroll efter en kraftig kollision eller stöt

- !** **OBS!**  
Rullstolen kan få skador som inte är synliga om den råkar ut för en kraftig kollision eller stöt.  
– Det är mycket viktigt att du lämnar in rullstolen för besiktning av en behörig tekniker efter en kraftig kollision eller stöt.

## Reparera eller byta en innerslang

1. Ta av drivhjulet och släpp ut luften från innerslangen.
2. Ta av ena däcksidan från hjulringen med hjälp av ett cykeldäckverktyg. Använd inte vassa objekt, t.ex. en skruvmejsel, eftersom de kan skada innerslangen.
3. Dra ut innerslangen ur däck.
4. Reparera innerslangen med en cykelreparationssats eller byt ut slangen vid behov.
5. Pumpa slangen något så att den blir rund.
6. Sätt in ventilen i hjulringens ventilhål och lägg in slangen i däck (slangen ska ligga runt hela däck utan veck).
7. Lyft tillbaka däcksidan över hjulringens kant. Börja i närheten av ventilen och använd ett cykeldäckverktyg. Kontrollera runt hela däck att inte innerslangen fastnar mellan däck och hjulringens kant.
8. Pumpa däck till maximalt användningstryck. Kontrollera att det inte puser ut luft ur däck.

## Reservdelar

-  Alla reservdelar kan beställas från en auktoriserad Invacare-leverantör.

## 8.3 Åtdragningsmoment

- !** **OBS!**  
Dra inte åt fästelementen för hårt eftersom detta kan skada produkten.

Om inget annat anges i de specifika instruktionerna gäller följande riktlinjer:

Gänga	Åtdragningsmoment i Nm $\pm 10\%$
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	49 Nm
M12	80 Nm
M14	120 Nm
M16	180 Nm

## 8.4 Rengöring och desinfektion

### 8.4.1 Allmän säkerhetsinformation



#### FÖRSIKTIGT!

##### Risk för kontaminering

- Vidta försiktighetsåtgärder för dig själv och använd lämplig skyddsutrustning.



#### OBS!

Felaktiga vätskor och metoder kan skada produkten.

- Alla rengöringsmedel och desinfektionsmedel som används måste vara effektiva, kompatibla med varandra och måste skydda de material som de är avsedda att rengöra.
- Använd aldrig korroderande vätskor (alkaliska ämnen, syror etc.) eller slipande rengöringsmedel. Vi rekommenderar ett vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk som t.ex. diskmedel, om inte annat anges i rengöringsanvisningarna.
- Använd aldrig ett lösningsmedel (cellulosathinner, aceton etc.) som ändrar strukturen i plasten eller löser upp fästa etiketter.
- Se alltid till att produkten är helt torr innan den tas i bruk igen.



För rengöring och desinfektion i kliniska eller långvårdsmiljöer gäller riktlinjer för institutionell hygien.

### 8.4.2 Rengöringsintervall



#### OBS!

Regelbunden rengöring och desinfektion ger en smidigare drift, förlänger livslängden och förhindrar kontaminering.

Rengör och desinficera produkten

- regelbundet då den är i bruk
- före och efter underhållsprocedurer
- när den har kommit i kontakt med kroppsvätskor
- innan den används med en ny brukare.

### 8.4.3 Rengöring



#### OBS!

- Produkten tål inte rengöring i automatiska tvättanläggningar, högtryckstvätt eller ångrengöring.



#### OBS!

Smuts, sand och saltvatten kan skada hjullagren, och delar av stål kan rosta om ytan skadas.

- Utsätt endast rullstolen för sand och saltvatten under kortare perioder och rengör den efter varje utflykt till stranden.
- Om rullstolen är smutsig ska du torka av smutsen så snart som möjligt med en fuktig trasa och sedan torka den noggrant.

1. Ta bort eventuell installerad tillvalsutrustning (endast tillvalsutrustning som inte kräver verktyg).
2. Torka av de enskilda delarna med en trasa eller en mjuk borste, vanliga hushållsrengöringsmedel (pH = 6–8) och varmt vatten.
3. Skölj delarna med varmt vatten.
4. Torka delarna noga med en torr trasa.



Nötta målade metallytor kan putsas upp med bilpolermedel och mjukt vax.

### Rengöra klädseln

Instruktioner för rengöring av klädseln finns på etiketterna på sitsen, dynan och ryggstödsklädseln.



Om möjligt ska kardborrebanden (de självfästade delarna) alltid stängas vid tvätt, för att förhindra att det samlas skräp och trådar på kardborrebanden och att klädseln skadas av dem.

### 8.4.4 Desinfektion

Rullstolen kan desinficeras genom sprutning eller avtorkning med testade, godkända desinfektionsmedel.



Spraya en mjuk rengörings- och desinficeringsprodukt (bakteriedödande och svampdödande som uppfyller EN1040 / EN1276 / EN1650-standarderna) och följ instruktionerna från tillverkaren.

1. Torka av alla allmänt tillgängliga ytor med en mjuk trasa och vanligt hushållsdesinfektionsmedel.
2. Låt produkten lufttorka.

---

## 9 Felsökning

---

### 9.1 Säkerhetsinformation

Fel kan inträffa till följd av den dagliga användningen, justeringar eller förändrade krav på rullstolen. Tabellen nedan hjälper dig att identifiera och åtgärda fel.

En del av åtgärderna i listan måste utföras av en behörig tekniker. De är markerade. Vi rekommenderar dock att *alla* justeringar utförs av en behörig tekniker.



#### FÖRSIKTIGT!

- Om du upptäcker ett fel på rullstolen, t.ex. avsevärt förändrade hanteringssegenskaper, ska du omedelbart sluta använda rullstolen och kontakta din leverantör.

## 9.2 Identifiera och åtgärda problem

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Rullstolen rör sig inte i en rak linje	Felaktigt däcktryck i ett av drivhjulen	Korrigerar däcktrycket, → 11.2 Däck, sida 48
	En eller flera ekrar är trasiga	Byt ut felaktiga ekrar, → behörig tekniker
	Ekrarna är ojämnt spända	Dra åt lösa ekrar, → behörig tekniker
	Länkhjulslagren är smutsiga eller skadade	Rengör lagren eller byt ut länkhjulet, → behörig tekniker
Rullstolen tippar bakåt för lätt	Drivhjulen är monterade för långt fram	Montera drivhjulen längre bak, → behörig tekniker
	Ryggvinkeln är för stor	Minska ryggstödsvinkeln, → behörig tekniker
	Sittvinkeln är för stor	Montera länkhjulet upptill på framgaffeln, → behörig tekniker Välj en mindre framgaffel, → behörig tekniker
Bromsarna tar dåligt eller olika mycket	Felaktigt däcktryck i ett eller båda bakdäcken	Korrigerar däcktrycket, → 11.2 Däck, sida 48
	Felaktig bromsinställning	Korrigerar bromsinställningen, → behörig tekniker
Rullmotståndet är väldigt högt	Bakdäcken har för lågt däcktryck	Korrigerar däcktrycket, → 11.2 Däck, sida 48
	Drivhjulen är inte parallella	Se till att drivhjulen blir parallella, → behörig tekniker
Länkhjulen kränger när det går fort	Länkhjulens lagerblock är för dåligt åtdragen	Dra åt muttern på lagerblockets axel något, → behörig tekniker
	Länkhjulet är blankslitet	Byt länkhjul, → behörig tekniker
Länkhjulet är stelt eller sitter fast	Hjullagren är smutsiga eller defekta	Rengör lagren eller byt ut länkhjulet, → behörig tekniker
Rullstolen är svår att fälla upp	Ryggstödsklädseln sitter för hårt åtdragen	Lossa kardborrebanden på ryggstödsklädseln något, → 3.7 Justera formen – ryggstöd med justerbar spänning, sida 11

## 10 Återanvändning

### 10.1 Förvaring

- !** **OBS!**  
Risk för skador på produkten
- Förvara inte produkten nära värmekällor.
  - Förvara aldrig andra föremål ovanpå rullstolen.
  - Förvara rullstolen inomhus på en torr plats.
  - Se temperaturbegränsningen i kapitel 11 *Teknisk Data*, sida 47.

Efter en längre förvaringsperiod (längre än fyra månader) måste rullstolen inspekteras i enlighet med kapitel 8 *Underhåll*, sida 41.

### 10.2 Rekonditionering

Den här produkten kan återanvändas. Gör följande när produkten ska rekonditioneras för en ny användare:

- Inspektion
- Rengöring och desinfektion
- Anpassning till den nya användaren

Detaljerad information finns i 8 *Underhåll*, sida 41 och i servicemanualen för produkten.

Se till att bruksanvisningen överlämnas tillsammans med produkten.

Om skador eller fel upptäcks ska produkten inte återanvändas.

### 10.3 Kassering

Tänk på miljön och återvinn produkten genom att lämna in den på en återvinningscentral när den inte längre kan användas.

Ta isär produkten och dess komponenter så att de olika materialen kan separeras och återvinnas individuellt.

Kassering och återvinning av begagnade produkter och förpackningar måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för avfallshantering i respektive land. Kontakta det företag som sköter den lokala avfallshanteringen för att få information.

## 11 Teknisk Data

### 11.1 Mått och vikt

Alla mått- och viktspecifikationer hänvisar till ett stort utbud av standardkonfigurationer av rullstolen. Mått och vikt (baseras på ISO 7176-1/5/7) kan variera beroende på konfiguration.

- !** **OBS!**
- I vissa konfigurationer kommer rullstolens totala mått att överstiga de godkända gränserna för den användningsklara rullstolen, vilket i sin tur omöjliggör åtkomst till nödutgångar.
  - I vissa konfigurationer överstiger rullstolen den rekommenderade storleken för tågresor inom EU.

	<b>FOCUS</b>	<b>FOCUS 150</b>
Sittbredd	380–505 mm	530–555 mm
Sittdjup	Låga ramar: 375–450 mm Höga ramar: 425–500 mm Transit: 425–500 mm	425–500 mm
Sitthöjd	Låga ramar: 365–490 mm Höga ramar: 415–540 mm Transit: 430–465 mm	440–540 mm
Ryggstödshöjd	380–780 mm	380–780 mm
Armstödshöjd	190–290 mm Transit: 210–385 mm	190–290 mm
Benstödslängd (avstånd mellan fotstöd och sits)	355–465 mm i steg om 10 mm	355–465 mm i steg om 10 mm
Lutningsjustering (sittvinkel)	0° – 6°	0° – 6°
Ryggstödsjustering	– 6°-13° Fällbart ryggstöd: 0° – 30°	– 6°-13°
Total bredd	Sittbredd + 220 mm	Sittbredd + 220 mm
Totalhöjd	745–1320 mm	745–1320 mm
Total längd (med benstöd)	900–1195 mm Transit: 1080–1180 mm	900–1195 mm
Bredd hopvikt	320 mm Transit: 310 mm	320 mm
Längd hopvikt	595–890 mm	595–890
Höjd hopvikt	893–930	893–930
Brukarens maxvikt	135 kg	150 kg
Transportvikt	10 kg	10 kg
Totalvikt	16,2 kg	16,2 kg
Statisk stabilitet i uppförsbacke	9° -14°	9° -14°
Statisk stabilitet i nedförsbacke	12° -20°	12° -20°
Statisk stabilitet i sidled	19°	19°
Maximal lutning med parkeringsbroms	7°	7°
Vinkel mellan ben och sittytan	96° -211°	96° -211°
Främre utrymme för armstödsstruktur	320–505 mm	320–505 mm

Drivingsdiameter	450–540 mm	450–540 mm
Horisontal placering av axel	25–85 mm	25–85 mm
Minsta vändradie	785 mm	785 mm

	<b>515 mm (20 tum)</b>	<b>560 mm (22 tum)</b>	<b>600 mm (24 tum)</b>	<b>405 mm (16 tum)</b>
Bredd på hjulen	35 mm (1 3/8 tum)	25 mm (1 tum) – 35 mm (1 3/8 tum)	25 mm (1 tum) – 35 mm (1 3/8 tum)	45 mm (1 3/4 tum)
Hjullutning	0° +/- 1° (rullstol utan last)			

### 11.1.1 Maxvikt för borttagbara delar

Maxvikt för borttagbara delar	
Del:	Maxvikt:
Vinkeljusterbart benstöd med vaddyna och fotstöd	3,2 kg
Armstöd	2,0 kg
Drivhjul 600 mm (24 tum) massivt med drivring och ekerskydd	2,5 kg
Huvudstöd/nackstöd/kindstöd	1,4 kg
Bålstöd	0,8 kg
Ryggdyna	2,0 kg
Sittdyna	1,9 kg
Brickbord	3,9 kg




## 11.2 Däck

Det optimala trycket beror på däcktypen:

Nedanstående tabell visar tryck för olika däck. Om däck inte finns med i nedanstående lista kan du kontrollera däcktrycket på sidan av däck där det maximala däcktrycket finns angivet.

Däck	Maxtryck		
Pneumatiskt profildäck: 515 mm (20 tum), 560 mm (22 tum); 610 mm (24 tum)	4.5 bar	450 kPa	65 psi
Pneumatiskt lågprofildäck: 515 mm (20"); 560 mm (22"); 610 mm (24")	7.5 bar	750 kPa	110 psi
Massivt däck: 560 mm (22"), 610 mm (24")	-	-	-

Däck	Maxtryck		
Massivt däck: 125 mm (5 tum); 140 mm (5 1/2 tum); 150 mm (6 tum); 200 mm (8 tum)	-	-	-
Pneumatiskt däck: 150 mm (6 tum), 180 mm (7 tum); 200 mm (8 tum)	2.5 bar	250 kPa	36 psi

-  Kompatibiliteten för däcken som anges ovan beror på rullstolens konfiguration och/eller modell.
-  Däckets dimension är markerad på däcksidan. Byte till lämpliga däck måste utföras av en behörig tekniker.
-  Om du får punktering på ett däck kan du kontakta en lämplig verkstad (t.ex. en cykelreparatör eller cykelåterförsäljare) och få innerslangen utbytt av en fackman.



#### FÖRSIKTIGT!


– Lufttrycket i däcken måste vara lika på båda sidor för att bromsarna ska fungera effektivt och att rullstolen ska vara lätt att köra.


## 11.3 Material

Ram, ryggrör	Aluminium
Plastdelar som bromshandtag, sidoskydd, fotplattor, armstödsdynor och delar av de flesta alternativen	Termoplast (t.ex. PA, PP, ABS och PUR) enligt märkningen på delarna




Klädsel (sits och ryggstöd)	Skum (PUR), nylontyg och polyester, Jemima och plyshtyg och tyg belagt med elastiskt polyuretan (PU)
Brickbord	Termoplast (ABS) enligt märkningen på delen
Skrivar, brickor och muttrar	Stål

 Alla material som används är rostskyddade. Vi använder endast material och komponenter som följer REACH-direktivet.

 Stölskydds- och metalldetektorsystem: I sällsynta fall kan materialen som används i rullstolen aktivera stölskydds- och metalldetektorsystem.





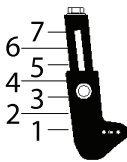
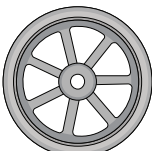
## 11.4 Miljöförhållanden

	Förvaring och transport	Drift
Temperatur	-20 °C till 40 °C	-5 °C till 40 °C
Relativ luftfuktighet	20 %–90 % vid 30 °C, icke-kondenserande	
Atmosfäriskt tryck	800–1 060 hPa	

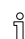 Tänk på att när en rullstol har förvarats i låga temperaturer måste den anpassas enligt kapitlet 8 *Underhåll, sida 41* före användning.







## 11.5 Tabeller med sitthöjder

### 11.5.1 Rea Focus hög – 515 x 35 mm (20 x 1 3/8 tum)

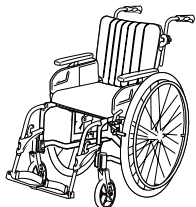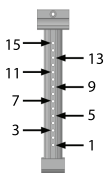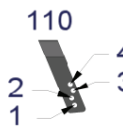						
415	3°	9	4	E/T	7	125
440	3°	7	2	E/T	5	125
440	3°	7	3	E/T	E/T	140
440	3°	7	3	E/T	6	150
465	3°	5	E/T	3	3	125
465	3°	5	1	4	E/T	140
465	3°	5	1	4	4	150
465	3°	5	2	E/T	E/T	180
490	3°	3	E/T	1	1	125
490	3°	3	E/T	2	E/T	140
490	3°	3	E/T	2	2	150
490	3°	3	E/T	3	E/T	180
490	3°	3	1	4	4	200







E/T = ej tillämpligt, \* = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

### 11.5.2 Rea Focus hög – 560 x 35 mm (22 x 1 3/8 tum)

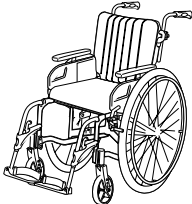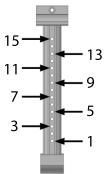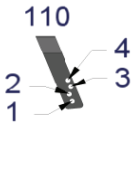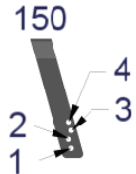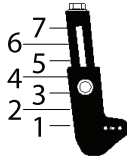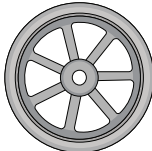						
415	3°	11	4	E/T	7	125
440	3°	9	2	E/T	5	125
440	3°	9	3	E/T	E/T	140
440	3°	9	3	E/T	6	150
465	3°	7	E/T	3	3	125
465	3°	7	1	4	E/T	140
465	3°	7	1	4	4	150
465	3°	7	2	E/T	E/T	180
490	3°	5	E/T	1	1	125
490	3°	5	E/T	2	E/T	140
490	3°	5	E/T	2	2	150
490	3°	5	E/T	3	E/T	180
490 *	3°	5	1	4	4	200
515	3°	3	E/T	1	E/T	140
515	3°	3	E/T	1	1	150
515	3°	3	E/T	2	E/T	180
515 *	3°	3	E/T	3	3	200
540 *	3°	1	E/T	1	1	200

E/T = ej tillämpligt, \* = ej möjligt i kombination med 90° benstöd







### 11.5.3 Rea Focus hög – 560 x 25 mm (22 x 1 tum)

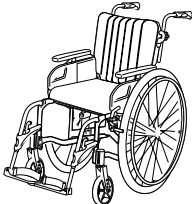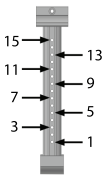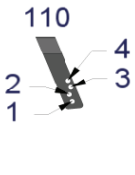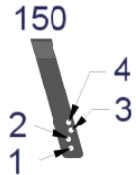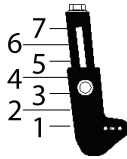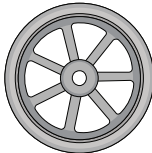						
415	3°	10	4	E/T	7	125
440	3°	8	2	E/T	5	125
440	3°	8	3	E/T	E/T	140
440	3°	8	3	E/T	6	150
465	3°	6	E/T	3	3	125
465	3°	6	1	4	E/T	140
465	3°	6	1	4	4	150
465	3°	6	2	E/T	E/T	180
490	3°	4	E/T	1	1	125
490	3°	4	E/T	2	E/T	140
490	3°	4	E/T	2	2	150

490	3°	4	E/T	3	E/T	180
490 *	3°	4	1	4	4	200
515	3°	2	E/T	1	E/T	140
515	3°	2	E/T	1	1	150
515	3°	2	E/T	2	E/T	180
515 *	3°	2	E/T	3	3	200
540 *	3°	E/T	E/T	E/T	E/T	200







E/T = ej tillämpligt, \* = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

#### 11.5.4 Rea Focus hög – 610 x 35 mm (24 x 1 3/8 tum)

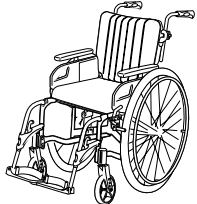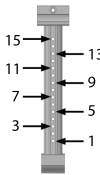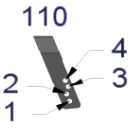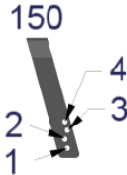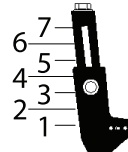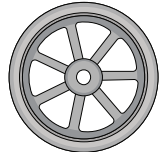						
415	3°	13	4	E/T	7	125
440	3°	11	2	E/T	5	125
440	3°	11	3	E/T	E/T	140
440	3°	11	3	E/T	6	150
465	3°	8	E/T	3	3	125
465	3°	8	1	4	E/T	140
465	3°	8	1	4	4	150
465	3°	8	2	E/T	E/T	180
490	3°	6	E/T	1	1	125
490	3°	6	E/T	2	E/T	140
490	3°	6	E/T	2	2	150
490	3°	6	E/T	3	E/T	180
490 *	3°	6	1	4	4	200
515	3°	5	E/T	1	E/T	140
515	3°	5	E/T	1	1	150
515	3°	5	E/T	2	E/T	180
515 *	3°	5	E/T	3	3	200
540 *	3°	3	E/T	1	1	200

E/T = ej tillämpligt, \* = ej möjligt i kombination med 90° benstöd







#### 11.5.5 Rea Focus hög – 610 x 25 mm (24 x 1 tum)

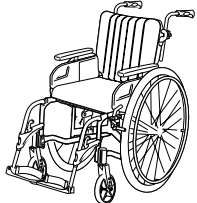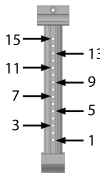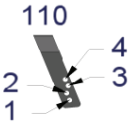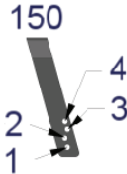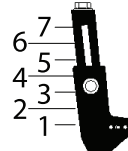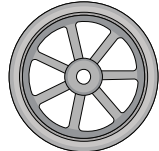						
415	3°	12	4	E/T	7	125
440	3°	10	2	E/T	5	125

440	3°	10	3	E/T	E/T	140
440	3°	10	3	E/T	6	150
465	3°	8	E/T	3	3	125
465	3°	8	1	4	E/T	140
465	3°	8	1	4	4	150
465	3°	8	2	E/T	E/T	180
490	3°	5	E/T	1	1	125
490	3°	5	E/T	2	E/T	140
490	3°	5	E/T	2	2	150
490	3°	5	E/T	3	E/T	180
490 *	3°	5	1	4	4	200
515	3°	4	E/T	1	E/T	140
515	3°	4	E/T	1	1	150
515	3°	4	E/T	2	E/T	180
515 *	3°	4	E/T	3	3	200
540 *	3°	2	E/T	1	1	200







E/T = ej tillämpligt, \* = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

### 11.5.6 Rea Focus låg – 515 x 35 mm (20 x 1 3/8 tum)

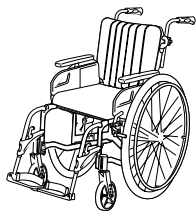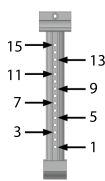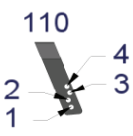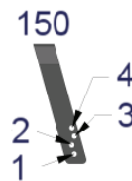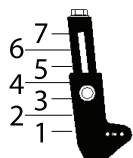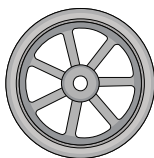						
365	3°	9	4	E/T	7	125
390	3°	7	2	E/T	5	125
390	3°	7	3	E/T	E/T	140
390	3°	7	3	E/T	6	150
415	3°	5	E/T	3	3	125
415	3°	5	1	4	E/T	140
415	3°	5	1	4	4	150
440	3°	3	E/T	1	1	125
440	3°	3	E/T	2	E/T	140
440	3°	3	E/T	2	2	150
440	3°	3	E/T	3	E/T	180







E/T = ej tillämpligt, \* = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

## 11.5.7 Rea Focus låg – 560 x 35 mm (22 x 1 3/8 tum)

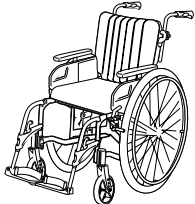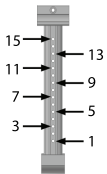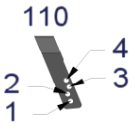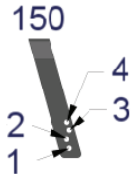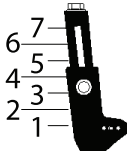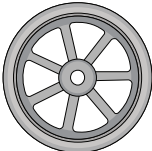						
365	3°	11	4	E/T	7	125
390	3°	9	2	E/T	5	125
390	3°	9	3	E/T	E/T	140
390	3°	9	3	E/T	6	150
415	3°	7	E/T	3	3	125
415	3°	7	1	4	E/T	140
415	3°	7	1	4	4	150
415	3°	7	2	E/T	E/T	180
440	3°	5	E/T	1	1	125
440	3°	5	E/T	2	E/T	140
440	3°	5	E/T	2	2	150
440	3°	5	E/T	3	E/T	180
440 *	3°	5	1	4	4	200
465	3°	3	E/T	1	E/T	140
465	3°	3	E/T	1	1	150
465	3°	3	E/T	2	E/T	180
465 *	3°	3	E/T	3	3	200
490 *	3°	1	E/T	1	1	200

E/T = ej tillämpligt, \* = ej möjligt i kombination med 90° benstöd







## 11.5.8 Rea Focus låg – 560 x 25 mm (22 x 1 tum)

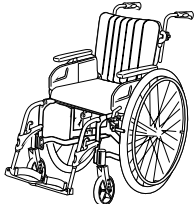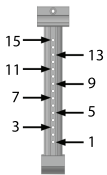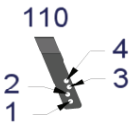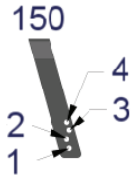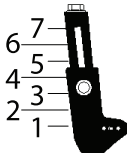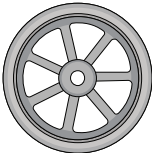						
365	3°	10	4	E/T	7	125
390	3°	8	2	E/T	5	125
390	3°	8	3	E/T	E/T	140
390	3°	8	3	E/T	6	150
415	3°	6	E/T	3	3	125
415	3°	6	1	4	E/T	140
415	3°	6	1	4	4	150
415	3°	6	2	E/T	E/T	180
440	3°	4	E/T	1	1	125
440	3°	4	E/T	2	E/T	140
440	3°	4	E/T	2	2	150

440	3°	4	E/T	3	E/T	180
440 *	3°	4	1	4	4	200
465	3°	2	E/T	1	E/T	140
465	3°	2	E/T	1	1	150
465	3°	2	E/T	2	E/T	180
465 *	3°	2	E/T	3	3	200
490 *	3°	E/T	E/T	E/T	E/T	200







E/T = ej tillämpligt, \* = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

### 11.5.9 Rea Focus låg – 610 x 35 mm (24 x 1 3/8 tum)

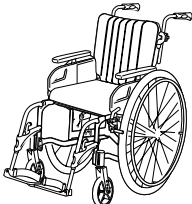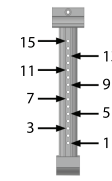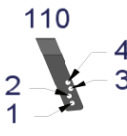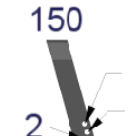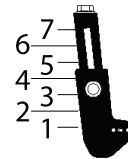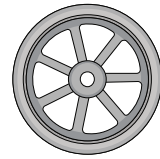						
390	3°	10	2	E/T	5	125
390	3°	10	3	E/T	E/T	140
390	3°	10	3	E/T	6	150
415	3°	8	E/T	3	3	125
415	3°	8	1	4	E/T	140
415	3°	8	1	4	4	150
415	3°	8	2	E/T	E/T	180
440	3°	6	E/T	1	1	125
440	3°	6	E/T	2	E/T	140
440	3°	6	E/T	2	2	150
440	3°	6	E/T	3	E/T	180
440 *	3°	6	1	4	4	200
465	3°	5	E/T	1	E/T	140
465	3°	5	E/T	1	1	150
465	3°	5	E/T	2	E/T	180
465 *	3°	5	E/T	3	3	200
490 *	3°	3	E/T	1	1	200

E/T = ej tillämpligt, \* = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

### 11.5.10 Rea Focus låg – 610 x 25 mm (24 x 1 tum)

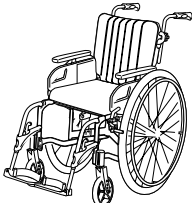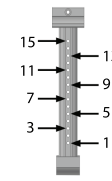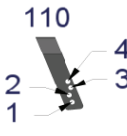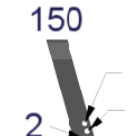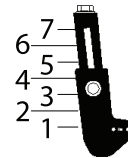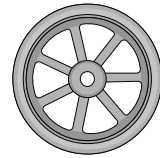						
390	3°	9	2	E/T	5	125
390	3°	9	3	E/T	E/T	140
390	3°	9	3	E/T	6	150

415	3°	7	E/T	3	3	125
415	3°	7	1	4	E/T	140
415	3°	7	1	4	4	150
415	3°	7	2	E/T	E/T	180
440	3°	5	E/T	1	1	125
440	3°	6	E/T	2	E/T	140
440	3°	5	E/T	2	2	150
440	3°	5	E/T	3	E/T	180
440 *	3°	5	1	4	4	200
465	3°	4	E/T	1	E/T	140
465	3°	4	E/T	1	1	150
465	3°	4	E/T	2	E/T	180
465 *	3°	4	E/T	3	3	200
490 *	3°	2	E/T	1	1	200

E/T = ej tillämpligt, \* = ej möjligt i kombination med 90° benstöd



## Säljbolag

### Sverige:

Invacare AB

Fagerstagatan 9

S-163 91 Spånga

Tel: (46) (0)8 761 70 90

Fax: (46) (0)8 761 81 08

sweden@invacare.com

www.invacare.se



Tillverkare:

Invacare Rea AB

Växjövägen 303

S-343 75 Diö

1431581-D 2023-05-21



**Making Life's Experiences Possible®**

**rea**



**Yes, you can.**