

Dolomite® Stand Assist®

da Tilbehør til Step Up-gangbord
Brugsanvisning

I Generelt

da

I.1 Om denne brugermanual

Denne manual hører til hjælpemidler fra Invacare og indeholder vigtige anvisninger om håndtering og samling. For at garantere sikkerheden ved brug af produktet skal brugsanvisningen til det tilhørende produkt læses omhyggeligt, og sikkerhedsanvisningerne skal følges.

Symboler i denne brugsanvisning

Advarsler vises i denne brugsanvisning med symboler.

Advarselssymbolerne ledsages af en overskrift, der viser, hvor alvorlig faren er.



ADVARSEL

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig kvæstelse eller død.



FORSIGTIG

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i en mindre eller lille kvæstelse.



VIGTIGT

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i beskadigelse af ejendom.



Tips og anbefalinger

Giver nyttige tips, anbefalinger og oplysninger, der sikrer en effektiv, problemfri anvendelse.



Dette produkt overholder EU-direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Lanceringsdatoen for dette produkt fremgår af CE-overensstemmelseserklæringen.

I.2 Tiltænkt anvendelse

Tilbehøret består af ståplade, knæbeskytter og støttese og er et hjælpemiddel til brugere med behov for:

- støtte til at stå.
- hjælp med flytning.
- hjælp til at rejse sig (kun med Step Up med elektrisk betjening).



Denne vejledning skal overdrages til slutbrugeren. Før du benytter dette produkt, skal du læse denne vejledning, og du bør opbevare den til senere brug.



VIGTIGT!

– Dette produkt er ikke beregnet til udendørs brug eller våde omgivelser.

I.3 Generelle advarsler



ADVARSEL!

Faldrisiko

- Dette tilbehør skal altid bruges sammen med den tilhørende sele.
- Selen skal altid være monteret, når brugeren står op.
- Brugeren må kun stå op uden selen, hvis det er certificeret medicinsk, at det ikke er farligt for brugeren.
- Brugeren skal altid være fastspændt med selen ved flytning på ståpladen.
- Dette produkt må kun anvendes i tilstedeværelse af en hjælper. Lad ikke brugeren være alene, mens han eller hun står på ståpladen.
- Hjulene på støttestativet skal være låste, bortset fra når brugeren flyttes på ståpladen.
- Sørg for, at gangbordet ikke vælter ned over brugeren, når han eller hun rejser sig eller sætter sig ned.

I.4 Garanti

Der er to års garanti fra leveringsdatoen. Der kan forekomme afvigelser pga. lokale aftaler. Normal slitage på f.eks. hjul, håndtag og bremses eller skader, som skyldes unormal brug (f.eks. overskredet maks. brugervægt), er ikke dækket af garantien. Vedligeholdelses- og betjeningsanvisningerne skal følges, for at garantien kan gælde.

2 Udpakning

2.1 Leveringseftersyn

Gør straks leverandøren opmærksom på eventuel transportskade. Gem emballagen, indtil leverandøren har kontrolleret varerne, og der er indgået en aftale.



Yes, you can.®

2.2 Montering af ståpladen



ADVARSEL!

Klemrisiko

Der kan være klemrisiko mellem beslaget på ståpladen og rammen
– Vær forsigtig, når ståpladen monteres




VIGTIGT!

Efter montering af ståpladen


– Sørg for, at ståpladen sidder sikkert på plads

1.

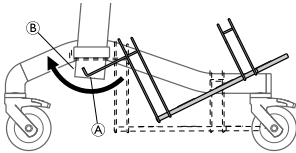

Hæld pladen, og skub låsekroge (A) under tværstangen (B) på gangbordet.



2.

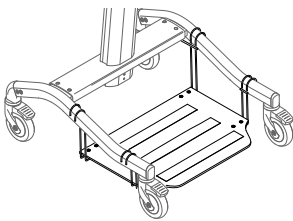

Hæng beslagene over armene på rammen.


3. Sørg for, at fodpladen holdes sikkert på plads af låsekroge.

2.3 Montering af selen

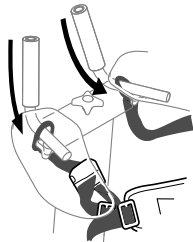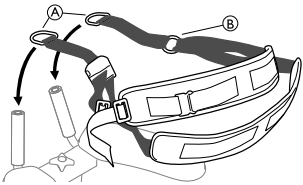

Før metalbøjlerne (A) over håndtagene, og sørg for, at stropperne er sikkert spændt. Vælg den inderste bøjle (B), hvis selen skal være kortere.

2.4 Montering af knæbeskytteren

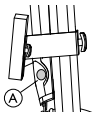

Figur 1




FORSIGTIG!

Dæk ikke nødstopfunktionen.

Knæbeskytteren må ikke dække nødstopknappen (A) på Step-Up med elektrisk betjening, figur 1.


– Når knæbeskytteren monteres, skal beslaget monteres enten over eller under knappen.

1.

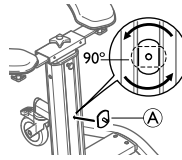


Placer monteringspladen (A) i åbningen på den midterste søjle

2.

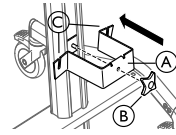

a. Placer holderen (A) på monteringspladen.
b. Spænd grebet (B), så udskæringerne C vender opad.

3.

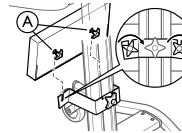

a. Løsn grebene (A) på knæbeskytteren, men tag dem ikke af.
b. Før grebene på knæbeskytteren ind i udskæringerne på holderen.
c. Spænd forsigtigt grebene (A) på knæbeskytteren.

3 Brug

3.1 Inden brug

Vi anbefaler ikke, at produktet udleveres til en person, uden at der først er foretaget en omfattende vurdering af personens specifikke behov. Det er vigtigt, at brugeren får den nødvendige støtte til brug af produktet som ordineret af en kvalificeret person. Dette er vigtigt både for brugerens sikkerhed og for dennes bedring.

3.2 Sådan hjælpes brugeren op på ståpladen – justering af selen




ADVARSEL!

Faldrisiko

- To af hjulene skal være låst, før brugeren hjælpes op på eller ned fra gangbordet.
- Undgå at løsne selen og åbne og snapbeslaget, hvis ikke brugeren er fuldt støttet.
- Sørg for, at ståpladen, selen og knæbeskytteren er fastgjort på gangbordet i henhold til anvisningerne, inden brugeren hjælpes op i stående stilling.
- Sørg altid for, at brugeren er fastgjort ved enhver justering af selen. Hold en hånd bag hans eller hendes ryg under justering af selen for at øge sikkerheden.

Sådan hjælpes brugeren op i stående stilling

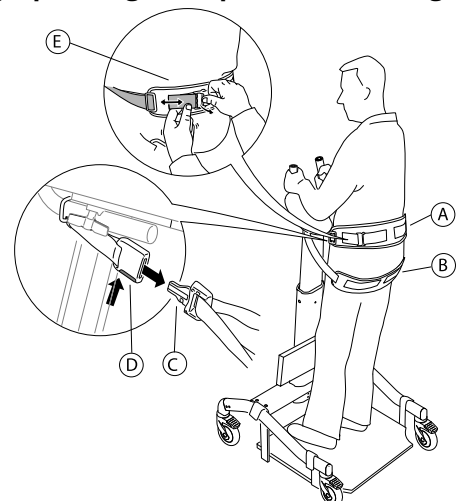

1. Lås parkeringsbremserne.
2. Indstil stroppen til en passende længde.

- Hjælp brugeren op i stående stilling. Brugeren skal stå så langt fremme på pladen som muligt.
- Placer den øverste polstring **A** bag ryggen af brugeren og den nederste **B** under brugeren.
- Forbind snaplåsen **C** fra selen med snapbeslaget **D**, der er monteret på håndtaget.
- Finjuster stroppen med spændet bag på selen **E**. Se *Justering af selens længde/størrelse* i dette afsnit.
- Juster knæbeskytteren korrekt under knæene på brugeren for at mindske trykket på knæene. Se afsnittet *Montering af knæbeskytteren*.

Hjælp til at rejse sig med Step Up med elektrisk betjening

Klargøring af gangbordet

- Placer hjulene forrest for at gøre støttefladen så stor om muligt.
- Sænk armstøtten med håndbetjeningen.

Vejledning til bruger/hjælper



- Placer brugerens fødder så langt fremme på ståpladen som muligt (med knæene på knæ knæbeskytteren).
- Brugeren skal læne sig frem og holde skubbehåndtagene, mens hjælperen justerer højden på armstøtten opad med håndbetjeningen.
- Brugeren skal trække eller skubbe sig selv op til stående stilling, mens støtten bevæger sig opad. Sørg for, at brugeren støttes af hjælperen.
- Fastspænd selen, når brugeren er i stående stilling. Følg trin 4-7 i *Sådan hjælpes brugeren op i stående stilling* i dette afsnit for at montere selen om brugeren.

Justering af selens længde/størrelse

- løsn stropperne med spændet bag på selen, eller
- vælg enten den inderste eller yderste bøjle ved montering af selen

Åbn selen

Tryk på den røde knap på snapbeslaget, og træk låsen ud for at åbne selen.

3.3 Flytning af brugeren



ADVARSEL!

Tipperisiko

Gangbordet kan blive ustabilt og tippe.

- Vær forsigtig, når brugeren flyttes over ujævne overflader og forhindringer, f.eks. dørtærskler.
- Sørg for altid at have et fast greb i Gangbordet.
- Selen skal altid være monteret og justeret korrekt, når brugeren flyttes.

Brugeren kan flyttes over meget korte afstande eller vendes omkring, mens han eller hun står på pladen, sikkert fastspændt.

- Løsning af parkeringsbremsen
- Flytning af brugeren
- Lås parkeringsbremserne efter flytningen

4 Vedligeholdelse

4.1 Rengøring



VIGTIGT!

Forkerte metoder eller væsker kan beskadige produktet

- Produktet må ikke rengøres på vaskeri eller med højtryksspuling.
- Brug aldrig syre, baser eller opløsningsmidler til at rengøre produktet med.

- Tør produktet af med en fugtig klud.
- Det aftagelige betræk til knæstøttepuden og selen kan rengøres med de gængse rengøringsprodukter på markedet.



Lad produktet tørre helt efter rengøring.

Invacare Salg

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk



Producent:
Invacare Dolomite AB
c/o Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 DIÖ
www.dolomite.biz

1537622-A 2015-01-21



Making Life's Experiences Possible™

