


Ohjainyksikkö

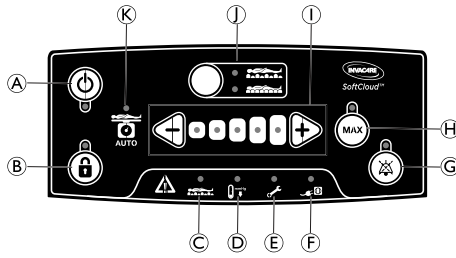

- A) Virtapainike
- B) Lukitus-/avauspainike
- C) Vaihteluvian merkkivalo
- D) Matalan paineen merkkivalo
- E) Huollon merkkivalo
- F) Virtakatkon merkkivalo
- G) Varoitusäänen mykistyspainike
- H) Suurimman kiinteyden painike
- I) Paineasetukset
- J) Tilapainike ja merkkivalo
- K) Automaattinen tunnistustoiminto

Ohjainyksikön käyttö

Virran kytkeminen ja katkaiseminen



1. Kytke tai katkaise virta painamalla virtapainiketta noin kolmen sekunnin ajan.

Tilan vaihtaminen



1. Vaihda vuorottelutilan (vaihtoehtoiset solut täyttyvät ja tyhjenevät jaksoittain) ja staattisen tilan (kaikki solut täyttyvät täysin ilman dynaamista vuorottelua) painamalla tilapainiketta. Kirkas LED-valo kertoo aktiivisen tilan.
2. Ota CLP-toiminto (jatkuva matala paine) käyttöön painamalla tilapainiketta kahden sekunnin ajan.

Paineasetusten muuttaminen

Saatavilla on viisi paineasetusta pehmeästä (15 mmHg) kiinteään (55 mmHg), 10 mmHg:n välein.

Kun käytät CLP-toimintoa, saatavilla on viisi paineasetusta 15 mmHg:stä 23 mmHg:hen, 2 mmHg:n välein



1. Lisää painetta painamalla pluspainiketta (+).
2. Vähennä painetta painamalla miinuspainiketta (-).

Kirkkaat LED-valot kertovat valitun asetuksen.

Painikkeiden lukitseminen ja lukituksen avaaminen



1. Lukitse kaikki ohjainyksikön painikkeet painamalla lukitus-/avauspainiketta. Kuulet äänimerkin, ja keltainen LED-valo syttyy merkiksi järjestelmän lukittumisesta.
2. Avaa lukitus painamalla sitä uudelleen vähintään kolme sekuntia (hälytysääni kuuluu ja kellanruskea valo sammuu).

Ohjainyksikön lukitus avautuu automaattisesti, jos virta katkeaa.

Varoitusäänen signaalien mykistäminen

Varoitusäänen voi vaimentaa, kun toimintahäiriön syytä selvitetään. Jos sitä ei selvitetä, varoitusääni palautuu 17 ± 3 minuutin jälkeen.



1. Mykistä varoitusääni painamalla mykistyspainiketta.

Nopean täytön suurimpaan paineeseen käyttöön ottaminen



1. Ota nopea täyttö suurimpaan paineeseen (60 mmHg) käyttöön painamalla suurimman kiinteyden painiketta.
2. Poista enimmäispaine käytöstä painamalla painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan. Jos tätä ei poisteta käytöstä, järjestelmä palaa automaattisesti vaihtelutilaan ja keskipaineeseen 30 ± 3 minuutin jälkeen potilaan turvallisuuden vuoksi.

Automaattinen tunnistus (ei koske kaikkia malleja)

Automaattista tunnistustoimintoa käytetään, kun patja siirretään uudelle käyttäjälle.



Järjestelmä aloittaa paineen viitearvosta laskiessaan yksilöllistä paineasetusta. Kun käyttäjä makaa patjalla, "kuormittamattoman" ja "kuormitetun" paineen välisiä eroja verrataan matriisiin ja yksi viidestä vaiheesta valitaan. Kun painetta säädetään, manuaaliset asetukset korvaavat automaattiset asetukset.

Vikojen tunnistaminen ja korjaaminen

**VAROITUS!****Sähköiskun vaara!**

Ohjainyksikön avaaminen voi aiheuttaa henkilövamman tai laitevaurion.
– Älä yritä avata ohjainyksikköä.

**TÄRKEÄÄ!**

– Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Invacare-toimittajaan tai Invacare-edustajaan.

Varoitus/vika	Syy	Ratkaisu
Ohjainyksikkö ei toimi; näytön valot eivät syty	Ohjainyksikköä ei ole ehkä kytketty virtalähteeseen Ohjainyksikön sulake on ehkä vaihdettava	1. Tarkista, että ohjainyksikkö on kytketty oikean jännitteen virtalähteeseen. 2. Tarkista, että ohjainyksikköön on kytketty virta. 3. Tarkista virtapistokkeen sulake. Tarkista molemmat ohjainyksikön sulakkeet (1 ampeerin hitaasti katkeava sulake) – sulakkeet voi irrottaa painamalla ja kääntämällä ruuvimeisselillä.
Potilas uppoaa tai "valuu" patjalla maatessaan.	Paine on ehkä asetettu liian alhaiseksi potilaan painolle.	1. Nosta paineasetuksia painamalla painenuolta. 2. Tarkista järjestelmän tehokas toiminta tekemällä "valumistesti". Katso kohta "Patjajärjestelmän käyttäminen".
Varoitusäänen mykistytksen LED-valo syttyy pysyvästi 	Alustava vika	1. Mykistä varoitusääni ja katkaise virta. 2. Tarkista, että kahva on ehyt, ja varmista, että kaikki neljä tiivistysliitintä on asetettu tiukasti ohjainyksikköön ja ilmaletkuihin. Tarkista, että CPR-lappu on kiinnitetty ja että kaikki neljä tiivistysliitintä on kiinnitetty kunnolla. 3. Tarkista kaikki ilmaletkut patjan sisäpuolella – jokaisen pitäisi olla kiinnitetty tiukasti. Tarkista, että kaikki ilmasolut on kiinnitetty kunnolla niihin liittyviin ilmaputkiin. 4. Tarkista kaikki solut, putket ja letkut ilmapuotojen varalta. 5. Kytke virta.
Matalan paineen LED-valo syttyy + varoitusääni	Liian matala paine	1. Mykistä varoitusääni ja katkaise virta. 2. Tarkista, että kahva on ehyt, ja varmista, että kaikki neljä tiivistysliitintä on asetettu tiukasti ohjainyksikköön ja ilmaletkuihin. Tarkista, että CPR-lappu on kiinnitetty ja että kaikki neljä tiivistysliitintä on kiinnitetty kunnolla. 3. Tarkista kaikki ilmaletkut patjan sisäpuolella – jokaisen pitäisi olla kiinnitetty tiukasti. Tarkista, että kaikki ilmasolut on kiinnitetty kunnolla niihin liittyviin ilmaputkiin. 4. Tarkista kaikki solut, putket ja letkut ilmapuotojen varalta. 5. Tarkista, että ilmansuodattimen suojus on kiinnitetty kunnolla ja että ilmansuodatin on puhdas. 6. Kytke virta.
Vaihteluvian LED-merkkivalo syttyy + varoitusääni	Vaihtelutilan vika (ei vaihtelua)	1. Mykistä varoitusääni ja katkaise virta. 2. Laske painetta irrottamalla ilmaletkut – yhdistä ne uudelleen, kun paine on laskenut. 3. Käynnistä järjestelmä uudelleen kääntämällä virtapainike off- ja on-asentoon. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti staattisessa tilassa ja vaihtaa vaihtelutilaan, kun käyttöpaine on saavutettu. 4. Nollaa henkilökohtaiset asetukset.
Virtakatkon LED-merkkivalo syttyy + varoitusääni	Virtakatko	1. Mykistä varoitusääni. 2. Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla virtalähteeseen ja ohjainyksikköön. Tarkista, että verkkovirta on kytketty. 3. Tarkista molemmat ohjainyksikön sulakkeet (1 ampeerin hitaasti katkeava sulake) – sulakkeen voi irrottaa painamalla ja kääntämällä ruuvimeisselillä. Jos virta palautuu 20 minuutin kuluessa virtakatkosta, järjestelmä suorittaa käynnistysjakson ennen viimeisimpiin asetuksiin palaamista.
Huollon LED-merkkivalo syttyy 	Huolto tarpeen	1. Ota yhteyttä Invacare-toimittajaan tai Invacare-edustajaan. Käytön jatkamiseen ei liity riskiä, vaikka huollon LED-merkkivalo syttyisi.



Invacare UK Operations Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ, UK



Yes, you can.