



„Invacare® Modulate“

Elektrinio vežimėlio naudotojo vadovo priedas

It **Sėdynės sistema**
Naudotojo vadovas

Šį vadovą reikia perduoti gaminio naudotojui.
PRIEŠ naudojant šį gaminį, BŪTINA perskaityti šį vadovą ir išsaugoti ateičiai.



Yes, you can.®

Turiny

1 Bendroji informacija	5	3.3.1 Pagrindinės sijos vidurio linijos laikiklio aukščio reguliavimas	17
1.1 Apie šį vadovą	5	3.3.2 Pagrindinės sijos vidurio linijos laikiklio aukščio reguliavimas	17
1.2 Šiame vadove naudojami simboliai	5	3.3.3 Nuotolinio valdymo pulto / ekrano padėties reguliavimas	18
1.3 Informacija apie garantiją	6	3.4 Pasukimo mechanizmo reguliavimas	19
1.4 Saugos informacija apie sėdynės sistemos naudojimą	6	3.5 Pasukamojo ekrano laikiklio reguliavimas	20
2 Komponentai	8	3.6 Rankinio smakro valdiklio reguliavimas	20
2.1 Gaminio aprašymas	8	3.6.1 Galūnių valdymo svirties reguliavimas	21
2.2 Elektrinio padėties nustatymo funkcijos	8	3.6.2 „Kiaušininio“ jungiklio reguliavimas	21
2.3 Rankinio padėties nustatymo funkcija	9	3.7 Galvos bloko reguliavimas	22
2.4 Vairavimo ir sėdėjimo funkcijų apribojimai (Linux sistema)	9	3.8 Rankų atramos	22
2.4.1 Važiavimo apribojimai	10	3.8.1 Rankų atramų aukščio reguliavimas	22
2.4.2 Sėdynės apribojimai	11	3.8.2 Rankų atramos pločio reguliavimas	23
3 Nustatymas	12	3.8.3 Rankų atramos gylio reguliavimas	23
3.1 Bendroji informacija apie sąranką	12	3.8.4 Pasipriešinimo keitimas (pakeliamos / kitos rankų atramos)	24
3.2 Nuotolinio valdymo pulto reguliavimas	13	3.8.5 Rankų pagalvėlės kampo reguliavimas (pakeliamos / kitos rankų atramos)	24
3.2.1 Standartinio nuotolinio pultelio laikiklio reguliavimas	14	3.8.6 Rankų pagalvėlės padėties reguliavimas (pakeliamos rankų atramos)	24
3.2.2 Pasukamojo pultelio laikiklio reguliavimas	14	3.9 Galvos atramos reguliavimas	24
3.2.3 „Maxx Resolve“ pasukamojo nuotolinio valdymo pulto laikiklio reguliavimas	15	3.9.1 „Rea“ galvos arba kaklo atramos padėties reguliavimas	25
3.3 Pagrindinės sijos vidurio linijos laikiklio reguliavimas	17	3.9.2 „Rea“ galvos arba kaklo atramos aukščio reguliavimas	26

© 2024, „Invacare Corporation“

Visos teisės saugomos. Draudžiama kopijuoti, pakartotinai skelbti ar keisti šią informaciją arba jos dalį negavus išankstinio rašytinio „Invacare“ leidimo. Prekių ženklai pažymėti simboliais ™ ir ®. Jei nenurodyta kitaip, visi prekių ženklai priklauso „Invacare Corporation“ ar jos filialams arba yra jų licencijuoti.

3.9.3	Sėdmenų atramų reguliavimas	26	3.17.3	Kojų atramos galinio stabdiklio nustatymas	40
3.9.4	„Elan“ galvos atramos detalių reguliavimas	26	3.17.4	Kojų atramos ilgio reguliavimas	41
3.10	Atlošo reguliavimas	28	3.18	„Vari-A“ kojų atramos	41
3.10.1	Atlošo aukščio reguliavimas	28	3.18.1	Kojų atramos pasukimas į išorę ir (arba) nuėmimas	41
3.10.2	Atlošo pločio reguliavimas	28	3.18.2	Kampo nustatymas	42
3.10.3	Atlošo kampo reguliavimas	29	3.18.3	Kojų atramos galinio stabdiklio nustatymas	43
3.10.4	Atlošo apmušalo įtempimo reguliavimas	30	3.18.4	Kojų atramos ilgio reguliavimas	44
3.11	Sėdynės reguliavimas	31	3.18.5	Blauzdos pagalvėlių reguliavimas	45
3.11.1	Sėdynės pločio reguliavimas	31	3.18.6	Kojų atramos reguliavimas	46
3.11.2	Sėdynės gylio reguliavimas	31	3.19	ADM kojų atramos	46
3.11.3	Sėdynės kampo reguliavimas	31	3.19.1	Kojų atramos pasukimas į išorę ir (arba) nuėmimas	46
3.12	Šoninės juosmens atramos reguliavimas	32	3.19.2	Kampo nustatymas	46
3.13	Klubo atramos su greito atjungimo jungtimi reguliavimas	33	3.19.3	Kojų atramos ilgio reguliavimas	47
3.14	Padėklo reguliavimas ir (arba) nuėmimas	35	3.19.4	Blauzdos pagalvėlių reguliavimas	48
3.14.1	Šoninis padėklo reguliavimas	35	3.19.5	Kojų atramos reguliavimas	49
3.14.2	Padėklo gylio reguliavimas ar nuėmimas	35	3.20	Elektrinės pakeliamos kojų atramos (ADE kojų atramos)	49
3.14.3	Padėklo nusukimas į šoną	35	3.20.1	Kojų atramos pasukimas į išorę ir (arba) nuėmimas	49
3.15	Centrinės kojų atramos, kurių aukštis reguliuojamas rankiniu būdu	36	3.20.2	Kampo nustatymas	49
3.15.1	Kojų atramos nuėmimas	36	3.20.3	Kojų atramos ilgio reguliavimas	50
3.15.2	Kojų atramos kampo nustatymas	36	3.20.4	Blauzdos pagalvėlių reguliavimas	50
3.15.3	Kojų atramos ilgio nustatymas	36	3.20.5	Kojų atramos reguliavimas	51
3.15.4	Paminos kampo nustatymas	37	3.21	Standartinės 80° kojų atramos reguliavimas	52
3.15.5	Blauzdos pagalvėlių reguliavimas	37	4	Naudojimas	53
3.16	LNX kojų atrama	37	4.1	Rankos atramos nuėmimas, kad būtų galima atsistoti iš šono	53
3.16.1	Kojų atramos ilgio nustatymas	37	4.2	Klubų atramos nuėmimas / uždėjimas naudojant greitą atjungimo jungtį	53
3.16.2	Paminos kampo nustatymas	38	4.3	Atlošo pagalvėlės keitimas	54
3.16.3	Paminos pločio reguliavimas	38	4.4	Centrinės elektrinės kojų atramos LNX su teleskopine pamina naudojimas	55
3.16.4	Pėdų platformos kampo nustatymas	38	5	Techninės priežiūros grafikas	56
3.16.5	Blauzdos pagalvėlių reguliavimas	39	6	Po naudojimo	57
3.17	„Vari-F“ kojų atrama	39			
3.17.1	Kojų atramos pasukimas į išorę ir (arba) nuėmimas	39			
3.17.2	Kampo nustatymas	40			

6.1	Atnaujinimas	57
6.2	Išmetimas	57
7	Trikčių diagnostika	58
7.1	Veikimo trikčių diagnostika	58
8	Techniniai duomenys	61
8.1	Techninės charakteristikos	61

1 Bendroji informacija

1.1 Apie šį vadovą

Šis dokumentas yra gaminio naudotojo dokumentacijos priedas.

Nors šis komponentas nėra atskirai pažymėtas CE ir UKCA ženklais, jis yra gaminio, atitinkančio Reglamento 2017/745 dėl medicinos priemonių (I klasės) ir 2022 m. JK reglamento (iš dalies pakeisto) dėl medicinos priemonių (II klasės) II dalies reikalavimus, dalis. Todėl jam taikomas gaminio CE ir UKCA ženklinimas. Daugiau informacijos žr. gaminio naudotojo dokumentacijoje.

Šį komponentą naudokite tik tada, jei perskaitėte ir suprantate šiame vadove pateiktus nurodymus. Dėl papildomos konsultacijos kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą, susipažinusį su jūsų medicinine būkle, ir išsiaiškinkite visus kylančius klausimus dėl tinkamo naudojimo ir kokių reguliavimų reikia atlikti.

Atkreipkite dėmesį, kad šiame dokumente gali būti skyrių, kurie nesusiję su jūsų komponentu, nes šis dokumentas yra taikomas visiems galimiems modeliams (tuo metu, kai jis atspausdintas). Jeigu nenurodyta kitaip, kiekvienas šio dokumento skyrius taikomas visiems komponento modeliams.

„Invacare“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo pakeisti komponento specifikacijas.

Prieš skaitydami šį dokumentą įsitinkinkite, kad turite naujausią jo versiją. Naujausią jo versiją PDF formatu galite rasti „Invacare“ interneto svetainėje.

Ankstesnės gaminio versijos gali būti neaprašytos dabartinėje šio vadovo versijoje. Jei reikalinga konsultacija, kreipkitės į „Invacare“.

Jeigu atspausdintą dokumentą sunku skaityti dėl šrifto dydžio, atsisiųskite versiją PDF formatu iš interneto svetainės. Tuomet ekrane galėsite padidinti PDF failo šrifto dydį taip, kad jums būtų patogiau skaityti.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie komponentą, pvz., saugos pranešimus ir informacijos apie atšauktus komponentus, susisiekite su savo „Invacare“ atstovu. Žr. šio dokumento pabaigoje nurodytus adresus.

Jei naudojant komponentą įvyksta rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir kompetentingai institucijai savo šalyje.

1.2 Šiame vadove naudojami simboliai

Šiame vadove vartojami simboliai ir įspėjamieji žodžiai, nurodantys pavojų ar nesaugius veiksmus, dėl kurių galima susižaloti arba sugadinti nuosavybę. Žr. toliau pateiktą informaciją dėl įspėjamųjų žodžių apibrėžimų.



PAVOJUS!

Nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima sunkiai susižaloti ar net žūti.



ĮSPĖJIMAS!

Nurodo pavojingą situaciją, kurios nepavykus išvengti galima sunkiai susižaloti ar net žūti.



PERSPĖJIMAS!

Nurodo pavojingą situaciją, kurios nepavykus išvengti galima šiek tiek arba nesunkiai susižeisti.



PRANEŠIMAS!

Nurodo pavojingą situaciją, kurios nepavykus išvengti galimi materialiniai nuostoliai.



Patarimai ir rekomendacijos

Naudingi patarimai, rekomendacijos ir informacija, kaip efektyviai ir patogiai naudoti gaminį.



Įrankiai

Nurodomi įrankiai, komponentai ir elementai, kurių reikia norint atlikti tam tikrą darbą.

Kiti simboliai

(Taikoma ne visiems vadovams)



JK atsakingas asmuo

Žymi, kad gaminyje nėra pagamintas Jungtinėje Karalystėje.



„Triman“

Nurodo perdirbimo ir rūšiavimo taisykles (taikoma tik Prancūzijoje).

1.3 Informacija apie garantiją

Produktui suteikiama gamintojo garantija, remiantis atitinkamų šalių bendrosiomis verslo nuostatomis ir sąlygomis.

Garantijos reikalavimus pateikti galima tik per tiekėją, iš kurio įsigytas produktas.

1.4 Saugos informacija apie sėdynės sistemos naudojimą

Prieš pristatant sėdynės sistema buvo specialiai sukonfigūruota ir primontuota prie vežimėlio pagrindo. Atkreipkite dėmesį, kad už galutinę konfigūraciją ir sprendimą, kokią visą vežimėlio sistemą pirkti, atsako elektrinio vežimėlio naudotojas, kuris pajėgus priimti tokį sprendimą, ir jo (jos) sveikatos priežiūros specialistas. Šio vadovo turinys paremtas prielaida, kad elektrinių vežimėlių specialistas pritaikė elektrinį vežimėlį naudotojui ir padėjo gydančiajam sveikatos priežiūros specialistui išsiaiškinti instrukcijas ir išmokti naudoti šį įrenginį.

Elektrinio vežimėlio naudotojo vadove pateikiama visa svarbi saugos informacija apie elektrinio vežimėlio ir sėdynės sistemos naudojimą. Būtinai perskaitykite šią saugos informaciją ir jos laikykitės.



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus apsvėsti

Elektrinis vežimėlis gali apsvėsti, jei keisdami sėdėjimo padėtį pakeisite jo stabilumo charakteristikas.

- Prieš pradėdami aktyviai naudotis vežimėliu, prižiūrimi kvalifikuoto sveikatos priežiūros specialisto išsiaiškinkite ir nustatykite nuosavas saugumo ribas, praktiškai išbandydami, kiek galite lenktis, siekti, kaip įsėsti į vežimėlį ir iš jo išlipti.
- Sėdynės sistemą ant pagrindo galima sumontuoti įvairiose padėtyse priekyje ir gale. Įsitikinkite, kad pasirinkta padėtis užtikrins maksimalų stabilumą visame sėdėjimo padėčių intervale.



- Atsižvelkite į visus asmeninius reikmenis ir priedus (kuprines, ventiliacijos sistemas, papildomus akumulatorius ir kt.), kurie bus gabenami ant vežimėlio. Pavyzdžiui, ant sėdynės sistemos atlošo pakabinta prikrauta kuprinė gali gerokai sumažinti vežimėlio galo stabilumą.
- Atsižvelkite, kaip naudojate atlošą. Pavyzdžiui, atitraukus atlošą jūsų svorio centras gali pasislinkti į galą ir taip gerokai sumažės vežimėlio galo stabilumas. Priešingai – naudodami storą atlošo pagalvėlę pasistumsite į priekį, o dėl to sumažės vežimėlio priekinis stabilumas.
- Svorį visada perkeltkite posūkiu kryptimi. Perkeltiant svorį posūkiui priešinga kryptimi, vežimėlio pagrindo stabilumas gali sumažėti ir vežimėlis gali apvirsti.
- Atsižvelkite, kokią sėdynės pagalvėlę naudojate. Naudojant storą sėdynės pagalvėlę, jūsų svorio centras pakils ir vežimėlio stabilumas sumažės visomis kryptimis.
- Visose sėdynės sistemose įtaisyta važiavimo blokavimo priemonė. Įsitinkite, kad ji nustatyta taip, jog nepakenktų stabilumui važiuojant (žr. skyrių „2.4 Vairavimo ir sėdėjimo funkcijų apribojimai (LiNX sistema), 9 psl.“).
- Vežimėlis yra su programuojamu valdikliu, kuriuo galima reguliuoti maksimalų vežimėlio greitėjimą ir lėtėjimą. Įsitinkite, kad šios nuostatos nustatytos tinkamai, atsižvelgiant į sistemą ir į jus – naudotoją.
- Kai nustatytas sumažintas važiavimo greitis arba įjungtas apsvertimo blokatorius, visada važiuokite ant lygaus paviršiaus, kad nesumažėtų vežimėlio stabilumas.



- Įsitinkite, kad nustatant vežimėlį atsižvelgiama į visas medicininės būklės. Nevalingi rankų judesiai, tokie kaip spazmai, gali paveikti vežimėlio stabilumą, ypač kai sėdynės sistema yra pakreipta ar atlošta.
- Kai sistema yra iki galo pakreipta ar atlošta, vežimėlio priekinių ratų negalima atkelti nuo žemės. Tokiu atveju iš karto kreipkitės į įgaliotąjį „Invacare“ pardavėją, kad problema būtų išspręsta.



ĮSPĖJIMAS!

Mirties, sunkaus sužalojimo arba sugadinimo pavojus

- Įsipainiojimo ir užspringimo rizika, kai nepritvirtinti asmeniniai daiktai (pvz., papuošalai, šalikai) užkliūva už judančių ar išsikišusių gaminio dalių.
- Įsitinkite, kad jokie palaidi daiktai nepaliestų judančių neįgalųjų vežimėlio komponentų, pvz., ratų ar motorizuotų sėdimųjų komponentų.
 - Laikykite rankas, drabužius ir visus kitus daiktus atokiau nuo ratų ar motorizuotų sėdynių komponentų, kai jie naudojami.
 - Nedelsdami išjunkite vežimėlį, kad sustabdytumėte bet kokį judėjimą.

2 Komponentai

2.1 Gaminio aprašymas



Tolesnės konfigūracijos gali skirtis priklausomai nuo šalies.

„Module“ sėdėjimo sistema siūloma su skirtingo tipo sėdynėmis.

Vienos dalies sėdynės plokštė

Vienos dalies sėdynės plokštė siūloma skirtingo sėdynės pločio (380 mm arba 430 mm). Atskiram pločio koregavimui gali turėti įtakos porankių pasirinkimas.

Vienos dalies sėdynės plokštė siūloma skirtingo sėdynės gylio (410 mm, 460 mm arba 510 mm). Vienos dalies sėdynės plokštės sėdynės gylį galima reguliuoti rankomis. Žr. 3.11.2 *Sėdynės gylio reguliavimas*, 31 psl..

Vienos dalies sėdynės plokštė siūloma skirtingo iš anksto surinktos sėdynės aukščio (435 mm, 460 mm arba 485 mm). Rankinį aukščio reguliavimą turi atlikti kvalifikuotas technikas. Daugiau informacijos apie aukščio reguliavimą žr. vežimėlio naudotojo vadove.

Teleskopinis sėdynės rėmas

Teleskopinis sėdynės rėmas galimas su įvairiomis parinktimis: sėdynės plokštė, sėdyne su diržu arba universaliu adapteriu.

Teleskopinio sėdynės rėmo sėdynės plotį galima reguliuoti rankomis. Žr. 3.11.1 *Sėdynės pločio reguliavimas*, 31 psl..

Teleskopinis sėdynės rėmas siūlomas skirtingo sėdynės gylio (410 mm, 460 mm, 510 mm arba 580 mm). Teleskopinio sėdynės rėmo sėdynės gylį galima reguliuoti rankomis. Žr. 3.11.2 *Sėdynės gylio reguliavimas*, 31 psl..

Teleskopinis sėdynės rėmas siūlomas skirtingo iš anksto surinktos sėdynės aukščio (435 mm, 460 mm arba 485 mm). Individualų aukščio reguliavimą galima atlikti kėlikliu, jei kėliklis yra konfigūracijos dalis. Rankinį aukščio reguliavimą turi atlikti kvalifikuotas technikas. Daugiau informacijos apie aukščio reguliavimą žr. vežimėlio naudotojo vadove.

2.2 Elektrinio padėties nustatymo funkcijos

Sėdynės sistema yra su toliau nurodytomis funkcijomis.

FIKSUOTAS PASUKAMAS PAKREIPIMAS

Naudojant fiksuoto pasukimo pakreipimo funkciją, svorio centras dėl fiksuotos posvyrio ašies pasislenka atgal, kai sėdynė pakreipiama atgal. Įprastas pakreipimo intervalas yra 0°–20°.

PAKREIPIMAS PAGAL SVORIO CENTRĄ

Pakreipimo pagal svorio centrą funkcija kompensuoja svorio poslinkį – paslenka sukimosi ašį ir visą sėdynės konstrukciją į priekį, o sėdynė pakreipiama atgal. Įprastas pakreipimo intervalas yra 0°–50°. Daugiau informacijos apie konkrečią konfigūraciją, žr. 8.1 *Techninės charakteristikos*, 61 psl..

ATLOŠIMAS

Naudodami atlošimo funkciją, naudotojai gali nustatyti tam intervalu keisti kampą tarp sėdynės ir atlošo. Įprastas atlošimo kampas yra 90°–120°.

KĖLIKLIO MODULIS

Naudodami kėliklio modulį, naudotojai gali elektrinę padėties nustatymo sistemą pakelti iki 300 mm nuo mažiausio sistemos aukščio nuo sėdynės iki grindų. Kėliklis yra suderintas su pakreipimo funkcija.

KOJŲ ATRAMOS

Siūlome platų elektrinių ir rankinio valdymo kojų atramų asortimentą – galima rinktis iš įvairių dydžių ir stilių, įskaitant individualias kojų atramas ir centre montuojamas pėdų platformas, padedančias įtvirtinti ir padėti naudotojo kojas. Be to, siūlome įvairių kojų atramų laikiklių, kad būtų lengviau pasirinkti kojų atramas. Elektrines kojų atramas galima užprogramuoti, kad jos veiktų pagal vieną ar dvi toliau nurodytas konfigūracijas:

- atskirai (kojų atramos veikia atskirai);
- kartu (kojų atramos veikia sinchroniškai)

2.3 Rankinio padėties nustatymo funkcija

Sėdynės sistema yra su toliau nurodytomis funkcijomis.

FIKSUOTAS PASUKAMAS PAKREIPIMAS

Naudojant fiksuoto pasukimo pakreipimo funkciją, svorio centras dėl fiksuotos posvyrio ašies pasislenka atgal, kai sėdynė pakreipiama atgal. Įprastas pakreipimo intervalas yra 0°–15°.

ATLOŠIMAS

Naudodami atlošimo funkciją, naudotojai gali nustatytame intervale keisti kampą tarp sėdynės ir atlošo. Įprastas atlošimo kampas yra 90°–120°.

KOJŲ ATRAMOS

Siūlome platų elektrinių ir rankinio valdymo kojų atramų asortimentą – galima rinktis iš įvairių dydžių ir stilių, įskaitant individualias kojų atramas ir centre montuojamas pėdų platformas, padedančias įtvirtinti ir padėti naudotojo kojas. Be to, siūlome įvairių kojų atramų laikiklių, kad būtų lengviau pasirinkti kojų atramas.

2.4 Vairavimo ir sėdėjimo funkcijų apribojimai (LiNX sistema)



PAVOJUS!

Sunkaus sužalojimo arba mirties rizika

- Ribojimo jungiklių / blokatorių nustatymo kampas turi lemiama reikšmės saugiam sistemos eksploatavimui.
- „Invacare“ nebus atsakinga už jokių sužalojimų ar žalą, patirtą atlikus gamyklos nerekomenduojamas nuostatų korekcijas.
 - Siekiant užtikrinti tinkamą sąranką, blokatorius ir ribojimo jungiklius reguliuoti turi tik kvalifikuotas technikas.
 - Niekada neviršykite maksimalių rekomenduojamų ribų. Blokatorius ir ribojimo jungiklius reikia nustatyti taip, kad jie geriausiai atitiktų naudotojo poreikius ir nepakenktų bendram vežimėlio stabilumui.
 - Atlikę bet kokius važiavimo apribojimo ar blokavimo funkcijų reguliavimus, visada išbandykite sėdynės sistemą visu judesio diapazonu (t. y. pasvirimo, atsilenkimo, pakėlimo), kad patikrintumėte, ar pakeista sąranka veikia tinkamai, ir įsitikintumėte, kad dėl to nekyla stabilumo ar tarpusavio trukdžių problemų.



Esant sudėtingesnėms / sėdynės sistemoms, gali reikėti papildomų blokatorių ir ribojimo jungiklių. Informacijos apie šiame vadove nenurodytų blokatorius / ribojimo jungiklius teiraukitės gaminio teikėjo.

TDX SP2 važiavimo ir sėdėjimo vietos apribojimai gali būti atnaujinami tik nejudant.


AVIVA RX ir AVIVA FX važiavimo ir sėdynės funkcijų apribojimai yra atnaujinti ir važiuojančiam, ir stovinčiam vežimėliui.

2.4.1 Važiavimo apribojimai

Sėdynės sistemos konfigūruojamos / programuojamos su važiavimo sulėtinimo funkcija. Važiavimo sulėtinimo funkcija naudoja mikrojungiklius, kurie aktyvina sumažintą sistemos važiavimo greitį.

Visose sėdynėse, kurias galima pakreipti ir atlošti, yra įtaisyta važiavimo blokavimo (DLO) ribojimo priemonė, skirta užtikrinti, kad neįgaliųjų vežimėlis nepradėtų važiuoti, kai sėdynės sistema yra pakreipta didesniu nei iš anksto nustatytasis saugus bendrasis kampas ir (arba) iš anksto nustatytasis aukštis. Bendrąjį kampą sudaro bet kuris sėdynės kampo, atlošo kampo ir (arba) paviršiaus kampo derinys.


AVIVA RX su kėlikliu

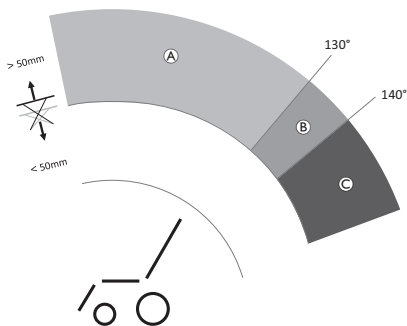

	Apribojimas	Apribojimo priežastis
Ⓐ	Važiavimo sulėtinimas	Jei kėliklis pakeltas <ul style="list-style-type: none"> • >50 mm
Ⓑ	Važiavimo sulėtinimas / tiekėjo reguliuojamas blokavimas	Jei kėliklis pakeltas <ul style="list-style-type: none"> • >50 mm ir jei atlošo kampas yra <ul style="list-style-type: none"> • >130° – <140°¹
Ⓒ	Važiavimo blokavimas	Jei kėliklis pakeltas <ul style="list-style-type: none"> • >50 mm ir jei atlošo kampas yra <ul style="list-style-type: none"> • >140°

¹ Tiekėjas gali nustatyti kampą, kada važiavimo sulėtinimas turi būti perjungiamas į važiavimo blokavimą.

AVIVA FX ir TDX SP2 su kėlikliu

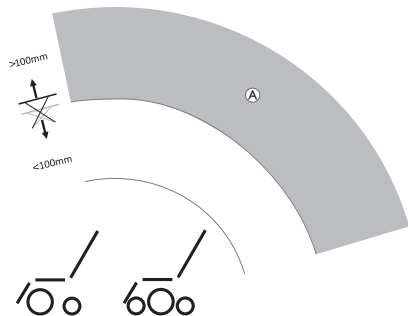


	Apribojimas	Apribojimo priežastis
Ⓐ	Važiavimo sulėtinimas	Jei kėliklis pakeltas <ul style="list-style-type: none"> • >100 mm

AVIVA RX, AVIVA FX ir TDX SP2 be kėliklio

Naudojant AVIVA RX, AVIVA FX ir TDX SP2 be kėliklio važiavimo apribojimų nėra.

2.4.2 Sėdynės apribojimai

AVIVA RX su kėlikliu

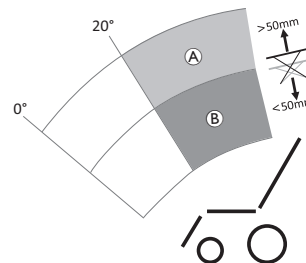

	Apribojimas	Apribojimo priežastis
Ⓐ	Pavertimas > 20° sulaikytas	Jei kėliklis pakeltas <ul style="list-style-type: none"> • >50 mm
Ⓑ	Pakėlimas sulaikytas	Jei pavertimo kampas yra <ul style="list-style-type: none"> • >20°

AVIVA FX ir TDX SP2 su kėlikliu

Naudojant AVIVA FX ir TDX SP2 su įtaisytu kėlikliu sėdynės apribojimų nėra.

AVIVA RX, AVIVA FX ir TDX SP2 be kėliklio

Naudojant AVIVA RX, AVIVA FX ir TDX SP2 be kėliklio sėdynės apribojimų nėra.

3 Nustatymas

3.1 Bendroji informacija apie sąranką



ĮSPĖJIMAS!

Mirties, sunkaus sužalojimo arba sugadinimo pavojus

Toliau naudojant elektrinį vežimėlį, kuris nėra nustatytas pagal tinkamas technines charakteristikas, gali pasireikšti nestabilus elektrinio vežimėlio elgesys, dėl kurio gali įvykti mirtis, sunkus sužalojimas arba sugadinimas.

- Veikimą koreguoti turi tik sveikatos priežiūros specialistai arba puikiai minėtas procedūras ir vairuotojo galimybes išmanantis asmuo.
- Nustatę / suregulavę elektrinį vežimėlį įsitikinkite, kad jis atitinka technines charakteristikas, įvestas parengiant. Jei elektrinis vežimėlis neatitinka techninių charakteristikų, NEDELSDAMI jį išjunkite ir iš naujo įveskite sąrankos technines charakteristikas. Susisieki su „Invacare“, jei elektrinis vežimėlis vis tiek neatitinka tinkamų techninių charakteristikų.



ĮSPĖJIMAS!

Mirties, sunkaus sužalojimo arba sugadinimo pavojus

Nepatikimas aparatinės įrangos pritvirtinimas arba jos nebuvimas gali sukelti nestabilumą, o jis, savo ruožtu, mirtį, rimtą sužalojimą arba turto sugadinimą.



- Po BET KOKIO reguliavimo, remonto ar priežiūros darbų, prieš naudodami įrangą įsitikinkite, kad visa techninė įranga patikimai pritvirtinta tinkamoje vietoje.



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti arba sugadinti

Dėl netinkamos šio elektrinio vežimėlio sąrankos, atliekamos naudotojų / slaugytojų arba nekvalifikuotų specialistų, galima susižeisti arba padaryti žalos.

- NEMĖGINKITE nustatyti šio elektrinio vežimėlio. Šio elektrinio vežimėlio sąranką TURI atlikti kvalifikuotas technikas.
- Kad naudotojas galėtų reguliuoti vežimėlį pats, sveikatos priežiūros specialistas turi jį išmokyti, kaip tinkamai tai daryti.
- NEBANDYKITE atlikti darbo, jei neturite išvardytų įrankių.



PERSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti arba sugadinti

Elektriniame vežimėlyje sumontuota individuali, keliais būdais reguliuojama sėdynės sistema su reguliuojamomis kojų, rankų, galvos atramomis ar kitais reguliavimo būdais, skirtais norint pritaikyti sėdynę prie fizinių poreikių ir naudotojo būklės. Įvairių elektrinio vežimėlio reguliavimo parinkčių ir jų parametru derinių atveju gali kilti elektrinio vežimėlio komponentų susidūrimas arba prispaudimas. Pritaikydami sėdynės sistema ir sėdynės funkcijas pagal naudotojo poreikius:



- būkite atsargūs ir reguliuodami elektrinio vežimėlio komponentus neprisipauskite galūnių, taip pat
- pasirūpinkite, kad nesusidurtų elektrinio vežimėlio komponentai.



PRANEŠIMAS

- Elektrinis vežimėlis gaminamas individualiai, pagal užsakyme nurodytas specifikacijas. Sveikatos priežiūros specialistas turi jį įvertinti pagal naudotojo reikalavimus ir sveikatos būklę.
- Jei ketinate pritaikyti elektrinio vežimėlio konfigūraciją, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
 - Bet kokį pritaikymą turi atlikti kvalifikuotas technikas.



Pirmą kartą elektrinį vežimėlį turi sureguliuoti sveikatos priežiūros specialistas. Kad naudotojas galėtų reguliuoti vežimėlį pats, sveikatos priežiūros specialistas turi jį išmokyti, kaip tinkamai tai daryti.

Elektrinio reguliavimo galimybės



Informacijos apie elektrinio reguliavimo galimybes žr. nuotolinio valdymo pulto naudotojo vadove.

Paminos

Visas „Invacare“ siūlomas paminas galima užlenkti aukštin.

3.2 Nuotolinio valdymo pulto reguliavimas



PERSPĖJIMAS!

Netyčia susidūrus su kliūtimi (tokia kaip durų rėmas arba stalas) kyla pavojus pastumti nuotolinį valdymo pultą atgal ir valdymo rankena gali užstrigti už rankų atramų, jeigu valdymo pulto padėtis yra sureguliuota, tačiau ne visi varžtai yra pritvirtinti

Dėl šios priežasties elektrinis vežimėlis, nevaldomai važiuodamas pirmyn, gali sužaloti naudotoją arba arti esantį asmenį.

- Reguluodami nuotolinio valdymo pulto padėtį, visuomet įsitikinkite, kad visi varžtai yra tvirtai priveržti.
- Jei netyčia taip nutiktų, nedelsdami IŠJUNKITE elektroniką elektrinio vežimėlio valdymo pultelyje.



PERSPĖJIMAS!


Pavojus susižaloti

Pasvirus ant nuotolinio valdymo pulto, pavyzdžiui, perkeliant į neįgalųjų vežimėlį arba iš jo, nuotolinio valdymo pulto laikiklis gali sulūžti ir naudotojas gali iškristi iš vežimėlio.

- Niekada nepasvirkite ant nuotolinio valdymo pulto kaip atramos, pavyzdžiui, perkeldami.

3.2.1 Standartinio nuotolinio pultelio laikiklio reguliavimas

Nuotolinio valdymo pulto padėties reguliavimas pagal naudotojo rankos ilgį

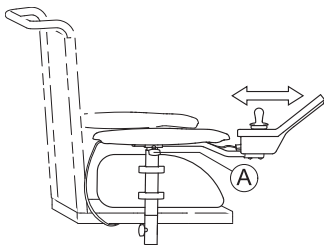


1. Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite sparnuotąjį varžtą.

Nuotolinio valdymo pulto aukščio reguliavimas



- 3 mm šešiabriaunis raktas

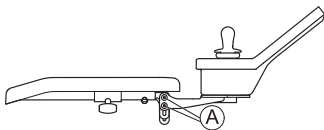


1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtus.

3.2.2 Pasukamojo pultelio laikiklio reguliavimas

Nuotolinio valdymo pulto aukščio reguliavimas



- 6 mm šešiabriaunis raktas

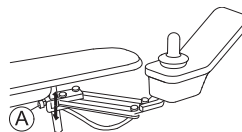


1. Atlaisvinkite varžtą **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtą.

Nuotolinio valdymo pulto poslinkio reguliavimas

Nuotolinio valdymo pultą į šoną galima reguliuoti 20 mm.



- 3 mm šešiabriaunis raktas

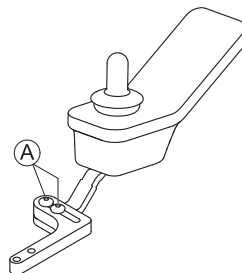


1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtus.

Nuotolinio valdymo pulto padėties reguliavimas



- 3 mm šešiabriaunis raktas

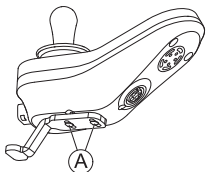


1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtus.

3.2.3 „Maxx Resolve“ pasukamojo nuotolinio valdymo pulto laikiklio reguliavimas

Nuotolinio valdymo pulto gylio reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas

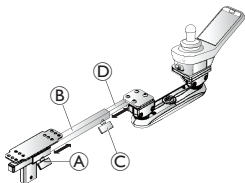

1. Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą **A**, kad sureguliuotumėte vamzdžio **B** gylį. Kai pasiekiamas norima padėtis, priveržkite varžtus.
2. Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą **C**, kad sureguliuotumėte vamzdžio **D** gylį. Kai pasiekiamas norima padėtis, priveržkite svirtį.

Aukščio ir kampo reguliavimas

„Maxx Resolve“ nuotolinio valdymo pulto laikiklio aukštis / kampas reguliuojamas dviem rutuliniais spaustukais, pritvirtintais prie pasukimo mechanizmo. Galiniai rutulinis spaustukas tvirtinamas prie nuotolinio valdymo pulto vamzdžio, o ant priekinio rutulinio spaustuko tvirtinamas nuotolinio valdymo pultas. Abu rutulinius spaustukus galima nepriklausomai reguliuoti, kad nuotolinio valdymo pultas būtų naudotojui tinkamame aukštyje ir (arba) tinkamu kampu.



Į viršų sumontuoti rutuliniai
spaustukai




Į apačią sumontuoti rutuliniai
spaustukai



Suregulius rutulinių spaustukų kampą į viršų, pasukimo mechanizmo korpusas pakreipiamas į viršų. Šis kampas aukštyn reiškia, kad kai nuotolinio valdymo pultas pasisuka į išorę (kai jis sumontuotas ant dešiniojo porankio) arba į vidų (kai jis sumontuotas ant kairiojo porankio), jis pasisuka į apačią. Priešingas poveikis pasireiškia, kai rutulinių spaustukų kampas reguliuojamas žemyn.




- 5 mm šešiabriaunis raktas

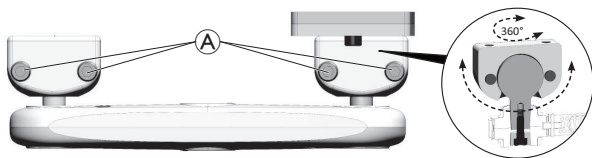

Kampo reguliavimas



Aukščio reguliavimas

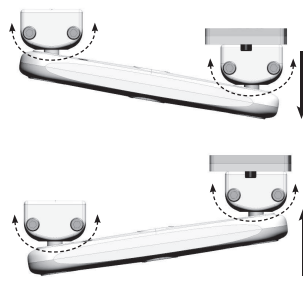


1. Atlaisvinkite kiekvieno rutulinio spaustuko varžtus (A).
2. Pakreipkite / pasukite rutulinius spaustuvus į norimą kampą / aukštį.
3. Kai pasiekama norima padėtis, priveržkite varžtus.

Prievartinio pasukimo jėgos įtempimo reguliavimas

„Maxx Resolve“ pasukamojo nuotolinio valdymo pulto laikiklyje naudojama reguliuojamo įtempimo diržinė pavara, kad būtų galima reguliuoti prievartinio pasukimo jėgą, reikalingą nuotolinio valdymo pulto padėčiai pakeisti. Įtempimą galima reguliuoti pasukimo mechanizmo centre esančiu kumšteliniu ratuku. Yra keturios įtempimo nustatymo parinktys, kad būtų atsižvelgta į naudotojo jėgą ir judrumą. Prievartinio pasukimo įtempimą reikia nustatyti pagal naudotojo poreikius.



- 6 mm šešiabriaunis raktas

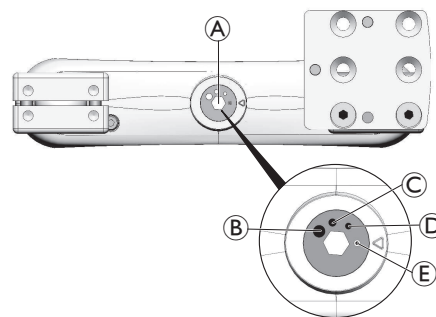

1. Naudodami kumštelinį ratuką (A) nustatykite prievartinio pasukimo įtempimą į vieną iš keturių nustatymų variantų:
 - (B) stiprus įtempis
 - (C) vidutinio stiprumo įtempis
 - (D) lengvas įtempis
 - (E) labai lengvas įtempis

3.3 Pagrindinės sijos vidurio linijos laikiklio reguliavimas



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti arba sugadinti

Dėl atsilaisvinusių mažų dalių gali kilti užspringimo pavojus, dėl to galima susižaloti arba mirti.

- Nenuimkite jokių mažų dalių, išskyrus tuos atvejus, kai keičiate vairasvirtės rankenėlę.
- Nepalikite nuimtos vairasvirtės rankenėlės be priežiūros.
- Atidžiai prižiūrėkite vaikus, gyvūnus arba žmones, turinčius fizinę ir (arba) protinę negalią.




PERSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti arba sugadinti

Po strypų modifikavimo, pvz., trumpinimo, likusios atplaišos ir neuždėti galiniai dangteliai gali sužaloti ar ką pažeisti.

- Atlikę ilgą pjūvį, pašalinkite atplaišas.
- Pašalinę atplaišas, vėl uždėkite galinį dangtelį.
- Patikrinkite, ar nėra atplaišų, kad gerai priglustų.

3.3.1 Pagrindinės sijos vidurio linijos laikiklio aukščio reguliavimas

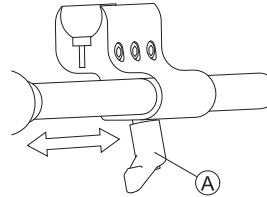

1. Atlaisvinkite svirtį (A).
2. Paslinkite pagrindinės sijos vidurio linijos laikiklį į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite svirtį.


3.3.2 Pagrindinės sijos vidurio linijos laikiklio aukščio reguliavimas

Pagrindinės sijos vidurio linijos laikiklio aukštį galima nustatyti dviem toliau nurodytais būdais.

- Nustatykite jį kartu su porankio aukščiu. Žr. atitinkamus skyrius apie porankį, *3.8.1 Rankų atramų aukščio reguliavimas*, 22 psl..
- Nustatykite tik pagrindinės sijos vidurio linijos laikiklio aukštį. Žr. tolesnį skyrių.



- 5 mm (3/16 col.) šešiabriaunis raktas

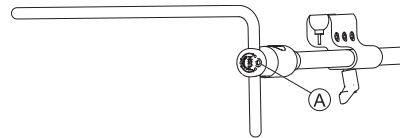


1. Atlaisvinkite varžtą (A).
2. Nustatykite norimą pagrindinės sijos aukštį.
3. Priveržkite varžtą.

3.3.3 Nuotolinio valdymo pulto / ekrano padėties reguliavimas



- 4 mm šešiabriaunis raktas
- 8 mm veržliaraktis


Nuotolinio valdymo pulto pakreipimas (DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400)

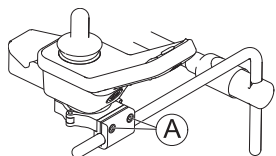

1. Atlaisvinkite varžtus Ⓐ.
2. Pakreipkite ant laikiklio esantį nuotolinį valdymo pultą.
3. Priveržkite varžtus.

pav. 3–1 DLX-REM400 reguliavimo pavyzdys. DLX-REM110, DLX-REM211 ir DLX-REM216 reguliuojami tuo pačiu būdu.


Nuotolinio valdymo pulto pasukimas (DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400)

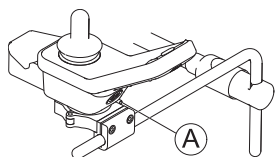

1. Atlaisvinkite varžtą Ⓐ.
2. Pasukite nuotolinio valdymo pultą spaustuke į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtą.


pav. 3–2 DLX-REM400 reguliavimo pavyzdys. DLX-REM110, DLX-REM211 ir DLX-REM216 reguliuojami tuo pačiu būdu.

Nuotolinio valdymo pulto pakreipimas (DLX-CR400 ir DLX-CR400LF)

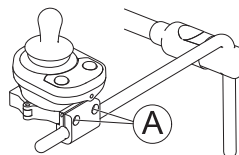

1. Atlaisvinkite varžtus Ⓐ.
2. Pakreipkite ant laikiklio esantį nuotolinį valdymo pultą.
3. Priveržkite varžtus.

Nuotolinio valdymo pulto pasukimas (DLX-CR400 ir DLX-CR400LF)

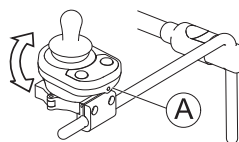


1. Atlaisvinkite varžtą Ⓐ (neparodyta paveiksle).
2. Pasukite nuotolinio valdymo pultą spaustuke į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtą.

DLX-REM500



- 5 mm (3/16 col.) šešiabriaunis raktas

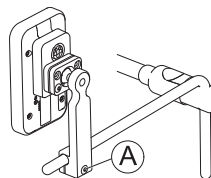


1. Atlaisvinkite varžtą Ⓐ.
2. Pasukite ant laikiklio esantį nuotolinį valdymo pultą.
3. Priveržkite varžtą.

ASL komponentai ant pagrindinės sijos padėklo



- 5 mm (3/16 col.) šešiabriaunis raktas

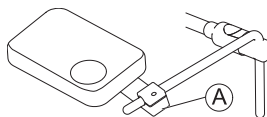


1. Atlaisvinkite varžtą (A).
2. Nustatykite padėklo ant laikiklio padėtį.
3. Priveržkite varžtą.

pav. 3–3 Kaip pavyzdys pateiktas brėžinys.

ASL komponentų tvirtinimas ant pagrindinės sijos laikiklio (tvirtinama tik ant laikiklio)



- 4 mm (5/32 col.) šešiabriaunis raktas

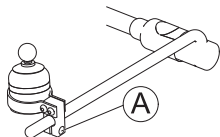

1. Atlaisvinkite varžtą (A).
2. Padėkite ASL komponentą ant laikiklio.
3. Priveržkite varžtą.

pav. 3–4 Kaip pavyzdys pateiktas brėžinys.

3.4 Pasukimo mechanizmo reguliavimas



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti arba sugadinti

Dėl atsilaisvintųjų mažų dalių gali kilti užspringimo pavojus, dėl to galima susižaloti arba mirti.

- Nenuimkite jokių mažų dalių, išskyrus tuos atvejus, kai keičiate vairasvirtės rankenėlę.
- Nepalikite nuimtos vairasvirtės rankenėlės be priežiūros.
- Atidžiai prižiūrėkite vaikus, gyvūnus arba žmones, turinčius fizinę ir (arba) protinę negalią.



PERSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti arba sugadinti

Po strypų modifikavimo, pvz., trumpinimo, likusios atplaišos ir neuždėti galiniai dangteliai gali sužaloti ar ką pažeisti.

- Atlikę ilgą pjūvį, pašalinkite atplaišas.
- Pašalinę atplaišas, vėl uždėkite galinį dangtelį.
- Patikrinkite, ar nėra atplaišų, kad gerai priglustų.

Pasukimo mechanizmas gali būti naudojamas įvairiems įtaisams, tokiems, kaip:

- PROTON galvos bloko sparneliai;
- galūnių valdymo svirtis smakro valdikliui;
- kiaušinio formos jungiklis;



- 4 mm (5/32 col.) šešiabriaunis raktas


Gylio reguliavimas

1. Atlaisvinkite varžtą **A**.
2. Nustatykite strypą reikiamu gyliu.
3. Priveržkite varžtą.

Padėties reguliavimas

Pasukimo mechanizmą galima pasukti 360 laipsnių.

1. Atlaisvinkite varžtą **A**.
2. Nustatykite į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtą.

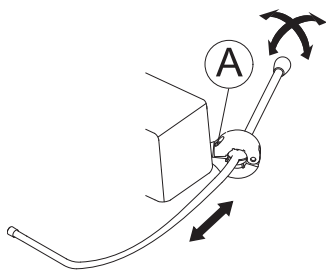

3.5 Pasukamojo ekrano laikiklio reguliavimas



- 3 mm šešiabriaunis raktas


Laikiklio aukščio reguliavimas

1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite norimą laikiklio aukštį.
3. Priveržkite varžtus.

Laikiklio krypties reguliavimas

Laikiklį galima sukti 360 laipsnių.

1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Sureguliuokite laikiklio orientaciją.
3. Priveržkite varžtus.

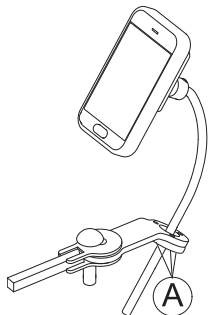


Ekranų krypties reguliavimas

Ekraną galima sukti 360 laipsnių.



- 18 mm veržliaraktis

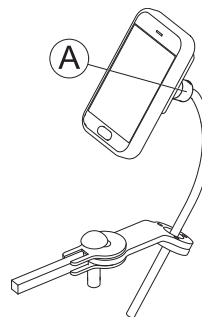

1. Atlaisvinkite suveržimo įvorę **A**.
2. Nustatykite ekrano kryptį.
3. Priveržkite suveržimo įvorę.

3.6 Rankinio smakro valdiklio reguliavimas



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti arba sugadinti

Dėl atsilaisvintųjų mažų dalių gali kilti užspringimo pavojus, dėl to galima susižaloti arba mirti.

- Nenuimkite jokių mažų dalių, išskyrus tuos atvejus, kai keičiate vairasvirtės rankenėlę.
- Nepalikite nuimtos vairasvirtės rankenėlės be priežiūros.
- Atidžiai prižiūrėkite vaikus, gyvūnus arba žmones, turinčius fizinę ir (arba) protinę negalią.



PERSPĒJIMAS!

Pavojus susižaloti arba sugadinti


Po strypų modifikavimo, pvz., trumpinimo, likusios atplaišos ir neuždėti galiniai dangteliai gali sužaloti ar ką pažeisti.

- Atlikę ilgą pjūvį, pašalinkite atplaišas.
- Pašalinę atplaišas, vėl uždėkite galinį dangtelį.
- Patikrinkite, ar nėra atplaišų, kad gerai priglustų.

3.6.1 Galūnių valdymo svirties reguliavimas

Vairasvirtės orientacijos reguliavimas

Valdymo svirtį galima sukti 360 laipsnių. Šone esantis griovelis leidžia vairasvirtę pakreipti 90 laipsnių kampu.

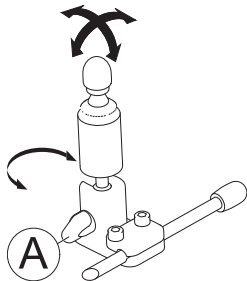


1. Atlaisvinkite rankinį sraigą **A**.
2. Pasukite apatinę vairasvirtės dalį į padėties išpjovą.
3. Sureguliuokite vairasvirtės orientaciją. Jei pageidaujama, užfiksuokite vairasvirtę išpjovoje 90 laipsnių kampu.
4. Priveržkite rankinį sraigą.

Padėties laikiklyje reguliavimas



- 4 mm (5/32 col.) šešiabriaunis raktas

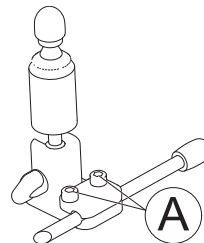

1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite laikiklyje vairasvirtės padėtį.
3. Priveržkite varžtus.

Aukščio ir gylio reguliavimas

Žr. 3.4 Pasukimo mechanizmo reguliavimas, 19 psl..


3.6.2 „Kiaušininio“ jungiklio reguliavimas

Jungiklio orientacijos reguliavimas

„Kiaušininį“ jungiklį galima pasukti 360 laipsnių.



- 11 mm (7/16 col.) veržliaraktis

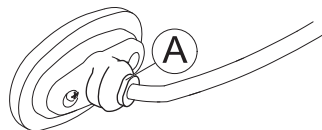

1. Atlaisvinkite veržlę **A**.
2. Nustatykite jungiklio orientaciją.
3. Priveržkite veržlę.

Aukščio ir gylio reguliavimas


Žr. 3.4 Pasukimo mechanizmo reguliavimas, 19 psl..

3.7 Galvos bloko reguliavimas

Pagalvėlės padėties reguliavimas



- 4 mm (5/32 col.) šešiabriaunis raktas

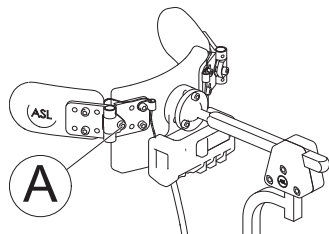

1. Atlaisvinkite varžtą **A**.
2. Nustatykite pagalvėlės padėtį.
3. Priveržkite varžtą.


PROTON sparnelių reguliavimas

Žr. 3.4 Pasukimo mechanizmo reguliavimas, 19 psl..

3.8 Rankų atramos


3.8.1 Rankų atramų aukščio reguliavimas

Standartinė rankų atrama

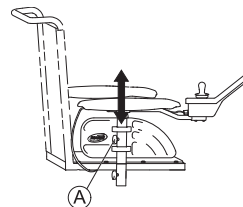

1. Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite sparnuotąjį varžtą.

Pakeliama rankos atrama

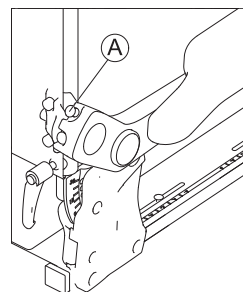


1. Atlaisvinkite srieginį varžtą **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite srieginį varžtą.

Pagal atlošą prisitaikanti rankos atrama



- 5 mm šešiabriaunis raktas
- 13 mm veržliaraktis

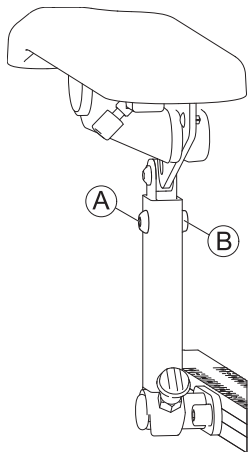

1. Ištraukite varžtą **A** ir veržlę **B**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Įdėkite ir priveržkite varžtą ir veržlę.


3.8.2 Rankų atramos pločio reguliavimas



- 8 mm šešiabriaunis raktas



Varžtas pasiekiamas iš priekio arba galo, atsižvelgiant į tai, kurioje pusėje yra.

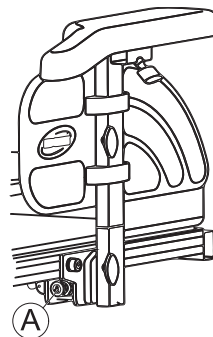


1. Atlaisvinkite varžtą **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtą.

3.8.3 Rankų atramos gylio reguliavimas



- 6 mm šešiabriaunis raktas

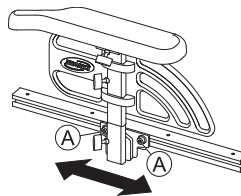


1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtus.

3.8.4 Pasipriešinimo keitimas (pakeliamos / kitos rankų atramos)

Galima nustatyti, kad pakeliamos ir kitos rankų atramos daugiau ar mažiau priešintųsi judesiams.



- 5 mm šešiabriaunis raktas

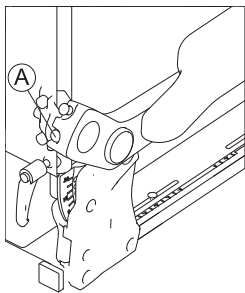



1. Kad rankų atramą būtų lengviau judinti, atlaisvinkite varžtą **A**.
2. Kad rankų atramą būtų sunkiau judinti, priveržkite varžtą **A**.

3.8.5 Rankų pagalvėlės kampo reguliavimas (pakeliamos / kitos rankų atramos)



- 5 mm šešiabriaunis raktas

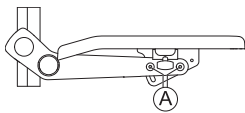


1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
 Neištraukite varžtų **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtus.

3.8.6 Rankų pagalvėlės padėties reguliavimas (pakeliamos rankų atramos)



- 5 mm šešiabriaunis raktas

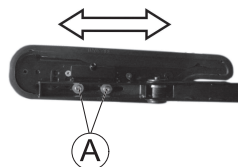

1. Pakreipkite komponentą vertikaliai.
2. Atlaisvinkite vidinius varžtus **A**.
3. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
4. Priveržkite varžtus.

Įsitikinkite, kad vėl įdėjote naudotas „Nordlock“ poveržles.

3.9 Galvos atramos reguliavimas



PERSPĖJIMAS!


Jei elektriniame vežimėlyje, kuris naudojamas kaip sėdynė transporto priemonėje, nebus įrengta galvos atrama arba ji netinkamai sureguliuota, kyla pavojus susižaloti

Dėl to susidūrus kaklas gali būti per daug ištiestas.

– Turi būti įrengta galvos atrama. „Invacare“ elektrinio vežimėlio galvos atrama (įsigyjama atskirai) idealiai tinka važiuojant.



– Galvos atrama turi būti sureguliuota atsižvelgiant į naudotojo ausų aukštį.

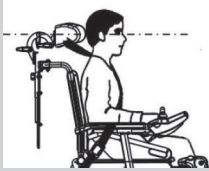

- Gali reikėti nuimti ir modifikuoti galinį pagalvėlės užvalkalą, kad būtų galima prieiti prie galvos atramos galinės plokštelės montavimo angų.
- Galima naudoti papildomą kaiščio plokštelę. Ją galima įstatyti tarp spaustuko bloko ir galinės plokštelės papildomam tarpui / erdvei tarp „Posture Back“ strypo ir atramos „Deep Back“.


Galvos atramos spaustuko įranga skirta įstatyti į esamas atlošo montavimo angas galinės atramos plokštelėje.

3.9.1 „Rea“ galvos arba kaklo atramos padėties reguliavimas

Visų tipų „Rea“ galvos ir kaklo atramų padėtis reguliuojama tokiu pačiu būdu.




- 5 mm šešiabriaunis raktas

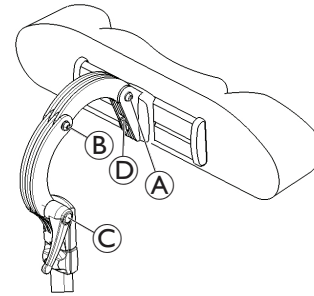

1. Atlaisvinkite varžtus A, B arba suveržimo svirtį C.
2. Nustatykite galvos arba kaklo atramą į reikalingą padėtį.
3. Vėl priveržkite varžtus ir suveržimo svirtį.
4. Atlaisvinkite šešiabriaunį varžtą D.
5. Paslinkite galvos atramą į kairę ar dešinę į reikalingą padėtį.
6. Vėl priveržkite šešiakampį varžtą.

3.9.2 „Rea“ galvos arba kaklo atramos aukščio reguliavimas

Visų tipų „Rea“ galvos ir kaklo atramų aukštis reguliuojamas tokiu pačiu būdu.

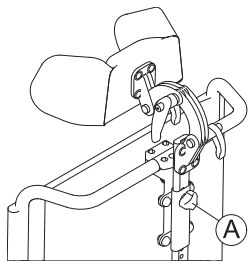

1. Atlaisvinkite rankinį sraigatą **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite rankinį sraigatą.


3.9.3 Sėdmenų atramų reguliavimas



1. Stumkite komponentus į vidų arba traukite į išorę į norimą padėtį.

3.9.4 „Elan“ galvos atramos detalių reguliavimas

„Elan“ galvos atramos detales galima patogiai reguliuoti. Paveikslėlyje žemiau parodytas galimas jungčių reguliavimo diapazonas.

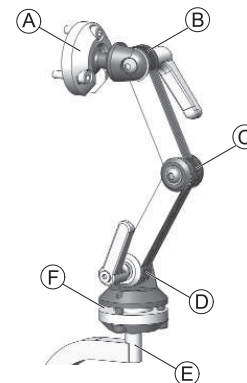


A	Viršutinė daugiaašė sukamoji ašis	<ul style="list-style-type: none"> • 360° sukimasis • 80° pakreipimas
B	Viršutinė jungtis	<ul style="list-style-type: none"> • 180° sukimasis
C	Vidurinė jungtis	<ul style="list-style-type: none"> • 100° sukimasis
D	Apatinė jungtis	<ul style="list-style-type: none"> • 180° sukimasis
E	Montavimo plokštelė	<ul style="list-style-type: none"> • 360° pasukimas intervalais po 90°
F	Apatinė daugiaašė sukamoji ašis	<ul style="list-style-type: none"> • 360° sukimasis • 50° pakreipimas

Pritaisymas



- 2,5 mm šešiabriaunis raktas
- 4 mm šešiabriaunis raktas
- 5 mm šešiabriaunis raktas

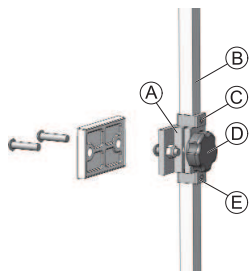

1. Naudodami pateiktas detales sulygiuokite ir pritaisykite galvos atramos spaustuko konstrukciją prie esamų atlošo angos (A) montavimo angų.

2. Pateiktomis tvirtinimo detalėmis pritaisykite galvos atramos plokštelę (nerodoma) prie galvos atramos strypo.



Galvos atramos plokštelę galima pasukti į norimą kampą šarnyriniu guoliu galvos atramos strypo gale, atlaisvinant ir priveržiant tvirtinimo detales.

3. Atsukite ir nuimkite apatinį D žiedą (E) nuo įrangos.
4. Užstumkite vertikalią montavimo plokštelę (B) ant spaustuko konstrukcijos ir pareguliuokite bendrąją galvos atramos plokštelės aukštį. Priveržkite rankenėlę (D). Norint tinkamai sureguliuoti galvos atramą, ją reikia pakoreguoti pagal naudotojo ausų aukštį.
5. Pagal poreikį pareguliuokite viršutinį D žiedą (C).


6. Nustatę galutinę aukščio padėtį, apatinį D žiedą (E) sureguliuokite taip, kad jis sandariai priglustų prie spaustuko konstrukcijos apačios (kad nenuslystų).

Gylis ir kampo reguliavimas

Galvos atramą galima toliau reguliuoti, nustatant norimą gylį ir kampą manipuluojant įranga.



- 4 mm šešiabriaunis raktas
- 5 mm šešiabriaunis raktas

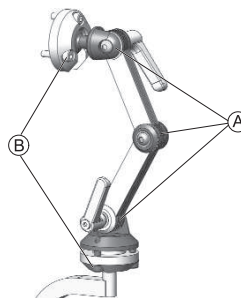

1. Atsukite varžtus ir dvigubos jungties reguliavimo bloko (A) suveržimo svirtis bei viršutinės ir apatinės sukamosios ašies (B) varžtus.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtus ir suveržimo svirtis.

3.10 Atlošo reguliavimas



PERSPĖJIMAS!

Pakoregavus sėdynės pakreipimą arba atlošo kampą, pasikeičia elektrinio vežimėlio geometrija ir tiesiogiai paveikiamas jo dinaminis stabilumas!

- Išsamesnės informacijos apie dinaminį stabilumą, važiavimą įkalnėmis ir per kliūtis bei tinkamą sėdynės pakreipimo ar atlošo kampo reguliavimą rasite atitinkamuose elektrinio vežimėlio naudotojo vadovo skyriuose.

3.10.1 Atlošo aukščio reguliavimas


Šiame skyriuje aprašomos atlošo plokštės aukščio reguliavimo procedūros.



Diržinį atlošą galima nustatyti tik į fiksuotą 48 cm ir 54 cm aukštį.



- 5 mm šešiabriaunis raktas

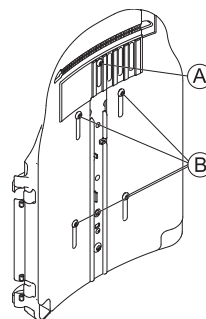

1. Atlaisvinkite varžtus A ir B.



Neištraukite varžtų A ir B.

2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtus.

3.10.2 Atlošo pločio reguliavimas


Atlošo plokštės plotį kažkiek galima reguliuoti nustatant priekinę plokštę, pvz., norint atlošo plokštę pareguliuoti sėdynės pagalvėlės atžvilgiu. Galinę plokštę daugiau reguliuoti gali tik technikas, kaip nurodyta šio elektrinio vežimėlio techninės priežiūros vadove.




Diržinis atlošas gali būti dviejų pločių: 38–43 cm ir 48–53 cm; tam tikrais atvejais jį reikia nuimti, kad būtų galima pareguliuoti plotį. Pakeitimo aprašas pateiktas šio elektrinio vežimėlio naudojimo vadove. Naudojimo vadovą galima užsisakyti iš „Invacare“. Jose yra instrukcijų, skirtų specialiai paruoštiems techninės priežiūros specialistams, ir aprašomi veiksmai, kurie nėra skirti galutiniam naudotojui. Atminkite, kad jei reguliuojamas diržinio atlošo plotis, reikia pakeisti ir atlošo pagalvėlę.



- 5 mm šešiabriaunis raktas

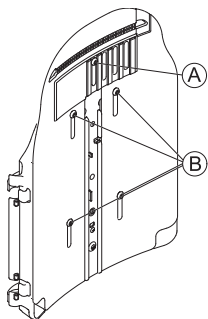

1. Atsukite ir nuimkite varžtą ①.
2. Atlaisvinkite varžtus ②.
 Neištraukite varžtų ②.
3. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
4. Įdėkite varžtą ①.
5. Priveržkite varžtus.

3.10.3 Atlošo kampo reguliavimas



PERSPĖJIMAS!

Kiekvieną kartą pakeitus sėdynės ir atlošo kampą pasikeičia elektrinio neįgaliųjų vežimėlio geometrija ir tai turi įtakos dinaminiam stabilumui.

- Daugiau informacijos apie stabilumą, tinkamą kliūčių įveikimą, važiavimą nuolydžiu ir tinkamą atlošo bei sėdynės padėtį ieškokite elektrinio vežimėlio naudotojo vadove.



PERSPĖJIMAS!

Pavojus iškristi iš vežimėlio

Reguliuojant atlošą vežimėlis gali netikėtai pajudėti atgal ir galite iš jo iškristi.

- Reguliuodami atlošą į jį nesiremkite.




Jei atlošas sutvirtintas rankenėlėmis, o ne šešiabriauniais varžtais, įrankių nereikia.

Reguliuojamo pločio atlošas



- 6 mm šešiabriaunis raktas

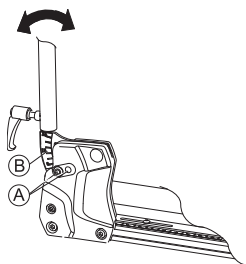


1. Ištraukite viršutinį atlošo varžtą **A** abiejose pusėse.
2. Reguliuokite reikalingą atlošo kampą po 3,8°. Šiuo tikslu naudokitės atlošo skale **B**. Įsitinkite, kad abiejose pusėse nustatytas vienodas kampas.

3. Įdėkite ir priveržkite varžtą. Įsitinkite, kad įkišote varžtą į vieną iš atlošo rėmo angų. Varžtas turi matytis rėmo viduje, o varžto galvutė turi būti lygiai su rėmu.

Paprastas atlošas




- 6 mm šešiabriaunis raktas

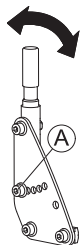

1. Išimkite vidurinius atlošo varžtus **A** abiejose pusėse.
2. Reguliuokite reikalingą atlošo kampą po 7,5°. Įsitinkite, kad abiejose pusėse nustatytas vienodas kampas.
3. Įdėkite ir priveržkite varžtą.

3.10.4 Atlošo apmušalo įtempimo reguliavimas

1.

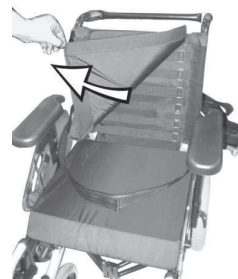

Nuimkite atlošo pagalvėlę (pritvirtinama kilpomis su kabliukais), atitraukdami ją į viršų, kad pasiektumėte reguliavimo dirželius.

2.



Atskirų dirželių įtempimą galite reguliuoti tiek, kiek norite.

3. Vėl uždėkite atlošo pagalvėlę.


3.11 Sėdynės reguliavimas


3.11.1 Sėdynės pločio reguliavimas

Galima nustatyti keturias ištraukiamosios sėdynės atramos padėtis. Todėl sėdynės plotį galima reguliuoti kartu su reguliuojamąja sėdynės plokšte arba reguliuojamąja diržine sėdyne.

Pločio reguliavimo aprašas pateiktas šio elektrinio vežimėlio naudojimo vadove. Naudojimo vadovą galima užsisakyti iš „Invacare“. Jose yra instrukcijų, skirtų specialiai paruoštiems techninės priežiūros specialistams, ir aprašomi veiksmai, kurie nėra skirti galutiniam naudotojui.


3.11.2 Sėdynės gylio reguliavimas


 Sėdynės gylis lemia sėdynės svorio centro pasirinkimą. Tai daro įtaką dinaminiam stabilumui. Jei labai pakeičiate sėdynės gylį, reikia sureguliuoti ir sėdynės svorio centrą. Žr. šio elektrinio vežimėlio naudojimo vadovo skyrių „Sėdynės svorio centro reguliavimas“. Naudojimo vadovą galima užsisakyti iš „Invacare“. Jose yra instrukcijų, skirtų specialiai paruoštiems technikams, ir aprašomi veiksmai, kurie nėra skirti galutiniam naudotojui.

 Kaip orientyrą galima naudoti skaičių skalę ant sėdynės. Jokių matmenų, pvz., sėdynės gylio centimetrais, šie skaičiai nenurodo. Daugiau informacijos apie skalę ir sėdynės gylio reguliavimą rasite naudojimo vadove.



- 6 mm šešiabriaunis raktas

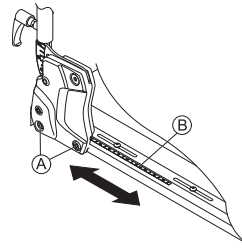


1. Abiejose pusėse atlaisvinkite apatinius atlošo varžtus  A.



Neištraukite varžtų  A.

2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.

Sėdynės gylį galima nustatyti tiksliai. Šiuo tikslu kaip orientyrą naudokite kėdės skalę  B.

Įsitinkinkite, kad abiejose pusėse nustatytas vienodas sėdynės gylis.

3. Priveržkite varžtus.

3.11.3 Sėdynės kampo reguliavimas




PERSPĖJIMAS!


Pakoregavus sėdynės pakreipimą arba atlošo kampą, pasikeičia elektrinio vežimėlio geometrija ir tiesiogiai paveikiamas jo dinaminis stabilumas!


– Išsamesnės informacijos apie dinaminį stabilumą, važiavimą įkalnėmis ir per kliūtis bei tinkamą sėdynės pakreipimo ar atlošo kampo reguliavimą rasite atitinkamuose elektrinio vežimėlio naudotojo vadovo skyriuose.

Sėdynės kampas reguliuojamas velenu, kuris yra priekinėje dalyje po sėdynės rėmu.

Reguliuojant sėdynės kampą reikia stebėti, kad bent 1 cm sraigto visada liktų veleno viduje ir jis nebūtų visiškai išsuktas iš veleno.


 Lengviau reguliuoti sėdynės kampą, kai neįgaliųjų vežimėlyje niekas nesėdi.

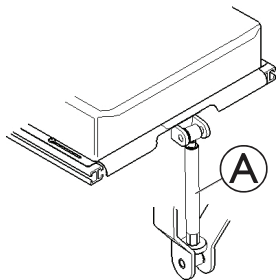


Paveikslėlyje parodyta veleno  padėtis, kai sėdynės kampas reguliuojamas rankiniu būdu.

3.12 Šoninės juosmens atramos reguliavimas

Pločio reguliavimas

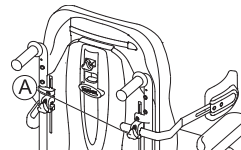



1. Atlaisvinkite rankenėles .
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite rankenėles.

Aukščio reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas

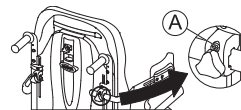



1. Atlaisvinkite varžtus .
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtus.

Gylio reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas

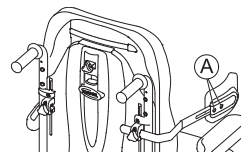


1. Atlaisvinkite varžtus .
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtus.

3.13 Klubo atramos su greito atjungimo jungtimi reguliavimas

Padėties reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas

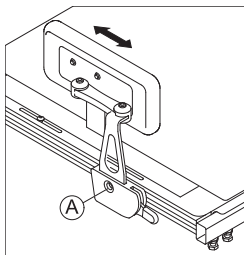



1. Atlaisvinkite varžtą **A**.
Varžto neištraukite.
2. Nustatykite norimą klubų atramos padėtį.
3. Priveržkite varžtą.

Pločio reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas (2 vnt.)

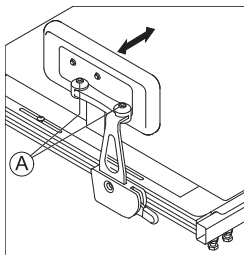


1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite norimą klubų atramos plotį.
 Klubų atramos plotis negali būti didesnis nei sėdynės plotis.
3. Priveržkite varžtus.

Kampo reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas

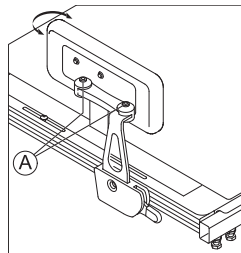


1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite norimą klubų atramos kampą.
3. Priveržkite varžtus.

Klubų pagalvėlės ilgio reguliavimas



- 10 mm veržliaraktis

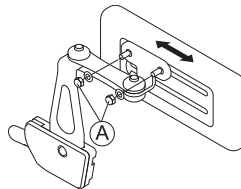

1. Atlaisvinkite du varžtus **A**.
2. Nustatykite norimą klubų pagalvėlės ilgį.
3. Priveržkite varžtus.

Klubų pagalvėlės aukščio reguliavimas

Klubų pagalvėlės aukštį galite nustatyti dviem toliau nurodytais būdais.


- Pasinaudojant jos montavimo angomis
- Pasinaudojant jos laikikliu

Pasinaudojant montavimo angomis




- 10 mm veržliaraktis

1.

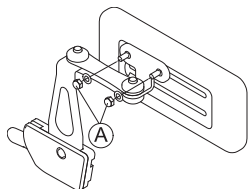

Atlaisvinkite du varžtus (A).

2.

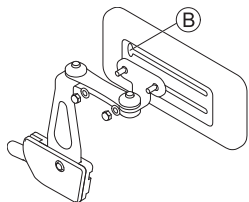

Išimkite klubų pagalvėlės laikiklį iš montavimo angos per išpjovą (B).

3. Įdėkite klubų pagalvėlės laikiklį į kitą montavimo angą.


4. Priveržkite varžtus.

Pasinaudojant laikikliu



- 5 mm šešiabriaunis raktas


1.

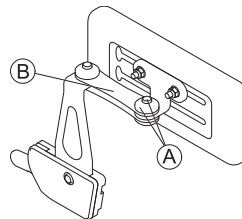

Išimkite viršutinį varžtą ir trinties dangtelį (A).

2. Išimkite mažą trinties žiedelį (B).

3.

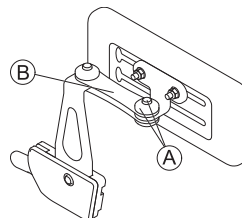

Išimkite klubų pagalvėlę su laikikliu, apsukite viršutinę pusę į apačią ir vėl įdėkite.

4. Įdėkite trinties žiedelį, trinties dangtelį, varžtą ir priveržkite.

3.14 Padėklo reguliavimas ir (arba) nuėmimas



ĮSPĖJIMAS!


Pavojus susižaloti arba sugadinti

Jei elektrinis vežimėlis turi padėklą ar kitą pagalbinę įrangą, ji gali atsilaisvinti perkeliančiam vežimėlį į transporto priemonę ir susidūrimo atveju sugadinti turtą arba sužaloti naudotojus.

- Jei įmanoma, kita pagalbinė elektrinio vežimėlio įranga turi būti pritvirtinta prie elektrinio vežimėlio arba nuimta nuo jo ir atskirai pritvirtinta transporto priemonėje kelionės metu.
- Jei dėklas pritaisytas, visada prieš veždami elektrinį vežimėlį jį nuimkite.




3.14.1 Šoninis padėklo reguliavimas

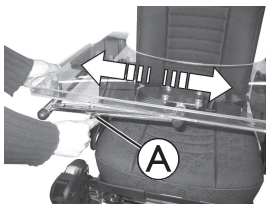

1. Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą ①.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite sparnuotąjį varžtą.

3.14.2 Padėklo gylio reguliavimas ar nuėmimas

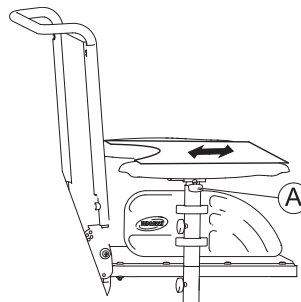

1. Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą ①.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį (arba visiškai jį nuimkite).
3. Priveržkite sparnuotąjį varžtą.

3.14.3 Padėklo nusukimas į šoną

Norint atsėsti į elektrinį vežimėlį arba nuo jo nultipti per šoną, galima pasukti padėklą į viršų ir į šoną.



PERSPĖJIMAS!


pavojus susižaloti! Pakeltas padėklas nėra užfiksuojamas šioje padėtyje!

- Nelenkite padėklo aukštyn ir palikite jį šioje padėtyje.
- Niekada nebandykite važiuoti pakėlę padėklą aukštyn.
- Visada nuleiskite padėklą kontroliuodami.


3.15 Centrinės kojų atramos, kurių aukštis reguliuojamas rankiniu būdu

3.15.1 Kojų atramos nuėmimas

Centrinę, neautomatiškai reguliuojamą kojų atramą galite nuimti visiškai.

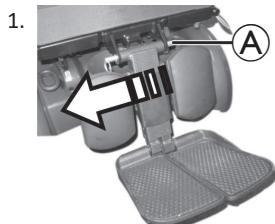

Nuimkite išimamą ašį **A**.

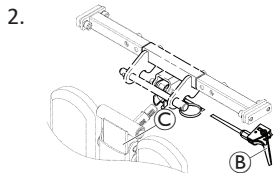

Tvirtai laikykite kojų atramą ir traukite svirtį **B**.

3. Kojų atramą nuimkite nuo laikiklio **C**.

3.15.2 Kojų atramos kampo nustatymas



PERSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti

Jei kojos atrama nepritvirtinta ir svirtis **A** patraukiama, kojos atrama staiga krinta ir gali sužeisti.

– Prieš patraukdami svirtį, pritvirtinkite kojų atramą.




1. Kojų atramą laikykite tvirtai.
2. Patraukite svirtį **A**.
3. Įstumkite kojų atramą iki reikiamos padėties.

3.15.3 Kojų atramos ilgio nustatymas



- 5 mm (3/16 col.) šešiabriaunis raktas

Galite reguliuoti kiekvienos kojų atramos ilgį atskirai.

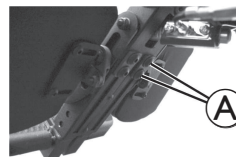

1. Atlaisvinkite kojų atramos gale esančius varžtus **A**.
2. Nustatykite norimą ilgį.
3. Vėl priveržkite varžtus.

3.15.4 Paminos kampo nustatymas



- 4 mm (5/32 col.) šešiabriaunis raktas




1. Palenkite pėdų atramas, kad pasiektumėte reguliavimo varžtus **A**.
2. Nustatykite reguliavimo varžtus.
3. Vėl nulenkite paminas.

3.15.5 Blauzdos pagalvėlių reguliavimas



- 5 mm (3/16 col.) šešiabriaunis raktas

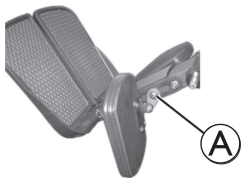

1. Palenkite blauzdos pagalvėlę į priekį, kad pasiektumėte varžtą **A**.
2. Atsukite varžtą ir sureguliuokite blauzdos pagalvėlę iki reikiamo kampo ir aukščio.
3. Vėl priveržkite varžą.
4. Atlenkite blauzdos pagalvėlę.

3.16 LNX kojų atrama


3.16.1 Kojų atramos ilgio nustatymas

Jei reikia, vietoje 90° kojų atrama gali būti nustatyta 83° arba 97° kampu. Kreipkitės į „Invacare“ tiekėją.




- 4 mm šešiabriaunis raktas
- 10 mm veržliaraktis atviru galu

Galite reguliuoti kiekvienos kojų atramos ilgį atskirai.

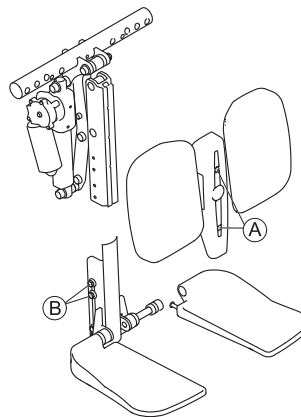

1. Išsukite varžtus **A**, esančius kojų atramos priekyje.
2. Nuimkite dangtį kartu su blauzdų pagalvėlėmis.
3. Atlaisvinkite veržles **B**, esančias kojų atramos šone. Gali tekti nuimti veržles nuo vieno lizdo ir perkelti jas prie kito.
4. Nustatykite norimą ilgį.
5. Priveržkite veržles.
6. Uždėkite atgal blauzdų pagalvėles, dangtį ir priveržkite varžtus.

 Kojų atrama su pėdų platforma reguliuojama tokiu pat būdu.

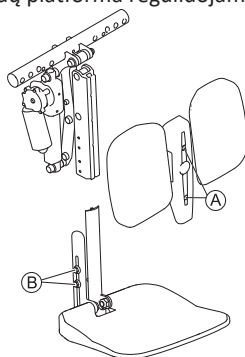

3.16.2 Paminos kampo nustatymas



- 4 mm (5/32 col.) šešiabriaunis raktas



1. Palenkite pėdų atramas, kad pasiektumėte reguliavimo varžtus **A**.
2. Nustatykite reguliavimo varžtus.
3. Vėl nulenkite paminas.


3.16.3 Paminos pločio reguliavimas

Paminos plotis reguliuojamas naudojant tarpiklius:

- kad padidintumėte plotį, iš vidinės pusės įstatykite tarpiklius.
 - Kad sumažintumėte plotį, įstatykite tarpiklius iš išorės.
- Kiekvienas tarpiklis padidina arba sumažina plotį 6,35 mm (1/4 col.).



- 6 mm šešiabriaunis raktas

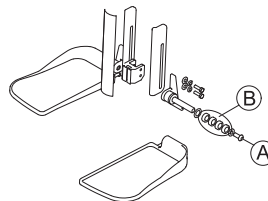


1. Išimkite varžtą **A**.
2. Nuimkite tarpiklius **B** ir paminą.
3. Jei reikia, įstatykite tarpiklius iš vidinės pusės.
4. Uždėkite paminą.
5. Jei reikia, įstatykite tarpiklius iš išorinės pusės.
6. Vėl priveržkite varžtą.

3.16.4 Pėdų platformos kampo nustatymas



- 4 mm (5/32 col.) šešiabriaunis raktas

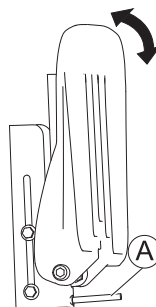


1. Užlenkite pėdų platformą į viršų, kad pasiektumėte reguliavimo varžtą **A**.
2. Nustatykite reguliavimo varžtą.
3. Vėl nulenkite pėdų platformą.

3.16.5 Blauzdos pagalvėlių reguliavimas

! Elektrinio vežimėlio sugadinimo pavojus

- Pakeitę blauzdų pagalvėlių konfigūraciją, reguliuodami kojų atramos kampą patikrinkite, ar blauzdų pagalvėles neliečia nei ratukų, nei sėdynės plokštės.

Blauzdų pagalvėles prie jų atitinkamų montavimo laikiklių gali būti reguliuojamos nepriklausomai, pasinaudojant blauzdų pagalvėlių galinėje pusėje esančiais tvirtinimo varžtais. Blauzdų pagalvėlių gylis, aukštis ir kampas gali būti reguliuojami norint išgauti įvairiausias konfigūracijas. Nepriklausomai reguliuojamos pagalvėles leidžia optimaliai ir patogiai įsitaisyti galutiniams naudotojams – toliau pateikti konfigūracijų pavyzdžiai.

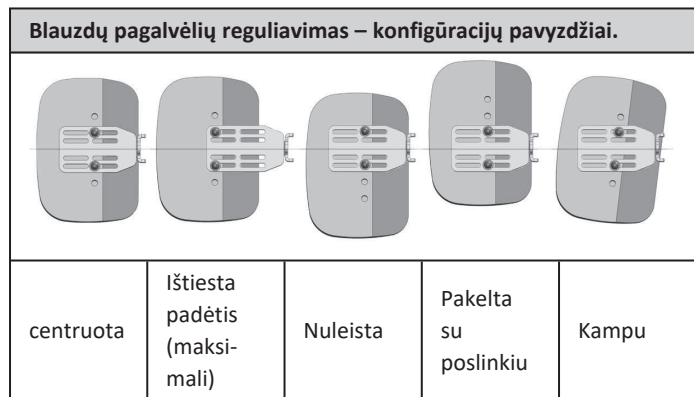


- 4 mm šešiabriaunis raktas

1. Palenkite blauzdos pagalvėlę į priekį, kad pasiektumėte varžtus.
2. Atlaisvinkite varžtus ir juos ištraukite, jei reikia.
3. Nustatykite reikiamą blauzdos pagalvėlės aukštį ir plotį.
4. Vėl priveržkite varžtus.
5. Atlenkite blauzdos pagalvėlę.

3.17 „Vari-F“ kojų atrama

3.17.1 Kojų atramos pasukimas į išorę ir (arba) nuėmimas

Nedidelis atrakinimo mygtukas yra kojų atramos viršutinėje dalyje. Kai kojų atrama atrakinta, lipant į vežimėlį ją galima pasukti į vidų ar į išorę arba visai išimti.

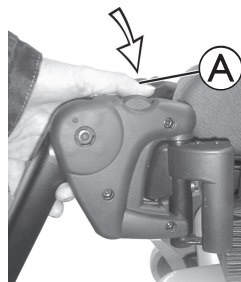

1. Paspauskite atrakinimo mygtuką **A** ir pasukite kojų atramą į išorę.
2. Ištraukite kojų atramą aukštyn.

3.17.2 Kampo nustatymas

**PERSPĖJIMAS!****Sužalojimo pavojus dėl netinkamo pėdų ir kojų atramų nustatymo**


– Prieš kiekvieną kelionę ir jos metu būtina užtikrinti, kad pamina neliestų nei ratukų, nei žemės.



- 6 mm šešiabriaunis raktas

1. Atlaisvinkite varžtą **A** šešiabriauniu raktu.

2. Jei kojų atramos neišeina pajudinti atlaisvinus varžtą, į tam skirtą angą **B** įkiškite metalinį kaištį ir švelniai pakalkite plaktuku. Taip bus atpalaiduotas vidinis kojų atramos spaudimo mechanizmas. Jei reikia, procedūrą pakartokite kitoje pusėje.

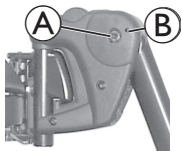

3. Atlaisvinkite varžtus **C**.



4. Nustatykite norimą kampą.


5. Vėl priveržkite varžtą.

3.17.3 Kojų atramos galinio stabdiklio nustatymas




- 6 mm šešiabriaunis raktas
- 10 mm veržliaraktis

1.

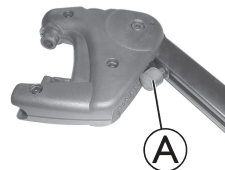

Galutinė kojų atramos padėtis nustatoma naudojant guminį stabdiklį **A**.

2.

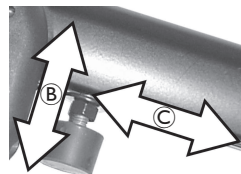


Guminį stabdiklį galima įsukti arba išsukti **B** ar pastumti į viršų arba į apačią **C**.


3.



Atlaisvinkite varžtą **D** ir pakreipkite kojų atramą į viršų, kad galėtumėte pasiekti guminį stabdiklį.

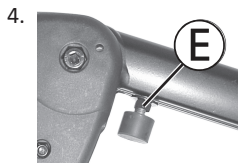

Atlaisvinkite antveržlę ⑤.

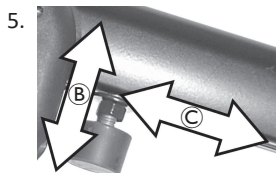

Guminį stabdiklį perkelkite į norimą padėtį.

6. Vėl priveržkite antveržlę.



Perkelkite kojų atramą į norimą padėtį.

8. Vėl priveržkite varžtą.

3.17.4 Kojų atramos ilgio reguliavimas




PERSPĖJIMAS!

Sužalojimo pavojus dėl netinkamo pėdų ir kojų atramų nustatymo

– Prieš kiekvieną kelionę ir jos metu būtina užtikrinti, kad pamina neliestų nei ratukų, nei žemės.



- 5 mm šešiabriaunis raktas

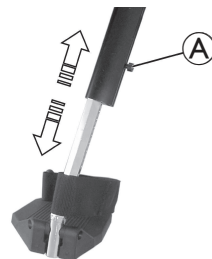


1. Atlaisvinkite varžtą ①.
2. Nustatykite reikiamą ilgį.
3. Vėl priveržkite varžtą.

3.18 „Vari-A“ kojų atramos

3.18.1 Kojų atramos pasukimas į išorę ir (arba) nuėmimas

Nedidelis atrakinimo mygtukas yra kojų atramos viršutinėje dalyje. Kai kojų atrama atrakinta, lipant į vežimėlį ją galima pasukti į vidų ar į išorę arba visai išimti.

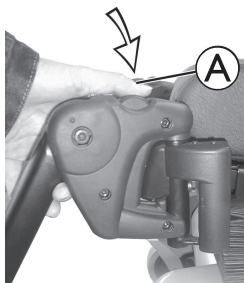

1. Paspauskite atrakinimo mygtuką **A** ir pasukite kojų atramą į išorę.
2. Ištraukite kojų atramą aukštyn.

3.18.2 Kampo nustatymas



PERSPĖJIMAS!

Sužalojimo pavojus dėl netinkamo pėdų ir kojų atramų nustatymo

- Prieš kiekvieną kelionę ir jos metu būtina užtikrinti, kad pamina neliestų nei ratukų, nei žemės.



1.


A

Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę **A** ją bent vienu apsisukimu pasukdami prieš laikrodžio rodyklę.




2.

Spustelėdami rankenėlę atlaisvinkite fiksavimo mechanizmą.

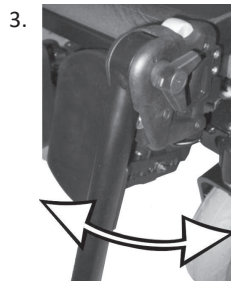

3.

Nustatykite norimą kampą.

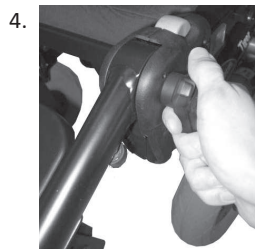

4.


Sukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ją priveržkite.

3.18.3 Kojų atramos galinio stabdiklio nustatymas




- 10 mm veržliaraktis

1.

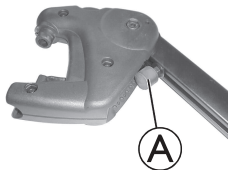


Galutinė kojų atramos padėtis nustatoma naudojant guminį stabdiklį **A**.

2.

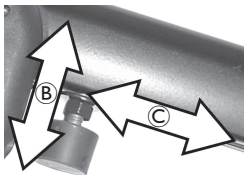

Guminį stabdiklį galima išsukti arba išsukti **B** ar pastumti į viršų arba į apačią **C**.

3.

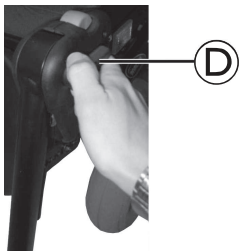


Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę **D** ją bent vienu apsisukimu pasukdami prieš laikrodžio rodyklę.

4.




Spustelėdami rankenėlę atlaisvinkite fiksavimo mechanizmą.

5.

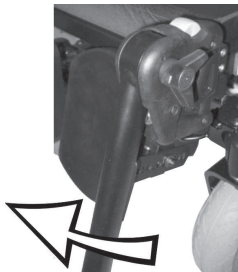


Pakreipkite kojų atramą į viršų, kad galėtumėte pasiekti guminį stabdiklį.

6.

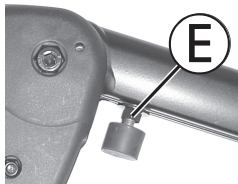


Veržliaraktiu atlaisvinkite antveržlę **A**.

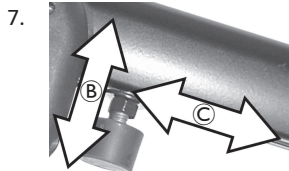

Guminį stabdiklį perkeltite į norimą padėtį.

8. Vėl priveržkite antveržlę.

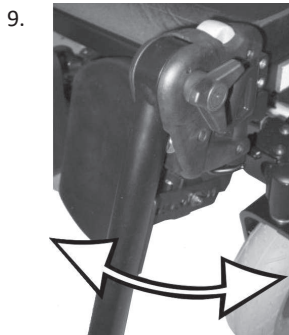

Perkeltite kojų atramą į norimą padėtį.

10. Vėl priveržkite fiksavimo rankenėlę.

3.18.4 Kojų atramos ilgio reguliavimas




PERSPĖJIMAS!

Sužalojimo pavojus dėl netinkamo pėdų ir kojų atramų nustatymo

- Prieš kiekvieną kelionę ir jos metu būtina užtikrinti, kad pamina neliestų nei ratukų, nei žemės.



- 5 mm šešiabriaunis raktas

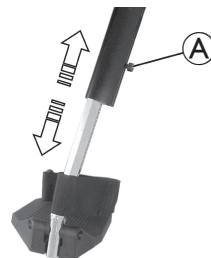


1. Atlaisvinkite varžtą ①.
2. Nustatykite reikiamą ilgį.
3. Vėl priveržkite varžtą.

3.18.5 Blauzdos pagalvėlių reguliavimas

Aukščio reguliavimas



- 4 mm šešiabriaunis raktas

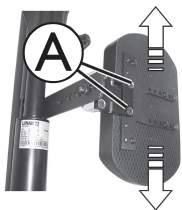


1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite reikiamą padėtį.
3. Vėl priveržkite varžtus.

Gylio reguliavimas

Blauzdų pagalvėlės gylį galima reguliuoti atramine plokštele. Atraminės plokštelės angų deriniais galima nustatyti 5 skirtingus gylius.



- 10 mm veržliaraktis

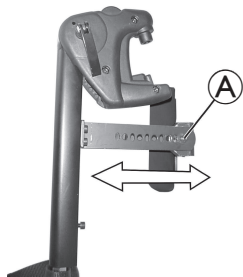

1. Nuimkite **A** varžto veržlę.
2. Nustatykite reikiamą gylį. Atkreipkite dėmesį, kad apvalios angos skirtos blauzdos pagalvėlės fiksavimo varžtui, o pailgos angos – įvorei be sriegio.
3. Veržlę įkiškite atgal ir priveržkite.

Blauzdos pagalvėlės atrakinimas ir pasukimas atgal

1.



Nuspauskite blauzdų pagalvėlę tiesiai žemyn.

2.



Atrakinkite kojų atramą ir pasukite į išorę. Blauzdų pagalvėlė pati pasisuka atgal.

3.




Perkelkite koją virš kulno dirželio ir padėkite ant žemės.

3.18.6 Kojų atramos reguliavimas

Reguliuojamo kampo kojų atramos reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas

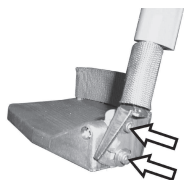


1. Atlaisvinkite abu kojų atramos varžtus.
2. Nustatykite reikiamą kampą.
3. Vėl priveržkite varžtus.

Reguliuojamo kampo ir gylio kojų atramos reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas

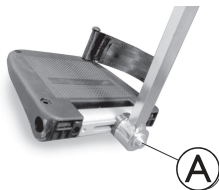


1. Atlaisvinkite kojų atramos varžtus **A**.
2. Pareguliuokite kojų atramos kampą ar gylį.
3. Vėl priveržkite varžtą.

3.19 ADM kojų atramos

3.19.1 Kojų atramos pasukimas į išorę ir (arba) nuėmimas

Nedidelis atrakinimo mygtukas yra kojų atramos viršutinėje dalyje. Kai kojų atrama atrakinta, lipant į vežimėlį ją galima pasukti į vidų ar į išorę arba visai išimti.

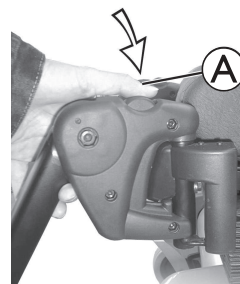

1. Paspauskite atrakinimo mygtuką **A** ir pasukite kojų atramą į išorę.
2. Ištraukite kojų atramą aukštyn.

3.19.2 Kampo nustatymas



PERSPĖJIMAS!

Sužalojimo pavojus dėl netinkamo pėdų ir kojų atramų nustatymo

- Prieš kiekvieną kelionę ir jos metu būtina užtikrinti, kad pamina neliestų nei ratukų, nei žemės.



PERSPĒJIMAS!
Sutraiškymo pavojus


– Nelaikykite rankų kojų atramos sukimosi erdvėje.

Pakēlimas



1. Traukite kojos atramą į priekį, kol nustatysite norimą kampą.

Nuleidimas

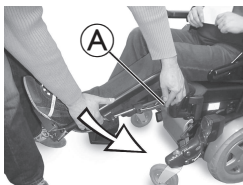

1. Laikykite kojų atramą pėdų plokštės srityje, traukite šoninę reguliavimo svirtį **A** ir lėtai nuleiskite kojų atramą.

3.19.3 Kojų atramos ilgio reguliavimas




PERSPĒJIMAS!
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo pėdų ir kojų atramų nustatymo

– Prieš kiekvieną kelionę ir jos metu būtina užtikrinti, kad pamina neliestų nei ratukų, nei žemės.



- 5 mm šešiabriaunis raktas

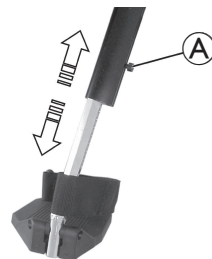


1. Atlaisvinkite varžtą **A**.
2. Nustatykite reikiamą ilgį.
3. Vėl priveržkite varžtą.

3.19.4 Blauzdos pagalvėlių reguliavimas

Aukščio reguliavimas



- 4 mm šešiabriaunis raktas

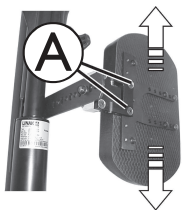


1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite reikiamą padėtį.
3. Vėl priveržkite varžtus.

Gylio reguliavimas

Blauzdų pagalvėlės gylį galima reguliuoti atramine plokšte. Atraminės plokštelės angų deriniais galima nustatyti 5 skirtingus gylius.



- 10 mm veržliaraktis

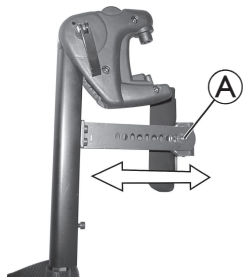

1. Nuimkite **A** varžto veržlę.
2. Nustatykite reikiamą gylį. Atkreipkite dėmesį, kad apvalios angos skirtos blauzdos pagalvėlės fiksavimo varžtui, o pailgos angos – įvorei be sriegio.
3. Veržlę įkiškite atgal ir priveržkite.

Blauzdos pagalvėlės atrakinimas ir pasukimas atgal



1.

Nuspauskite blauzdų pagalvėlę tiesiai žemyn.



2.



Atrakinkite kojų atramą ir pasukite į išorę. Blauzdų pagalvėlė pati pasisuka atgal.



3.


Perkelkite koją virš kulno dirželio ir padėkite ant žemės.

3.19.5 Kojų atramos reguliavimas

Reguliuojamo kampo kojų atramos reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas

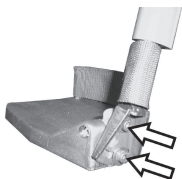


1. Atlaisvinkite abu kojų atramos varžtus.
2. Nustatykite reikiamą kampą.
3. Vėl priveržkite varžtus.

Reguliuojamo kampo ir gylio kojų atramos reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas

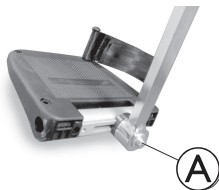


1. Atlaisvinkite kojų atramos varžtus **A**.
2. Pareguliuokite kojų atramos kampą ar gylį.
3. Vėl priveržkite varžtą.

3.20 Elektrinės pakeliamos kojų atramos (ADE kojų atramos)

3.20.1 Kojų atramos pasukimas į išorę ir (arba) nuėmimas

Nedidelis atrakinimo mygtukas yra kojų atramos viršutinėje dalyje. Kai kojų atrama atrakinata, lipant į vėžimėlį ją galima pasukti į vidų arba į išorę arba visai išimti.

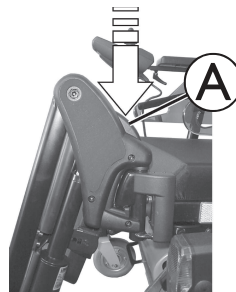

1. Paspauskite atrakinimo mygtuką **A** ir pasukite kojų atramą į išorę.
2. Ištraukite kojų atramą aukštyn.

3.20.2 Kampo nustatymas



PERSPĖJIMAS!
Sutraiškymo pavojus

– Nelaikykite rankų kojų atramos sukimosi erdvėje.

**PERSPĖJIMAS!**

Sužalojimo pavojus dėl netinkamo pėdų ir kojų atramų nustatymo

- Prieš kiekvieną kelionę ir jos metu būtina užtikrinti, kad pamina neliestų nei ratukų, nei žemės.

Elektra reguliuojamo aukščio kojų atramos valdomos nuotoliniu valdikliu. Daugiau informacijos žr. atskirame nuotolinio valdymo pulto naudotojo vadove.


3.20.3 Kojų atramos ilgio reguliavimas**PERSPĖJIMAS!**

Sužalojimo pavojus dėl netinkamo pėdų ir kojų atramų nustatymo

- Prieš kiekvieną kelionę ir jos metu būtina užtikrinti, kad pamina neliestų nei ratukų, nei žemės.




- 10 mm veržliaraktis

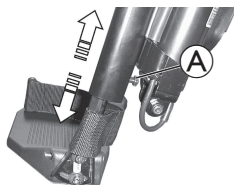

1. Atlaisvinkite varžtą **A**.
2. Nustatykite reikiamą ilgį.
3. Vėl priveržkite varžtą.

3.20.4 Blauzdos pagalvėlių reguliavimas**Aukščio reguliavimas**

- 4 mm šešiabriaunis raktas

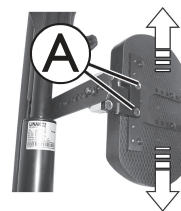


1. Atlaisvinkite varžtus **A**.
2. Nustatykite reikiamą padėtį.
3. Vėl priveržkite varžtus.

Gylio reguliavimas

Blauzdų pagalvėlės gylį galima reguliuoti atramine plokšte. Atraminės plokštelės angų deriniais galima nustatyti 5 skirtingus gylius.



- 10 mm veržliaraktis

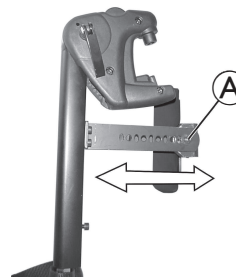

1. Nuimkite **A** varžto veržlę.
2. Nustatykite reikiamą gylį. Atkreipkite dėmesį, kad apvalios angos skirtos blauzdos pagalvėlės fiksavimo varžtui, o pailgos angos – įvorei be sriegio.
3. Veržlę įkiškite atgal ir priveržkite.

Blauzdos pagalvėlės atrakinimas ir pasukimas atgal

1.



Nuspauskite blauzdų pagalvėlę tiesiai žemyn.

2.



Atrakinkite kojų atramą ir pasukite į išorę.
Blauzdų pagalvėlė pati pasisuka atgal.

3.




Perkelkite koją virš kulno dirželio ir padėkite ant žemės.

3.20.5 Kojų atramos reguliavimas

Reguliuojamo kampo kojų atramos reguliavimas



- 5 mm šešiabriaunis raktas

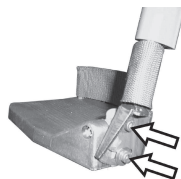


1. Atlaisvinkite abu kojų atramos varžtus.
2. Nustatykite reikiamą kampą.
3. Vėl priveržkite varžtus.

Reguliuojamo kampo ir gylio kojų atramos reguliavimas




- 5 mm šešiabriaunis raktas

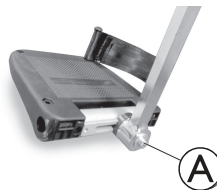

1. Atlaisvinkite kojų atramos varžtus [Ⓐ].
2. Pereguliuokite kojų atramos kampą ar gylį.
3. Vėl priveržkite varžtą.


3.21 Standartinės 80° kojų atramos reguliavimas


Pasukimas ir (arba) nuėmimas

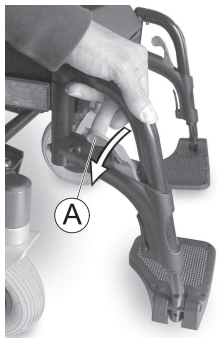

1. Paspauskite atleidimo svirtį **A** į vidų arba į išorę.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Jei komponentą norite išimti, patraukite jį į viršų.

Ilgio reguliavimas

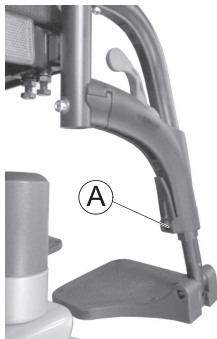


1. Atlaisvinkite varžtą **A**.
 Neištraukite varžto **A**.
2. Nustatykite komponentą į reikiamą padėtį.
3. Priveržkite varžtą.

4 Naudojimas


4.1 Rankos atramos nuėmimas, kad būtų galima atsisėsti iš šono

Pakeliama rankos atrama

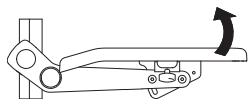

1. Pakelkite rankos atramą, kad būtų galima atsisėsti iš šono.

Pagal atlošą prisitaikanti rankos atrama

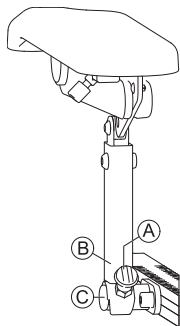


1. Patraukite rankenėlę **A**, kad atfiksotumėte rankos atramos laikiklį **B** nuo atraminės plokštelės **C**.
2. Pakelkite rankos atramą, kad būtų galima atsisėsti iš šono.



Daugiau informacijos, kaip atsisėsti iš šono, žr. elektrinio vežimėlio naudotojo vadove.

4.2 Klubų atramos nuėmimas / uždėjimas naudojant greito atjungimo jungtį

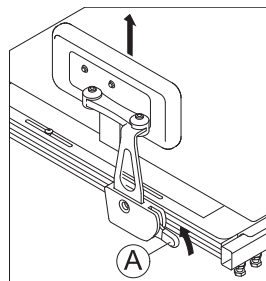

Klubų atramos nuėmimas

1. Svirtį **A** traukite aukštyn.
2. Išimkite klubų atramą iš laikiklio.


Klubų atramos įdėjimas

1. Įdėkite klubų atramą į laikiklį.
2. Svirtį **A** stumkite žemyn.
Įsitikinkite, kad klubų atrama spragtelėdama užsifiksavo.


4.3 Atlošo pagalvėlės keitimas

tik „Matrx Elite“ atlošams

Atlošo pagalvėlės nuėmimas

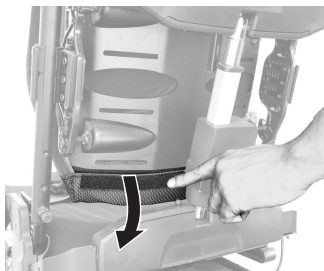


1. Atlaisvinkite prikabinamas juosteles ties apatiniu atlošu.

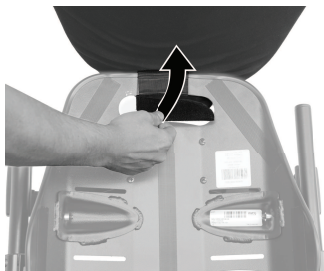

2. Pakelkite pagalvėlę aukštyn.
3. Atlaisvinkite prikabinamas juosteles ties atlošo rankena.

Atlošo pagalvėlės uždėjimas

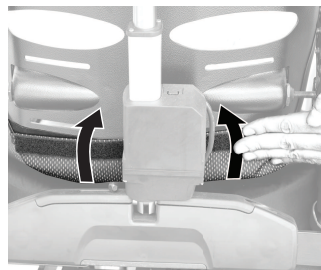

1. Pritvirtinkite prikabinamas juosteles ties apatiniu atlošu.



2. Atlenkite atlošą aukštyn.



3. Pritvirtinkite prikabinamas juosteles ties atlošo rankena.

4.4 Centrinės elektrinės kojų atramos LNX su teleskopine pamina naudojimas

Kampo reguliavimas



ĮSPĖJIMAS!

Sugnybimo vieta

Sugnybimo pavojus reguliuojant kojų atramos kampą.
– Reguluojant kojų atramos kampą, kojų atramos viršus turi būti atviras.

Paminos nuleidimas



PRANEŠIMAS

Paminą nuleidžiant iki iš anksto nustatyto taško galima pažeisti grindis.
– Paminai palietus grindis jos nebenuleidinėkite.

Teleskopinę paminą galite nuleisti iki iš anksto nustatyto taško. Atsižvelgiant į vežimėlio konfigūraciją, šis taškas gali tiksliai neatitikti aukščio nuo sėdynės iki grindų, bet būti keliais milimetrais aukščiau ar žemiau grindų.

Važiavimo blokavimas



PRANEŠIMAS

Važiuojant vežimėliu, kai pamina nuleista, galima sugadinti kojų atramą.
– Pajudinus paminą važiavimas iš karto blokuojamas.

1. Jei norite išjungti važiavimo blokavimą, įtraukite paminą į viršutinę padėtį.

5 Techninės priežiūros grafikas

Siekdami užtikrinti optimalų elektrinės padėties nustatymo sistemos saugumą ir patikimumą, laikykitės toliau pateiktame techninės priežiūros grafike / lentelėje esančių nurodymų. Be techninės priežiūros grafiko, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytas techninės priežiūros užduotis ir saugos įspėjimus, kuriuos turėtumėte įtraukti į savo kasdienę rutiną.



ĮSPĖJIMAS!

Apie bet kokius staigius ar laipsniškus elektrinės padėties nustatymo sistemos veikimo ir (arba) eksploatacinių savybių pablogėjimus (t. y. padidėjusį pavaros variklio ir (arba) pavarų dėžės triukšmą, barškėjimą, nesklandumus ir t. t.) būtina nedelsiant pranešti pardavėjui.

– Rekomenduojama, kad vežimėlį nuodugniai apžiūrėtų kvalifikuotas technikas, kuris patikrintų, ar nėra neįprasto nusidėvėjimo požymių ar fizinio pažeidimo, dėl kurių reikėtų atlikti techninę priežiūrą ir (arba) remontą.



Siekiant užtikrinti, kad elektrinė padėties nustatymo sistema veiktų tinkamai ir saugiai, „Invacare“ rekomenduoja kas šešis (6) mėnesius kreiptis į pardavėją, kad elektrinę padėties nustatymo sistemą visapusiškai patikrintų kvalifikuotas technikas.



Būtinai perskaitykite visą techninės priežiūros ir saugos informaciją, skirtą jūsų vežimėlio elektriniam pagrindui, ir laikykitės nurodymų. Žr. vežimėlio naudotojo vadovą (pateikiamas atskirai).

Kasdienė priežiūra:

- Patikrinkite, ar tinkamai veikia visi jungikliai (mygtukai / perjungiami valdikliai), kuriais valdoma elektrinė padėties nustatymo sistema.
- Pakeiskite akumulatorius (svarbios informacijos apie akumuliatorių įkrovimą ir tinkamą akumuliatorių priežiūrą ieškokite vežimėlio naudotojo vadove).

Mėnesinės patikros kontrolinis sąrašas:

- Elektros / laidų pynės
 - Patikrinkite, ar laidai nėra prispausti ar įtempti (visame sėdynės sistemos intervale)
 - Patikrinkite, ar laidai nėra nusidėvėję
 - Įsitinkite, kad jungtys tinkamai pritvirtintos
- Apmušalas:
 - Patikrinkite visas apmušalo dalis, ar jos neapgadintos ir ar nesusidėvėjusios
 - Patikrinkite visus užvalkalus, ypač arti metalinių dalių, ar jie neapgadinti ir ar nesusidėvėję
- Detalės ir komponentai:
 - Patikrinkite montavimo detales (nuo sėdynės sistemos iki pagrindo)
- Ribojimo jungikliai:
 - Patikrinkite ribojimo jungiklio nuostatas
 - Įsitinkite, kad DLO veikia tinkamai

6 Po naudojimo

6.1 Atnaujinimas

Gaminys gali būti naudojamas pakartotinai. Atnaujinkite gaminį kitam naudotojui atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Tikrinimas
- Valymas ir dezinfekavimas
- Pritaikymas kitam naudotojui

Išsamios informacijos žr. ir šio gaminio naudojimo vadovą.

Pasirūpinkite, kad perduodant gaminį kitam naudotojui, naudotojo vadovas taip pat būtų perduodamas.

Jei aptinkama kokių nors pažeidimų ar gedimų, gaminio pakartotinai nenaudokite.

6.2 Išmetimas

Tausokite aplinką ir pasibaigus šio gaminio eksploatacijai atiduokite jį perdirbti perdirbimo įmonei.

Išardykite gaminį ir jo dalis, kad galėtumėte atskirti skirtingas medžiagas ir jas būtų galima atskirai perdirbti.

Panaudoti gaminiai ir pakuotės turi būti išmetami ir perdirbami laikantis konkrečioje šalyje galiojančių atliekų apdorojimo teisės aktų ir taisyklių. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietos atliekų tvarkymo įmonę.

7 Trikčių diagnostika

7.1 Veikimo trikčių diagnostika



Papildomos informacijos apie trikčių diagnostiką, susijusias su elektriniu vežimėliu ir elektronika, ieškokite elektrinio vežimėlio ir nuotolinio valdymo pulto naudotojo vadovų (pateikiami atskirai) trikčių diagnostikos skyriuose.

Požymis	Galima priežastis	Sprendimai
Elektrinio vežimėlio maitinimas įjungtas, bet sistema nevažiuoja	Sistema pakreipta ir (arba) pakilusi aukščiau nei važiavimo blokavimo (DLO) kampas	Sėdynės sistemą grąžinkite į neutralią (pradinę) padėtį.
	Pavaros varikliai neįjungti	Įjunkite pavaros variklius.
	Centrinė elektrinė kojų atrama LNX su teleskopine pamina yra nuleista	Įtraukite pamina į viršutinę padėtį.
Sėdynės sistema neveikia	Išsekę akumulatoriai	Patikrinkite / įkraukite / pakeiskite akumulatorius. Kreipkitės į tiekėją.
	Atsilaisvinusi / sugedusi elektros jungtis	Patikrinkite kabelių jungtis / patikrinkite kabelių spaustukus (ar ne per daug priveržti / ne per laisvi). Kreipkitės į tiekėją.
	Išmuštas saugiklis	Patikrinkite / pakeiskite saugiklį. Kreipkitės į tiekėją.
	Trukdžiai / kliūtys, prispausti laidai	Patikrinkite, ar nėra trukdžių arba kliūčių / patikrinkite, ar neprispausti laidai. Kreipkitės į tiekėją.

Požymis	Galima priežastis	Sprendimai
Nutrūkstamas sėdynės sistemos veikimas (ne kasdien, pakreipus, atlošus...)	Atsilaisvinusi / sugedusi elektros jungtis	Patikrinkite kabelių jungtis / patikrinkite kabelių spaustukus (ar ne per daug priveržti / ne per laisvi).
	Sugedusi maitinimo laidų pynė	Patikrinkite / pakeiskite maitinimo laidų pynę. Kreipkitės į tiekėją.
	Sugedęs ribojimo jungiklis	Patikrinkite / pakeiskite ribojimo jungiklį. Kreipkitės į tiekėją.
	Beveik išseiktas akumuliatorius (svyruojanti įkrova)	Patikrinkite / pakeiskite akumuliatorių. Kreipkitės į tiekėją.
Važiavimo blokavimas (DLO) neveikia	Atsilaisvinusi / sugedusi elektros jungtis	Patikrinkite jungtis. Kreipkitės į tiekėją.
	DLO ribojimo jungiklis / mechaninis jungiklis nenustatytas tinkamai	Kreipkitės į tiekėją.
	Sugedęs DLO ribojimo jungiklis	Kreipkitės į tiekėją.
Ribojimo jungiklis veikia netinkamai	Atsilaisvinusi / sugedusi elektros jungtis	Patikrinkite jungtis. Kreipkitės į tiekėją.
	Sugedęs ribojimo jungiklis	Patikrinkite / pakeiskite ribojimo jungiklį. Kreipkitės į tiekėją.
	Ribojimo jungiklis nenustatytas tinkamai	Kreipkitės į tiekėją.

Požymis	Galima priežastis	Sprendimai
Sistema veikia tik viena kryptimi	Viršyta riba (DLO, RDS, atramos kampo, sėdynės pakėlimo blokavimo)	Grąžinkite į ribų intervalą.
	Sugedęs ribojimo jungiklis	Patikrinkite / pakeiskite ribojimo jungiklį. Kreipkitės į tiekėją.
	Ribojimo jungiklis nenustatytas tinkamai	Kreipkitės į tiekėją.
	Žema įtampa	Kreipkitės į tiekėją.
	Akumulatorius neįkrautas	Įkraukite akumulatorius.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia	Nuotolinio valdymo pultas neprijungtas	Patikrinkite kabelio jungtį.
	Nuotolinio valdymo pultas neįjungtas	Naudodami klaviatūrą, įjunkite nuotolinio valdymo pulso maitinimą. Kreipkitės į tiekėją.
	Išmuštas pagrindinis saugiklis	Patikrinkite / pakeiskite saugiklį.
Pavara nenustoja veikti	Sugnybta jungiklio laidų pynė	Patikrinkite / sureguliuokite laidų pynės padėtį, kad ji nebūtų sugnybta. Kreipkitės į tiekėją.

8 Techniniai duomenys

8.1 Techninės charakteristikos

Čia pateikta techninė informacija taikoma esant standartinei konfigūracijai arba duomenys turi būti laikomi didžiausiomis pasiekiamomis vertėmis. Jei pridėdama priedų, vertės gali skirtis. Kiek būtent gali skirtis vertės, nurodyta atitinkamiems priedams skirtuose skyriuose.



Turėkite omenyje, kad kai kuriais atvejais išmatuotos vertės gali skirtis iki ± 10 mm.

Daugiau elektrinio vežimėlio techninių duomenų rasite vežimėlio naudotojo vadove.

„Modulite“ sėdynės sistemos matmenys ir svoriai

Matmenys pagal ISO 7176-5	Elektrinis neįgaliojo vežimėlis			
	TDX SP2 („Standard“)	AVIVA RX („Standard“)	AVIVA RX (HD)	AVIVA FX
Sėdynės plotis [mm] (rankų atramų reguliavimo intervalas pateiktas skliausteliuose)	<ul style="list-style-type: none"> • 380 (380–430) • 430 (430–480) • 480 (480–530) • 530 (530–580) 	<ul style="list-style-type: none"> • 330 (330–380) • 380 (380–430) • 430 (430–480) • 480 (480–530) • 530 (530–580) 	<ul style="list-style-type: none"> • 620 (620–670) • 650 (650–700) 	<ul style="list-style-type: none"> • 380 (380–430) • 430 (430–480) • 480 (480–530) • 530 (530–580)
Sėdynės gylis [mm]	<ul style="list-style-type: none"> • 410–560 	<ul style="list-style-type: none"> • 410–510 	<ul style="list-style-type: none"> • 510–580 	<ul style="list-style-type: none"> • 410–510
Sėdynės pagalvėlės storis [mm]	<ul style="list-style-type: none"> • 50, 75, 90, 100 		<ul style="list-style-type: none"> • 90 	<ul style="list-style-type: none"> • 50, 75, 90, 100
Atlošo kampas	<ul style="list-style-type: none"> • Nuo +90° iki +120° 			
Atlošo aukštis ¹ [mm]				
Diržinis atlošas	<ul style="list-style-type: none"> • 480 / 540 		<ul style="list-style-type: none"> • 540 	<ul style="list-style-type: none"> • 480 / 540
Teleskopinis sėdynės rėmas	<ul style="list-style-type: none"> • 560–610 		<ul style="list-style-type: none"> • — 	<ul style="list-style-type: none"> • 560–610
„Matrx“ atramos	<ul style="list-style-type: none"> • — 	<ul style="list-style-type: none"> • 400 / 500 	<ul style="list-style-type: none"> • — 	<ul style="list-style-type: none"> • 400 / 500

Matmenys pagal ISO 7176-5	Elektrinis neįgaliojo vežimėlis			
	TDX SP2 („Standard“)	AVIVA RX („Standard“)	AVIVA RX (HD)	AVIVA FX
Rankų atramos teleskopinio sėdynės rėmo aukštis [mm]				
T formos rankų atrama	• 245–310 / 295–360			
Pakeliama rankos atrama	• 230–360	• —	• 230–360	
Pagal atlošą prisitaikanti rankos atrama	• 230–300 / 300–360	• —	• 230–300 / 300–360	
Rankų atramos vienos dalies sėdynės plokštės aukštis [mm]				
T formos rankų atrama	• 275–340 / 325–390	• —	• —	
Rankų atramos gylis ² [mm]	• maks. 440	• 325–397		
Maks. Rankų atramos svoris [kg]	• 1,7			
Maks. Galvos atramos svoris [kg]	• 1,4			
Sėdynės kampas, elektrinis reguliavimas (tik pakreipimo modulis 50° [T] / pakreipimas su kėlikliu 45° [T / L])				
Standartinis montavimas	• Nuo 0° iki 50 (T) / nuo 0° iki 45° (T / L)	• —	• —	
5° fiksuotas priekinis laikiklis	• Nuo –5° iki 45° (T) / nuo –5° iki 40° (T / L)	• —	• —	
10° fiksuotas priekinis laikiklis	• Nuo –10° iki 40° (T) / nuo –10° iki 35° (T / L)	• —	• —	
5° fiksuotas užpakalinis laikiklis	• Nuo 5° iki 55° (T) / nuo 5° iki 50° (T / L)	• —	• —	
Sėdynės kampas, elektrinis reguliavimas (30°)				
Standartinis montavimas	• Nuo 0° iki +30°			
5° fiksuotas priekinis laikiklis	• Nuo –5° iki +25°	• —		
Sėdynės kampas, elektrinis reguliavimas (20°)				

Matmenys pagal ISO 7176-5	Elektrinis neįgaliojo vežimėlis			
	TDX SP2 („Standard“)	AVIVA RX („Standard“)	AVIVA RX (HD)	AVIVA FX
Standartinis montavimas	• Nuo 0° iki +20°			• —
Sėdynės kampas, rankinis reguliavimas	• Nuo 0° iki +8°	• Nuo 0° iki +15°		• —

Pėdų ir kojų atramos					
„Vari F“	Ilgis [mm]	• 290–460	Standartinis 80°	Ilgis [mm]	• 290–460
	Kampas	• Nuo +70° iki 0°		Kampas	• Nuo +80° iki 0°
	Maks. Svoris [kg]	• 1,6		Maks. Svoris [kg]	• 3,1
„Vari A“	Ilgis [mm]	• 290–460	Įmontuotas centre (rankinis)	Ilgis [mm]	• 280–385
	Kampas	• Nuo +70° iki 0°		Kampas	• Nuo +90° iki 0°
	Maks. Svoris [kg]	• 2,7		Maks. Svoris [kg]	• 5,4
ADM (rankinis)	Ilgis [mm]	• 290–460	Centre sumontuota elektrinė LNX ³	Ilgis [mm]	• 340–410
	Kampas	• Nuo +80° iki 0°		Kampas	• Nuo +97° iki +7°
	Maks. Svoris [kg]	• 3,1			• Nuo +90° iki 0°
ADE (elektrinis)	Ilgis [mm]	• 290–460			• Nuo +83° iki -7°
	Kampas	• Nuo +80° iki 0°			
	Maks. Svoris [kg]	• 4,2			

1 Išmatuota be sėdynės pagalvėlės.

2 Atstumas tarp atlošo atskaitos plokštumos ir priekinės rankos atramos dalies

3 Kojų atrama nenuimama, todėl komponento svorio išmatuoti negalima



EU Export:

Invacare Poirier SAS

Route de St Roch

F-37230 Fondettes


Phone: (33) (0) 2 47 62 69 80

serviceclient_export@invacare.com

www.invacare.eu.com

UKRP Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1660627-G 2024-07-18

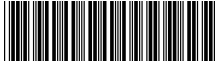

„Making Life's Experiences Possible®“



Yes, you can.®