

Invacare® LiNX

Ovladač Chin Control

cs **Dálkový ovladač**
Uživatelská příručka

Tento návod k použití MUSÍ být poskytnut každému uživateli tohoto výrobku.
PŘED použitím výrobku si návod prostudujte a poté ho uschovejte pro
budoucí použití.



Yes, you can.®

Obsah

1	Obecné	3
1.1	O této příručce	3
1.2	Záruka	3
1.3	Životnost	3
1.4	Omezení odpovědnosti	3
1.5	Symbole použité v tomto návodu	4
1.6	Všeobecné poznámky týkající se bezpečnosti	4
1.7	Hlavní součásti	6
1.8	Údržba	6
2	Nastavení	7
2.1	Všeobecné informace týkající se nastavení	7
2.2	Elektroinstalace	7
2.3	Připojení dálkového ovladače	8
2.4	Úprava manuálního ovladače pro ovládání bradou Chin Control	9
2.4.1	Nastavení joysticku pro ovládání končetinami	9
2.4.2	Nastavení oválného spínače	10
2.4.3	Nastavení výkyvného mechanismu	10
2.5	Úprava elektrického ovladače pro ovládání bradou Chin Control	10
2.5.1	Nastavení joysticku pro ovládání končetinami	11
2.5.2	Nastavení joysticků a přepínačů na spojení	11
2.5.3	Nastavení výšky joysticku spojení	12

3	Použití	13
3.1	Použití ručně odklopného ovladače pro ovládání bradou Chin Control	13
3.2	Používání elektricky odklopného ovladače pro ovládání bradou Chin Control	14

© 2024 Invacare Corporation

Všechna práva vyhrazena. Přetisk, vytváření kopií nebo úpravy, ať celého dokumentu, nebo jen jeho částí, jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Invacare zakázány. Ochranné známky jsou označeny symboly [™] a [®]. Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky vlastní nebo používá na základě získané licence společnost Invacare či její přidružené společnosti.

1 Obecné

1.1 O této příručce

Tento dokument doplňuje uživatelskou dokumentaci k výrobku.

Tato součástka není opatřena označením CE a UKCA, avšak je součástí výrobku, který splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích 2017/745, třídy I, a části II UK MDR 2002 (v platném znění) týkající se zdravotních prostředků. Z toho důvodu se na ni vztahuje označení CE a UKCA výrobku. Více informací naleznete v uživatelské dokumentaci k výrobku.

Používejte tuto součástku pouze tehdy, když jste si přečetli tuto příručku a porozuměli jí. Vyžádejte si další rady od zdravotníka, který je obeznámen s vaším zdravotním stavem a vyjasněte si veškeré otázky ohledně správného používání a nezbytného nastavení se zdravotníkem.

Pamatujte, že některé části tohoto dokumentu se nemusí vztahovat na vaši součástku, neboť tato příručka platí pro všechny dostupné modely vyráběné v době jejího tisku. Není-li uvedeno jinak, jednotlivé části tohoto dokumentu se týkají všech modelů součástky.

Společnost Invacare si vyhrazuje právo změnit specifikace součástky bez dalšího upozornění.

Než začnete tento dokument číst, zkontrolujte, že se jedná o jeho nejnovější verzi. Nejnovější verzi naleznete ve formátu PDF na webových stránkách společnosti Invacare. Předchozí verze výrobku nemusí být popsány v aktuální revizi této příručky. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na společnost Invacare.

Pokud je pro vás velikost písma v tištěné verzi dokumentu hůře čitelná, můžete si ji z webu stáhnout ve formátu PDF. Stažený soubor si můžete na obrazovce přiblížit tak, aby byl pro vás lépe čitelný.

Další informace o součástce, např. bezpečnostní údaje o součástce či informace o stažení součástek, vám poskytne zástupce společnosti Invacare. Adresy jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. V případě vážného incidentu souvisejícího se součástkou informujte výrobce a příslušný orgán ve vaší zemi.

1.2 Záruka

Podmínky záruky jsou součástí obecných podmínek platných v jednotlivých zemích, ve kterých se tento výrobek prodává.

1.3 Životnost

Životnost tohoto výrobku odhadujeme na pět let za předpokladu, že je používán v přísném souladu s účelem použití, jak je uvedeno v tomto dokumentu a za předpokladu splnění všech požadavků na údržbu a servis. Odhadovaná životnost může být delší při šetrném používání a pečlivé údržbě výrobku a za předpokladu, že technický a vědecký pokrok neukáže nová technická omezení. Očekávaná životnost se může výrazně zkrátit při nadměrném nebo nesprávném používání. Uvedená odhadovaná životnost tohoto výrobku nepředstavuje další doplňkovou záruku.

1.4 Omezení odpovědnosti

Společnost Invacare nenese žádnou zodpovědnost za poškození vzniklé v důsledku následujících situací:

- nedodržení pokynů v uživatelské příručce,
- nesprávné použití,
- přirozené opotřebení,
- nesprávná montáž nebo sestavení provedené kupujícím nebo třetí stranou,
- Technické modifikace a/nebo neautorizované modifikace
- Použití nevhodných náhradních dílů

1.5 Symboly použité v tomto návodu

V tomto návodu jsou použity symboly a signální slova k označení nebezpečných situací nebo postupů, které by mohly zapříčinit úraz osob nebo škodu na majetku. Definice těchto signálních slov jsou uvedeny níže.



VAROVÁNÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku by mohlo dojít k vážnému poranění nebo usmrcení.



UPOZORNĚNÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku může dojít k drobnému či méně závažnému poranění.



OZNÁMENÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku by mohlo dojít k poškození majetku.



Tipy a doporučení

Poskytuje užitečné rady a doporučení pro účelné a bezproblémové používání výrobku.



Nástroje

Označuje potřebné nástroje, součásti a položky, které jsou potřebné při provádění určité pracovní činnosti.

Další symboly

(Neplatí pro všechny příručky)



Odpovědná osoba v UK

Označení, pokud výrobek není vyráběn ve Velké Británii.



Triman

Uvádí pravidla recyklace a třídění (platí pouze pro Francii).

1.6 Všeobecné poznámky týkající se bezpečnosti



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění osob nebo poškození elektrického invalidního vozíku

Montáž, údržbu a provoz tohoto zařízení provádějte až poté, co si pečlivě prostudujete a pochopíte veškeré pokyny a příručky k tomuto výrobku a dalším výrobkům, které používáte nebo jsou nainstalované na tomto výrobku.

— Dodržujte pokyny uvedené v uživatelských příručkách.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí vážného úrazu či poškození elektrického invalidního vozíku nebo okolí

Nesprávná nastavení mohou vést k nekontrolovatelnému nebo nestabilnímu chování elektrického invalidního vozíku. Nekontrolované nebo nestabilní chování elektrického invalidního vozíku může vést ke vzniku nebezpečné situace, jako je havárie.

— Nastavení výkonu smí provádět pouze kvalifikovaní technici nebo osoby, které jsou plně obeznámeny s parametry programování, postupem nastavení, konfigurací elektrického invalidního vozíku a schopnostmi pacienta.
— Nastavení výkonu musí být prováděno pouze v suchých podmínkách.

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí poranění osob nebo poškození elektrického invalidního vozíku**

Nebezpečí neočekávaného pohybu elektrického invalidního vozíku nebo sedacího systému, když se kolem joysticku zamotají volné osobní věci (např. šperky, šály).

- Ujistěte se, že jsou všechny volné předměty mimo joystick, když je elektrický invalidní vozík zapnutý.
- Okamžitě vypněte elektrický vozík, abyste zastavili jakýkoli pohyb.

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí poranění osob nebo poškození v důsledku zkratu**

Kolíky konektorů kabelů připojených k napájecímu modulu mohou zůstat pod napětím i po vypnutí systému.

- Kabely, jejichž kolíky jsou pod napětím, by měly být připojeny, upoutány nebo zakryty (nevodivými materiály) tak, aby nemohlo dojít k jejich kontaktu s osobami nebo s materiály, které by mohly způsobit elektrický zkrat.
- Pokud je třeba odpojit kabely s kolíky pod proudem, například při odpojování sběrnice kabelu od dálkového ovladače, z bezpečnostních důvodů nezapomeňte příslušné kolíky zakrýt nevodivým materiálem.

**UPOZORNĚNÍ!****Nebezpečí poranění osob v důsledku neočekávaného pohybu**

Jelikož je elektrický invalidní vozík vybaven gyroskopickým modulem, doporučujeme používat jízdní funkci s deaktivovaným gyroskopem. Když se elektrický invalidní vozík používá v jedoucím vozidle (např. na lodi, v autobuse nebo ve vlaku), může být narušena funkce gyroskopu a následně může vlivem jízdních podmínek dojít k nezamýšlenému pohybu.

- Při jízdě na palubě lodi nebo v jedoucím vozidle používejte jízdní funkci s deaktivovaným gyroskopem.
- Pokud elektrický invalidní vozík není vybaven jízdní funkcí s deaktivovaným gyroskopem, obraťte se na svého dodavatele výrobků Invacare.

**UPOZORNĚNÍ!****Nebezpečí poranění horkými povrchy**

Vzdálený modul se může po dlouhodobém vystavení silnému slunečnímu záření zahřát.

- Nenechávejte elektrický invalidní vozík dlouhodobě na přímém slunci.

**OZNÁMENÍ!**



Kolíky konektoru se mohou při styku s kůží ušpinit nebo poškodit v důsledku elektrostatického výboje.

- Nedotýkejte se kolíků konektoru.

! **OZNÁMENÍ!**

Pod žádným krytem se nenachází uživatelem opravitelné části.

— Neotevírejte a nerozebírejte žádné kryty.

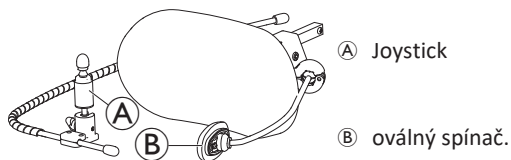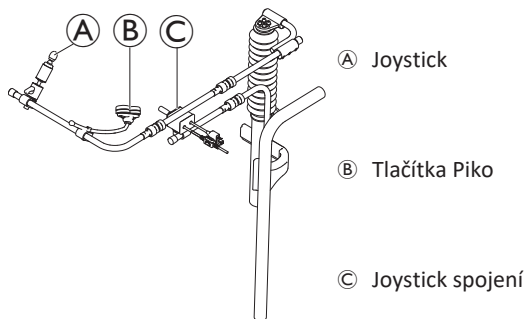1.7 Hlavní součásti**Manuální ovladač Chin Control****Elektrický ovladač Chin Control****1.8 Údržba**

- Všechny elektronické součásti udržujte trvale zbavené prachu, nečistot a kapalin. K čištění výrobku použijte tkaninu navlhčenou teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky, jelikož mohou způsobit poškození výrobku.
- Jedenkrát měsíčně zkontrolujte všechny součásti vozidla, zejména konektory, svorky nebo kabely, a zaměřte se na uvolnění, poškození nebo korozi. Ujistěte se, že všechny konektory jsou správně vzájemně spojeny. Zajistěte všechny kabely tak, aby byly chráněny před poškozením. Poškozené součásti vyměňte. Zkontrolujte přítomnost jakýchkoli cizích předmětů nebo materiálů a odstraňte je.
- Každých 6 měsíců přezkoušejte všechny funkce ovládacího systému, abyste se ujistili o jejich správné činnosti.

! **OZNÁMENÍ!**

Žádné elektronické součásti neobsahují díly, které by byly opravitelné uživatelem.

— Nepokoušejte se otvírat žádné pouzdro nebo provádět jakékoli opravy, jelikož v opačném případě dojde ke ztrátě platnosti záruky a k případnému zhoršení úrovně bezpečnosti systému.



Je-li kterákoli součást jakkoli poškozena nebo existuje-li podezření na její vnitřní poškození (například po pádu), nechejte ji před uvedením do provozu zkontrolovat kvalifikovaným personálem. V případě jakýchkoli pochybností se poraďte s nejbližším poskytovatelem produktů Invacare.

2 Nastavení

2.1 Všeobecné informace týkající se nastavení

Úkony související s počátečním nastavením, které jsou popsány v této kapitole, mají být prováděny vyškolenými a oprávněnými servisními techniky. Nejsou určeny k tomu, aby byly prováděny uživatelem.

2.2 Elektroinstalace

Aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz, musí být při instalaci kabelových svazků i jednotlivých kabelů dodrženy základní elektroinstalační zásady.

Kabely musí být zajištěny mezi svými konektory i v kterémkoli bodě ohybu, aby se ohybové síly nepřenášely na konektory.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí poranění osob a poškození dálkového ovladače

Poškození kabelů zvyšuje odpor elektroinstalace. Poškozený kabel může být zdrojem místně působícího tepla, jisker nebo elektrického oblouku, a tudíž i zdrojem vznícení okolních hořlavých materiálů.

- Instalace musí zajistit, aby všechny elektrické kabely, včetně sběrnice kabelu, byly chráněny před poškozením a potenciálním stykem s hořlavými materiály.



OZNÁMENÍ!

Kabely a vzdálené moduly se mohou poškodit, pokud nebudou uloženy správně.

- Kabely musí být vedeny a vzdálené moduly musí být umístěny tak, aby na ně nepůsobilo mechanické namáhání a aby byly chráněny před nesprávným použitím nebo poškozením, které může být způsobeno například zachycením, rozdrčením, nárazy vnějších předmětů, přiskřípnutím nebo odřením.

Všechny kabely musí být opatřeny vhodným tahovým odlehčením a nesmějí být překračovány mechanické mezní hodnoty kabelových svazků i jednotlivých kabelů.

Zajistěte, aby konektory a konektorové zásuvky byly zakrytím chráněny před stříkající vodou a před vniknutím vody. Kabely se zásuvkovými konektory by měly být uspořádány vodorovně nebo by měly směřovat dolů. Ujistěte se, že všechny konektory jsou správně vzájemně spojeny.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí poranění osob a poškození dálkového ovladače

Kolíky konektorů kabelů připojených k napájecímu modulu mohou zůstat pod napětím i po vypnutí systému.

- Kabely, jejichž kolíky jsou pod napětím, by měly být připojeny, upoutány nebo zakryty tak, aby nemohlo dojít k jejich kontaktu s osobami nebo s materiály, které by mohly způsobit elektrický zkrat.

Ujistěte se, že kabely nepřecházejí přes vozík, aby bylo zabráněno možnosti jejich zachycení nebo poškození vnějšími předměty. Obzvláště opatrně si počínejte při používání invalidních vozíků opatřených pohyblivými konstrukcemi, jako například zvedákem sedadla.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění osob nebo poškození v důsledku zkratu

Neustálý kontakt mezi uživatelem a kabelem může vést k poškození pláště kabelu. Zvyšuje to riziko elektrických zkratů.

- Neumisťujte kabely v místech, kde by přicházely do trvalého kontaktu s koncovým uživatelem.

Při instalaci sběrnicového kabelu zamezte zbytečnému namáhání kabelu i jeho přípojných míst. Aby se prodloužila provozní životnost kabelu a minimalizovala možnost jeho náhodného poškození, mělo by být ve všech místech, kde je to možné, omezeno ohýbání kabelu.



OZNÁMENÍ!

Sběrnicový kabel se může pravidelným ohýbáním poškodit

- V případě, kdy je sběrnicový kabel vystaven cyklickému ohybovému namáhání, se doporučuje použití kabelového řetězu k podepření tohoto kabelu. Maximální protažení řetězu by mělo být menší než délka sběrnicového kabelu. Ohybová síla působící na kabel by nikdy neměla překračovat 10 N.



Je třeba provést vhodné testy životnosti, aby byla zjištěna/ověřena předpokládaná životnost a aby bylo možno stanovit časový plán prohlídek a údržby.

2.3 Připojení dálkového ovladače



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí neočekávaného zastavení

Pokud dojde k poškození zástrčky kabelu dálkového ovladače, může se kabel dálkového ovladače při jízdě uvolnit. Při ztrátě napájení může dojít k náhlému vypnutí dálkového ovladače. To způsobí neočekávané zastavení.

- Vždy ověřte, že zástrčka kabelu dálkového ovladače není poškozená. V případě poškození zástrčky okamžitě kontaktujte dodavatele.



OZNÁMENÍ!

Zástrčku dálkového ovladače lze do konektorové zásuvky zasunout pouze jedním způsobem.

- Při zasouvání nepoužívejte nadměrnou sílu.

1. Zástrčku dálkového ovladače do konektorové zásuvky zatlačte jemně. Zástrčka musí zapadnout na místo, což je signalizováno zřetelným cvaknutím.

2.4 Úprava manuálního ovladače pro ovládání bradou Chin Control



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu nebo úmrtí

Malé části mohou být vdechnuty, následkem čehož může dojít k poranění či úmrtí.

- Nedemontujte žádné malé části.
- V blízkosti dětí, domácích zvířat či osob s tělesným/mentálním postižením je vyžadován neustálý dohled.



UPOZORNĚNÍ!

Riziko poranění a poškození

Ponechané otřepy a chybějící koncové kryty po úpravách na tyčích, například po zkrácení tyče, mohou způsobit poranění nebo poškození.

- Po odřezání nadbytečné délky odstraňte přítomné otřepy.
- Po odstranění otřepů opět nainstalujte koncový kryt.
- Zkontrolujte, zda koncový kryt dobře sedí.


2.4.1 Nastavení joysticku pro ovládání končetinami

Nastavení hloubky a výšky

Informace naleznete v části 2.4.3 *Nastavení výkyvného mechanismu*, strana 10.

Nastavení orientace joysticku


Joystick lze otáčet o 360 stupňů. Štěrbina na boku umožňuje nastavit joystick v úhlu 90 stupňů.

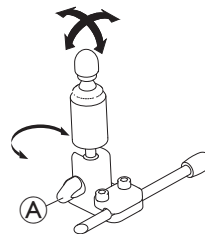

1. Rukou povolte šroub **A**.
2. Natočte spodní část joysticku do stejné polohy jako drážku.
3. Nastavte orientaci joysticku. Je-li to vhodné, zajistěte joystick v drážce v úhlu 90 stupňů.
4. Rukou utáhněte šroub.

Nastavení polohy na držáku

- Imbusový klíč 4 mm (5/32 in)

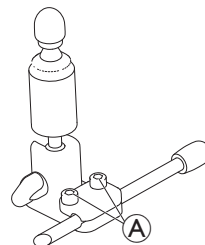

1. Povolte šrouby **A**.
2. Nastavte polohu joysticku na držáku.
3. Utáhněte šrouby.

2.4.2 Nastavení oválného spínače


Nastavení hloubky a výšky

Informace naleznete v části 2.4.3 *Nastavení výkyvného mechanismu*, strana 10.

Nastavení orientace spínače

Oválný spínač lze otáčet o 360 stupňů.

- Montážní klíč 11 mm (7/16 in)

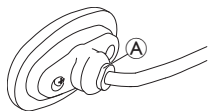


1. Povolte matici (A).
2. Nastavte orientaci oválného spínače.
3. Utáhněte matici.

2.4.3 Nastavení výkyvného mechanismu

Výkyvný mechanismus lze používat s různými možnostmi, například:

- křídélka hlavové sestavy PROTON,
- joystick pro ovládání končetinami k ovládání bradou,
- oválný spínač.

- Imbusový klíč 4 mm (5/32 in)

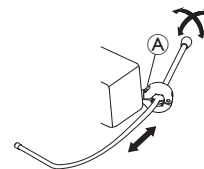

Nastavení hloubky

1. Povolte šroub (A).
2. Nastavte tyč do požadované hloubky.
3. Utáhněte šroub.

Nastavení polohy

1. Povolte šroub (A).
2. Nastavte požadovanou polohu.
3. Utáhněte šroub.

Výkyvný mechanismus lze otáčet o 360 stupňů.

2.5 Úprava elektrického ovladače pro ovládání bradou Chin Control



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu nebo úmrtí

Malé části mohou být vdechnuty, následkem čehož může dojít k poranění či úmrtí.

- Nedemontujte žádné malé části.
- V blízkosti dětí, domácích zvířat či osob s tělesným/mentálním postižením je vyžadován neustálý dohled.



UPOZORNĚNÍ!

Riziko poranění a poškození

Ponechané otřepy a chybějící koncové kryty po úpravách na tyčích, například po zkrácení tyče, mohou způsobit poranění nebo poškození.

- Po odřezání nadbytečné délky odstraňte přítomné otřepy.
- Po odstranění otřepů opět nainstalujte koncový kryt.
- Zkontrolujte, zda koncový kryt dobře sedí.

2.5.1 Nastavení joysticku pro ovládání končetinami

Viz „Nastavení orientace joysticku“ v části 2.4.1 *Nastavení joysticku pro ovládání končetinami, strana 9.*

2.5.2 Nastavení joysticků a přepínačů na spojení


Úprava polohy joysticků/přepínačů



OZNÁMENÍ!

Pokud šrouby utáhnete nesprávným utahovacím momentem, může dojít k jejich uvolnění nebo poškození.
— Šrouby utáhněte momentem o hodnotě 3 Nm ± 10 %.

- Imbusový klíč 4 mm

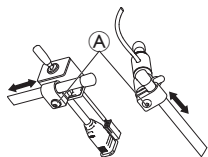

1. Povolte šrouby **A**.
2. Posuňte joystick nebo přepínač do požadované polohy spojení.
3. Utáhněte šrouby.


Úprava polohy tlačítek Piko



OZNÁMENÍ!

Pokud šrouby utáhnete nesprávným utahovacím momentem, může dojít k jejich uvolnění nebo poškození.
— Šrouby utáhněte momentem o hodnotě 3 Nm ± 10 %.


- Imbusový klíč 4 mm
- Montážní klíč 11mm (7/16 in)

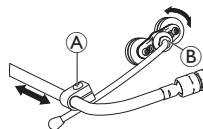

1. Povolte šroub **A**.
2. Posuňte držák do požadované polohy.
3. V případě potřeby uvolněte **B**.
4. Nastavte orientaci držáku.
5. Odstraňte šroub **A** a matici **B**.


Nastavení výšky a hloubky spojení

- Imbusový klíč 3 mm

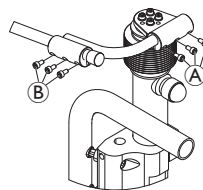

1. Povolte šrouby **A** (úprava výšky) nebo **B** (úprava hloubky).
2. Posuňte spojení do požadované polohy.
3. Utáhněte šrouby.

Nastavení orientace spojení


 Tato část se vztahuje pouze k variantám s kulovými klouby.

Pomocí kulových kloubů na spojení lze provádět další nastavení joysticků a dálkového ovladače. Kulovými klouby lze volně pohybovat a nabízí neomezené možnosti nastavení.

! OZNÁMENÍ!

Pokud kulové klouby utáhnete nesprávným utahovacím momentem, může dojít k jejich uvolnění nebo poškození.
— Kulové klouby utáhněte momentem o hodnotě 35 Nm.

- Montážní klíč 19mm (2x)

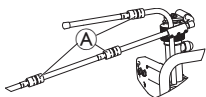


1. Povolte kulový kloub Ⓐ.
2. Napolohujte spojení.
3. Utáhněte kulový kloub.

2.5.3 Nastavení výšky joysticku spojení

! OZNÁMENÍ!

Pokud upínací páčku utáhnete nesprávným utahovacím momentem, může dojít k jejímu nadměrnému uvolnění nebo poškození.
— Upínací páčku utahujte pouze rukou.

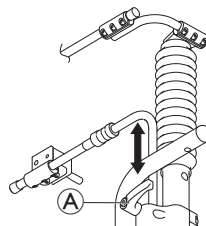

1. Povolte upínací páčku Ⓐ.
2. Nastavte výšku joysticku spojení.
3. Utáhněte upínací páčku.

3 Použití



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu nebo úmrtí

Malé části mohou být vdechnuty, následkem čehož může dojít k poranění či úmrtí.

- Nedemontujte žádné malé části.
- V blízkosti dětí, domácích zvířat či osob s tělesným/mentálním postižením je vyžadován neustálý dohled.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí úrazu nebo poškození

Oděv nebo osobní doplňky mohou omezit správnou funkci ovladače Chin Control nebo jí zabránit.

- Před prvním použitím zkontrolujte správné zapojení kabelů.
- Zajistěte, aby se žádný oděv ani doplňky nikdy neocly v dosahu použití.



OZNÁMENÍ!


Dodatečné předměty, které nepatří k ovladači Chin Control, jej mohou poškodit.

- Nezavěšujte předměty jako oděv nebo doplňky na žádné části ovladače Chin Control.

3.1 Použití ručně odklopného ovladače pro ovládání bradou Chin Control

Jízda

Tímto proporcionálním joystickem lze pohnout s vynaložením menší síly, než vyžaduje standardní joystick.

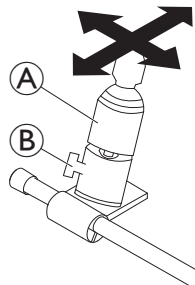

1. Vychyľte joystick **A** z neutrální polohy požadovaným směrem.
 Joystick můžete nastavit dle svých potřeb pomocí křídlatého šroubu **B**.



Další informace o jízdě naleznete v uživatelské příručce k hlavnímu dálkovému ovládání.

Změny funkčních karet


Ve výchozím nastavení je na opěrku hlavy namontován oválný spínač pro změnu funkcí nebo profilů.



Informace o ovládání funkcí elektrických sedadel a rozdílů mezi funkční kartou a profilem naleznete v uživatelské příručce hlavního dálkového ovladače.

1. Krátkým stisknutím oválného spínače změníte funkční kartu.
2. Dlouhým stisknutím oválného spínače změníte profil.

Posunutí ovladače dovnitř / ven

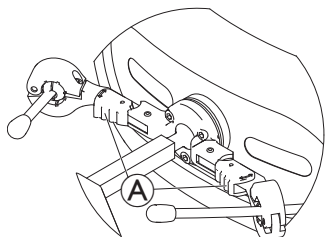


1. Stiskněte pojistný mechanismus **A** (za opěrkou hlavy) a nakloňte joystick nebo oválný spínač směrem dovnitř nebo ven, dokud nezacvakne na místo.


3.2 Používání elektricky odklopného ovladače pro ovládání bradou Chin Control

Jízda

Tímto proporčním joystickem lze pohnout s vynaložením menší síly, než vyžaduje standardní joystick.

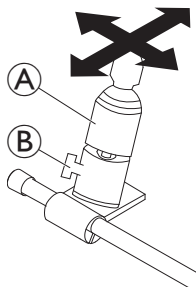


1. Vychylte joystick **A** z neutrální polohy požadovaným směrem.

 Další informace o jízdě naleznete v uživatelské příručce k hlavnímu dálkovému ovládacímu panelu.



Ve výchozím nastavení jsou na nosníku brady namontována dvě tlačítka Piko.

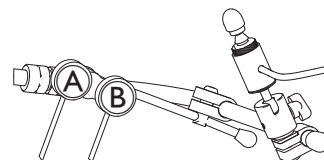

Zapnutí nebo vypnutí dálkového ovládání.

1. Stiskněte červené tlačítko Piko **A** pro zapnutí nebo vypnutí dálkového ovládání.

Změny funkčních karet

1. Krátkým stisknutím černého tlačítka Piko **B** změníte funkční kartu.
2. Dlouhým stisknutím černého tlačítka Piko **B** změníte profil.




Informace o ovládání funkcí elektrických sedadel a rozdílu mezi funkční kartou a profilem naleznete v uživatelské příručce hlavního dálkového ovladače.

Elektrické posunutí ovladače Chin Control nahoru a ven

Joystick spojení řídí pohyb ovladače Chin Control.

Možné pohyby uvádí tabulka:

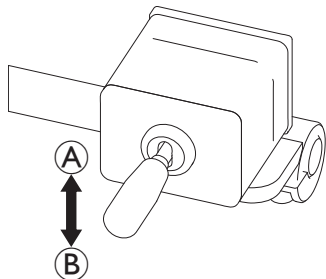

Poloha joysticku	Pohyb
nahoru (A)	Ovladač Chin Control se pohne nahoru a ven
dolů (B)	Ovladač Chin Control se pohne dolů a dovnitř

1. Posuňte joystick spojení požadovaným směrem, dokud nebude ovladač Chin Control v požadované poloze.



EU Export:

Invacare Poirier SAS

Route de St Roch

F-37230 Fondettes

Phone: (33) (0) 2 47 62 69 80

serviceclient_export@invacare.com

www.invacare.eu.com

UKRP Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1662673-C 2024-10-14



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®