



scalamobil®



Smidig och säker i varje steg.

scalamobil – det mobila hjälpmedlet för enkel och säker trappklättring.

Nyhet



www.invacare.se



Scala – frihet på dina villkor.

Om vardagsrörligheten blivit ett hinder med tiden, exempelvis på grund av sjukdom eller olycka kan trappor ofta bli en oöverstiglig barriär. Som ett resultat kan hela våningar i hus lämnas helt oanvända, eller så kan den drabbade behöva överväga att lämna sitt eget hem. Dessutom kan partners och anhöriga ha svårt att klara av situationen. Lösningar för fast rörlighet kräver komplicerade och dyra renoveringar och är inte alltid lämpliga för alla typer av trappor.

Tack vare scalamobil är begränsningar orsakade av trappor ett minne blott. Inga strukturella förändringar krävs för att använda detta mångsidiga hjälpmedel, som är kompatibelt med de flesta modeller av trappor.

Både drabbade personer och deras anhöriga kommer att dra lika stor nytta av denna frihet och som ett resultat kan de återigen utföra sina dagliga ärenden med självständighet och flexibilitet.

Scalamobil är rätt val för dig om:

- ✓ du bor i ett hem med flera våningsplan.
- ✓ du vill garantera säkerheten för både rullstolsanvändare och deras anhörig.
- ✓ du har behov utav en lösning som inte kräver några strukturella ändringar.
- ✓ du föredrar förflyttningsstöd som gör att du kan sitta kvar i din egen rullstol.
- ✓ du behöver en trappklättringshjälp men litar inte på en rullstol för dagligt bruk.
- ✓ användarvänlighet är viktigt för dig.
- ✓ du vill förenkla vardagen för partners och anhöriga.





Trygghet och frihet i ditt eget hem.


TRYGGHET

tillförlitlig & smart

Användarvänlighet och säker drift är nyckelfunktioner för scala-modellerna. Med sin beprövade teknik ingjuter detta hjälpmedel tillförlitlighet och förtroende, vilket underlättar handhavandet. Du kommer snabbt i gång med att använda Scalan på ett säkert sätt – vilket leder till omedelbart stöd i vardagen.

Tack vare bland annat en automatisk vinkelövervakning och många andra smarta funktioner garanteras säkerheten i alla typer av trappor.

- ✓ **Stabilitet:** Solid konstruktion lätt att justera
- ✓ **Kontroll:** Intuitiv kontrollenhet
- ✓ **Mångsidig:** Smarta körlägen, startspärr och nödstopp

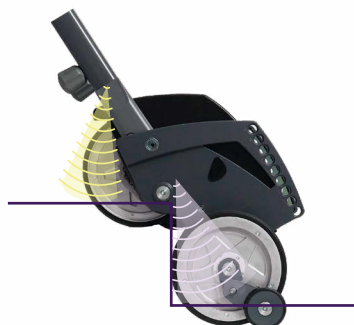

MOBILITET**mångsidig & flexibel**

Den mobila trappklättraren är passande för alla typer av trappor och kan anpassas efter användarens individuella behov.

Scalamobil kan enkelt tas isär i två delar och enkelt fästas på nästan alla typer av rullstolar. En genuin förbättring av din vardag väntar.

scalacombi är utrustad med integrerad sits, fällbara armstöd och fotstöd samt har en funktion som underlättar att köra över en tröskel – så att man kan övervinna alla utmaningar i hemmiljön.

- ✓ **Montering:** Färdig att använda på många typer av trappor, utan modifieringar
- ✓ **Flexibilitet:** scalamobil är enkel att hantera och mycket lätt att ta isär vid behov

Lätt att stuva och plocka isär vid transport.

**KOMFORT****bekväm & elegant**

Under utvecklingen av de nya scalamobilmodellerna har användarvänligheten haft högsta prioritet. Den breda, stabila sitsen är klädd i ett mjukt men ändå stödjande material för optimal komfort.

Samtidigt ger den dynamiska och mjuka stegsekvensen (Soft Step) en smidig trappklättring med jämna, konsekventa rörelser. Rent estetiskt integreras scalamobilmodellerna obemärkt i hemmet. Dess minimalistiska och tydliga design skapar ett övergripande utseende av hög kvalitet.

- ✓ **Bekväm:** Glider över trappor tack vare sin patenterade soft-step teknik
- ✓ **Kvalitet:** Tillverkad enligt en hög standard - Tillverkad i Tyskland
- ✓ **Utformning:** Attraktiv design






TRAPPOR

Ta trapporna på allvar och livet med lätthet.


Till skillnad från trapphissar kräver Albers mobila trappklättrare inga strukturella förändringar i hemmet. Detta spar tid, ger sinnesro och erbjuder en snabb, flexibel lösning. Dessa enheter är lämpliga för alla trappdesigner och är kompatibla med nästan alla typer av trappor, inklusive smala, branta eller spiraltrappor.

Tack vare dess kompakta design och enkla hopfällbarhet är detta trappklättringshjälpmedel enkelt att ta med även på resan.


Som ett resultat kan trappor enkelt övervinnas, både inomhus och utomhus.

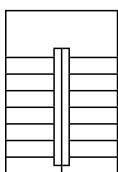


Trappstegshöjd upp till 20cm

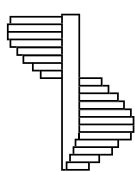

Spiraltrappa

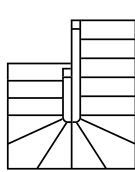

Smal, svängd trappa

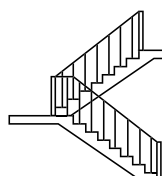

Extern trappa med räcke


Ingen anpassning krävs, oavsett trappmodell.

Ett tillfreds- ställande re- sultat för varje underlag.


Trappor skiljer sig inte bara i sin struktur, utan även i sitt material och design, beroende på deras syfte och placering.

Scalamobil kan hantera nästan alla situationer, oavsett om trapptegen är i trä, sten eller metall, eller om de är täckta av heltäckningsmatta. Däcken, som är tillverkade av ett slitagesäkert material, ger tillräckligt grepp och stabilitet på alla konventionella ytor, vilket ger operatörerna trygghet vid användning. Scala-modellerna är skonsamma mot trappbeläggningar, även vid upprepande användning.


sten &
plattor

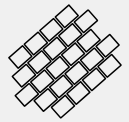


Heltäcknings-
matta

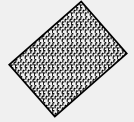


trä &
laminat

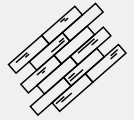

galler &
metall

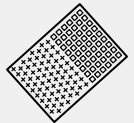

glas &
plast

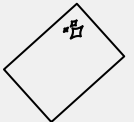

i Alla torra ytor kan enkelt övervinnas i manuell läge.



”

Scalamobilen är helt fantastisk! Min fru och jag kan nu lätt ta oss upp för trapporna och behöver inte längre förlita oss på extern hjälp. Tack för denna innovativa design som har gjort våra liv enklare!

Max M. från München

Scalamobilen har förändrat våra liv till det bättre. Min man, som har svårt med trappor på grund av sina rygproblem, kan nu klättra utan några bekymmer. Vi är tacksamma för denna utmärkta teknologi, som har gett honom tillbaka hans självständighet!

Hanna K. från Stuttgart

“





Pålitlighet. Absolut.

Scalamobil är den ideala hjälpen för de som behöver övervinna trappor i sin egen rullstol. Scalacombi är den perfekta lösningen för personer som behöver ett hjälpmedel för att komma upp i trappor eller vid användning i trånga trapphus. Klättringsteknologin är densamma i båda modellerna: två elektriskt drivna hjulpar klättrar kontinuerligt uppför trappan, steg för steg. Fokus ligger på säkerhet och har varit vår huvudprioritet sedan den första patentansökan 1986.

MODELLVERSIONER

scalamobil®

Kombinerad med en rullstol

Scalamobil kan enkelt anslutas till nästan alla typer av rullstolar utan behov av verktyg. Detta gör det möjligt för rullstolsanvändare att förbli sittande i sin rullstol och enkelt övervinna hinder, både i hemmet eller om man är på resande fot.

- i** Scalamobil kan även kombineras med transportrullstolar eller särskilt smala rullstolar.



scalacombi®

Med integrerat säte

Scalacombi är idealisk för personer som behöver assistans vid trappklättring men inte är beroende av en rullstol i vardagen. Trappklättraren har ett bekvämt, integrerat säte och kan fällas ihop för kompakt förvaring.



Båda modellerna levereras som standard med:



Batteri

Det kraftfulla batteriet klarar upp till 300 steg på en laddning



Batteriladdare

Smart laddare med automatisk laddning och avstängning då batteriet är fulladdat.



Manöverhandtag med display

Ergonomiskt och flexibelt justerbart manöverhandtag

DISPLAY

Enkel att greppa.

Smart användarkoncept för säkerhet och komfort

Vinkelindikatorn visar om Scalamobilen är i rätt position.



Hinderfunktion:

Funktion för att övervinna störningar, såsom en tröskel, gör det mycket enklare att ta sig förbi hinder på vägen till trappan.




Lås:

säkerhetslås skyddar trappklättraren mot obehörig användning.




På/av:

Strömbrytare för att slå på och av Scala.

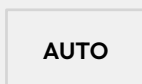

I auto-läge detekteras klättringsriktningen av sensorer och aktiveras automatiskt.

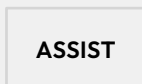

Klättringen assisteras när enheten är i rätt position och motorkontrollen bekräftar sensorsignalerna.




I manuellt läge är trappklättring möjligt i alla situationer, då sensorsfunktionerna är inaktiverade



Tydlig display
som visar
batteriinformation
och klättringsriktning

BREDD & HÖJD

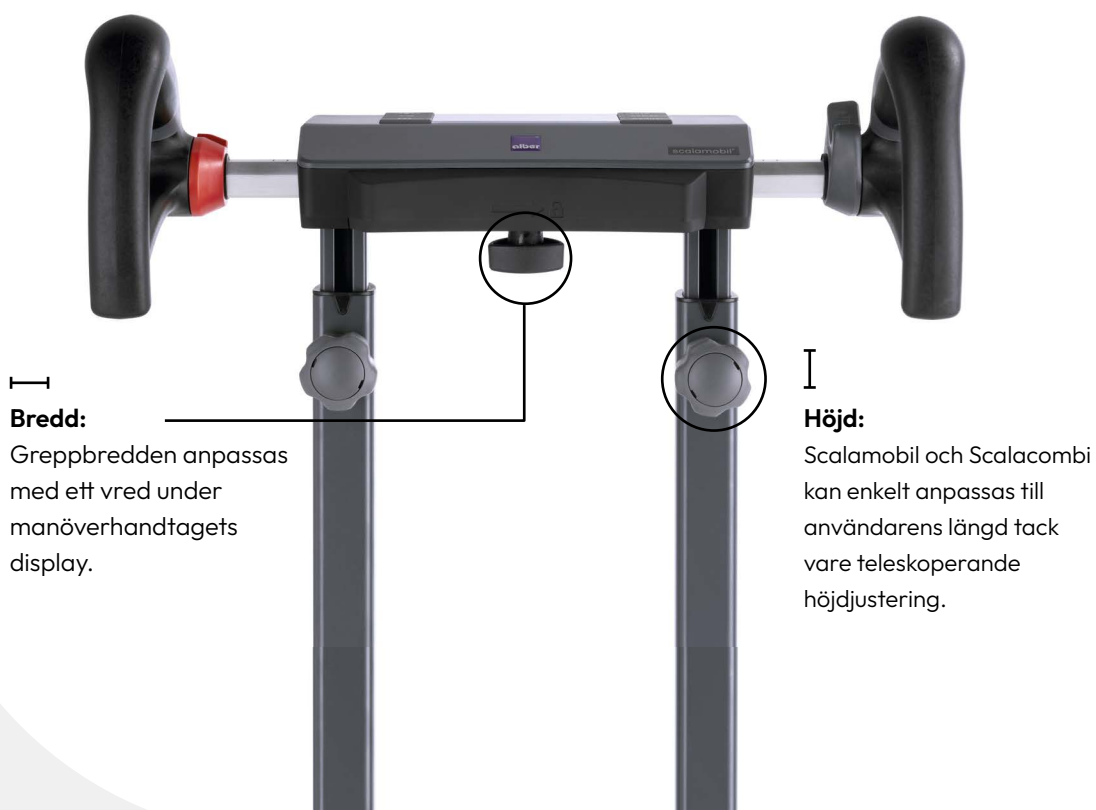

Bredd:
Greppbredden anpassas
med ett vred under
manöverhandtagets
display.

Höjd:
Scalamobil och Scalacombi
kan enkelt anpassas till
användarens längd tack
vare teleskoperande
höjdjustering.

SENSORER

För säkerhetens skull. Det är tryggt.

Säkerhet är högsta prioritet vid användning och drift av Scala-enheter. En rad smarta funktioner säkerställer pålitliga upp- och nedfärder. Integrerade sensorer samlar in och bearbetar all nödvändig information.

Kombinerad med rullstol:

Vid användning av Scalamobil-modellen måste rullstolens hjul tas bort under klättringsprocessen.

Sensorer under klättringsprocessen:

För komfort vid användning är de dynamiska mjuka stegen en av de viktigaste funktionerna i den nya Scala-generationen. Det fungerar genom att individuellt och automatiskt minska hastigheten innan kontakt med varje trappsteg. Sensorer integrerade i trappklättraren mäter steghöjden, vilket möjliggör en optimalt anpassad och skonsam klättringsprocess.





Teknisk data

	scalamobil S45	scalacombi S46
Vikt		
Totalt	26kg	38kg
Max brukarvikt	140kg	140kg
Max totalvikt	180kg (Scalamobil, rullstol och rullstolsanvändare) S45 med Scalaport X7 160kg	
Räckvidd	Upp till 300steg (ca 20 våningar)*	
Hastighet	Ca 12steg/minut inkl. Soft Step*	
Batteri	2x12V, 3,4Ah VRLA (ventilreglerat bly-gel-batteri) Läckageskyddad och underhållsfri	

*Beroende på rullstolsanvändarens och rullstolens vikt, samt stegens geometri.



Tillbehör

01. Fäste

Fäste för att docka Scalamobil-enheten på rullstolen. Du måste ange rullstolens typ och sitsbredd vid beställning. Scalaport X7 För transport av rullstolar utan monterade fästen, speciellt utformad för allmän användning eller vid färdtjänst. (Ej på bild)

02. Huvudstöd

Det mjukt vadderade huvudstödet kan justeras i höjd, djup och vinkel. Det ger stöd och stabilitet för nacke och huvud.

03. Fäste för rullstolens hjul

Fästet gör det möjligt att transportera rullstolens hjul tillsammans med Scalamobil-enheten. Kompatibelt med alla standardmodeller av rullstolar.

04. Tippskydd

Om inte originaltippskydden på rullstolen kan kombineras med trappklättraren så finns tippskydd som tillbehör. Tippskydden kan tas bort tack vare det snabbblåsande fästet när trappklättraren används. De kan justeras i höjd och längd.

05. Automatlås

Enkel låsning av rullstolen till Scalamobilen.

06. Snabbkopplingsaxel




För att klättra uppför trappor med Scalamobil-enheten måste först rullstolens hjul tas bort. Ett snabbkopplingssystem krävs, vilket finns som ett omvandlingskit och inkluderar alla nödvändiga komponenter – för montering på standardnav och trumbromsar.

07. ISOFIX®-anslutning (endast Scalacombi S46)

Möjliggör enkel fastsättning av barnsitsar.

För en översikt av hela tillbehörssortimentet, t.ex. säkerhetsbälten, etc. vänligen besök:

www.alber.de/en/products/stairclimbing-aids/

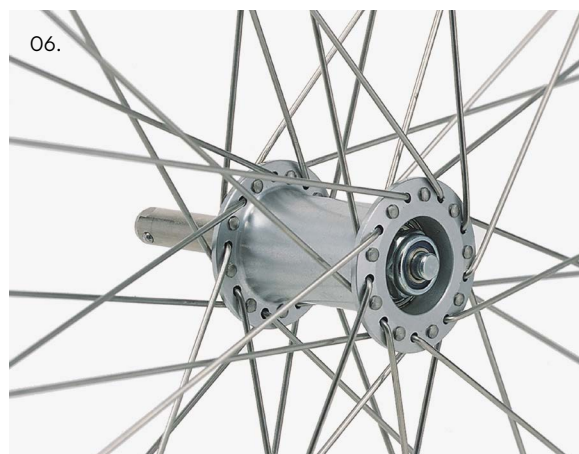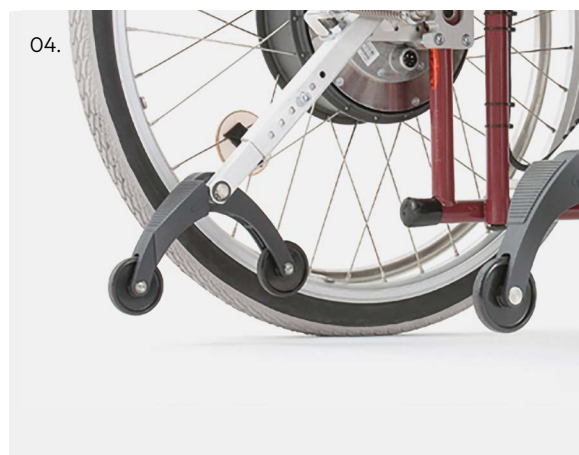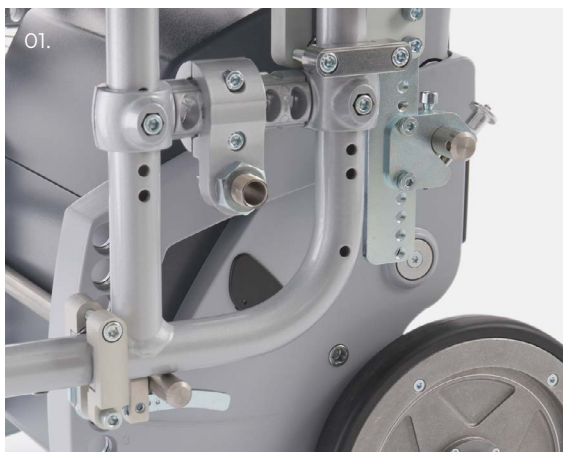

i

Scalamobil och Scalacombi levereras med:
 Ett manöverhandtag med display.
 En klättringsenhet med säkerhetsbroms.
 Ett batteripack samt laddare.



Scalamobil med universalfäste Scalaport X7

Scalaport X7 – Flexibel och Universell Lösning

Scalaport X7 är en universell adapter som, i kombination med scalamobil, möjliggör transport av olika manuella rullstolar upp och ner för trappor utan behov av att montera ett specifikt fäste på varje enskild rullstol. Detta system är särskilt utformat för användning inom vårdinrättningar, transporttjänster och offentliga byggnader som skolor och museer.

Alla manuella rullstolar är redo för transport på några sekunder

Rullstolen dockas utan fäste eller ombyggnad. Passar alla kommersiellt tillgängliga rullstolar. Även lämplig för barnstolar med en sittbredd från 26 cm. Idealisk för patienttransport och offentliga byggnader. Mycket kompakt för transport tack vare en ny fällmekanism.

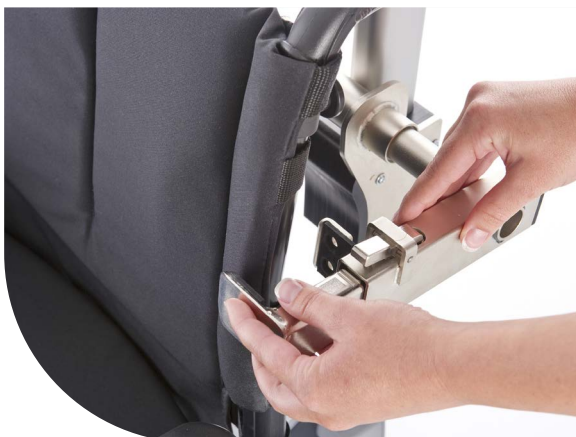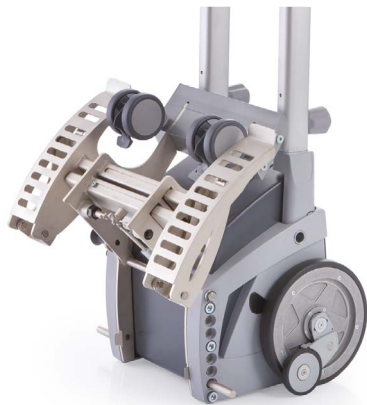



Utvecklad av Alber.

Smidig mobilitet.

Som marknadsledare inom mobilitetslösningar för rullstolar har Alber GmbH över 35 års erfarenhet inom elektromobilitet. Vi är en pålitlig partner till försäkringsbolag och samarbetar med leverantörer inom hälsovården världen över. Från den initiala konsultationen till löpande service: Du kan lita på oss.

www.invacare.se



scalamobil – Det Mobila Hjälpmidlet för Enkel och Säker Trappklättring

Scalamobil och Scalacombi är CE-märkta enligt den europeiska medicintekniska förordningen (MDR) 2017/745, har frivilligt testats av TÜV Süd och är certifierade enligt produktstandarden EN 7176-28.

Vårt kvalitetsåtagande – din säkerhet!
Alber är certifierat enligt den aktuella kvalitetsledningsstandarden ISO 13485 för medicintekniska produkter. Vårt miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001, säkerställer att våra produkter tillverkas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.



Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga
Sverige
sweden@invacare.com

MADE IN GERMANY ■■■