

VICAIR®

Vicair® Adjuster O2



Vaskbar Vicair pude med optimal trykaflastning og justeringsmuligheder



Yes, you can.®

Vicair Adjuster O2 er en ny og forbedret *Vicair* pude med 5 kamre, der kan justeres i forskellige fyldningsgrader for at minimere tryk og forskydningskræfter, samt give en stabil positionering.


Vicair Adjuster O2 har optimale justeringsmuligheder ved komplekse positioneringsbehov for fx asymmetrisk benlængde eller bækkenstilling, fremadskridning og shear.



Let vedligeholdelse

Vicair puderne indeholder flere hundrede små trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet **Smartcells™**, der har en meget lav friktionsoverflade. Luftcellerne gør puden blød og komfortabel at sidde på, samtidig med at cellerne bevarer den lave friktion. Cellene glider let mod hinanden og former sig efter kroppens former og danner en stor overflade. Resultatet er en stabil og komfortabel støtte til kroppen, kombineret med en optimal trykfordeling.

Når **Vicair Adjuster O2** skal rengøres lægges hele puden inklusiv celler i vaskemaskinen ved 60°C, og puden lufttørres fx natten over.

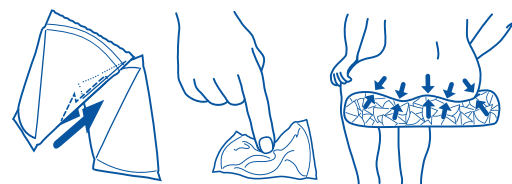

Betræk

Standardbetrækket er åndbart, komfortabelt og strækbart.

Inkontinensbetrækket er ligeledes åndbart og strækbart - lukkes omkring puden med lynlås.

Begge betræk er forsynet med en lille åbning bagtil, som den blå strop kan trækkes igennem. Når den blå strop er synlig, ved man, at puden ligger korrekt i betrækket.



Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.



Vicair Adjuster O2 se skema nedenfor

0,5 - 0,85 kg

250 kg

60°

90°

Størrelser, mm (b x d)

350x350	450x500	500x400	550x430
350x450	450x550	500x550	550x450
400x500			550x500
			550x550

Størrelser, mm (h)

60/100/120

Betræk

Sort



Vicair Adjuster O2 puder leveres i en række specialstørrelser. Kontakt Invacare for bestilling.

Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37,
 2605 Brøndby
 Denmark



Yes, you can.®

Vicair Adjuster O2 - DK - 02/2018



© 2023 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. Vicair Adjuster O2 - DK - 08/2023