



Confidence in posture solutions

Azalea[®] Base



Le fauteuil idéal pour adapter
un corset-siège



Le fauteuil *Rea Azalea Base* est conçu pour les utilisateurs recherchant des solutions alternatives en terme de positionnement, il est idéal pour y adapter un corset-siège. Le châssis offre de nombreux points de fixation au niveau de l'assise et un espace plus important au niveau du dossier pour faciliter l'adaptation d'un corset-siège sur un châssis de qualité. Une autre caractéristique de ce fauteuil est sa bascule d'assise à compensation qui assure la stabilité de l'utilisateur. Tous les avantages qu'offrent le modèle *Azalea* sont également présents sur cette version Base. Toutes les pièces et les accessoires des modèles *Rea Azalea* sont compatibles avec l'*Azalea Base* (sauf cale-tronc). Disponible en 5 coloris.

Une assise réglable

Le *Rea Azalea Base* est spécialement conçu pour recevoir un corset-siège ou siège moulé notamment grâce à l'espace plus important au niveau du dossier et aux nombreux réglages possibles de l'assise. Le dossier est réglable en angle et est inclinable par vérins pneumatiques ou réglable en angle mécaniquement par vis. La largeur d'assise est réglable au niveau des accoudoirs, les repose-jambes sont également réglables en largeur. La profondeur est ajustable. Grâce à ses nombreuses caractéristiques, le *Rea Azalea Base* s'adapte parfaitement aux différentes formes de siège moulé.

Retrouvez l'ensemble des accessoires disponibles sur la brochure du *Rea Azalea*.

Caractéristiques et options



Nombreuses possibilités de fixation

Le châssis offre de nombreux points de fixation au niveau de l'assise et un espace plus important au niveau du dossier.



Plaque d'assise avec pente d'assise

Plaque d'assise avec pente d'assise de -5° ou +5°, réglable en profondeur sur 70 mm.

Données techniques

Pour les personnes ayant une déficience visuelle, toutes les informations sont disponibles sur www.invacare.fr.

| | Largueur d'assise | Profondeur d'assise | Hauteur d'assise | Hauteur du dossier | Hauteur des accoudoirs | UL | Pente d'assise | Angle de dossier |
|------------------------|--|--|------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--|------------------|
| <i>Rea Azalea Base</i> | 340 / 390 / 440 / 490 mm (+ 50/100 mm) | 380 - 450 mm ¹ / 430 - 500 mm | 400/450 mm | 600 ¹ / 700 mm | 240 - 360 mm | 330 - 627 mm | -1° à 23° (22 / 24") (+1° à 25°) (16") | 0° - +30° |

| | Largueur hors-tout | Hauteur hors-tout | Longueur hors-tout avec potences | Poids du fauteuil | Poids max utilisateur | Poids de transport | Crash-testé | Pente maximale pour l'utilisation des freins de parking |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---|
| <i>Rea Azalea Base</i> | Largueur d'assise (+220mm/+230mm) | 1300 ¹ / 1400 mm | 930 - 1040 ¹ / 950 - 1035 mm | 20 kg | Max 135 kg | 15 kg | ISO 7176-19 | 7° |

1. Pour largeur d'assise 340 mm
2. Crash-testé avec une configuration spécifique

Coloris du châssis



Tél. : +33 2 47 62 64 00
 Fax : +33 2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
 Route de Saint Roch - 37230 Fondettes
 France

