


# BC3615LA

AR

تعليمات الاستخدام

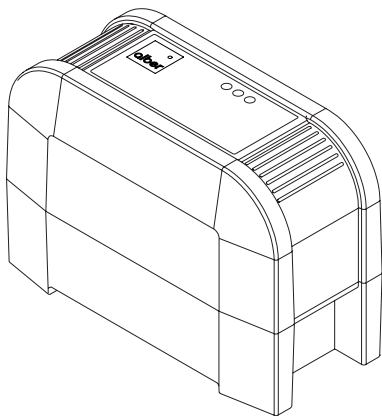

## إرشادات السلامة

- يرجى قراءة دليل الاستخدام هذا قبل بدء تشغيل الجهاز.
- لا يُسمح باستخدام الشاحن BC3615LA إلا لشحن بطاريات المنتجين Esprit وe-fix eco. واستخدامه مع منتجات أخرى غير مسموح به وقد يسبب ضرراً كبيراً.
- لا يُسمح باستخدام الشاحن إلا لشحن بطاريات الرصاص المغلقة ذات جهد اسمي 36 فلت وسعة اسمية 5 إلى 12 أمبير/ساعة.
- ولا يُسمح باستخدام الشاحن لشحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- لا يُسمح باستخدام الجهاز إلا في حالة عدم تضرر كابلات التوصيل والجسم. في حالة تضرر كابلات الشبكة الكهربائية لهذا الجهاز، يجب استبدالها بكابلات خاصة توفرها الشركة الصانعة أو خدمة العملاء الخاصة بها.
- لا تعرض كابلات الطاقة للشد لتجنب انقطاع الكابلات.
- الجهاز مخصص للاستخدام في الغرف الجافة ويجب ألا يتعرض بأي حال من الأحوال للمطر أو الماء المتناثر أو بخار الماء.
- لا تصطحب الجهاز على الكرسي المتحرك.
- اسحب القابس الكهربائي من المقبس وافصل كابل الشحن من حزمة البطارية عند اكتمال الشحن.
- لا تُغطي الجهاز أثناء التشغيل.
- لا تفتح الجهاز.
- يجب أن يكون الأطفال تحت إشراف شخص مسؤول للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص للأطفال والأشخاص الآخرين الذين تمنعهم قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة من استخدام الجهاز بأمان دون رقابة أو تلقي توجيه من شخص مسؤول.
- احترس، يتم توليد غازات قابلة للانفجار أثناء الشحن! تجنب اللهب والشرر. تأكد من توفير تهوية كافية أثناء الشحن.

## غرض الاستخدام

الشاحن BC3615LA مخصص لشحن بطاريات الرصاص الخاصة بالمنتجين Esprit و e-fix eco. الشاحن مصمم للتشغيل في وضع ثابت، وهو غير مناسب للاصطحاب على كرسي متحرك. يمكن استخدام الشاحن في كافة أنحاء العالم، حيث يتواءم تلقائيًا مع جهد التيار الكهربائي المعني. وإذا لزم الأمر، فيرجى استخدام مهايئ طاقة مناسب.

## بدء التشغيل

- أدخل قابس الشحن في مقبس الشحن الخاص بحزمة البطارية
- أدخل قابس الطاقة في المقبس
- تجري عملية الشحن تلقائيًا
- انتبه إلى بيان وضع التشغيل
- افصل قابس الطاقة مجددًا عندما يضيء بيان وضع التشغيل باللون الأخضر. وفي الحالات الطارئة، يمكن مقاطعة الشحن في أي وقت.
- أزل قابس الشحن من حزمة البطارية.

## بيان وضع التشغيل

يحتوي شاحن BC3615LA على بيان وضع التشغيل، والذي يوفر معلومات حول تقدم عملية الشحن.


- بيان ضوئي أحمر: تعرضت البطارية للتفريغ العميق أو تم توصيلها بقطبية معكوسة. اتصل بوكيل الخدمة المختص.
- بيان ضوئي أصفر: الشاحن جاهز للتشغيل.
- يومض البيان الضوئي باللون الأخضر: عملية الشحن جارية.
- بيان ضوئي أخضر: اكتملت عملية الشحن.

## الصيانة والعناية

هذا الجهاز لا يحتاج إلى صيانة. وإذا لزم الأمر، فنظف الجهاز بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم مواد التنظيف الأكلية. احم قابس الطاقة وقابس الشحن من الاتساخات.

## البيانات الفنية للجهاز BC3615LA

WS60-1-36V	موديل OEM:
100 – 240 فلت تيار متردد، 50 / 60 هرتز،	جهد الشبكة:
0.64 – 1.3 أمبير	
54 واط	طاقة الخرج:
36 فلت تيار مستمر	جهد الخرج:
1.5 أمبير	تيار الخرج:
IP 31	فئة الحماية:
II	فئة الحماية:
أثناء التشغيل 0°C ... 50°C	درجة الحرارة المحيطة:
التخزين -40 ... +65°C	
أثناء التشغيل 10 ... 80%	الرطوبة:
أثناء التخزين 10 ... 95%	
أثناء التشغيل 700 ... 1060 هيكتوباسكال	ضغط الهواء:
أثناء التخزين 500 ... 1060 هيكتوباسكال	
	قطبية قابس الشحن:

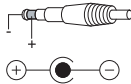

أثناء الشحن، يجب أن تكون البطارية في غرفة جيدة التهوية



العزل الوقائي / فئة الجهاز 2



لا يُستخدم في الهواء الطلق



متوافق مع التوجيهات الأوروبية



يُرجى التعامل بصورة رشيدة بيئيًا وأن تصطحب هذا المنتج إلى مرفق إعادة التدوير المحلي المختص بمنطقةك في نهاية عمره الإنتاجي. يُرجى الاستعلام عن التشريعات السارية في بلدك فيما يتعلق بالتخلص من النفايات.



وبدلاً من ذلك، يمكن أيضًا إعادة هذه المكونات إلى شركة Alber أو وكلاء شركة Alber المتخصصين للتخلص منها بطريقة احترافية وصديقة للبيئة.



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14

D-72461 Albstadt

رقم الهاتف +49 (0) 7432 2006-0

رقم الفاكس +49 (0) 7432 2006-299

[info@alber.de](mailto:info@alber.de)

[www.alber.de](http://www.alber.de)

39.0002.4.18.01

تحریرًا في: 21/01/2021