

Flo-tech[®] ***Solution Xtra***



Almofada & Sistema Modular



Yes, you can.

Combina excelentes propriedades de redução de pressão com a promoção ativa da correção da postura.

A almofada Invacare **Flo-tech Solution XTRA** e o Sistema Modular foram desenvolvidos em conjunto com clínicos para responder às especificidades posturais dos utilizadores de cadeiras de rodas. Através do uso do Sistema Modular, as intervenções terapêuticas tornam-se mais eficazes, promovendo uma correta postura que facilitará a função e contribuindo para o aumento do conforto e para a preservação da integridade da pele.

Desenhada para promover correção ativa e gestão da postura

Os componentes modulares são concebidos em espuma CMHR de alta densidade e podem ser usados para facilitar uma correção ativa e gestão da postura. As cunhas têm marcas e fixações de faixas aderentes macho/fêmea, permitindo o recorte para adequação às necessidades individuais do utilizador.

A aplicação das cunhas por baixo da almofada em combinação com a aplicação dos componentes modulares na superfície, permitem um elevado e versátil conjunto de opções para os terapeutas que implementam intervenções específicas em Posicionamento Sentado.



Um saco de fluído duplo cobre toda a superfície da almofada

A área de contacto entre o utilizador e a almofada é protegida, uma vez que o fluído redistribui a pressão para fora das proeminências ósseas. A camada adicional de fluído é incorporada por baixo da zona vulnerável das tuberosidades isquiáticas e sacro, para uma redução mais significativa da pressão.

Esta almofada, devido às suas características, é indicada para utilizadores com elevado risco de surgimento de úlceras de pressão.

Capa Impermeável Bi-elástica

A capa bi-elástica é impermeável a líquidos e permeável ao vapor. Dispõe de dois zips: o azul para abrir a capa; o verde para expandir a capa e permitir a colocação dos componentes modulares, assegurando a correta imersão do utilizador sobre a almofada.

Características e Opções



Nivelador pélvico

Pode ser colocado em qualquer um dos lados da área isquiática, debaixo da bolsa de fluído. Ajuda a corrigir ou a acomodar obliquidades pélvicas.



Suporte de anca

Pode ser colocado de ambos os lados para promover a estabilização pélvica e o correcto alinhamento da coxa na posição mediana.



Adutor

Aplicado no 1/3 lateral distal do fémur (num ou ambos os lados), reduz a rotação externa e abdução dos membros inferiores.

Características e Opções



Abdutores

Facilita o correcto alinhamento femural. Útil para utilizadores com rotação interna da anca e adução.



Base rígida

Deve ser colocada sob a base da almofada quando aplicada numa cadeira com tela de assento - favorecer uma base plana para maximizar o posicionamento.



Saco de fluído

Auxilia na redução da pressão ao nível das tuberosidades isquiáticas. Colocado à frente pode inibir o deslizamento anterior do utilizador sobre o assento. Colocado lateralmente, auxilia na gestão de obliquidades pélvicas.



Cunha frontal

Colocada por baixo da almofada promove a estabilização pélvica (acomodação da rotação pélvica posterior/ redução da rotação anterior). Útil, por ex. para promover o correto posicionamento de utilizadores que têm tendência em deslizar anteriormente sobre o assento.



Cunhas de canto

Indicadas para situações de rotação lateral da anca para promover o correcto alinhamento.



Cunhas laterais

Colocadas lateralmente debaixo da almofada (espuma pode ser recortada para adequação ao tamanho da almofada), promovem a estabilidade lateral da pélvis.



Ultra-fresh™ adicionado a todas as almofadas para proteção antimicrobiana e anti-odor

Tratamento antimicrobiano adicionado a toda a espuma Flo-tech para ajudar a torná-la resistente ao crescimento de bactérias causadoras de odores. Ajuda a proporcionar frescor por mais tempo.

Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Vários Tamanhos	Altura	Peso Total	Peso máx. utilizador ¹	Temperatura máx. lavagem	
					
Flo-tech Xtra	44	78 mm	3.08 kg	140 kg	80°



Uso Bariátrico

1. Os limites máximos de peso do usuário são definidos assumindo que a almofada selecionada tenha largura e profundidade apropriadas para o usuário pretendido.

Fabricada segundo as normas Europeias:
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores



Observe que as cores podem variar ligeiramente daquelas exibidas acima.

Tel: +351 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784, Leça do Balio



Yes, you can.®