

VICAIR®

Vicair® Vector O2



Vaskbar Vicair pude med optimal trykaflastning og positionering



Vicair® Vector O2

Vicair **Vector O2** er en ny og forbedret Vicair pude, nu med 9 kamre, der samtidig med, at den giver den bedste trykaflastning og positionering, også er mulig at vaske inklusiv indholdet af **Smartcells™** i en vaskemaskine.

Hele **Vector O2** kan rengøres i en vaskemaskine ved 60 grader.

Vector O2 leveres med et unikt og vaskebart inderbetræk, der er fremstillet med en åben struktur. Dette gør puden optimalt åndbar og regulerende med hensyn til varme og fugt.




Nem justering af **Vector O2**, mens brugeren sidder på puden




100% vaskbar i maskine

Vicair **Vector O2** kan vaskes i vaskemaskine ved 60°C uden at tømme puden for **Smartcell™**.

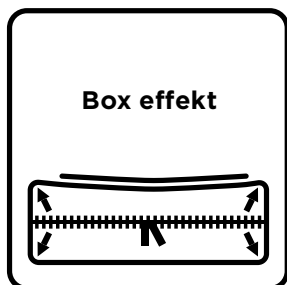


Box effekt

Lynlåsens udformning gør **Vicair Vector O2** mere stabil at sidde på, og giver samtidig mulighed for at justere indholdet og dermed positionere brugeren, mens denne sidder på puden.

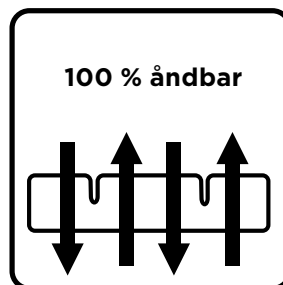

100 % åndbar

På grund af inderbetrækkets åbne struktur er der mulighed for god ventilation af både varme og fugt.

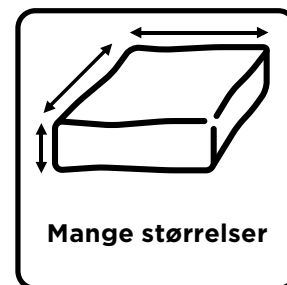


Mange størrelser

Vicair Vector O2 findes i mange forskellige størrelser, herunder også særlige junior størrelser.

Vicair teknologi

Invacare **Vicair** puderne benytter sig af **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode til støtte og aflastning af kroppen. Puderne indeholder flere hundrede små trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet **Smartcells™**, der har en meget lav friktionsoverflade. Luftcellerne gør puden blød og komfortabel at sidde på, samtidig med at cellerne bevarer den lave friktion. Cellene glider let mod hinanden og former sig efter kroppens former og danner en stor overflade. Resultatet er en stabil og komfortabel støtte til kroppen, kombineret med en optimal trykfordeling.

Når **Vicair Vector O2** skal rengøres lægges hele puden inklusiv celler i vaskemaskinen, og puden lufttørres fx natten over.

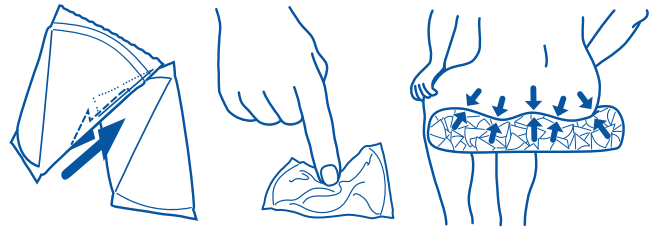

Optimal positionering og trykaflastning

Vicair Vector O2 er klinisk testet med gode resultater. Puden kan bruges i de fleste alvorlige tilfælde af tryksår. Derudover giver puden en høj grad af stabilitet, der medfører nedsat shear, god komfort og øget bevægelsesfrihed.

Vicair Vector O2 puderne er inddelt i 9 kamre, der kan justeres i forskellige fyldningsgrader for at minimere tryk og forskydningskræfter, samt give en stabil positionering. Puden kan justeres, mens brugeren sidder på puden på grund af placeringen af lynlås langs pudens side.



Vicair Vector O2 er vedligeholdelsesfri og altid klar til brug. Nem at indstille, optimal stabilitet og enkel vedligeholdelse.

Betræk

Standard betrækket er åndbart, komfortabelt og strækbart i alle retninger. Standardbetrækket lukkes omkring puden med en lynlås.

Inkontinensbetrækket er ligeledes åndbart og strækbart - lukkes omkring puden med lynlås.


Begge betræk er universal betræk, der kan anvendes på flere Vicair puder, hvilket giver fleksibilitet.

Begge betræk er forsynet med en lille åbning bagtil, som den blå strop kan trækkes igennem. Når den blå strop er synlig, ved man, at puden ligger korrekt i betrækket.



Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

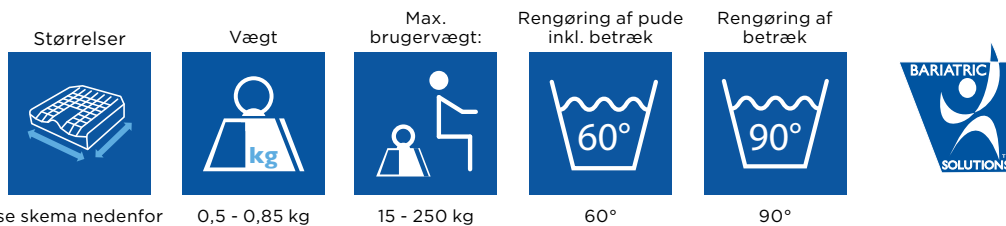

Vicair Vector O2 se skema nedenfor

0,5 - 0,85 kg

15 - 250 kg

60°

90°

Størrelser, mm (b x d)

	Vicair Vector O2
250 x 250	x
300 x 300	x
350 x 350	x
350 x 400	x
350 x 450	x
400 x 400	x
400 x 450	x
400 x 500	x
430 x 430	x
430 x 450	x
450 x 400	x
450 x 450	x
450 x 500	x
450 x 550	x
500 x 400	x
500 x 450	x
500 x 500	x
500 x 550	x
550 x 430	x
550 x 450	x
550 x 500	x
600 x 500	x

Vicair Vector O2 puder leveres i en række specialstørrelser.

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
Kontakt Invacare for bestilling.

Størrelser, mm (h)

Vicair Vector O2
60/100

Betræk

Sort



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37,
2605 Brøndby
Denmark

