

# NordBed™ Ultra

Udviklet til borgere med en demensdiagnose



ERGOMOVE™ TEKNOLOGI | OPTIMAL SIKKERHED |  
FOREBYGGER FALDULYKKER



# NordBed Ultra

Udviklet til borgere med en demensdiagnose

Nordbed Ultra kan enkelt tilpasses således at de mange særlige behov, borgere med en demensdiagnose har, tilgodeses.

Bedst mulig sikkerhed, for borgere med demens, skabes blandt andet ved at sikre høj grad af uafhængighed og mobilisation.

Med en laveste højde på 25 cm, i kombination med svagt lys under sengen, forbedres borgerens mulighed for at komme sikkert ud af sengen og risikoen for skader, som følge af fald, reduceres. En tynd madras, placeret på gulvet, til beskyttelse ved fald, kan i særlige tilfælde anbefales. Anvendelse af sengeheste kan endvidere, for nogen borgere, forebygge fald.

For at sikre optimale arbejdsvilkår for personalet kan Nordbed Ultra indstilles til en arbejdshøjde på 85 cm. Nordbed Ultra kan, med alle sine indstillingsmuligheder, tilpasses forskellige stadier af den demente borgers udvikling

## Hjemlig og æstetisk

Gavle og sider på Nordbed Ultra kan beklædes med blødt stof i forskellige farver. Dette tilfører sengen et særligt hjemligt udtryk og stoffets tydelige og fine struktur, føles behageligt for borgeren og stimulerer berøringssansen (taktilsansen).

Borgere med en demensdiagnose har ofte svært ved at finde sig til rette i og genkende nye omgivelser. Derfor er det særlig vigtigt at benytte muligheden for, at tilpasse Nordbed Ultra til den enkelte borgers behov, for således at fremme genkendeligheden og styrke trygheden.

Et bredt udvalg af gavle, sidepaneler og sengeheste, i forskellige farver og træsorter, gør det muligt at individualisere den enkelte plejesengs udtryk og således styrke genkendeligheden for borgeren.



## Perfekt til borgere med en demensdiagnose

- ▶ Indstilling til lav højde øger sikkerheden for mobile borgere
- ▶ Nordbed Ultra kan tilpasses:
  - Således at sengen er genkendelig som en traditionel seng
  - Således at sengen ligner moderne senge (box madrasser) og derved er let genkendelig
  - Med forskelligt stofmaterialer, med tydelig struktur, på gavle og sider, kan der skabes et hyggeligt og sikkert sengemiljø
  - Med en let belysning under sengen kan borgeren bedre orientere sig om natten og faldskader minimeres

4

**EXCLUSIVE  
EGENSKABER**

1

### ErgoMove teknologi

- ▶ Den unikke ErgoMove teknologi bringer borgere til en komfortabel og aktiv siddeposition, uden at borgeren glider nedad i løbet af processen og der er derfor ikke behov for repositionering
- ▶ Minimerer risiko for shear

3

### Op og Ud funktion

- ▶ Sikker og enkel forflytning
- ▶ Understøtter et ergonomisk bevægelsesmønster

2

### Laveste højde 25 cm

- ▶ Standard hjul på 10 cm medvirker til at sikre en lav højde og reducerer faldrisiko

4

### Optimale inddeling af liggefladen

- ▶ i overensstemmelse med antropometriske statistikker

## Egenskaber

- ▶ **Personlig profil:**
  - Programmerbar med LCD håndbetjening (option)
  - Personlig indstilling af Ergomove og udstigningshøjde
- ▶ **Integreret forlængelse af liggefladen**
  - + 10 cm i både hoved- og benende
- ▶ **Anti Trendelenburg og som option Trendelenburg**
  - Støtte til plejepersonale i forbindelse med repositionering af borger
  - Letter redistribuering af tryk
- ▶ **Nat belysning**
  - Nem at betjene
  - Øger sikkerheden og forebygger fald



## Håndbetjening ▲

Tydelige farver

- ▶ Farverne er enkle at kende fra hinanden - til støtte for især svagtseende borgere
- ▶ Mest anvendte taster har let genkendelige farver.
- ▶ Farverne er udvalgt i samarbejde med eksperter
- ▶ Med henblik på at forenkle valget af den ønskede funktion, tændes der lys over tasterne, når blot én tast aktiveres.
- ▶ Mest anvendte taster er placeret øverst på håndbetjeningen og indstillingstasterne nederst på håndbetjeningen er som standard låsbar


## Tekniske data ▼

Ved behov for yderligere information om produktet henvises til brugermanualen som kan hentes på Invacares hjemmeside [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Udvendig bredde Udvendig bredde ▼	Udvendig længde Indvendig længde ▼	Højdeindstilling ▼	Mål på liggefladdede ▼	Frihøjde ▼	Lårvinkel ▼	
<b>NordBed Ultra</b>	100 / 90 cm	213 / 200 cm	25 - 85 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
Benstøtteløft ▼	Anti-Trendelenburg / Trendelenburg ▼	Max. brugervægt ▼	Total vægt ▼	Produktets tungeste del ▼	Dokumenteret maskinvaskbar ▼	
<b>NordBed Ultra</b>	19°	+/- 15°	200 kg	105 kg	55 kg	Ja

**NB:** Plejesengen må ikke anvendes af børn under 12 år eller af patienter, hvis kropsstørrelse svarer til en normal 12 årig, eller mindre.

## Stelfarve ▼

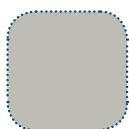

Aluminium grå

## Træfarve ▼



Bøg



Eg



Rødbrun



Bøg/lys blå



Lys blå



Hvid

Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark

© 2019 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. NordBed Ultra Dementia - DK - 08/2019

**INVACARE**  
Yes, you can.®