


Invacare® NordBed™ Kid

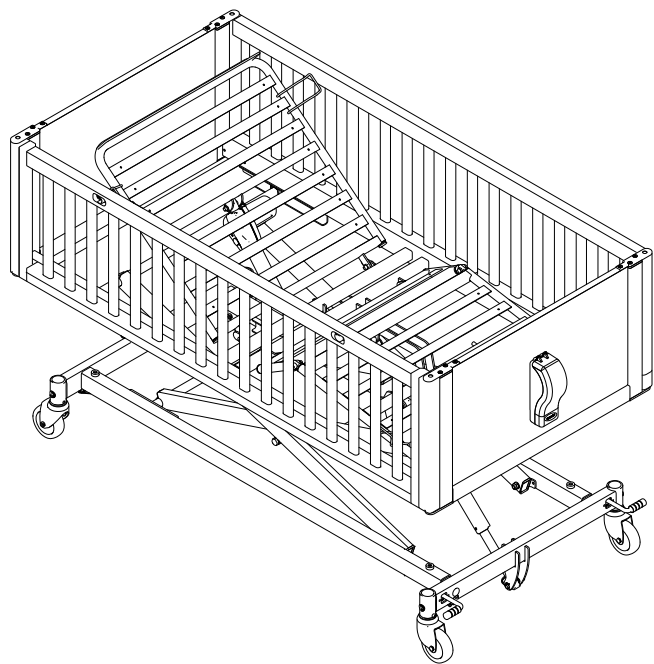

fr Lit pour enfants
Manuel de maintenance

REVENDEUR : conservez ce manuel.
Les procédures figurant dans ce manuel DOIVENT être exécutées
par un technicien qualifié.



Yes, you can.®

©2022 Invacare Corporation

Tous droits réservés. La republication, la duplication ou la modification de tout ou partie du présent document est interdite sans l'accord écrit préalable d'Invacare. Les marques commerciales sont identifiées par ™ et ®. Toutes les marques commerciales sont détenues par ou cédées sous licence à Invacare Corporation ou ses filiales, sauf stipulation contraire.

Making Life's Experiences Possible est une marque déposée aux États-Unis.

Sommaire

1 Généralités	4
1.1 Introduction	4
1.2 Symboles figurant dans ce document.	4
2 Sécurité	5
2.1 Informations de sécurité générales	5
2.2 Pièces principales du lit.	5
3 Réglages (Mise en service)	6
3.1 Informations de sécurité générales	6
3.2 Installation des panneaux du lit.	6
3.3 Installation des barrières	7
3.3.1 Installation de la barrière fixe.	7
3.3.2 Installation de la barrière rabaisable	7
3.3.3 Installation de la barrière avec portes repliables	8
3.4 Réglage des panneaux du lit	9
4 Transport et stockage	10
4.1 Démontage de la plateforme du plan de couchage.	10
4.2 Montage de la plateforme du plan de couchage	11
5 Entretien	12
5.1 Informations générales sur l'entretien	12
5.1.1 Liste de contrôle de maintenance.	12
5.2 Inspection après changement de place - Préparation pour un nouvel utilisateur.	12
5.2.1 Liste de contrôle - Après changement de place.	12
5.3 Nettoyage et désinfection	12
5.3.1 Informations de sécurité générales	12
5.3.2 Fréquence de nettoyage.	13
5.3.3 Instructions de nettoyage	13
5.3.4 Nettoyage du produit à la main	13
5.3.5 Instructions de désinfection	13
5.3.6 Lubrification.	13
5.4 Boîtier de contrôle	14
5.4.1 Réinitialisation du boîtier de contrôle	14

1 Généralités

1.1 Introduction

Le présent manuel fournit des informations importantes relatives au montage, au réglage et à la maintenance approfondie du produit. Pour garantir une utilisation en toute sécurité du produit, lisez attentivement le manuel et respectez les instructions de sécurité.

Consultez le manuel d'utilisation sur le site Web d'Invacare ou contactez un représentant Invacare. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent manuel.

Invacare se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.

Avant de lire ce manuel, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Cette version est disponible au format PDF sur le site Internet d'Invacare.

Consultez le manuel d'utilisation pour plus d'informations et avant tout achat.

Pour obtenir plus d'informations sur le produit, comme les avis de sécurité ou les rappels du produit, contactez votre représentant Invacare local. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent document.

1.2 Symboles figurant dans ce document

Les symboles et mots d'avertissement utilisés dans le présent document s'appliquent aux risques ou aux

pratiques dangereuses qui pourraient provoquer des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous aux informations ci-dessous pour la définition des symboles d'avertissement.



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures mineures ou légères.



AVIS

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des dommages matériels.



Conseils et recommandations

Donne des conseils, recommandations et informations utiles pour une utilisation efficace et sans souci.

Autres symboles



Personne responsable au RU

Indique si un produit n'est pas fabriqué au Royaume-Uni.



Triman

Indique les règles de recyclage et de tri (applicable uniquement à la France).

2 Sécurité

2.1 Informations de sécurité générales



AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou de dommage matériel

- Les procédures décrites dans le présent manuel ne doivent être réalisées que par un technicien qualifié.
- Utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange d'origine.
- Ne manipulez pas ce produit ni aucun autre équipement disponible en option sans avoir lu et compris complètement ces instructions et toute autre documentation d'instructions supplémentaire, telle que les manuels d'utilisation, les manuels d'installation ou les fiches d'instructions fournis avec ce produit ou l'équipement en option.
- Après chaque montage, vérifiez que tous les raccords sont bien serrés et que toutes les pièces fonctionnent correctement.



AVERTISSEMENT !

Risque de contamination

- Nettoyez et désinfectez le produit avant de procéder à la maintenance.



AVIS !

- Il se peut que le montage des accessoires ne soit pas décrit dans le présent manuel de maintenance. Reportez-vous au manuel fourni avec l'accessoire.
- Des manuels supplémentaires peuvent être commandés chez Invacare. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent document.
 - Du fait de différences régionales, vous devez vous reporter au catalogue ou au site Internet Invacare de votre pays pour connaître les accessoires qui sont disponibles ; vous pouvez également contacter un représentant Invacare. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent document.



AVIS !

- Certaines pièces de rechange sont exclusivement disponibles sous forme de kit. Utilisez toujours le nouveau kit complet lors du remplacement d'une pièce.
- Des pièces de rechange peuvent être commandées chez Invacare. Reportez-vous au site Internet Invacare de votre pays pour accéder au catalogue électronique des pièces de rechange.




AVIS !

- Consultez le manuel d'utilisation de ce produit pour plus d'informations sur
- Caractéristiques techniques
 - Composants du produit
 - Étiquettes
 - Instructions de sécurité complémentaires



Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

2.2 Pièces principales du lit

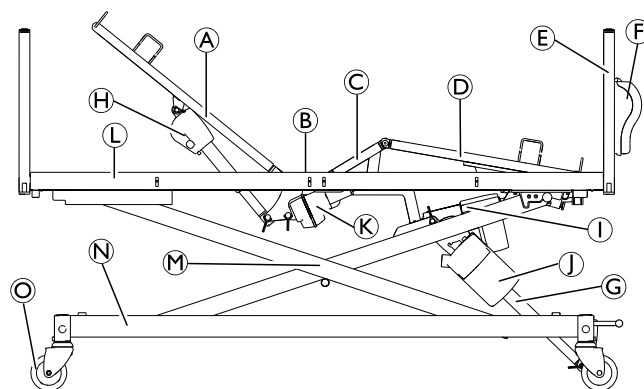

Pièces du lit standard :

- Ⓐ Section relève buste
- Ⓑ Section de l'assise
- Ⓒ Section plicature
- Ⓓ Section jambes
- Ⓔ Panneau de lit
- Ⓕ Boîtier de télécommande
- Ⓖ Vérin de réglage de la hauteur
- Ⓗ Vérin de la section relève buste
- Ⓘ Vérin section jambes
- Ⓝ Unité centrale
- Ⓚ Vérin de la section plicature
- Ⓛ Plateforme du plan de couchage
- Ⓜ Croisillons
- Ⓝ Châssis
- Ⓞ Roulette

Télécommande (non illustrée)

Barrières latérales (non illustrées)

3 Réglages (Mise en service)

3.1 Informations de sécurité générales



AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou de dommage matériel
Des éléments endommagés peuvent affecter la sécurité du produit.


- Vérifiez l'absence de dommages dus au transport sur toutes les pièces avant utilisation.
- En cas de dommage, n'utilisez pas le produit et contactez votre fournisseur Invacare pour plus d'informations à ce sujet.

3.2 Installation des panneaux du lit




Clé Allen (3 mm, 4 mm)

1.

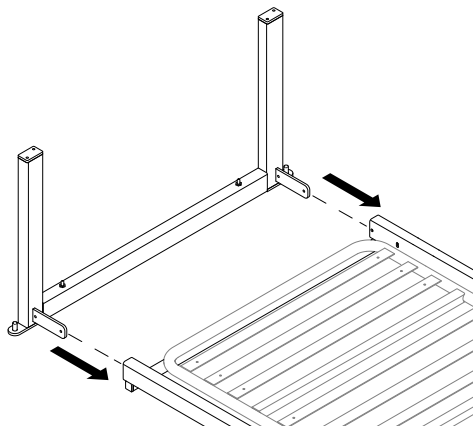

Insérez les inserts du châssis des panneaux du lit dans les tubes latéraux carrés de la plateforme du plan de couchage.


2.

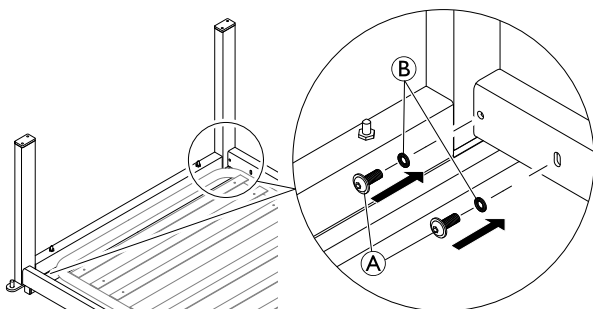

Des deux côtés du lit, insérez les vis (A) et les rondelles (B) et serrez-les jusqu'à ce que le châssis des panneaux du lit soit stable, mais que l'on puisse encore régler légèrement son angle d'inclinaison.

i Ne serrez pas complètement les vis (A) à ce stade-là. Reportez-vous à l'étape 4.

3.

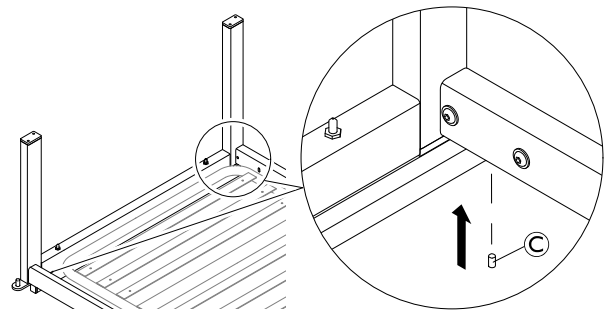


Positionnez le châssis des panneaux du lit à un angle de 90° par rapport à la plateforme du plan de couchage et, de chaque côté du lit, insérez la vis sans tête (C) jusqu'à sentir une résistance.

i Les vis sans tête (C) sont utilisées pour régler l'angle entre le châssis des panneaux du lit et la plateforme du plan de couchage afin que les barrières soient bien en place et fonctionnent correctement. Voir 3.4 Réglage des panneaux du lit, page 9.

4. Serrez les vis (A) de chaque côté du lit.


5.

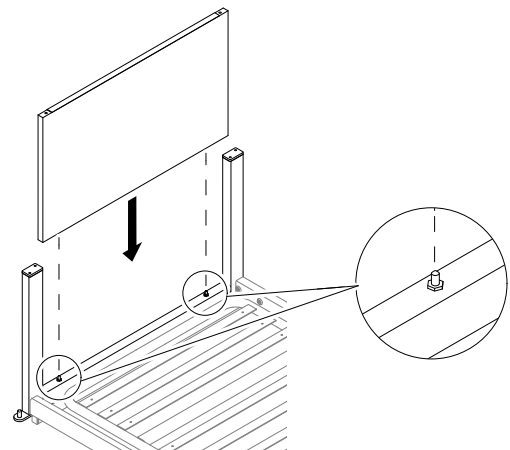


AVIS !

Le panneau du lit sur lequel est fixé le boîtier de télécommande doit être placé au niveau du pied du lit, le boîtier de télécommande orienté vers l'extérieur.

Insérez le panneau du lit sur les deux broches du châssis du panneau.

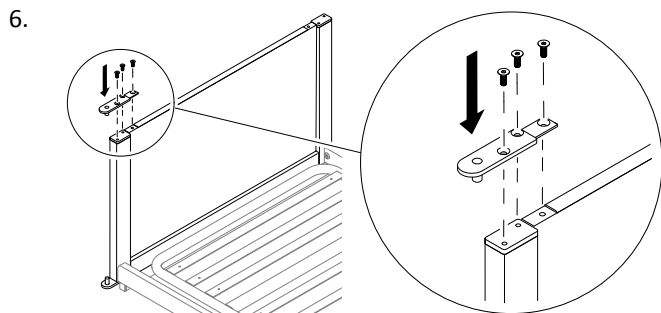

6. Sur un côté du lit, installez provisoirement la plaque pour fixer le panneau du lit sur le châssis du panneau du lit, jusqu'à ce qu'une barrière soit montée de l'autre côté du lit.

 Il s'agit d'une solution temporaire qui permet de maintenir en place le panneau du lit. Une fois que la barrière sera installée de l'autre côté du lit, cette plaque pourra être retirée pour permettre d'installer la deuxième barrière.

7. Répétez les étapes 1 à 4 à l'autre extrémité du lit.

3.3 Installation des barrières



AVERTISSEMENT !

Risque de blessure corporelle

Il existe des risques de coincement ou de pincement lors du montage ou du démontage de la barrière.


- Faites attention à vos doigts.
- Suivez attentivement les instructions.
- Après chaque montage, vérifiez que tous les raccords sont bien serrés et que la barrière fonctionne correctement.

3.3.1 Installation de la barrière fixe





Clé Allen (4 mm)

Fixation

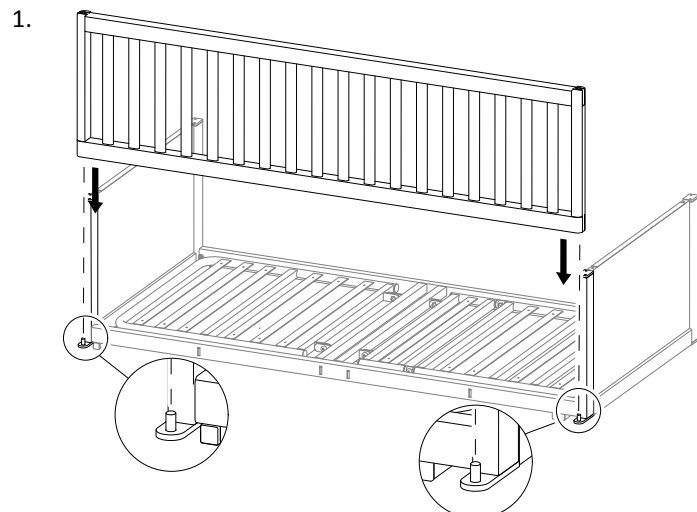

1. Placez la barrière sur les broches situées sur le châssis des panneaux du lit.

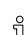 Si la barrière ne s'insère pas sur les broches, un réglage des panneaux du lit est nécessaire. Voir 3.4 Réglage des panneaux du lit, page 9.

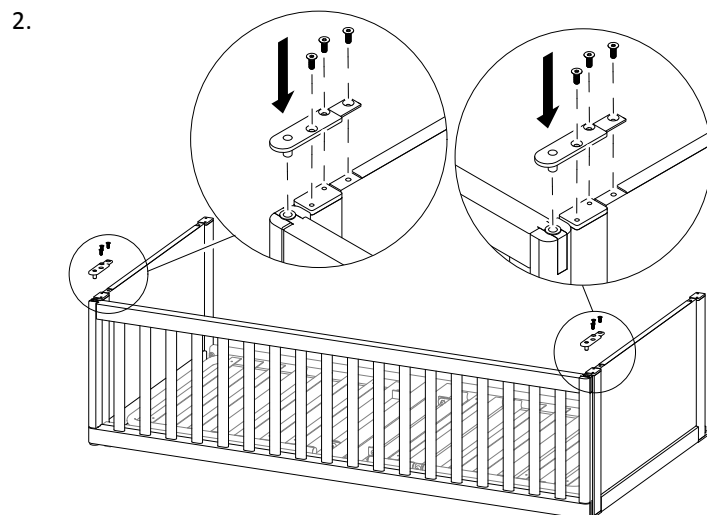

Aux deux extrémités du lit, fixez la barrière sur les panneaux du lit à l'aide de la plaque et des trois vis.

3. Vérifiez que la barrière est bien en place et ajustez les panneaux si nécessaire. Voir 3.4 Réglage des panneaux du lit, page 9.

Démontage

Suivez les étapes 1 et 2 dans l'ordre inverse pour effectuer le démontage.


3.3.2 Installation de la barrière rabaisable



Clé Allen (4 mm)


Fixation

1.

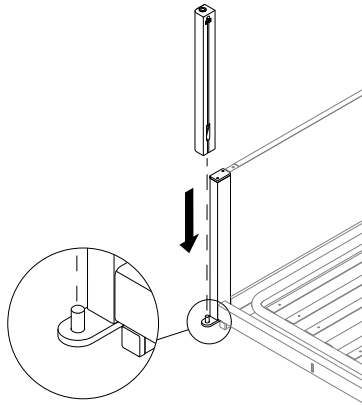

Placez le montant sur la broche située sur le châssis des panneaux, glissière orientée vers l'autre extrémité du lit.

2.

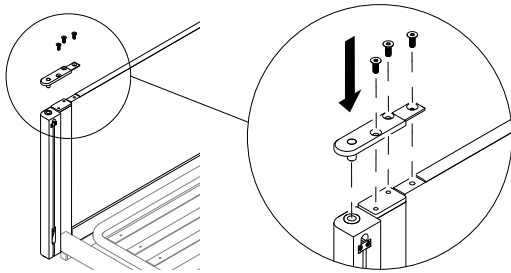


Fixez le montant sur le panneau du lit à l'aide de la plaque et des trois vis.

3. Répétez les étapes 1 et 2 à l'autre extrémité du lit.

4. Relevez le lit dans la position la plus haute.

5.

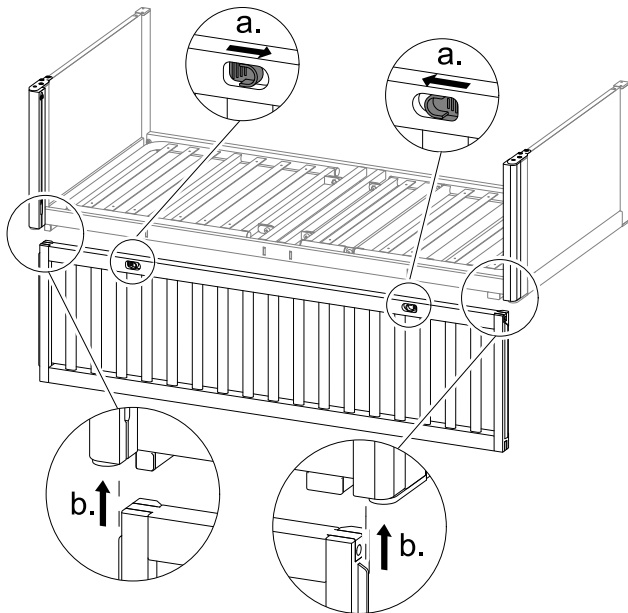


Poussez les deux verrous l'un vers l'autre et, en les maintenant dans cette position, faites glisser la barrière dans les glissières des montants en passant par dessous.

6. Vérifiez que la barrière est bien en place et fonctionne correctement ; ajustez les panneaux si nécessaire. Voir 3.4 Réglage des panneaux du lit, page 9.

Démontage

Relevez le lit dans la position la plus haute et suivez les étapes 1, 2 et 5 dans l'ordre inverse pour effectuer le démontage aux deux extrémités du lit.

3.3.3 Installation de la barrière avec portes repliables

 Clé Allen (2,5 mm, 4 mm)




AVIS !

- Avant son montage ou démontage, la barrière doit dans la position repliée et verrouillée.
- Les quatre petites cales et la cale centrale doivent toujours être montées du même côté du lit que la barrière avec portes repliables.


Fixation

1.

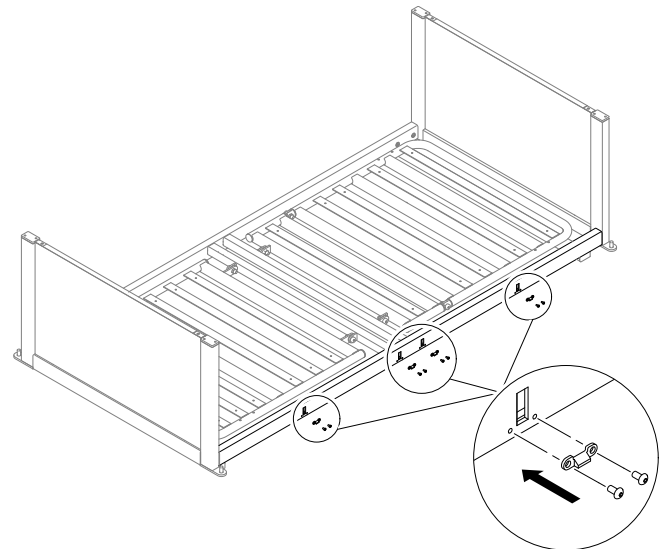


Fixez une petite cale à l'aide de deux vis au-dessous de chacune des quatre fentes du tube latéral carré de la plateforme du plan de couchage.


2.

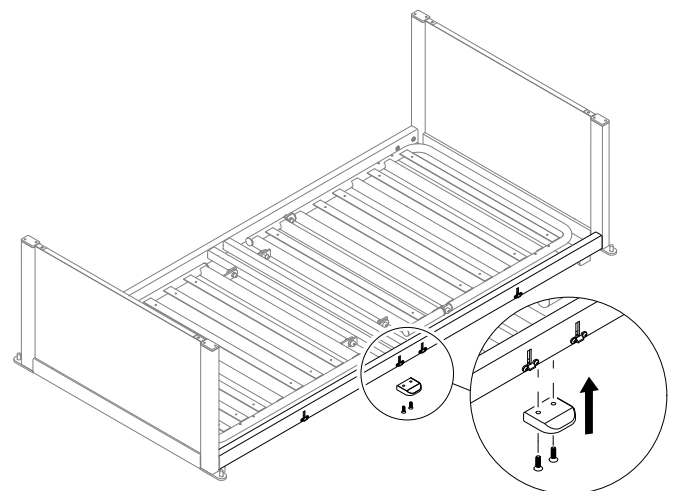

Fixez la cale centrale à l'aide de deux vis sur la face inférieure du tube latéral carré de la plateforme du plan de couchage.

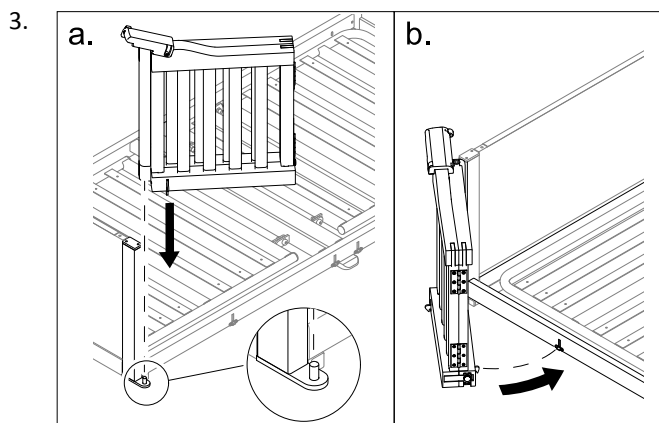

Placez la barrière sur la broche située sur le châssis du panneau du lit et fermez-la, de façon à ce qu'elle s'enclenche sur le tube latéral carré de la plateforme du plan de couchage en faisant entendre un déclic.

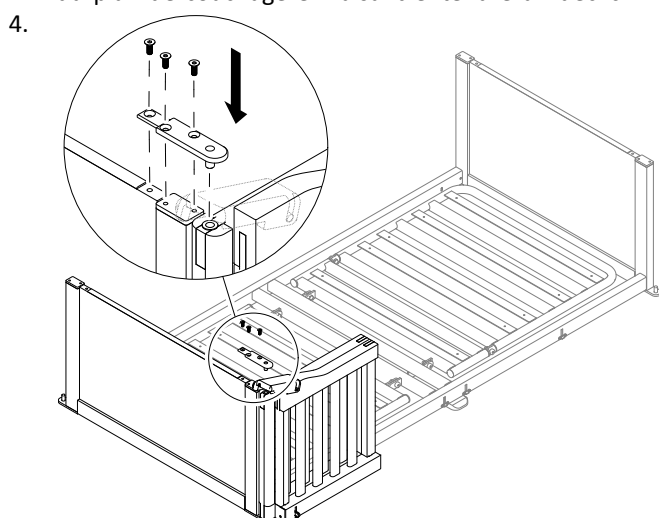


Fixez la barrière sur les panneaux du lit à l'aide de la plaque et des trois vis.

5. Répétez les étapes 3 et 4 à l'autre extrémité du lit.
6. Vérifiez que la barrière est bien en place et fonctionne correctement ; ajustez les panneaux si nécessaire. Voir 3.4 Réglage des panneaux du lit, page 9 .


Démontage

Suivez les étapes 1 à 4 dans l'ordre inverse pour effectuer le démontage aux deux extrémités du lit.


3.4 Réglage des panneaux du lit

 Clé Allen (3 mm, 4 mm)


Lors de l'installation des barrières, il peut être nécessaire de régler l'angle entre le châssis des panneaux du lit et la plateforme du plan de couchage afin que les barrières soient bien en place et fonctionnent correctement.

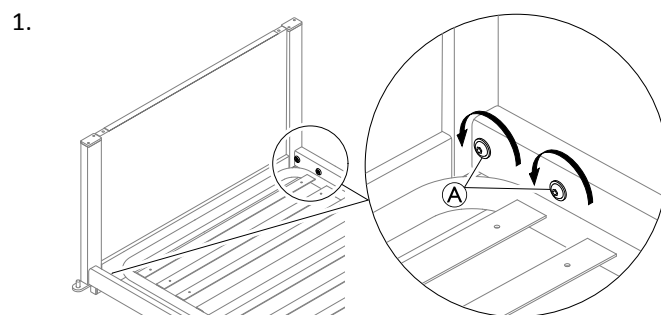

Desserrez légèrement les vis **A** situées à chaque angle de façon à ce que le châssis des panneaux de lit soit toujours stable, mais que l'on puisse légèrement régler l'angle d'inclinaison.

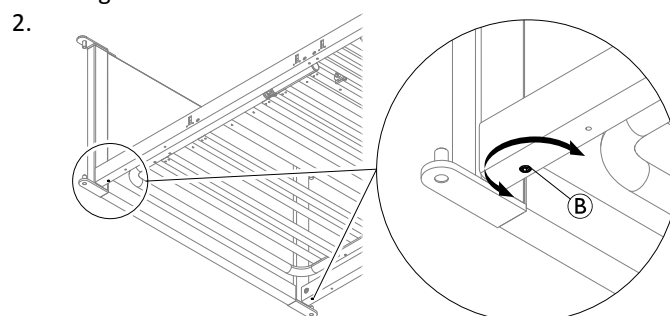

Si nécessaire, utilisez les vis sans tête **B** pour régler l'angle du châssis des panneaux du lit jusqu'à ce que les barrières soient bien en place et fonctionnent correctement.

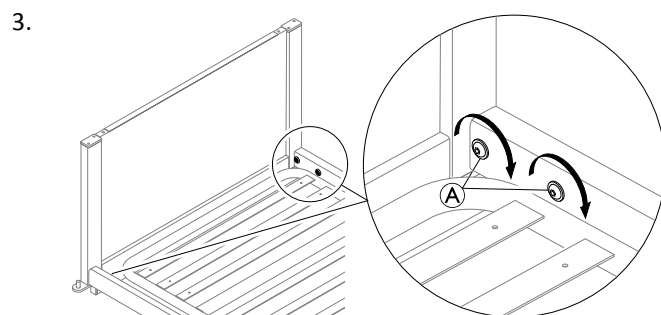

Serrez complètement les vis **A** à chaque angle du lit.


4 Transport et stockage

4.1 Démontage de la plateforme du plan de couchage

- ! AVIS !**
 Avant le démontage
 – Assurez-vous que les freins sont enclenchés.
 – Deux personnes au moins sont nécessaires pour démonter la plateforme du plan de couchage, car elle doit être soutenue aux deux extrémités.


1. Soulevez le lit à sa position la plus haute et débranchez le lit du secteur.

2.

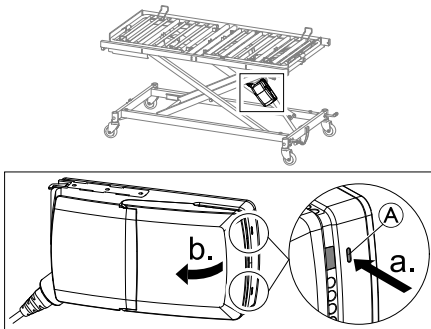

Appuyez sur les deux verrous **A** de l'unité centrale avec un objet pointu (tournevis, par exemple) et ouvrez le couvercle.

3.


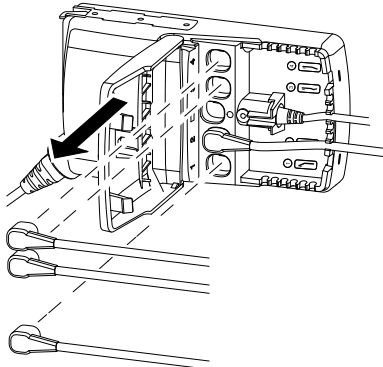


Débranchez de l'unité centrale les câbles des vérins de la section du plan de couchage et fermez le couvercle de l'unité centrale.

i Le nombre de câbles de vérin à débrancher dépend de la configuration du lit. Ne débranchez pas le câble du vérin de réglage de la hauteur ni celui de la télécommande. Voir 5.4 Boîtier de contrôle, page 14.


4. Branchez le lit sur le secteur et abaissez-le à sa position la plus basse.

5.

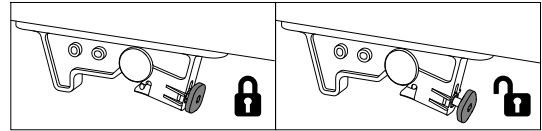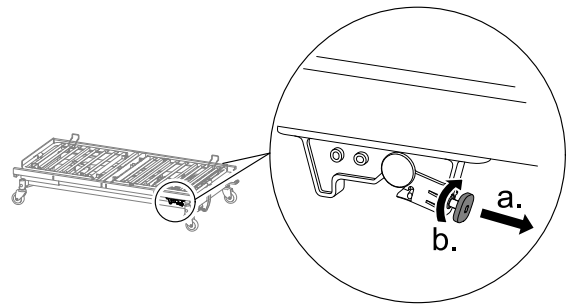


De chaque côté de la plateforme du plan de couchage, tirez sur la goupille de verrouillage rouge et faites-la pivoter de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mettre en position déverrouillée.

6.

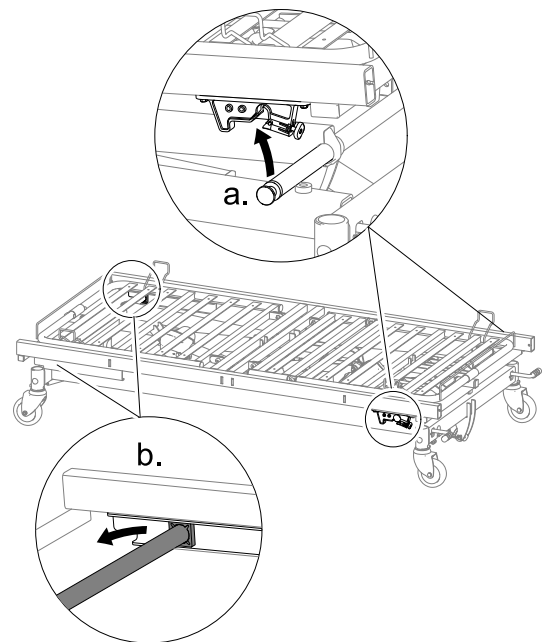

- Au niveau du pied du lit, soulevez la plateforme du plan de couchage du croisillon.
- Au niveau de la tête du lit, faites glisser les blocs coulissants du croisillon hors des glissières de la plateforme du plan de couchage.

7.

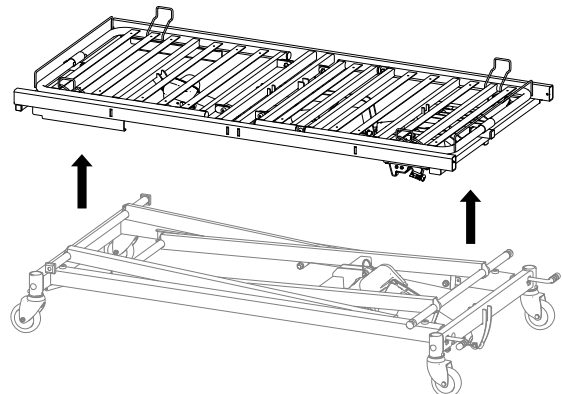

Soulevez la plateforme du plan de couchage hors de la base.

4.2 Montage de la plateforme du plan de couchage




AVIS !

Avant le montage



- Assurez-vous que les freins sont enclenchés.
- Deux personnes au moins sont nécessaires pour monter la plateforme du plan de couchage, car elle doit être soutenue aux deux extrémités.

1.

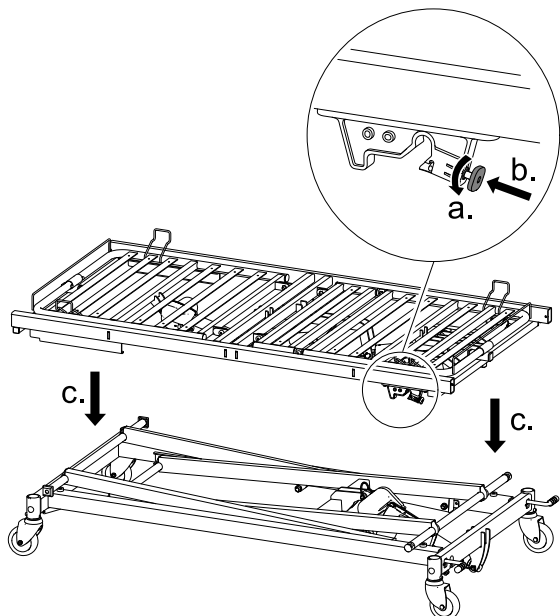

De chaque côté de la plateforme du plan de couchage, faites pivoter la goupille de verrouillage rouge de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'engage en position de verrouillage avant d'abaisser la plateforme du plan de couchage sur le croisillon.


2.

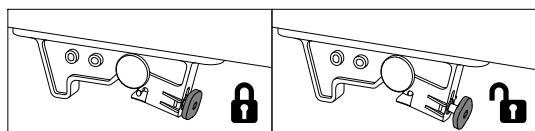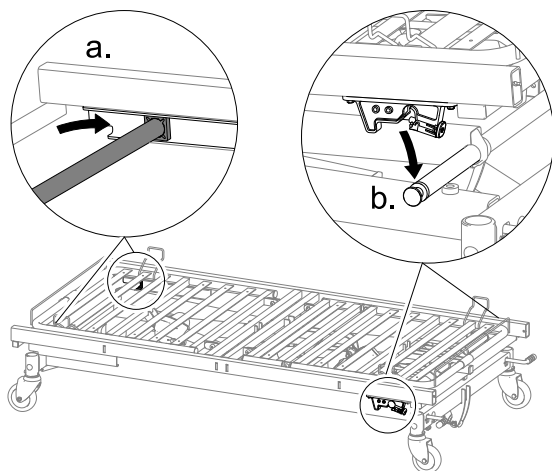

Au niveau de la tête du lit, faites glisser les blocs coulissants du croisillon dans les glissières de la plateforme du plan de couchage et au niveau du pied du lit, abaissez la plateforme du plan de couchage sur le croisillon jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en faisant entendre un déclic.


3. Branchez le lit sur le secteur, relevez-le dans la position la plus haute et débranchez le lit du secteur.

4.

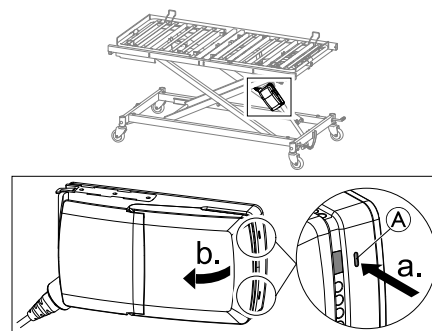

Appuyez sur les deux verrous **A** de l'unité centrale avec un objet pointu (tournevis, par exemple) et ouvrez le couvercle.

5.

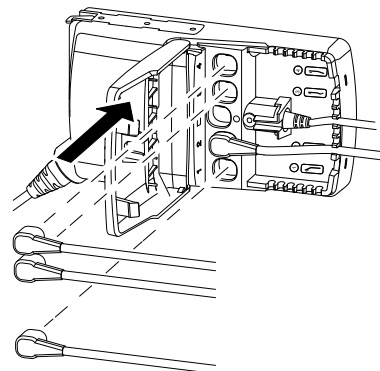

Branchez les câbles des vérins de la section du plan de couchage et fermez le couvercle de l'unité centrale.



Le nombre de câbles de vérin à brancher dépend de la configuration du lit. Voir 5.4 *Boîtier de contrôle*, page 14.

5 Entretien

5.1 Informations générales sur l'entretien



AVIS !

- Le plan de couchage doit être maintenu pendant les inspections de maintenance pour éviter qu'il ne s'abaisse de façon accidentelle.
- La maintenance du lit peut être effectuée uniquement par le personnel ayant reçu les instructions ou la formation nécessaires.
- Lors de la remise en état du lit, ou si les fonctions du lit changent, l'entretien doit être effectué conformément à la liste de contrôle de maintenance.

Un contrat de maintenance peut être souscrit dans les pays où Invacare a sa propre société de vente. Dans certains pays, Invacare peut également proposer des cours de réparation et de maintenance du lit. La liste des pièces de rechange et des manuels d'utilisation supplémentaires sont disponibles via la page d'accueil d'Invacare.

Avant utilisation

- Vérifiez que toutes les pièces manuelles et électriques fonctionnent correctement et qu'elles sont en bon état.
- Vérifiez, en soulevant et en abaissant le lit, si les croisillons circulent librement dans les glissières.

Au bout de trois mois

- Vérifiez que toutes les pièces électriques et manuelles fonctionnent correctement et resserrez les boulons, vis, écrous, etc.

Tous les ans

- Il est recommandé de procéder tous les ans à un test de sécurité comprenant le contrôle des performances des vérins et de l'état mécanique.

Tous les deux ans

- Dans des conditions d'utilisation normale, nous préconisons fortement une maintenance conformément à la liste de contrôle ci-dessous après deux années d'utilisation, puis tous les deux ans par la suite.



Les vérins, la télécommandes et l'unité centrale doivent être remplacés en cas de panne.

5.1.1 Liste de contrôle de maintenance

Points de contrôle

- Circlips, goupilles et bague de fixation en plastique - correctement verrouillés et intacts.
- Vis - serrées.
- Soudures - intactes.
- Vérifiez l'absence de courbure au niveau des glissières.
- Système de verrouillage et de mobilité des barrières - correctement verrouillé et en état de marche.
- Fixations de roue - serrées.

- Freins des roulettes - verrouillage correct.
- Vérins de réglage de la hauteur - fonctionnement correct.
- Vérins des sections du plan de couchage - fonctionnement correct.
- Câbles - correctement branchés et non endommagés.
- Prises électriques - non endommagées.
- Revêtement isolant des câbles et boîtiers des vérins - absence de fissures ou de dommages.
- Revêtement endommagé - réparé.
- Accessoires - montage et fonctionnement corrects.

5.2 Inspection après changement de place - Préparation pour un nouvel utilisateur



AVIS !

- Lorsque le lit a été changé de place, et avant d'être attribué à un nouveau patient, il doit faire l'objet d'un examen minutieux.
- Cette inspection doit être effectuée par un professionnel formé à cet effet.
 - Pour plus d'informations sur les tâches de maintenance de routine, reportez-vous au tableau de maintenance.

5.2.1 Liste de contrôle - Après changement de place

Points de contrôle

- Vérifiez que le croisillon est correctement enclenché dans les points de pivotement inférieurs et les glissières de la base.
- Vérifiez que les goupilles qui bloquent le plan de couchage sur le croisillon sont correctement enclenchées (bouton rouge du plan de couchage).
- Vérifiez le verrouillage des vérins (goupilles correctement montées).
- Vérifiez le câblage électronique des vérins (câbles non entravés).
- Assurez-vous que les boîtiers des vérins sont intacts (absence de fissures et de fuites de liquide).
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement montés sur l'unité centrale.
- Vérifiez les différentes sections du plan de couchage en activant toutes les fonctions des pièces mobiles à l'aide de la télécommande.
- Vérifiez le fonctionnement des freins.
- Vérifiez que les inserts pour panneaux sont correctement montés (stables) et que les panneaux du lit sont bien fixés.
- Vérifiez les fonctions de verrouillage des barrières.

5.3 Nettoyage et désinfection

5.3.1 Informations de sécurité générales



ATTENTION !

Risque de contamination

- Prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger et portez un équipement de protection adéquat.

**ATTENTION !****Risque de décharge électrique et de détérioration du produit**

- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur, le cas échéant.
- Lors du nettoyage de composants électroniques, tenez compte de leur classe de protection concernant la pénétration d'eau.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'éclaboussures d'eau sur la fiche ou la prise murale.
- Ne touchez pas la prise électrique avec les mains mouillées.

**AVIS !**

- Des méthodes ou des liquides inappropriés risqueraient de blesser quelqu'un ou d'endommager le produit.
- Tous les désinfectants et agents de nettoyage utilisés doivent être efficaces, compatibles entre eux et protéger les surfaces qu'ils sont censés nettoyer.
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage corrosifs (alcalins, acides, etc.) ou abrasifs. Nous recommandons d'utiliser un agent de nettoyage ménager ordinaire, comme du liquide vaisselle, sauf indication contraire dans les instructions de nettoyage.
- N'utilisez jamais de solvant (diluants cellulose, acétone, etc.) qui modifie la structure du plastique ou dissout les étiquettes apposées.
- Procédez à un séchage complet du produit avant toute nouvelle utilisation.



Pour le nettoyage et la désinfection en environnement clinique ou de soins à long terme, suivez les procédures internes.

5.3.2 Fréquence de nettoyage**AVIS !**

- Une désinfection et un nettoyage réguliers garantissent un bon fonctionnement, augmentent la durée de vie et permettent d'éviter toute contamination.
- Nettoyez et désinfectez le produit :
 - régulièrement lors de l'utilisation,
 - avant et après toute procédure d'entretien,
 - lorsqu'il a été en contact avec des fluides corporels, quels qu'ils soient,
 - avant de l'utiliser pour un nouvel utilisateur.

5.3.3 Instructions de nettoyage**IMPORTANT !**

- Le produit ne doit pas être nettoyé dans des installations de lavage automatique, équipées de systèmes de nettoyage à haute pression ou à la vapeur.

5.3.4 Nettoyage du produit à la main

Tous les composants (à l'exclusion des textiles amovibles)

- Agent de nettoyage : nous vous recommandons d'utiliser un détergent doux au pH neutre ou presque neutre (5-9).



Les produits de consommation disponibles dans le commerce, comme le liquide vaisselle à la main ou les nettoyeurs tout usage, peuvent être utilisés. Lisez les instructions sur l'étiquette de votre agent de nettoyage et utilisez-le à la concentration indiquée.

- Température maximale de l'eau : 40 °C
1. Essuyez soigneusement les surfaces avec un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution de détergent, jusqu'à éliminer toute trace visible de saleté.
 2. Enlevez tous les restes de détergent à l'aide d'un chiffon humide propre.
 3. Séchez-les à l'aide d'un chiffon doux propre.

Textiles amovibles (y compris toile et matelas)

- Consultez l'étiquette apposée sur chaque produit.

5.3.5 Instructions de désinfection**Pour les soins à domicile**

- Désinfectant : nous vous recommandons d'utiliser un désinfectant de surface à base d'alcool (avec 70-90 % d'alcool).



Lisez les instructions sur l'étiquette de votre désinfectant. Elle fournit des informations sur le spectre d'activité (bactéries, champignons et/ou virus), la compatibilité des matériaux et la bonne durée d'exposition.

1. Assurez-vous que les surfaces sont nettoyées avant la désinfection.
2. Humidifiez un chiffon doux, essuyez toutes les surfaces accessibles pour les désinfecter et gardez-les humidifiées pendant la durée d'exposition indiquée sur l'étiquette du désinfectant.
3. Laissez sécher le produit à l'air.

Pour les soins en établissement

Suivez vos procédures de désinfection internes et utilisez uniquement les désinfectants et méthodes préconisés.

5.3.6 Lubrification

Il est recommandé de lubrifier le lit selon le tableau suivant :


Pièce du lit	Méthode de lubrification
Roulements de levage et croisillons	Huile (destinée aux dispositifs médicaux)
Suspension moteur	Huile (destinée aux dispositifs médicaux)
Coulisseaux et glissières	Graisse
Axes et rouleaux pour le croisillon (l'axe doit être démonté)	Graisse




Pour commander de l'huile et de la graisse agréées, veuillez contacter votre revendeur Invacare.

5.4 Boîtier de contrôle

Le boîtier de contrôle est fixé au vérin de réglage de la hauteur ; il est plus facile d'accès lorsque le lit est dans sa position la plus haute.

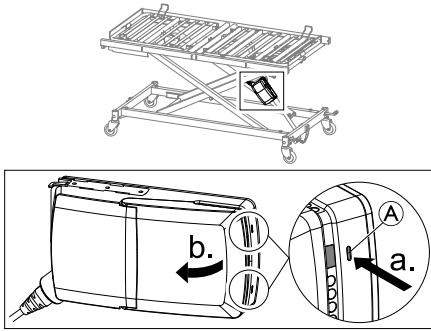

Pour ouvrir le boîtier de contrôle :
Appuyez sur les deux verrous A du boîtier de contrôle avec un objet pointu (tournevis, par exemple) et ouvrez le couvercle.

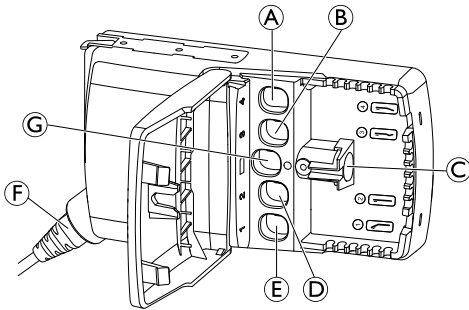

Les prises de vérin situées à l'intérieur du boîtier de contrôle ont des étiquettes comportant des symboles et des couleurs spécifiques permettant de savoir où brancher les fiches respectives.

- A Vérin de la section jambes
- B Vérin de la section cuisses
- C Télécommande
- D Vérin de réglage de la hauteur
- E Vérin de la section dos
- F Câble d'alimentation secteur
- G non utilisé

5.4.1 Réinitialisation du boîtier de contrôle

i En cas d'erreur fatale sur le boîtier de contrôle, le voyant orange s'allume et un signal sonore retentit au niveau du boîtier de contrôle lorsque l'on appuie sur un bouton. De plus, le lit ne bouge pas. Pour effacer cette erreur, il faut réinitialiser le boîtier du lit.

1. Pour réinitialiser le boîtier du lit, appuyez simultanément sur Hi-Lo vers le haut et Hi-Lo vers le bas (deuxième ligne du télécommande) pendant 5 secondes.
Ensuite, le voyant orange devient vert.



Belgium & Luxemburg:

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr



Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden

