



Invacare® EC-Track™

da Installationstjekliste



FORHANDLER: Opbevar denne manual.
Procedurerne i denne manual SKAL udføres af en uddannet tekniker.



Yes, you can.®

Installationstjekliste | EC-Track-system, Gantry, Robin og Robin Evo

Skinnesystemet og/eller personløfteren er blevet kontrolleret og testet for følgende i henhold til **Vejledningen/installationsmanualen**:

Er EC-Track på installationen?

Ja (fuldfør følgende afsnit).


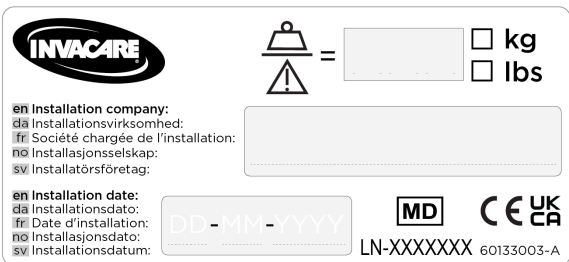
Installationsmærkatet for Invacare EC-Track-systemet viser følgende oplysninger:			
Maksimal sikker arbejdsbelastning (SWL)		Installationsdato	
Mærkatnummer (LN)			

Type installation

Type af skinesamling	<input type="checkbox"/> Lige/bøjede skinne(r)	<input type="checkbox"/> Krydsende (X-Y-system)	<input type="checkbox"/> Værelse-til-værelse
Værelsestype	<input type="checkbox"/> Soveværelse	<input type="checkbox"/> Badeværelse	<input type="checkbox"/> Stue
Fastgørelse	<input type="checkbox"/> Loft	<input type="checkbox"/> Væg	<input type="checkbox"/> Gulv til loft (vægstolpe)
Forstærkninger	<input type="checkbox"/> Nej	Ja, udført af: <input type="checkbox"/> Installatør <input type="checkbox"/> En anden entreprenør: _____	

Nej (Gå til **2. Kontrolpunkter | Robin** og sørg for at kontrollere skinnernes producent **Vejledning/installationsmanual**).


1. Kontrolpunkter EC-Track og Gantry	✓	✗	Bemærkninger
1.1 Alle nødvendige forstærkninger er forsvarligt fastgjorte (hvis relevant).			
1.2 Skinnesystemets komponenter vælges og monteres i overensstemmelse med Installationsmanualen .			
1.3 Beslagene er placeret under deres nominelle maksimale afstandsforhold. Hvis det er Gantry-systemet, er stolperne placeret under deres nominelle maksimale afstand.			
1.4 Alle beslag er fastgjort korrekt til loftet/væggen.			
1.5 Beslaget til skinnefastgørelse er sat forsvarligt fast. Hvis det er Gantry-systemet, er alle forbindelser forsvarligt fastgjorte.			
1.6 Alle skinneender er udstyret med endestop, som er tilstrækkeligt fastspændt og har endestykker (hvis relevant).			
1.7 Skinnerne er rene og fri for spåner eller andet affald fra installationen.			
1.8 Kørevognen (og, hvis relevant, krydsende kørevogne) kører jævnt og stille i hele skinesystemet.			
1.9 Justér friktionsbremsen på kørevognen, hvis det er nødvendigt.			
1.10 Kontrollér monteringsanordningerne på krydsende kørevogne.			
Transitkobling/skinneskifter (hvis relevant)			
1.11 Låseanordningerne er alle OK (sikker sporing, hver hægte bevæger sig uafhængigt, korrekt justeret i forhold til sporingsrillerne, ingen forhindring der hindrer korrekt funktion, sikkerhedsplade er monteret).			
1.12 Kontrollér skinnernes indbyrdes placering. Justér igen, hvis det er nødvendigt.			
1.13 Afstand mellem spor og transitkobling/skinneskifter er maks. 3 mm.			
1.14 Transitkobling/låseanordning virker OK (10 gange: Deaktiver venstre/højre klo x 5).			
1.15 Funktionstest udført under belastning gennem systemets skinneskifter (5 cyklusser med den maksimale sikre arbejdsbelastning (SWL)).			

1. Kontrolpunkter EC-Track og Gantry	✓	✗	Bemærkninger
1.16 Indlægspladen er monteret (L- og M-skinne).			
Belastningstest			
1.17 Kontrollér, om skinnesystemet er nivelleret (før test af skinnesystemet).			
1.18 Belastningen skal forblive ophængt ved hvert fastgørelsespunkt i 20 minutter.  Lasten skal ophænges under hvert fastgørelsespunkt i 20 minutter.			ISO 10535
1.19 Skinnesystemet forbliver i samme højde efter belastningstesten.			
1.20 Skinnesystemet forbliver nivelleret efter belastningstesten.			
1.21 Skinnesystemet er blevet markeret med installationsmærkatet, der viser den maksimale sikre arbejdsbelastning (SWL) (200 kg), installationsdatoen og installationsfirmaet.			
1.22 Udfyld de ønskede felter på Installationsmærkatet og anbring det på skinnerne. Tildæk det med det beskyttende laminat. 			
1.23 Klæb en etiket med datoen for næste eftersyn (MM-ÅÅÅÅ) på skinnerne. Mærkat eksempel: <input type="text" value="Dato for næste eftersyn"/> <input type="text"/>			

Er Robin personløfteren monteret på EC-Track?

- Ja (fuldfør følgende afsnit).
- Nej (Gå til **3. Afsnit om sidste trin** og sørg for at kontrollere personløfterens producent **Vejledning/installationsmanual**).

2. Kontrolpunkter Robin / Robin Evo	✓	✗	Bemærkninger
2.1 Robin personløfterens serienummer (skriv det i kommentarfeltet).			
2.2 Personløfteren er markeret med den maksimale sikre arbejdsbelastning (SWL) (200 kg).			
2.3 Op-afbryderne fungerer korrekt.			
2.4 Ned-afbryderne fungerer korrekt. Funktionen til at løsne stroppen fungerer korrekt. Kontrollér justeringen, hvis den ikke virker			
2.5 Endestop virker korrekt. Kontrollér justeringen, hvis den ikke virker.			
2.6 Nødstop og nulstilling virker korrekt.			
2.7 Nødsænkningfunktionen og nulstilling virker korrekt.			
2.8 Endestopsafbryderen ved nødsænkning fungerer korrekt.			
2.9 Den fulde længde af stropper (bånd) har ingen tegn på slid, trævling og/eller løs syning.			
2.10 Kroge og krogenes fastgørelse har ikke tegn på slid/skade, som kan true løftet.			
2.11 Håndbetjeningen er tilsluttet korrekt.			
2.12 Håndbetjeningen er funktionsdygtig og i god stand.			

2. Kontrolpunkter Robin / Robin Evo	✓	✗	Bemærkninger
2.13 Kontrollér affjedringen og krydstiften.			
2.14 Udfør en fuld løftecyklus med den maksimale sikre arbejdsbelastning (200 kg).  Skal være ubesværet og uden skurrende lyd.			

3. Afsluttende trin	✓	✗	Bemærkninger
3.1 Ejeren har alle nødvendige Brugsanvisninger .			
3.2 Affald fra installationen er samlet sammen og bortskaftet korrekt.			
3.3 To underskrevne kopier af denne installationstjekliste skal udfyldes. Én til installationsfirmaet og én til producenten (Invacare). Send venligst en kopi (scannet dokument, PDF eller læseligt billede) til ectrackinst@invacare.com med følgende navnekode: " Installationsfirmaets navn " + " Mærkatnummer " + " Installationsdato ", f.eks.: " Invacare LN0000001 18-okt-2022 ".			

Installation udført af:

Virksomhed ansvarlig for systemet: (fx leverandør, Center for teknisk bistand, Invacare osv.).	
Installationsfirmaets navn:	
Installatørens navn [blokbogstaver]:	
Installatørens underskrift og dato:	

**Belgium & Luxemburg:**

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

United Kingdom & Ireland:

Invacare Limited
Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 200
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Norge:

Besøksadresse:
(Office addresses)
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Tel: (47) 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Norge:

Vareleveringsadresse:
(Storage / Technical dep)
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo
teknisk@invacare.com
www.invacare.no

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via Marco Corner, 19
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
servizioclienti@invacare.com
www.invacare.it

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se



Invacare Portugal, Unipessoal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology
Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

