

Invacare® Birdie® – Nachtrag

7.1.1 Checkliste für die Sicherheitsinspektion

Regelmäßige Inspektionen sollten von einer Person vorgenommen werden, die geeignet, entsprechend qualifiziert und mit dem Design, der Verwendung und der Pflege des Lifters vertraut ist.

Datum der Inspektion:	Initialen:
SCHWENKRAD-FAHRGESTELL ☐ Prüfen, ob Teile fehlen. ☐ Fahrgestell öffnet/schließt leichtgängig. ☐ Schwenkräder und Achsbolzen auf festen Sitz überprüfen. ☐ Schwenkräder auf leichtgängiges Drehen und Rollen überprüfen. ☐ Prüfen, ob Rollen frei von Schmutz sind, und Schmutz ggf. beseitigen. ☐ Drehpunkte auf Verschleiß überprüfen.	
GURTE UND TEILE ☐ Bei jeder Verwendung alle Gurtbefestigungen prüfen, um sicherzustellen, dass der Gurt richtig befestigt und der Patient darin sicher ist. ☐ Prüfen, ob das Gurtmaterial Verschleißspuren aufweist. ☐ Riemen auf Abnutzung überprüfen. ☐ Überprüfen der Nähte.	
ELEKTRISCHE VERSTELLMOTOREINHEIT ☐ Auf Undichtigkeit überprüfen. ☐ Teile an Mast, Ausleger und Basis überprüfen. ☐ Auf Verschleiß und Defekte überprüfen. Bei Beschädigungen an das Werk zurücksenden. ☐ Elektrischen Verstellmotor zyklisch laufen lassen, um einen gleichmäßigen, laufruhigen Betrieb sicherzustellen.	

AUSLEGER

- ☐ Alle Teile und Spreizbügelabhängungen überprüfen.
- ☐ Prüfen, ob Krümmungen oder Biegungen vorhanden sind.
- ☐ Die Schraubverbindungen des Auslegers auf Verschleiß überprüfen.
- ☐ Überprüfen und sicherstellen, dass der Ausleger zwischen den Fußschiene zentriert ist.
- ☐ Drehbolzen des Masts überprüfen. Sicherstellen, dass der Bolzen fest sitzt.
- ☐ Drehpunkte auf Verschleiß überprüfen.
- ☐ Überprüfen, ob die sichere Tragfähigkeit am Ausleger sichtbar gekennzeichnet ist.

MAST

- ☐ Sichere Montage des Masts am Ausleger überprüfen.
- ☐ Prüfen, ob Krümmungen oder Biegungen vorhanden sind.
- ☐ Drehpunkte auf Verschleiß überprüfen.

SPREIZBÜGEL

- ☐ Bolzen/Haken auf Verschleiß oder Schäden überprüfen.
- ☐ Gurthaken auf Verschleiß oder Verbiegungen überprüfen.
- ☐ Drehpunkte auf Verschleiß überprüfen.
- ☐ Den Karabiner auf Verschleiß an den Kontaktpunkten überprüfen.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass sich der Karabiner nicht vollständig in den Kunststoffteilen dreht. Sonst müssen die kunststoffbewegten Teile ausgetauscht werden. Siehe Abbildung ④.
- ☐ Den Stift, mit dem der Karabiner am Ausleger befestigt ist, überprüfen.
- ☐ Überprüfen, ob die sichere Tragfähigkeit am Spreizbügel sichtbar gekennzeichnet ist.

REINIGUNG

- ☐ Immer, wenn es erforderlich ist.

④

