

7.1.1 Lista de verificação de inspeção de segurança

A pessoa que realizar as inspeções periódicas deve ter as qualificações corretas e adequadas, para além de bons conhecimentos da conceção, utilização e cuidados com o elevador.

Data da inspeção:	Rubrica:
BASE DOS RODÍZIOS ☐ Verifique se faltam ferragens. ☐ Verifique se a base abre e fecha com facilidade. ☐ Verifique se os rodízios e os parafusos do eixo estão bem apertados. ☐ Verifique se os rodízios oscilam e rodam sem problemas. ☐ Verifique se os rodízios têm detritos e limpe-os. ☐ Verifique se as articulações apresentam sinais de desgaste.	
CESTAS E FERRAGENS ☐ Verifique todas as fixações da cesta sempre que esta for usada para assegurar uma ligação correta e a segurança do paciente. ☐ Verifique se o material da cesta apresenta sinais de desgaste. ☐ Verifique se as correias apresentam sinais de desgaste. ☐ Inspeccione as costuras.	
SUPORTE DO ATUADOR ELÉTRICO ☐ Verifique se há fugas. ☐ Inspeccione as ferragens no mastro, braço e base. ☐ Verifique se há sinais de desgaste ou deterioração. Se encontrar danos, devolva à fábrica. ☐ Ligue e desligue para assegurar o bom funcionamento do atuador elétrico.	

BRAÇO ☐ Verifique todas as ferragens e suportes da barra de suporte. ☐ Verifique se há empenos ou torções. ☐ Verifique se as articulações aparafusadas do braço apresentam sinais de desgaste. ☐ Inspeccione para assegurar que o braço está centrado entre as pernas da base. ☐ Verifique o parafuso de rotação do mastro. Certifique-se de que o parafuso está bem apertado. ☐ Verifique se as articulações apresentam sinais de desgaste. ☐ Verifique se a carga de trabalho segura está visivelmente marcada no braço.
MASTRO ☐ O mastro deve estar montado em segurança no braço. ☐ Verifique se há empenos ou torções. ☐ Verifique se as articulações apresentam sinais de desgaste.
BARRA DE SUPORTE ☐ Verifique se o parafuso/ganchos apresentam sinais de desgaste ou danos. ☐ Verifique se os ganchos da cesta apresentam sinais de desgaste ou torções. ☐ Verifique se as articulações apresentam sinais de desgaste. ☐ Verifique se o mosquetão apresenta sinais de desgaste nos pontos de contacto. ☐ Verifique se o mosquetão não roda completamente dentro das peças de plástico. Se rodar, significa que as peças de plástico apresentam desgaste e precisam de ser substituídas. Consulte a Figura (A). ☐ Verifique o pino soldado que suporta o mosquetão no braço. ☐ Verifique se a carga de trabalho segura está visivelmente marcada na barra de suporte.
LIMPEZA ☐ Sempre que necessário.

(A)

