

SoftCloud™

La gamme de matelas à pression alternative



Technologie de pression alternative établie

POLYVALENCE | DESIGN INTUITIF | CONFORT



Yes, you can.

Invacare

La gamme SoftCloud

La technologie de pressions alternatives appliquées est recommandée pour une prévention et une gestion des escarres lorsqu'elle est combinée avec une surveillance personnalisée, des repositionnement et un programme de soins.

Les professionnels de la santé rencontrent souvent des situations dans lesquelles les patients ne peuvent pas tolérer, ou avoir accès au repositionnement. Dans ces circonstances, le EUPUAP recommande d'utiliser un système de support actif comme plan de gestion et de prévention des escarres.

Les matelas SoftCloud® et les revêtements sont une gamme de surfaces de support actives de haute qualité, conçues pour les patients à "haut risque" de développement d'escarres. La pression alternative du matelas SoftCloud a été conçue pour imiter l'environnement protecteur naturel des mouvements spontanés, en redistribuant la pressions plusieurs fois par heure, même lorsque le patient ne bouge pas.



"Utilisez une surface de support active (revêtement ou matelas) pour les individus **à haut risque de développement** d'escarres lorsqu'un repositionnement manuel fréquent n'est pas possible." (EPUAP, 2014)

**NOU-
VELLES**

FONCTIONNALITÉS

1

Design intuitif

- Une unité de contrôle moderne et intuitive



2

Auto-détECTION et auto-ajustement

- Offre le bon support clinique pour assurer le confort du patient





3

Mode de gonflage maximum via une unité de contrôle digitale

- Fournit une surface ferme pour assurer que le soignant puisse changer les draps de lit et repositionner le patient



► Poignées

Pour faciliter la prise en main du matelas et son transport

► Sheet Loops

Permet au lit d'être librement sécurisé au matelas tout en assurant l'accès à l'étiquette CPR

► Housse zippée

Le zip 360° sur le dessus de la housse facilite son retrait pour le lavage

► Dossier articulé

Conçu pour être compatible avec un lit profilé pour prévenir des distortions des cellules d'air (Pro seulement)

► Talons flottants

Les 5 cellules talon du SoftCloud Pro sont équipées d'une option qui permet de décharger en permanence les talons de l'utilisateur. Cette fonctionnalité est idéale pour les utilisateurs les plus vulnérables comme les individus avec des plaies aux chevilles existantes.

► Système d'organisation des câbles

Pas de câbles d'alimentation traînant

► Languette CRP

Dans une situation dans laquelle le CPR doit être administré, une languette de déclenchement rapide est attachée au matelas. Lorsqu'elle est tirée, le matelas se dégonfle immédiatement.

► Mode de transport

Une attache de transport peut être attachée au tuyau pour assurer un gonflement constant des cellules pendant le transport.



Introduction de la gamme **SoftCloud**

La gamme offre quatre options
faciles d'utilisation:



SoftCloud Top

- ▶ Revêtement
- ▶ Composé de cellules d'air s'alternant doucement pour disperser les points de pression indésirables.
- ▶ Cycle de 12 minutes
- ▶ Cycle 2 en 1
- ▶ 3 cellules statiques pour la tête

SoftCloud Air

- ▶ Système de remplacement de matelas
- ▶ Composé de cellules d'air s'alternant doucement pour disperser les points de pression indésirables
- ▶ Cycle de 12 minutes
- ▶ Cycle 2 en 1
- ▶ 3 cellules statiques pour la tête

SoftCloud Ace

- ▶ Système de remplacement de matelas
- ▶ Composé de cellules d'air s'alternant doucement pour disperser les points de pression indésirables
- ▶ Cycle de 10 minutes
- ▶ Cycle 3 en 1
- ▶ Revêtement perméable à la vapeur avec coutures soudées à haute fréquence
- ▶ 3 cellules statiques pour la tête

SoftCloud Pro

- ▶ Système de remplacement de matelas
- ▶ Composé de cellules d'air s'alternant doucement pour disperser les points de pression indésirables
- ▶ Cycle de 10 minutes
- ▶ Cycle 3 en 1
- ▶ Paroi latérale statique gonflée en permanence, qui offre des supports latéraux fermes avec une plateforme de transfert semi-stable.
- ▶ Section spéciale pour les talons sensibles
- ▶ 3 cellules statiques pour la tête

Unités de contrôle intuitives

Les unités de contrôle SoftCloud bénéficient d'un affichage intuitif qui peut être utilisé pour ajuster les niveaux de confort en proposant 1, 2 ou 3 modes de pression alternatifs avec une option statique.

De plus, une fonctionnalité d'auto-détection permet à l'unité de contrôle d'automatiquement ressentir la pression du corps and d'ajuster les niveaux de pression en conséquence. Les fonctionnalités des unités de contrôle tant visuelles que sonores s'activent en cas de faible pression ou coupure de courant. Elles bénéficient d'une sourdine d'alarme et d'une fonction de verrouillage du panneau de contrôle pour faciliter le nettoyage



Données techniques ▼


Pour obtenir des informations d'avant-vente plus compréhensibles sur ce produit, incluant le manuel d'utilisation, référez-vous au site Invacare et à votre espace Pro



Largeur ▼



Longueur ▼

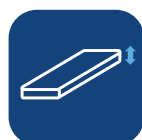

Hauteur ▼



Poids max. utilisateur ▼

SoftCloud Top	83-88 cm	202 cm	13 cm	200 kg
SoftCloud Air	83-88 cm	202 cm	18 cm	200 kg
SoftCloud Ace	83-88 /103-116 cm	202 cm	20 cm	220 kg/ 350 kg
SoftCloud Pro	83-88 cm	202 cm	20 cm	220 kg



Profondeur ▼



Largeur ▼



Hauteur ▼

Unité de contrôle 1	12 cm	25 cm	24 cm
Unité de contrôle 2	12 cm	29 cm	25 cm

Couleur ▼



Dark Blue

Note: les couleurs peuvent légèrement varier de la couleur présentée ci-dessus

Données réglementaires ▼

Le matelas est fabriqué pour:

Norme Européenne: BS EN 597-1 Cig
Norme Européenne: BS EN 597-2 Match
BS7175 Crib 5

Unité de contrôle:

Niveau sonore: ≤ 30 dB

Autres Informations ▼

Les soins infirmiers essentiels sont cruciaux dans la prévention des escarres. Ce matelas contribuera positivement au résultat du plan de prévention des escarres. Education, jugement clinique et plans d'actions basés sur la vulnérabilité sont des facteurs fondamentaux dans la prévention des escarres. Une échelle d'évaluation peut être utilisée comme méthode formelle d'évaluer les risques de développement d'escarres et devrait être utilisée en combinaison avec une évaluation informelle (jugement infirmier).

Tel. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

