

Action[®] 5



ALL RIGHTS RESERVED
PATENT
PENDING
ALL RIGHTS RESERVED



reddot award 2015
winner

Encaja perfectamente con tu
estilo de vida.



Yes, you can.

La *Invacare Action*⁵ ha sido diseñada para los usuarios más activos que buscan una silla asequible con buenos resultados de conducción y que se pliegue fácilmente, para poder almacenarla y transportarla. Con sus dos patentes y su fabricación ligera, la nueva **Action**⁵ ofrece plenas garantías a los usuarios. Las opciones estándar incluyen:

- **Mecanismo de plegado horizontal único**
- **La estabilidad de una silla rígida**
- **Ajustes rápidos**
- **Altamente configurable**



Mecanismo de plegado único



- El innovador diseño de la silla permite que el chasis **se reduzca en tamaño** y que el respaldo se pliegue sobre el asiento, **compactando** la silla.
- No necesita una maneta adicional para plegar la silla, haciéndolo sin esfuerzos para facilitar su **transporte y almacenaje**.



La estabilidad de una silla rígida

- El sistema de plegado patentado* en forma de H le aporta a la silla **mayor estabilidad** comparándola a otras sillas plegables del mercado.
- La función de auto-bloqueo garantiza una posición de asiento segura y hace que la silla se pueda propulsar casi sin realizar esfuerzo, lo que **mejora los resultados de conducción**.



La silla se puede ajustar con el usuario sentado

- Nuestra tecnología única patentada* permite ajustar el ángulo del respaldo con el **usuario sentado en la silla**.
- La ajustabilidad en pocos pasos permite **valoraciones y ajustes rápidos y fáciles** para asegurar el posicionamiento del usuario.
- El ajuste sin intervalos permite conseguir **una posición del respaldo lo más precisa posible** para el usuario.



Personalízala

- Ofrece al usuario la libertad de diseñar su silla según su personalidad, con una amplia variedad de colores para elegir.
- La **Action⁵** se puede configurar según las necesidades del usuario, desde seleccionar un look más activo con pescantes fijos, o la versión con pescantes abatibles, que permite un plegado y un transporte aún más fácil.
- Las próximas dos páginas detallan la gama de opciones disponibles en la **Action⁵**.
- La Action⁵ es también compatible con otros productos de Invacare, incluyendo la gama de dispositivos electrónicos Alber.



Galardonada con el premio de diseño Red Dot

- La Invacare **Action⁵** ha ganado el premio de Diseño de Producto Red Dot Award.
- El Red Dot Award no es sólo el premio de diseño de producto más competitivo del mundo, sino también uno de los premios de diseño más prestigiosos.



reddot award 2015
winner




Configurable



Tapizado de asiento ajustable en tensión y en profundidad

Los ajustes se pueden realizar fácilmente mediante una cincha.

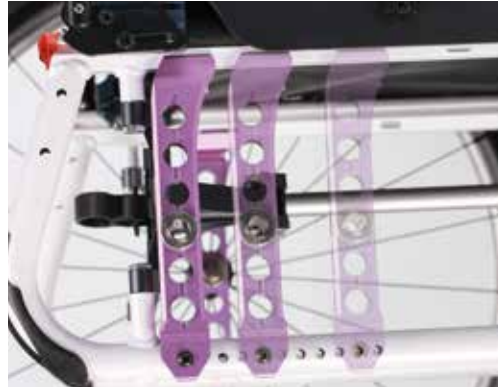

Centro de gravedad

Se pueden realizar ajustes del centro de gravedad de 100mm. en incrementos de 25mm que incluso se pueden minimizar a 12mm.



Ángulo de caída de las ruedas

Ajustes estándar de 0-2°, disponible con ajustes de 3-4° si se requiere.

Parte delantera



Pescantes abatibles

Los pescantes se pueden abatir hacia dentro y hacia afuera.



Pescantes fijos

Está disponible un chasis con pescantes fijos a 80°, para los usuarios más independientes.



Ruedas delanteras

Hay disponibles una selección de ruedas desde 4" hasta 7", incluyendo una rueda blanda con llanta de aluminio muy estilizada.

Opciones



Tapizado de respaldo

Incluye un bolsillo en el respaldo y una cincha reflectante para mejor visibilidad.



Reposabrazos tubulares

Ahora como opción en la **Action5** para conseguir un diseño más activo.



Respaldo abatible

Respaldo abatible sobre el asiento y ajustable en ángulo (-15° / +15°).

Reposabrazos



Antisalpicaduras

Los reposabrazos antisalpicaduras son muy ligeros, ayudando a mantener la ligereza de la silla.



Reposabrazos convencional ajustable en altura

Ajustable en profundidad mediante deslizamiento en el carril del asiento.



Ruedas traseras activas

24" o 25". Radios negros y tapón del eje de color (si color Accent seleccionado).

Otras opciones



NUEVO



Nueva versión Action5 Sport

Versión más activa con chasis plegable y ruedas 24" Spinerig como estándar. Resultados de desplazamiento mejorados y peso reducido a partir de 12 kg.


Rueda Spinerig

Ofrece una mayor rigidez y un peso reducido. Con eje Quick Release de color Accent Azul o Púrpura como opción.



Palanca de desbloqueo de reposabrazos

El reposabrazos se puede desmontar fácilmente y abatir hacia atrás, incluso los usuarios con fuerza limitada en la mano.

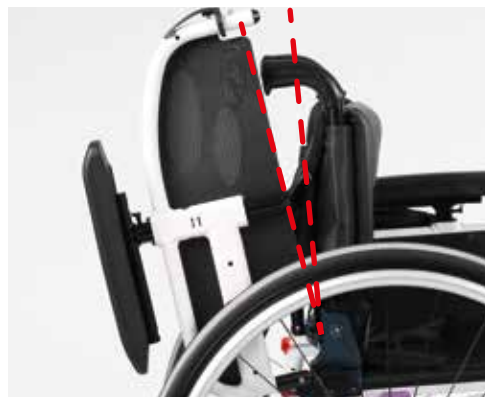

Posición de reposabrazos abatible ajustable

Se puede fijar la posición del reposabrazos con un simple tornillo para facilitar el acceso cuando está abatido hacia atrás.








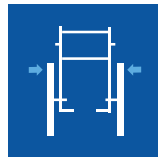




Posición de almohadilla de reposabrazos reversible








La posición del reposabrazos se puede invertir fácilmente para conseguir una almohadilla corta y larga en una sola.

Datos Técnicos ²

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web www.invacare.es

	Ancho de asiento	Profundidad asiento	Ángulo de asiento	Altura asiento	Ángulo respaldo	Altura respaldo	Ángulo parte delantera del chasis
<i>Invacare Action⁵</i>	 305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	 350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	 0 - 9 °	 Delante 360-535mm en intervalos de 25mm Detrás 360-510mm en intervalos de 25 mm	 Fijo a 90° O ajustable a 90° -15°/+15°	 Fijo 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Ajustable 360-400 y 410-490 mm	 Pescante fijo 80° Pescante abatible 70°/80° y 90° Pescante elevable 0-80°

	Regulación de los reposapiés	Altura reposabrazos	Ancho total ³	Ancho plegada	Largo total	Largo total sin reposapiés	Alto total
<i>Invacare Action⁵</i>	 Pescantes abatibles: 200-510 mm Pescantes fijos: 300-530 mm	 186-227 mm 186-266 mm 205-280 mm	 Ancho de asiento + 180mm a Ancho de asiento + 250 mm (freno tambor)	 320 -380 mm	 845 -1205 mm	 670 -860 mm	 701 -1108 mm

	Pendiente máxima	Radio de giro	Peso máximo del usuario	Peso total	Peso de transporte	COMPATIBLE alber	CRASH TEST
<i>Invacare Action⁵</i>	 7°	 1050-1380 mm	 100 y 130 kg	 Desde 12,3 kg ⁴	 Desde 8,3 kg		

Este producto ha sido testado y medido según EN 12183:2014. Las medidas pueden variar en 15 mm / 2°. Además, nuestras sillas cumplen con la normativa ISO 7176:2008 y con la ISO 10542, y disponemos de opciones adicionales que garantizan un mayor nivel de seguridad para el ocupante de la silla mientras viaja en un vehículo. Sin embargo recomendamos que el usuario sea transferido al asiento del vehículo y use los sistemas de retención del vehículo siempre que sea posible. Para más información pre-compra de esta silla, por favor, consulte la web www.invacare.es. Para más información sobre el uso, ajustes y transportabilidad, por favor, refiérase al manual del usuario.


1/ Patentes pendientes

2/ Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

3/ Importante: Con cada grado de caída, el ancho total incrementa de 25 mm aprox.

4/ Action5 Sport: a partir de 12 kg

Colores de chasis

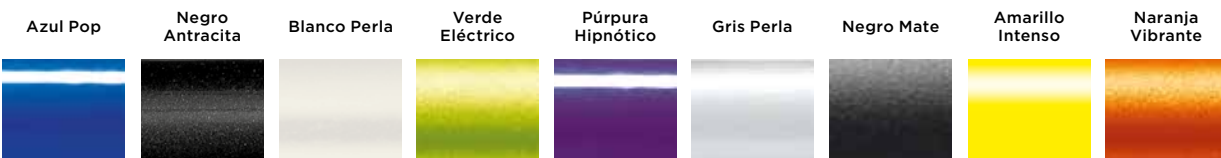

Tapizado

Nylon Negro / Malla Gris



Colores accent

Plata

Azul

Púrpura



Captura el código QR y accede al configurador de colores de la nueva silla manual **Action5**