

Tillverkare	Rullstolsmodell	Monteringsbracket vid beställning av komplett Viamobil 25	Måste beställas separat.	Kommentar 
Invacare	Rea Azalea	1566408		Begränsning i sitsinställning när man har extra körhandtag monterat. Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921. Original tipskydd måste ersättas av 1521032
Invacare	Rea Azalea Minor	1490760		Begränsning i sitsinställning när man har extra körhandtag monterat. Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921. Original tipskydd måste ersättas av 1521032
Invacare	Rea Azalea Tall	1593078		Begränsning i sitsinställning när man har extra körhandtag monterat. Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921. Original tipskydd måste ersättas av 1521032
Invacare	Rea Dahlia 30°	1565999		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tipskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tipskydd önskas
Invacare	Rea Dahlia 45°	1566162		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tipskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tipskydd önskas
Invacare	Rea Spirea 4 NG (wheel position front)	1520365		
Invacare	Rea Spirea 4 NG (wheel position back)	1520366		
Invacare	Rea Spirea 4 NG TV	1566369		
Invacare	Action 5 / MyOn	1566518		
Invacare	XLT 2008/ XLT Swing	1490918	1521197	
Invacare	Rea Spirea 3	1489384		
Invacare	Rea Assist	1467960	1521197	Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tipskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tipskydd önskas
Invacare	Rea Focus	1521215		Monteringsbracket avser montering på Focus tillverkad efter Maj 2011
Invacare	Rea 703 LX	1457496		
Invacare	Rea Bellis	1457521		Med körbåge, beställ 1489921.
Invacare	Rea Silencio 704 with frame modification/ REA Comfort	1457511		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tipskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tipskydd önskas
Invacare	Rea Spirea 2 16"	1467051		Om drivhulets position är bakom ramröret, beställ monteringsbracket 1467296
Invacare	Rea Spirea 2 22/24"	1467295		Om drivhulens placering är bakom ramen använd monteringsbracket 1467296
Invacare	Rea Comfort (Silencio 704)	1457511		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tipskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tipskydd önskas
Invacare	Scan mob Rea 702TV	1465592		
Etac	Cross	1465463		
Etac	Cross 5	1565550		
Etac	Cross 6	1594371		
Etac	Transit	1465588		
Etac	Prio	1566074		Rullstolens tipskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tipskydd önskas
Etac	Prio 3D	1594503		
Etac	Twin	1465509		
Etac	M100 Hjulposition bak	1520607		Rullstolens tipskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tipskydd önskas
Etac	M100 Hjulposition fram	1520606		Rullstolens tipskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tipskydd önskas

Hantverksdesign	HD Balance Drivhjulposition A	1564900		Om stolen har körbåge beställ även 1489921
Hantverksdesign	HD Balance Alla drivhjulpositioner 24"	1594796		Om stolen har körbåge beställ även 1489922
Hantverksdesign	HD 500 24"	1521269		Om stolen har körbåge beställ även 1489922
Hantverksdesign	HD 600 12 1/2"	1521264		Om stolen har körbåge beställ även 1489922
Anatomicsitt	Mika strl 2 & 3	1465680		Om stolen har körbåge beställ även 1489922
Alu Rehab	Netti III	1520312		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tippskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tippskydd önskas
Alu Rehab	Netti 4U Comfort CED/CE	1467954	1489922 / 1490601	Rullstolens tippskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tippskydd önskas. Rekommenderade länkhjul från tillverkare 7"x 1 3/4"
Handicare	Legend	1457537		Rullstolens tippskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tippskydd önskas
Handicare	Emineo Basic	1457534		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tippskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tippskydd önskas
Handicare	Emineo One Tool	1467046		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tippskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tippskydd önskas
Handicare	Bilanx	1457510	1521197	Rullstolens tippskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tippskydd önskas. Extra körhandtag krävs, beställ 1593418.
Sunrise Medical	Breezy 305	1490485	1521197	
Sunrise Medical	Quickie II	1457504		
Berollka	Finess/Sprint	1465392		
Sopur	Classic 160	1520025		

Invacare kan erbjuda monteringssatser till fler rullstolsmodeller,
än ovan listade rullstolar
Vid frågor ring kundservice på telefon: 08-761 70 90, eller din distriktsrepresentant.

Bultar viamobil V25 (Beställs separat utifrån rullstolens sittbredd)			
<i>Bakre</i>		<i>Främre</i>	
Längd (mm)	Artikelnummer	Längd (mm)	Artikelnummer
90	1521218	112	1521226
115	1521219	162	1521227
140	1521220	222	1521225
165	1521221		
190	1521222		
215	1521223		
235	1521224		