

DHCare Sangles

Pour chaque patient. Pour chaque transfert.



Une solution adaptée à chaque situation

10 modèles disponibles dans 7 tailles avec plusieurs tissus pour s'adapter à tous les patients et usages



Une large gamme de sangles de transfert

Pour un ajustement optimal

Notre nouvelle gamme de sangles a été conçue pour assurer un transfert sécurisant, efficace et confortable pour le patient. La gamme propose des solutions avec différents modèles, tailles et tissus afin de garantir que la sangle s'adapte parfaitement à chaque personne, qu'elle ait une légère mobilité réduite ou qu'elle ait besoin d'un soutien corporel complet du corps et de la tête.

Notre équipe de spécialistes et d'ergothérapeutes a passé du temps à s'assurer que ces sangles soient intuitives et faciles à manipuler pour la tierce-personne.

Cela permet de réduire le temps d'installation et d'améliorer la sérénité.

La gamme se compose de 10 modèles, disponibles dans un maximum de 7 tailles et jusqu'à 4 matériaux au choix.

Ce large choix garantit un modèle adapté à chacun et pour chaque type d'utilisation; transfert quotidien du lit au fauteuil roulant ou du fauteuil roulant à la chaise de douche, transfert aux toilettes ...




L'art de choisir

Veillez toujours à ce que la sangle soit spécifiquement conçue pour le lève-personne que vous utilisez, car si vous ne le faites pas, vous risquez de vous blesser gravement. Il existe différents types et tailles de sangles. Le choix de la sangle la plus appropriée pour votre patient assurera sa sécurité et améliorera son confort pendant le transfert.

Il faut prendre en compte :

- Les capacités fonctionnelles du patient, sa taille et son poids
- Le type de transfert
- La forme de la sangle qui correspond au contrôle du corps, par exemple la forme en U ou le maintien du corps entier
- Toute position privilégiée à la suite d'un problème médical, par exemple un accident vasculaire cérébral ou une amputation
- Le type de matériau et le rembourrage éventuel
- Toute sensibilité à la pression dans un domaine quelconque

L'objectif est naturellement de maximiser la sécurité et le confort ; mais, en choisissant le bon modèle, il est également possible de favoriser l'activation de la personne, y compris dans des situations de levage variées.

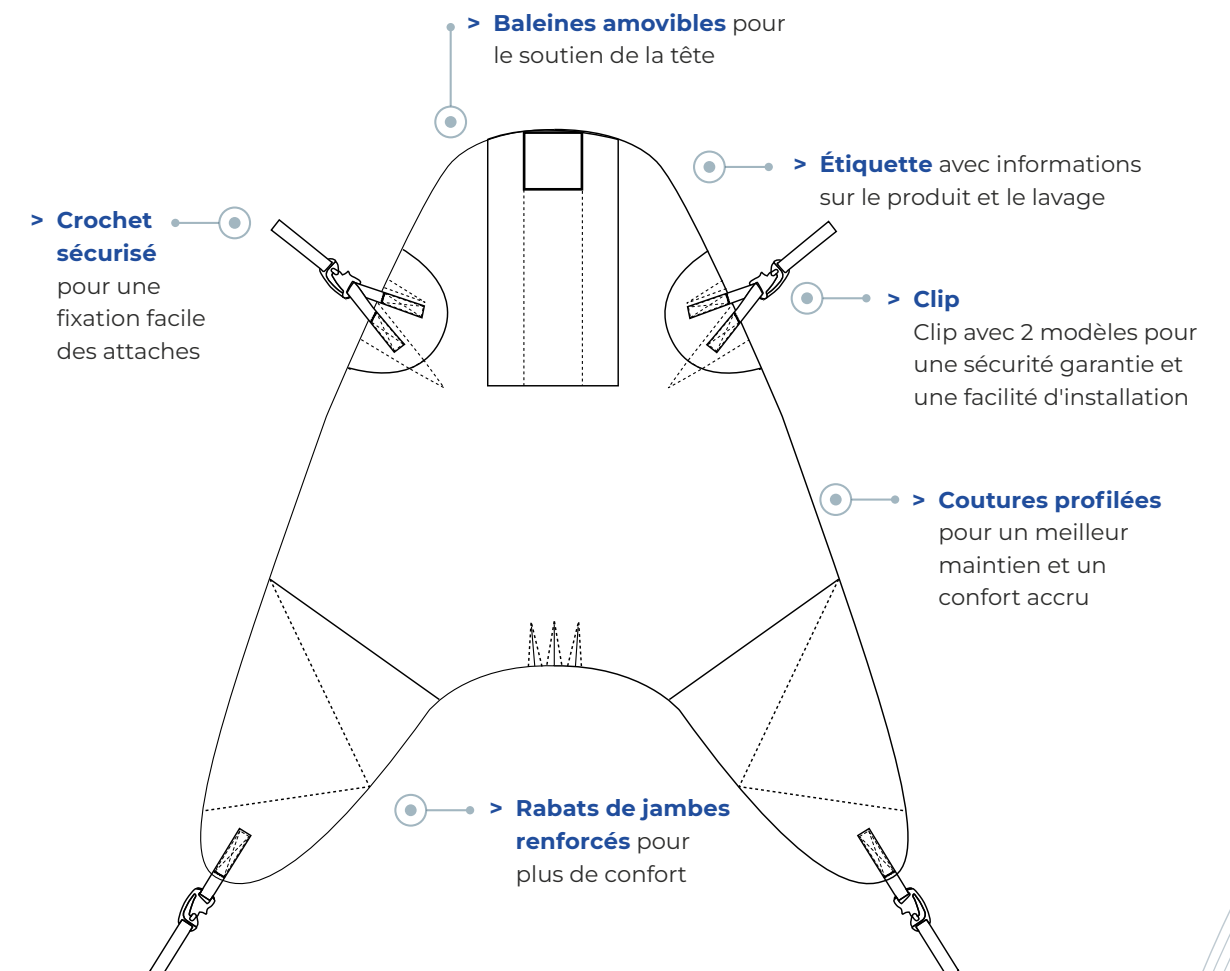

Des modèles différents pour des situations différentes

Sangle Universelle avec t ti re plus



La sangle Universelle avec t ti re plus s'utilise en combinaison avec un l ve personnes passif. Il convient aux transferts courts entre, par exemple, un lit, un fauteuil et un fauteuil roulant, ainsi qu'au relevage depuis le sol.

- Confortable gr ce   une grande surface d'appui, de l'arri re du genou jusqu'au sommet de la t te.
- Enveloppement de la zone d'assise par une coupe cintr e (pinces) apportant plus de confort et un sentiment de s curit .
- Appui t te renforc  par des baleines plastiques amovibles.
- Pans de jambes renforc s pour une r partition uniforme des pressions.

La sangle doit  tre retir e apr s le transfert.

2 Mat riaux :

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Sangle Confort Plus avec t ti re



La sangle Confort Plus avec t ti re est une sangle sur laquelle le patient peut rester assis pendant de longues p riodes. Cette sangle n'a pas besoin d' tre retir e apr s chaque transfert.

- Coupe confort sp cifique permettant de rester en place dans le fauteuil apr s le transfert.
- Enveloppement des fesses accru par rapport   une coupe standard, offrant davantage de soutien des fessiers dans la sangle.
- R duction des manipulations et de la p nibilit  physique pour le soignant.
- R duction du risque au niveau du sacrum/coccyx lorsque le patient reste assis sur la sangle et par r duction des frictions/cisaillements lors des mouvements.
- Id al lorsque la pose et la d pose des sangles sont douloureuses/difficiles.

Pose uniquement en position allong e.

2 Mat riaux :

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Sangle Universelle avec t ti re



- Maintien s curis  de patients pr sentant spasmes en extension, hyper-mobilit  ou troubles du tonus (dystonie), afin de r duire les mouvements incontr l s et d'am liorer le confort pendant levage/transfert l'enveloppement int gral favorise l'inhibition posturale et peut diminuer l'intensit  des spasmes.
- Aide au contr le c phalique : la conception permet au patient de rentrer le menton vers la poitrine (meilleure s curit  posturale).
- Dystonie / motricit  extr me : limitation des mouvements brusques, ressenti de s curit  accru.

3 Mat riaux :

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Sangle Universelle dossier bas



- Maintien de l'ensemble du corps, y compris les  paules
- Convient aux personnes ayant un bon contr le de la t te
- Peut  tre utilis e pour des transferts   partir de la position allong e pour des transferts assis/assis, pour des ramassages au sol

2 Mat riaux :

M

L

XL

Des modèles différents pour des situations différentes

Sangle amputé



- Ajustement confortable avec soutien de la tête (appui-tête renforcé).
- La sangle descend largement sous le coccyx, offrant un soutien accru aux patients sans fonction de genou.
- Pans de jambes courts pour envelopper et stabiliser le moignon.
- Peut être utilisée pour des transferts assis/assis et de la position allongée à assise
- À utiliser uniquement si la pression sur le moignon est tolérée.

3 Matériaux :



Maille 3D Bambou



M L XL XXL

Sangle bariatrique



- La sangle bariatrique comporte plusieurs clips pour assurer un soutien optimal des personnes dont le poids dépasse 150 kg. Cette sangle ne peut être utilisée qu'avec un berceau spécifique bariatrique.
- Le levage séparé des jambes, grâce à une suspension à double clip, assure une répartition confortable des pressions au niveau des jambes.
- Coupe spécifique adaptée aux usagers bariatriques.
 - Suspension 8 points.
 - Convient jusqu'à 350 kg.
 - La sangle bariatrique ne peut être posé/retiré qu'en position allongée.

1 taille en version Maille Filet



Maille

1 taille disponible

Sangle Toilette



- Convient aux personnes ayant un bon contrôle des hanches, du tronc et de la tête
- La ceinture offre un maintien accru du corps et un positionnement sécurisant
 - Peut être utilisée pour des transferts assis/assis

1 Matériau :



Polyester



S M L XL XXL

La bonne taille est primordiale !

Pour que le transfert à l'aide d'un lève-personne mobile se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, il est primordial que la sangle soit de la bonne taille et que le modèle soit adapté au patient et à la situation de levage. Pour déterminer le modèle, la taille et le matériau les mieux adaptés à chaque patient, il est toujours nécessaire de procéder à un essai individuel.

Pour déterminer la taille appropriée d'une sangle de transfert, mesurez la hauteur de la tête aux fesses, et pour un gilet de levage, le tour de taille. Vous trouverez à la page 10 un aperçu des tailles disponibles pour chaque modèle de sangle.

Hauteur de tête-coccyx

Taille	Mesure tête-coccyx
XXS	45 - 60 cm
XS	60 - 80 cm
S	80 - 87 cm
M	85 - 90 cm
L	90 - 97 cm
XL	95 - 102 cm
XXL	102 - 106 cm

La sangle est trop grande :

- Si le patient s'enfonce par l'ouverture inférieure
- Si les sangles de jambe sont positionnées trop loin dans les plis des genoux du patient
- Si l'appui-tête dépasse largement la tête

La sangle est trop petite :

- Si le visage du patient est trop près du fléau
- Si la sangle de jambe frotte l'aine
- Si la sangle semble ou est trop serrée
- Si la tête (jusqu'au sommet de la tête inclus) n'est pas suffisamment soutenue

Sangles pour transfert actif / Verticalisateur

Trasnfert sous-axillaire



La sangle transfert sous-axillaire offre un bon soutien dorsal lors de l'utilisation d'un verticalisateur pour transfert actif. Cela apporte une aide au patient pour se lever tout en faisant travailler son tonus pour limiter sa perte d'autonomie.

- Fabriqué en mousse de polyuréthane. Cela assure une répartition optimale de la pression lors du lever.
- La mousse de polyuréthane a un effet régulateur d'humidité.
- Doté d'une housse en polaire douce, confortable et facile à laver
- Placement bas dans le bas du dos
- Facile à appliquer

Transfert sous-axillaire Confort



La sangle Transfert sous-axillaire Confort est une sangle dorsale qui offre au patient un soutien supplémentaire pour se lever lors d'un transfert actif avec verticalisateur.

- Équipé d'une sangle abdominale pour un soutien dorsal supplémentaire lors de l'utilisation d'un verticalisateur motorisé
- Sangle et ceinture de fixation velcro avec boucle à pression
- Rouleaux en mousse confort sous les aisselles pour une répartition optimale de la pression
- Stabilité accrue pour les personnes souffrant d'un manque de mobilité des bras ou des jambes
- Large sangle dorsale pour un placement confortable contre le bas du dos



Polyester

S M L XL XXL

4 tissus pour couvrir tous les besoins

Polyester - Durable pour une utilisation de courte durée




Le polyester est un matériau tissé, résistant et lisse. Le tissu convient aux transferts courts, la sangle doit être retirée après le transfert. La sangle en polyester est facile à utiliser. Grâce à sa structure adaptée, elle offre l'adhérence souhaitée lors du transfert. Grâce notamment au tissage et au fil utilisé, le tissu est très résistant et ne se déforme pas. Le polyester sèche très rapidement. Après essorage, il est pratiquement sec et prêt à être réutilisé presque immédiatement.

Maille - Pour le bain, la douche et le transfert standard



La maille est un tissu fabriqué en polyester résistant et lisse, perméable à l'eau, elle est idéale pour une sangle utilisée pour la douche ou le bain. Une sangle en Maille est facile à mettre en place et doit être retirée après le transfert. Grâce à sa structure adaptée, elle offre l'adhérence souhaitée lors du transfert. Grâce notamment au tissage et au fil utilisé, le tissu est très résistant et ne se déforme pas. Le polyester sèche très rapidement et la mousse du rembourrage n'absorbe pas l'eau. Après essorage, il est pratiquement sec et peut être réutilisé presque immédiatement.

Tissu 3D - Dissipation optimale de l'humidité et de la chaleur pour les sangles 'ALL DAY'

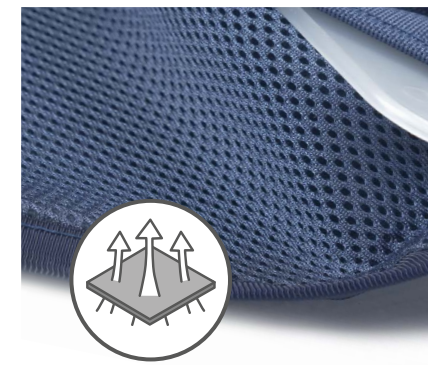

Notre tissu 3D est un polyester à structure très ouverte, où les deux couches de matériau sont maintenues séparées l'une de l'autre. La dissipation de l'humidité et de la chaleur est optimale car les ouvertures à l'arrière sont plus grandes que sur le côté où est assis le patient. Ce matériau absorbe très peu l'humidité et favorise une transpiration optimale. Tout ceci garantit le même effet d'évacuation de l'humidité et de la chaleur que les t-shirts de sport modernes. Après lavage et essorage, cette sangle sort de la machine à laver presque sèche et est quasiment prête à être réutilisée. Un autre avantage de ce matériau est son effet d'amortissement.

Bambou - Confortable, extensible et thermorégulateur, idéal pour les sangles 'ALL-DAY'



tricot constitué d'une combinaison de fibre naturelle d'origine végétale (rayonne) et de fil polyester, et il est également antibactérien. Le bambou se caractérise par une texture très douce, agréable au toucher. Ce tricot présente une élasticité confortable, permettant à la sangle d'épouser la morphologie pendant le levage. La technique de tricotage crée des micro boucles dans la matière, conférant à la sangle une structure ouverte qui favorise la régulation de la chaleur. La fibre naturelle de bambou absorbe l'humidité ; par conséquent, après lavage, la sangle doit sécher avant toute réutilisation.

Confort prolongé : toucher très doux et élasticité offrant un effet "seconde peau" – idéal pour les sangles laissées en place entre deux transferts.
Thermorégulation : micro boucles et structure ouverte pour évacuer la chaleur et mieux gérer l'humidité, améliorant la tolérance cutanée.
Hygiène : caractère antibactérien du textile (bambou/rayonne + polyester).

Un système d'accroche SECURISEE

Fixations diverses et innovantes pour un maximum de sécurité
Nous proposons 3 types de fixation différentes suivant le fléau choisi.
Il existe 2 types de clips adapté au berceau 4 points et 1 fixation à boucle adaptée au fléau 2 points.

SECURITE et ERGONOMIE

Clip UC : verrouillage mécanique captif (sécurité anti décrochage).

Le clip UCP, fiable et performant, se fixe facilement sur le berceau et assure un transfert sûr de par la force de traction exercée sur le clip par le poids du patient qui rend impossible tout détachement de la sangle. Les extrémités en nylon facilitent la fixation et le retrait du clip.



iQ clip : double sécurité, impossible à ouvrir sous charge

Le détachement accidentel de la sangle est impossible grâce au double mécanisme de sécurité du clip IQ: conception innovante avec ressort combinée à la force de traction exercée sur le clip par le poids du patient qui rend impossible tout détachement de la sangle. Même si, par exemple, un patient souffrant de spasmes touche le clip, celui-ci restera fixé à coup sûr.

Boucles

La sangle à boucles est équipée de plusieurs boucles, permettant d'ajuster l'angle de levage du patient selon la situation. Ces sangles ne peuvent être utilisées que sur le fléau avec crochets. (fléau 2 points sur gamme Wendydrive2)



Choix du fléau



Fléau 2 points

La solution standard pour les sangles à boucles. Disponible en différentes largeurs.



Fléau étoile

Donne à la personne plus grande/plus lourde, plus d'espace et une légère inclinaison vers l'arrière. Pour les sangles à boucles.



Berceau 4 points

Le patient peut être incliné manuellement en position assise ou couchée. Le berceau assure l'équilibre de la position. Pour les sangles à clips.



Berceau 4 points électrique



Berceau 4 points à inclinaison électrique permettant d'incliner le patient en position assise ou couchée. Pour les sangles à clips.



Berceau 4 points bariatrique

Offrir plus d'espace et de confort aux patients jusqu'à 400 kg. Convient pour les sangles à clips.

Guide de choix ▼

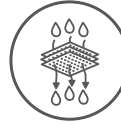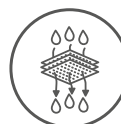Modèle	Dimensions	Fxation	Polyester	Maille	3D	Bambou				
Universelle avec têteière plus 	45 - 60 cm	UCP-Clip								
	60 - 80 cm									
	80 - 87 cm									
	85 - 60 cm	IQ-Clip								
	90 - 97 cm									
	95 -102 cm									
102 -106 cm										
Confort Plus avec têteière 	45 - 60 cm	UCP-Clip								
	60 - 80 cm									
	80 - 87 cm									
	85 - 60 cm	IQ-Clip								
	90 - 97 cm									
	95 -102 cm									
102 -106 cm	Lussen									
Universelle avec têteière 	45 - 60 cm	UCP-Clip								
	60 - 80 cm									
	80 - 87 cm									
	85 - 60 cm	IQ-Clip								
	90 - 97 cm									
	95 -102 cm									
102 -106 cm	Lussen									
Universelle dossier bas 	85 - 90 cm	UCP-Clip								
	90 - 97 cm									
	95 -102 cm	IQ-Clip								
Amputé 	85 - 60 cm	UCP-Clip								
	90 - 97 cm									
	95 -102 cm	IQ-Clip								
	102 -106 cm									
Bariatrique 	1 maat	UCP-Clip								
		IQ-Clip								
Toilette 	80 - 87 cm	UCP-Clip								
	85 - 60 cm									
	90 - 97 cm									
	95 -102 cm	IQ-Clip								
	102 -106 cm									

Tel: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@dhcare.com
www.dhcare.be/fr

DHCare Belgium SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique

