

Tilbanden

Voor elke client, voor elke transfer



Voor elke situatie een passende oplossing

15 modellen · verkrijgbaar in maximaal 6 maten · keuze uit 4 stofsoorten



Het assortiment tilbanden

Ontworpen voor de optimale pasvorm

Ons assortiment tilbanden is ontwikkeld vanuit één uitgangspunt: voor iedere gebruiker en elke zorgsituatie de juiste pasvorm. De tilbanden zijn ontwikkeld in samenwerking met ergotherapeuten en zorgprofessionals en combineren veiligheid, comfort en gebruiksgemak. Hierdoor wordt de tijd voor het aanleggen van de tilband verkort en krijgen zorgverleners meer vertrouwen tijdens iedere transfer.

Het assortiment bestaat uit vijftien modellen, verkrijgbaar in maximaal zes maten en tot drie verschillende materiaaluitvoeringen.

Dankzij deze uitgebreide keuze is er voor vrijwel iedere gebruiker en iedere toepassing een geschikte tilband beschikbaar, of het nu gaat om een dagelijkse transfer van bed naar rolstoel of fauteuil, een toilettransfer of ondersteuning tijdens het douchen of baden.



De kunst van het kiezen

Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van de juiste tilband voor iedere individuele situatie. Afhankelijk van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de gebruiker, en het type transfer dat moet worden uitgevoerd, wordt eerst het juiste model tilband gekozen. Vervolgens worden de juiste maat en het meest geschikte materiaal geselecteerd. Tot slot worden de passende bevestiging, het juiste tiljuk en eventuele accessoires gekozen om een veilige en optimale transfer te garanderen. Het doel is vanzelfsprekend om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te maximaliseren. Door de juiste tilband te kiezen, kan de gebruiker bovendien zo actief mogelijk worden betrokken bij de transfer, ook in uiteenlopende tilsituaties. In deze brochure begeleiden wij u stap voor stap bij het kiezen van de juiste tilband voor uw specifieke situatie.

Zorgvrager/situatie



Model




Maat



Materiaal



Passende bevestiging en tiljuk

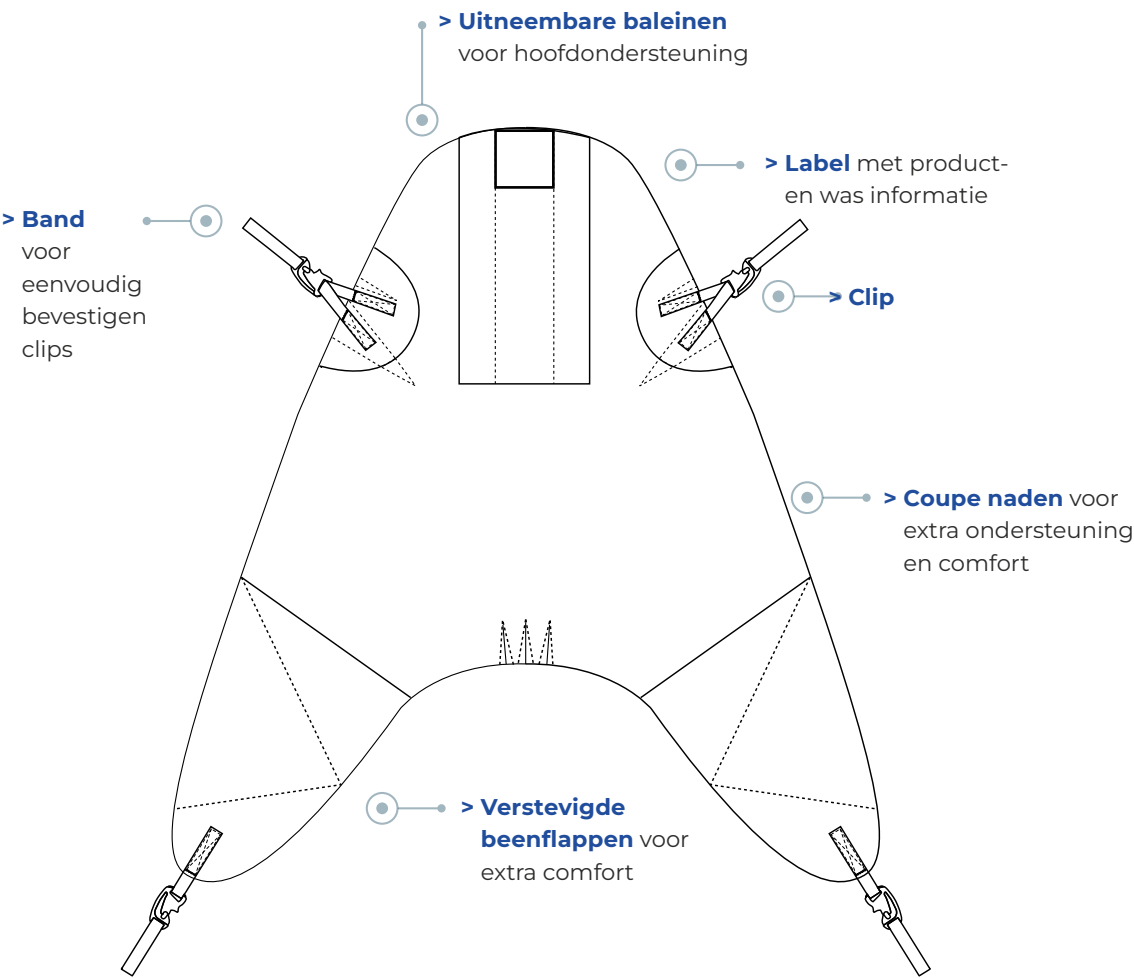


Verschillende modellen voor verschillende situaties

Standaard tilband



De standaard tilband wordt gebruikt in combinatie met een passieve tillift. De tilband is geschikt voor korte transfers, bijvoorbeeld tussen bed, stoel en rolstoel, of voor het optillen van een gebruiker vanaf de vloer.

- Comfortabel dankzij het grote ondersteuningsoppervlak, van de knieholte tot aan het hoofd.
- Het zitgedeelte heeft een voorgevormde pasvorm voor extra comfort en een veilig gevoel.
- De hoofdsteun is verstevigd met uitneembare baleinen.
- De beenpanden zijn verstevigd voor een gelijkmatige drukverdeling.
- De tilband dient na de transfer te worden verwijderd.

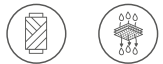

Polyester Netstof

XXS XS S M L XL XXL

Verblijfsband



De verblijfstilband is een comfortabele tilband waarop de gebruiker gedurende langere tijd kan blijven zitten. Hierdoor hoeft de tilband niet na iedere transfer te worden verwijderd.

- De speciale comfortpasvorm maakt het mogelijk de tilband na de transfer in de stoel te laten zitten.
- Het zitgedeelte omsluit en ondersteunt de billen beter dan de standaarduitvoering.
- Vermindert de fysieke belasting en werkdruk voor zorgverleners en verkleint het risico op drukletsel wanneer de gebruiker op de tilband blijft zitten.
- Ideaal wanneer het aanbrengen en verwijderen van een tilband pijnlijk of moeilijk is.
- Kan uitsluitend in liggende positie worden aangebracht.



3D stof Bamboe

XXS XS S M L XL XXL

Anti-spasme tilband



Uit ervaring blijkt dat dit gevoel van veiligheid en geborgenheid strekspasmen aanzienlijk kan verminderen. De zorgvrager kan daarbij ook de kin meer naar de borst brengen.

- Geschikt voor gebruikers met strekspasmen.
- Geschikt voor gebruikers die zeer onrustig zijn.
- Geschikt voor gebruikers met een spierspanningsstoornis (dystonie).
- Verkrijgbaar als In verblijfstilband of in netmateriaal.
- Voorzien van extra banden voor hoofdondersteuning, een buikfixatie en extra lussen aan de beenslips.
- De volledig omsluitende vorm geeft de gebruiker een comfortabel, veilig en geborgen gevoel.
- De hoofdsteunbandjes zorgen ervoor dat de kin meer op de borst wordt gebracht



Netstof 3D stof Bamboe

XXS XS S M L XL XXL

Longseat tilband



De longseat tilband is een tilband die speciaal is ontwikkeld voor alle transfers van zorgvragers met een enkele of dubbele bovenbeenamputatie die geen druk op de stomp kunnen verdragen.

- Rechthoekige band zonder beenslips
- Vormt zich naar het lichaam van de gebruiker
- Optioneel te gebruiken met verbredingsstang/ been clip verbreder voor meer ruimte tussen de benen
- Been clips of lussen worden via buitenzijde bovenbenen bevestigd aan het juk
- Longseat tilband kan alleen in liggende positie worden aangebracht/verwijderd



Netstof 3D stof

M L XL

Verschillende modellen voor verschillende situaties

Amputatie tilband



De amputatie-tilband is een tilband die speciaal is ontwikkeld voor alle transfers van zorgvragers met een enkele of dubbele bovenbeenamputatie.

- Comfortabele pasvorm met goede hoofdondersteuning
- Tilband loopt ver onder de stuit door voor extra ondersteuning voor zorgvrager zonder kniefunctie
- Voorzien van korte beenslips voor het omsluiten van de stomp
- Vereist dat zorgvrager druk op de stomp kan verdragen

Bariatrische tilband



De bariatrische tilband heeft meerdere clips voor optimale ondersteuning van mensen met obesitas. Deze tilband is enkel te gebruiken in combinatie met een bariatrisch juk.

- Alleen te gebruiken in combinatie met bariatrisch juk
- Afzonderlijk tillen van de benen door een dubbele clipophang zorgt voor comfortabele drukverdeling op de benen
- Speciale pasvorm voor zorgvragers met ernstige obesitas
- 8 punts ophanging
- Geschikt tot 350 kg
- De Bariatrische tilband kan alleen in liggende positie worden aangebracht/verwijderd

Toiletband DeLuxe



Toiletband DeLuxe is specifiek ontworpen voor directe transfers van niet-mobiele zorgvragers naar het toilet. De band is voorzien van een hoofdsteun.

- De toiletband laat de billen vrij. Zo kan de zorgverlener de onderkleding naar beneden schuiven, waarna de zorgvrager kan plaatsnemen op het toilet
- Gemaakt van zacht en duurzaam polyester met een stevige beenpolstering
- Voor het gebruik van de toiletband is een goede schouderfunctie een vereiste
- Gebruik van toiletband DeLuxe voorkomt een extra transfer via het bed



Netstof 3D stof Bamboe



M L XL XXL



Netstof

1 maat beschikbaar



Polyester



S M L XL XXL

Actieve tilbanden

Lowzone tilband



De lowzone tilband geeft goede rugondersteuning bij gebruik van een actieve lift. Dit geeft de zorgvrager n t dat extra stukje ondersteuning bij het opstaan.

- Gemaakt van polyurethaan schuim. Dit zorgt voor optimale drukverdeling bij het opstaan.
- Het polyurethaan schuim heeft een vochtregulerende werking.
- Voorzien van comfortabel en makkelijk uitwasbare zachte fleece hoes
- Plaatsing laag in de onderrug
- Gemakkelijk aan te brengen

1 maat beschikbaar

Tilvest DeLuxe



De Tilvest DeLuxe is een rugband die zorgvragers extra veel ondersteuning biedt bij het gaan staan in een actieve lift.

- Voorzien van buikband voor extra veel ondersteuning in de rug bij gebruik van een actieve tillift.
- Klittenband en fixatiegordel met klikgesp
- Comfortabele okselrollen van schuimrubber voor optimale drukverdeling
- Extra stabiliteit voor mensen die een arm- of beenfunctie missen
- Brede rugband voor comfortabele plaatsing tegen de onderrug



Polyester

S M L XL XXL

Stap 1

Stap 2



The right size is everything!


Selecteer de juiste maat

Om transfers met een plafondlift of passieve tillift zo veilig en comfortabel mogelijk te laten verlopen, is het essentieel dat de tilband de juiste maat heeft en dat het model geschikt is voor de specifieke gebruiker en transfersituatie. Een individuele passing is noodzakelijk om te bepalen welk model, welke maat en welk materiaal het meest geschikt zijn voor de gebruiker.

Voor het bepalen van de juiste maat van een passieve tilband wordt de afstand gemeten van de bovenkant van het hoofd tot het stuitbeen. Voor een tilvest wordt de tailleomtrek gemeten.

Op pagina 12 vindt u een overzicht van de beschikbare maten per tilbandmodel. De exacte maat dient echter altijd te worden vastgesteld door de tilband bij de gebruiker te passen.

Passieve tilband

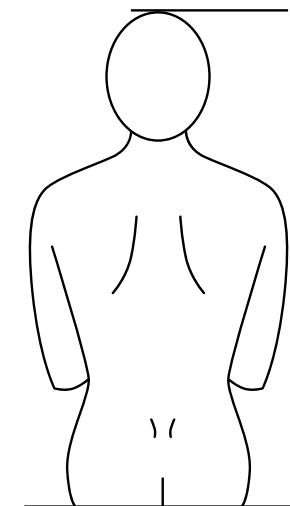

Afstand van de bovenkant van het hoofd tot het stuitbeen

Maat	Afstand van de bovenkant van het hoofd tot het stuitbeen
XXS	45 - 60 cm
XS	60 - 80 cm
S	80 - 87 cm
M	85 - 90 cm
L	90 - 97 cm
XL	95 - 102 cm
XXL	102 - 106 cm


De tilband is te groot:

- Als het zitvlak van de zorgvrager te ver naar buiten schuift door de onderste opening
- Als de beenslips zich te veel in de knieholtes van de zorgvrager bevinden
- Als de hoofdsteun ver boven het hoofd uitsteekt

De tilband is te klein:

- Als het gezicht van de zorgvrager zich te dicht bij het tiljuk bevindt
- Als de beenslips schuren in de lies
- Als de tilband er te strak uit ziet of te strak aanvoelt
- Als het hoofd (tot en met de kruin) niet voldoende ondersteund wordt

Actieve tilbanden

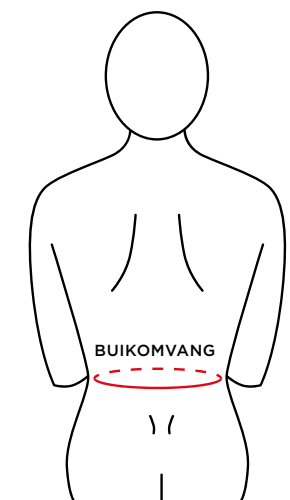

Maat	Tailleomtrek voor het tilvest
S	58 - 80 cm
M	74 - 96 cm
L	94 - 125 cm
XL	114 - 136 cm
XXL	128 - 158 cm


Vier functionele materialen

Polyester - Duurzaam voor kortdurend gebruik




Polyester is een geweven, sterk en glad materiaal. De stof is geschikt voor korte transfers en de tilband dient na de transfer verwijderd te worden. Een polyester tilband is gemakkelijk aan te brengen. Door de juiste structuur heeft dit wel de gewenste stroefheid bij het uitvoeren van de transfer. Mede door de weving en het gebruikte garen is de stof erg duurzaam en ontstaan er geen ladders in de stof. Polyester droogt zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en bijna direct opnieuw te gebruiken.

Netstof - Voor baden, douchen en standaard transfer

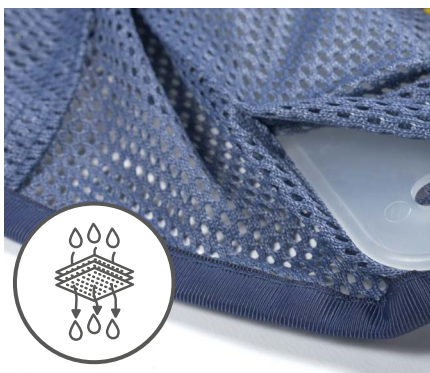

De waterdoorlatende netstof is ideaal voor een tilband die wordt gebruikt voor douchen of baden. De netstof is gemaakt van polyester, een geweven, sterk en glad materiaal. Een polyester tilband is gemakkelijk aan te brengen en dient na de transfer verwijderd te worden. Door de juiste structuur heeft dit wel de gewenste stroefheid bij het uitvoeren van de transfer. Mede door de weving en het gebruikte garen is de stof erg duurzaam en ontstaan er geen ladders. Polyester droogt zeer snel en het foam in de polstering neemt geen water op. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en is het bijna direct opnieuw te gebruiken.

3D stof - Optimale vocht- en warmteafvoer, geschikt voor verblijfsband

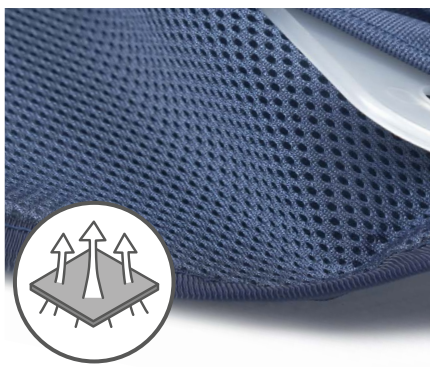

Onze 3D stof is een polyester met een zeer open structuur, waarbij het dubbellaags materiaal op afstand van elkaar worden gehouden. Vocht- en warmteafvoer zijn optimaal doordat er aan de achterkant grotere gaatjes zitten dan aan de kant waarop de zorgvrager zit. Het materiaal neemt nauwelijks vocht op en stimuleert optimale transpiratie. Dit alles zorgt voor hetzelfde vocht- en warmte-afdrijvende effect als bij moderne sportshirts. Na het wassen en centrifugeren komt deze band al bijna droog uit de wasmachine en is deze alweer bijna klaar voor gebruik. Bijkomend voordeel van dit materiaal is dat het een dempende werking heeft.

Bamboe - Comfortabele stretch en warmteregulatie, ideaal voor verblijfsband



Bamboe is een gebreid textiel dat bestaat uit een combinatie van plantaardige, natuurlijke vezel (rayon) en een polyester garen en is daarnaast anti-bacterieel. Bamboe kenmerkt zich door de zachte structuur die fijn aanvoelt. Dit gebreide textiel heeft een comfortabele stretch-eigenschap waardoor de band zich vormt naar het lichaam tijdens het tillen. Door de breitechniek ontstaan microlusjes in het materiaal die de band een open structuur geven. Dit stimuleert het reguleren van de warmte. De natuurvezel van bamboe neemt vocht op. Daarom moet deze tilband wel even drogen voor hergebruik na het wassen.

Passende bevestiging

Wij bieden de keuze uit drie verschillende bevestigingssystemen voor het bevestigen van de tilband aan de tillift:

Twee typen clips en een lusbevestiging, afhankelijk van het type tiljuk van de tillift. De lusbevestiging is uitsluitend bedoeld voor gebruik met tilliften die zijn voorzien van een lusophanging. Tilbanden met clips zijn uitsluitend geschikt voor tilliften met een zogenaamde paddenstoelvormige ophanging.

Ontdek hier de verschillende bevestigingstypes:



De vertrouwde UCP-clip

De vertrouwde UCP-clip is eenvoudig te bevestigen aan het juk en zorgt voor een veilige transfer. Door de vormgeving makkelijk aan het juk te bevestigen. De nylon uiteinden maken het makkelijk om de clip vast en los te maken.



De IQ Clip, vast is zeker

Ongewenst losraken van de tilband is onmogelijk dankzij de dubbele beveiliging. Dat betreft in de eerste plaats de borging van de sluiting door een veer in de iQ-clip. Ten tweede maakt trekkracht aan de clip door het gewicht van de cliënt het – dankzij de innovatieve vormgeving – onmogelijk dat de band losschiet. Ook als bijvoorbeeld een cliënt met spasmen de clip raakt, blijft deze gegarandeerd vastzitten.



Lussen: Gemak in eenvoud

De tilband met lussen is voorzien van meerdere lussen, zodat de hoek waarin de zorgvrager in wordt getild aangepast kan worden aan de situatie. Deze tilbanden kunnen uitsluitend worden gebruikt op jukken die geschikt zijn voor tilbanden met lussen. Alleen van toepassing op verblijfs- en de antispasme tilbanden.

Jukken



Tweepunts tiljuk

De standaard oplossing voor tilbanden met lussen. Verkrijgbaar in verschillende breedte maten.



Spin tiljuk

Geeft de grotere/ zwaardere zorgvrager meer ruimte en een lichte kanteling achterover. Voor tilbanden met lussen.



Balans tiljuk

De zorgvrager kan handmatig in zittende of liggende positie worden gekanteld. Het tiljuk zorgt dat de positie in evenwicht blijft. Voor tilbanden met clips.



Elektrisch tiljuk

Elektrisch kantelbaar tiljuk waar de zorgvrager naar zittende of liggende positie gekanteld kan worden. Voor tilbanden met clips.



Bariatrische tiljuk

Geeft zorgvragers tot 400 kg extra ruimte en comfort. Geschikt voor tilbanden met clips.

Tilbanden overzicht ▼

Stap 1		Stap 2		Stap 3		Stap 4					
Model		Maatvoering		Bevestiging	Polyester	Netstof	3D stof	Bamboe			
Standaard		45 - 60 cm	XXS	UCP Clip							
		60 - 80 cm	XS								
		80 - 87 cm	S								
		85 - 90 cm	M	IQ Clip							
		90 - 97 cm	L								
		95 -102 cm	XL								
		102 -106 cm	XXL								
Verblijfsband		45 - 60 cm	XXS	UCP Clip							
		60 - 80 cm	XS								
		80 - 87 cm	S								
		85 - 90 cm	M	IQ Clip							
		90 - 97 cm	L								
		95 -102 cm	XL								
		102 -106 cm	XXL								
Anti-spasme		45 - 60 cm	XXS	UCP Clip							
		60 - 80 cm	XS								
		80 - 87 cm	S								
		85 - 90 cm	M	IQ Clip							
		90 - 97 cm	L								
		95 -102 cm	XL								
		102 -106 cm	XXL								
Long seat		85 - 90 cm	M	UCP Clip							
		90 - 97 cm	L								
		95 -102 cm	XL	IQ Clip							
Amputatie		85 - 90 cm	M	UCP Clip							
		90 - 97 cm	L								
		95 -102 cm	XL	IQ Clip							
		102 -106 cm	XXL								
Bariatrisch		1 size		UCP Clip							
				IQ Clip							
Toiletband Deluxe		80 - 87 cm	S	UCP Clip							
		85 - 90 cm	M								
		90 - 97 cm	L	IQ Clip							
		95 -102 cm	XL								
		102 -106 cm	XXL								