

AQUATEC®

Ocean Family



Mobila hygienstolar





Aquatec **Ocean 2**

- Stabil, rostfri stålram
- Individuellt justerbar sitshöjd: inga verktyg krävs.
- Maskintvättbart justerbart ryggstöd med quick-release spännen.
- Utrymmessparande körhandtag möjliggör optimal position över toaletten.
- Ergonomiska uppfällbara armstöd.
- För enkel förflyttning är fotstöden höjjusterbara, svängbara och avtagbara.
- Uppfällbara fotplattor med justerbart hälbånd säkerställer en trygg position.
- Alla hjul är bromsbara

Ocean 2 finns i följande varianter:

- Standardversion med länkhjul.
- Med 24" drivhjul, quick release-funktion och fyra länkhjul.
- XL-versionen med breddad ryggram (80 mm bredare mellan armstöden) med 4 låsbara länkhjul.
- Standardmodellen kan utrustas i efterhand med 24" hjul (inte XL-versionen).

Egenskaper och tillbehör



Drivhjul 24" **Ocean 2**
24" drivhjul inkl bromsar, med quick release-funktion. Bakhjulen är fortsatt påmonterade.

Ocean 2 XL

Mer utrymme mellan armstöden och max brukarvikt på 180 kg.



Individuellt justerbar sitshöjd: Inga verktyg krävs.



Enkel att ta isär och sätta ihop vid exempelvis resa.



100 % rostfri.

Aquatec **Ocean Vip**



- Stabil rostfri stålram
- Sitstiltan kan justeras individuellt (tilt 1° framåt, 35° bakåt).
- Gasfjäder av rostfritt stål.
- Extremt stabil även vid maximal tilt.
- Enkel höjdjustering för sitthöjden i 3 steg, inga verktyg krävs.
- Uppfällbara fotplattor med justerbart hälband säkerställer en trygg position
- Mycket bekväm sits med hög sittkomfort.
- Justerbart ryggstöd som är lätt att justera, ta bort och tvätta i maskin.
- Enkel höjdjustering för fotstöden
- Armstöden kan höjdjusteras och och fällas upp
- I standardversionen ingår riktningsslås vilket gör det enklare att köra i långa korridorer. Resterande hjul är låsbara.

Ocean Vip finns i följande varianter:

- Standardversion med länkhjul.
- Standardversion med länkhjul och gejder.
- **XL**-version (mer utrymme mellan armstöden) med länkhjul.
- **Ocean Vip** kan eftermonteras med XL-armstöd.
- **Ocean Vip** kan uppgraderas till en **Ocean Dual Vip** med fällbar rygg

Egenskaper och tillbehör



Sitstilt

Tilt 1° framåt, 35° bakåt.

Huvudstöd

Justerbart i höjd och djupled.



Riktningsspärr

Vänster bakhjul har riktningsspärr för enklare hantering i långa korridorer.



Justerbar sitthöjd

Justerbar i 3 steg, inga verktyg krävs.

Aquatec *Ocean Dual Vip*



- Sitstilen kan justeras individuellt (tilt 1° framåt, 35° bakåt).
- Två extra gasfjädrar i rostfritt stål för att sänka ryggstödet (lutningsvinkel 10° - 50°).
- Handtag med säkerhetsspärr för att förhindra oavsiktlig fällning av ryggstödet.
- Stabil också vid maximal bakåtlutning. Inkluderar tippskydd.
- Justerbart ryggstöd som är lätt att justera, ta bort och tvätta i maskin.
- Justerbar sitthöjd.
- För enkel förflyttning är fotstöden höjdjusterbara, svängbara och avtagbara utan verktyg.
- Fotplattorna är uppfällbara och har justerbara hälband.
- Armstöden kan fällas upp och även höjdjusteras.

Ocean Dual Vip finns i följande varianter:

- Standardversion med länkhjul.
- ***Ocean Vip*** kan i efterhand utrustas med fällbart ryggstöd för ***Ocean Dual Vip*** och förses med tippskydd.
- ***Ocean Dual Vip*** kan utrustas med XL armstöd.

Egenskaper och tillbehör



Sittenhet 0°, ryggstöd 25°.



Tiltad sittenhet 35°, ryggstöd 50°.



Inklusive tippskydd.

Aquatec *Ocean E-Vip*



- Sitthöjden justeras elektriskt helt steglöst mellan 500 och 1050 mm.
- Stolen tiltas elektriskt framåt 5° och bakåt hela 35°.
- Stolen är stabil även vid maximal tilt och maximalt höjdläge.
- Överskådlig handkontroll för enkel justering av sitthöjd och sitstilt (endast 4 knappar).
- Idealisk att använda i duschen då alla elektroniska komponenter är vattentäta.
- Kan rengöras med maskintvätt i upp till 85°C! Batteriet ska då tas bort.
- Laddningsbara batterier som är lätta att ta av, kan även laddas på stolen.
- Tilten är oberoende av sitthöjdsinställningen
- Fotplattorna är höjjusterbara utan verktyg och kan svängas undan eller tas av för enkel förflyttning.
- Armstöden kan fällas upp.
- Ett av hjulen har riktningsspärrfunktion, vilket underlättar att köra stolen i långa korridorer

Ocean E-Vip finns i följande varianter:

- Standardversion med länkhjul.
- **Ocean E-Vip** kan utrustas med XL-armstöd.

Egenskaper och tillbehör



Maximal lutningsvinkel och högsta höjdläge.



Avtagbara batterier.



Överskådlig och lättanvänd handkontroll.


Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se


Artikelnummer	Aquatec Ocean 2	Aquatec Ocean 2 24"	Aquatec Ocean 2 XL
Hygienstol med länkhjul	1534327		1558672
Hygienstol med 24" drivhjul		1534329	
Mått			
Sittbredd	480 mm (A)	480 mm (A)	480 mm (A)
Sittdjup	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)
Sitthöjd	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)
Totalbredd	560 mm (D)	675 mm (D)	640 mm (D)
Totaldjup	900 mm (E)	1060 mm (E)	900 mm (E)
Totalhöjd	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)
Djup utan fotstöd	700 mm (G)	855 mm (G)	700 mm (G)
Fotplatta djup	155 mm (H)	155 mm (H)	155 mm (H)
Höjd till armstöd	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)
Höjd, fotstöd till sits	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)
Höjd under sits:			
med gejder	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)
utan gejder	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)
Höjd, sits till armstöd	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)
Bredd mellan armstöd	460 mm (M)	460 mm (M)	540 mm (M)
Sitthål, bredd	205 mm	205 mm	205 mm
Sitthål, djup	320 mm	320 mm	320 mm
Gradering, höjdjustering	25 mm	25 mm	25 mm
Ø Länkhjul	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Drivhjul	-	24" (610 mm)	-
Bredd mellan 24" drivhjulen	-	54 cm (N)	-
More info			
Vikt	14.5 kg	19.5 kg	14.5 kg
Max brukarvikt	150 kg	150 kg	180 kg
Färg	Vit	Vit	Vit

Hälband är inkluderade vid leverans. Bäckben och gejder ingår inte vid leverans.


Ocean 2 med länkhjul

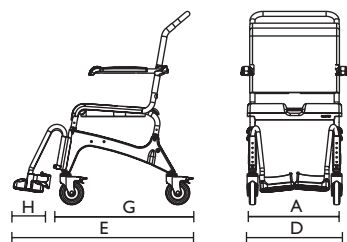

Ocean 2 med 24" drivhjul

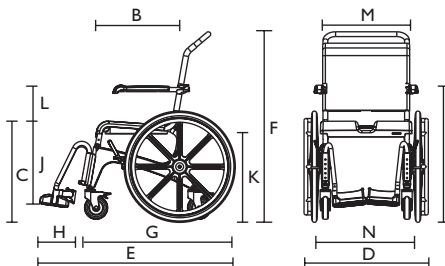


Ocean 2 XL

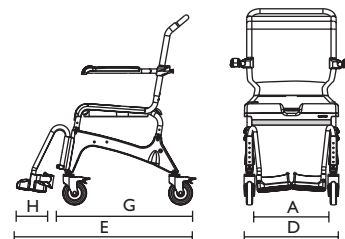


Artikelnummer	Aquatec Ocean Vip med tilt	Aquatec Ocean Vip XL med tilt	Aquatec Ocean Dual Vip med tilt och tillbakalutning	Aquatec Ocean E-Vip
Hygienstol med länkhjul	1470000	1470788	1470829	1471208
Hygienstol med länkhjul och gejder	1470712			
Mått				
Sittbredd	500 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	480 mm (A)
Sittdjup	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)
Sitthöjd	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	500 - 1050 mm (C)
Totalbredd	595 mm (D)	625 mm (D)	625 mm (D)	730 mm (D)
Totaldjup	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1010 mm (E)
Total höjd utan justerbart huvudstöd	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1070 - 1620 mm (F)
Djup utan fotstöd	845 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	1010 mm (G)
Fotplatta djup	160 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	155 mm (H)
Höjd till armstöd	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	730 - 1320 mm (I)
Höjd, fotstöd till sits	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)
Höjd under sits: med gejder utan gejder	420 - 520 mm (K) 440 - 540 mm (K)	420 - 520 mm (K) 440 - 540 mm (K)	420 - 520 mm (K) 440 - 540 mm (K)	420 - 970 mm (K) 465 - 1015 mm (K)
Höjd, sits till armstöd	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	230 - 270 mm (L)
Bredd mellan armstöden	475 mm (M)	555 mm (M)	475 mm (M)	470 mm (M)
Sitthål, bredd	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
Sitthål, djup	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Tiltvinkel sits	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°	-5° till 35°
Tiltvinkel rygg	-	-	10° - 50°	-
Gradering, höjjustering	50 mm	50 mm	50 mm	steglös
Ø Länkhjul	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
More info				
Vikt	23.5 kg	23.5 kg	28.3 kg	39 kg
Max brukarvikt	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Färg	Vit	Vit	Vit	Vit

Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip

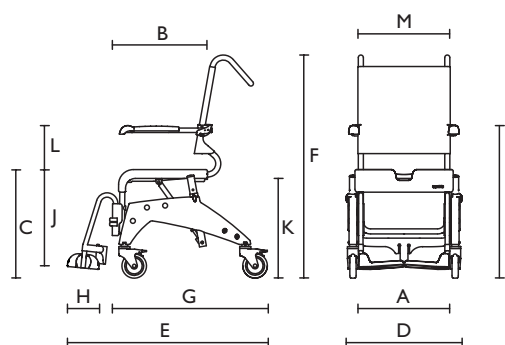

Ocean E-Vip

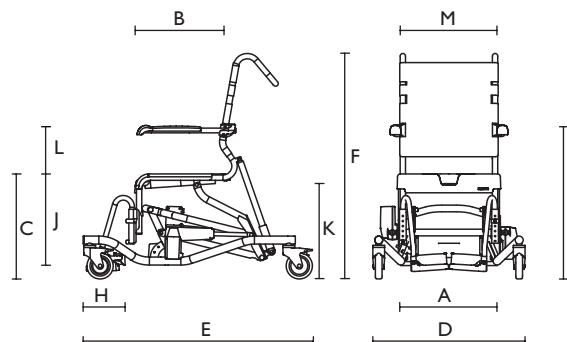



Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga

