



Post 4: Dynamiske overmadrasser

Invacare®

MicroAIR® MA50CE

Den beste kombinasjon av
komfort og teknologi

Trusted Solutions,
Passionate People



MicroAir MA50CE er en teknisk innovativ og klinisk effektiv madrass med mange funksjoner som gir meget god trykkavlastning og optimal komfort og brukervennlighet.

MicroAIR MA50CE er en dynamisk overmadrass som har 4 intervaller for trykkveksling. Madrassen er beregnet for brukere med middels til høy risiko for å utvikle trykksår.



Dynamisk/vekslende trykk

MicroAir MA50CE består av 16 vekslede luftfylte celler som tilsammen sikrer en komfortabel liggeflate for brukeren. Cellene er produsert i polyuteran-behandlet nylon av høy kvalitet. Trykkvekslingen kan stilles med enten 5, 10, 15 eller 20 min. intervaller. Avlastningen foregår ut fra prinsippet «én opp og én ned». Trekket er produsert uten bruk av bromin- eller halogenstoffer, og er luftgjennomtrengelig. Inkontinestrekket har glidelås for å enkelt kunne tas av i forbindelse med rengjøring.



MicroAIR MA50CE-pumpen

Pumpen til **MicroAIR MA50CE** har knapper for å stille inn trykk, vekslingsintervaller, og til å gi maksimalt trykk i forbindelse med stell av brukeren og ved transport. Pumpen har flere sikkerhetsfunksjoner: audio og visuell alarm ved lavt trykk eller strømmbrudd, samt en panellåsefunksjon som hindrer utilsiktede endringer av innstillingene. Trykktransduseren måler trykket automatisk og stiller inn dette i overensstemmelse med pasientens vekt. I statisk funksjon forblir **MicroAIR MA50CE** luftfylt, og i dynamisk funksjon veksler dette for hver 2. celle.




Manuell «sitte opp» funksjon

Når «sitte opp» funksjonen aktiveres, tilføres automatisk 25 % mer luft for å forhindre at brukeren «sitter igjennom madrassen» når hjertebrettet heves.



Kabelhåndteringssystem

Kabelhåndteringssystemet gjør at kabler legges langs siden på madrassen for å øke sikkerheten til pasient og personale.

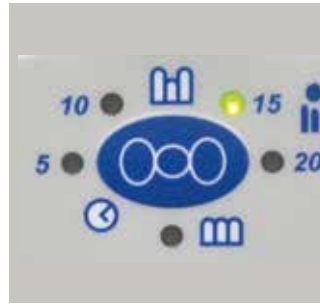

Valg mellom 4 tidsintervaller

Pumpen kan stilles inn i fire tidsintervaller (5, 10, 15 og 20 min.) for å øke pasientens komfort, og for å sikre optimal trykkavlastning. Det er mulig å velge mellom dynamisk og statisk funksjon, sistnevnte for en begrenset periode.



HLR (CPR)

HRL-funksjonen er plassert i fotenden av madrassen. I nødsituasjoner kan luften tømmes fra madrassens bryst- og mageregion på 15 sekunder.



Transportfunksjon

MicroAir MA50CE-pumpen har en magnetventil som holder luften i madrassen i forbindelse med strømbrytning. Dette sikrer at pasienten ikke «sitter igjennom» madrassen så lenge luftslangen er tilkoblet pumpen. Pumpens batteri-back-up lagrer pumpens innstillinger inntil strømmen kommer tilbake. Dette bidrar til å optimere sikkerheten for både pasient og pleiepersonale.



Individuelt utskiftbare celler

Trykkavlastning skjer ved at cellerne veksler utfra et «opp-og-ned» mønster, som bidrar til at blodomløpet opprettholdes. Hver celle kan enkelt og raskt byttes. Cellene er produsert i materiale av meget høy kvalitet for sikker drift.



Fri for bromin- og halogenstoff

Det nye dartex-trekket som er produsert i toveis strekkbart polyuretanmateriale (reducerer skyv- og friksjonskrefter) inneholder ingen bromin- eller halogenstoffer. Den nye teknologien bidrar til at materialet har lengre holdbarhet. Trekket er luftgjennomtrengelig, og kan fjernes helt og vaskes ved 95 °C.









Festestropper

Elastiske festestropper i hode- og benenden sikrer at madrassen ikke forskyver seg på skummadrassen. For ytterligere sikkerhet kan man anvende to sikkerhetsstropper. Disse kan også brukes til å pakke sammen madrassen i forbindelse med transport.

Tekniske data

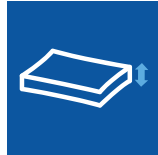Mer informasjon om dette produktet, samt produktets bruksanvisning, finnes på www.invacare.no.

	Bredde	Lengde	Høyde	Vekt	Maks. brukervekt:	Vask
						
MicroAIR 50CE	830 mm / 880 mm	2000 mm	130 mm	Madrass: 3.5 kg Pumpe: 2.2 kg	Max.: 180 kg Min: 15 kg	95°


Madrasen er produsert i henhold til:

- Europeisk standard: BS EN 597-1 Cig
- Europeisk standard: BS EN 597-2 Match
- EN 60601-1
- IEC 60601-1-2

1. **MicroAIR MA50CE** pumpe og toppmadrass har latexfrie komponenter.

Farge

Blå

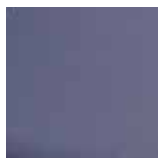

HMS nr.	Art. nr.	Overmadrass dynamisk	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
230243	1552408	MicroAIR MA50	83x200x13	PU behandlet nylon/ polyuretan	Overmadrass, dynamisk med pumpe
230242	1552394	MicroAIR MA50	88x200x13	PU behandlet nylon/ polyuretan	Overmadrass, dynamisk med pumpe

I overensstemmelse med fortsatt videreutvikling av våre produkter, forbeholder vi oss retten til å endre produktdesign uten forvarsel. Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne publikasjonen må ikke, i noen form, reproduseres uten samtykke fra Invacare. Invacares registrerte varemerke: MicroAIR