



# Dolomite® Alpha

Alpha Basic, Alpha Advanced

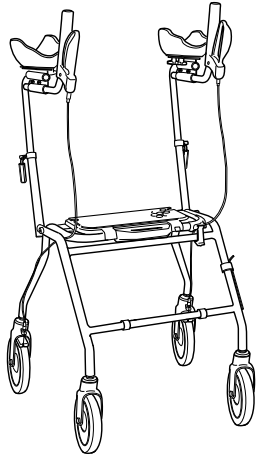

Alpha Basic

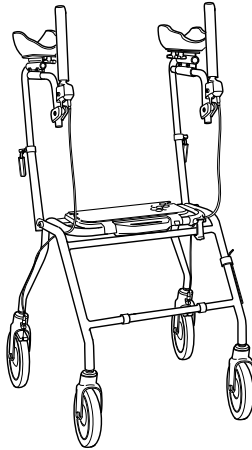

Alpha Advanced

en	Walking table User Manual .....	3
da	Ganghjælpemiddel Brugsanvisning .....	23
de	Gehhilfe Gebrauchsanweisung .....	41
fi	Kävelypöytä Käyttöohje .....	61
fr	Tablette de déambulation Manuel d'utilisation .....	81
it	Deambulatore Manuale d'uso .....	101
nl	Looptafel Gebruiksaanwijzing .....	123
no	Gåbord Bruksanvisning .....	143
sv	Gåbord Bruksanvisning .....	163



This manual **MUST** be given to the user of the product.  
**BEFORE** using this product, this manual **MUST** be read and saved for  
future reference.

**Dolomite**



**Yes, you can.®**

©2020 Invacare Corporation

All rights reserved. Reproduction, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

Making Life's Experiences Possible is a registered trademark in the U.S.A.

---

## Innholdsfortegnelse

---

Denne bruksanvisning skal overleveres til sluttbrukeren. FØR du bruker dette produktet, MÅ du lese denne bruksanvisning og oppbevare den til senere referanse.

<b>1 Generell informasjon</b>	<b>144</b>
1.1 Innledning	144
1.2 Symboler i denne håndboken	144
1.3 Samsvar	144
1.4 Levetid	145
1.5 Garantiopplysninger	145
1.6 Ansvarsbegrensning	145
<b>2 Sikkerhet</b>	<b>146</b>
2.1 Generell sikkerhetsinformasjon	146
2.2 Merking og symboler på produktet	147
<b>3 Produktoversikt</b>	<b>149</b>
3.1 Produktbeskrivelse	149
3.2 Tiltent bruk	149
3.3 Indikasjoner for bruk	149
3.4 Levert produkt	149
3.5 Tilbehør	149
<b>4 Bruk</b>	<b>150</b>
4.1 Før bruk	150
4.2 Montering av ganghjelpemiddelet	150
4.3 Legge ganghjelpemiddelet sammen og folde det ut	151
4.4 Justere armstøtten	151
4.5 Stille inn bremsehåndtaket (Alpha Advanced)	153
4.6 Gå med hjelpemiddelet til å gå	153
4.7 Å sette seg ned i en stol	154
4.8 Reis deg opp i stående stilling	154
4.9 Sitt på hjelpemiddelet til å gå	155
4.10 Aktivere bremsen	155

<b>5 Vedlikehold</b>	<b>157</b>
5.1 Generell vedlikeholdsinformasjon	157
5.2 Kontrollsjekklister	157
5.3 Rengjøring og desinfisering	157
5.3.1 Generell sikkerhetsinformasjon	157
5.3.2 Rengjøringshyppighet	158
5.3.3 Rengjøringsanvisninger	158
<b>6 Etter bruk</b>	<b>159</b>
6.1 Avfallshåndtering	159
6.2 Overhaling	159
<b>7 Tekniske Data</b>	<b>160</b>
7.1 Mål og vekt	160
7.2 Materiale	161

# 1 Generell informasjon

## 1.1 Innledning

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet håndteres. Les bruksanvisningen nøye, og følg sikkerhetsinstruksjonene i den, slik at du kan bruke produktet på en trygg måte.

Vær oppmerksom på at det kan være deler av dette dokumentet som ikke er relevante for produktet ditt, ettersom dokumentet gjelder for alle tilgjengelige modeller (på trykktidspunktet). Hvis ikke annet er angitt, viser hvert avsnitt i dette dokumentet til alle modeller av produktet.

Alle modeller og konfigurasjoner som er tilgjengelige for ditt land, står oppgitt i de landsspesifikke salgsdokumentene.

Invacare forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Før du leser dette dokumentet, må du forsikre deg om at du har den nyeste versjonen. Du finner den nyeste versjonen som en PDF-fil på Invacare-nettstedet.

Hvis skriftstørrelsen i den trykte versjonen av dokumentet er vanskelig å lese, kan du laste ned PDF-versjonen fra nettstedet. Deretter kan du skalere PDF-en, slik at skriftstørrelsen passer bedre for deg.

Hvis du ønsker mer informasjon om produktet, som f.eks. produktsikkerhetsmerknader og tilbakekalling av produkter, kan du kontakte din Invacare-representant. Se adresser nederst i dette dokumentet.

Dersom det skjer en alvorlig hendelse i tilknytning til produktet, bør du informere produsenten og de kompetente myndigheter i landet ditt.

## 1.2 Symboler i denne håndboken

Advarslene i denne bruksanvisningen er angitt med symboler. Advarselsymbolene ledsages av en overskrift som angir alvorlighetsgraden.



### ADVARSEL

Angir en farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller død dersom den ikke unngås.



### FORSIKTIG

Angir en farlig situasjon som kan føre til lettere skade dersom den ikke unngås.



### VIKTIG

Angir en farlig situasjon som kan føre til skade på utstyr hvis den ikke unngås.



### Tips og anbefalinger

Gir nyttige tips, anbefalinger og opplysninger når det gjelder effektiv og problemfri bruk.

## 1.3 Samsvar

Kvalitet er avgjørende for virksomheten til selskapet, som arbeider innenfor fagområdene i ISO 13485.

Dette produktet er CE-merket i samsvar med forordning 2017/745 om medisinsk utstyr klasse 1. Lanseringsdatoen for dette produktet er oppgitt i CE-samsvarserklæringen.

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at selskapets påvirkning på miljøet – både lokalt og globalt – reduseres til et minimum.

Vi bruker kun materialer og komponenter som er i samsvar med REACH-forskriftene.

## 1.4 Levetid

Produktets forventede levetid er fem år ved daglig bruk, gitt at produktet brukes i samsvar med sikkerhetsinstrukser, vedlikeholdsintervaller og informasjon om riktig bruk som er lagt frem i denne håndboken. Den faktiske levetiden varierer etter brukens hyppighet og intensitet.

## 1.5 Garantiopplysninger

Vi tilbyr en produsentgaranti for produktet i samsvar med våre generelle forretningsvilkår i det aktuelle landet.

Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle leverandøren av produktet.

## 1.6 Ansvarsbegrensning

Invacare erkjenner ikke ansvar for skade som skyldes:

- Manglende overholdelse av instruksjonene i bruksanvisningen
- Feil bruk
- Naturlig slitasje
- Feilmontering utført av kjøperen eller en tredjepart
- Tekniske endringer
- Endringer som ikke er godkjent, og/eller bruk av uegnede reservedeler

## 2 Sikkerhet

### 2.1 Generell sikkerhetsinformasjon

**ADVARSEL!****Fare for alvorlig personskade eller skade på utstyr**

Feil bruk av produktet kan forårsake personskade og skade på utstyr.

- Hvis du har problemer med å forstå advarslene, forsiktighetsmeldingene eller instruksjonene, bør du ta kontakt med kvalifisert helsepersonell eller en leverandør eller teknisk personell før du forsøker å bruke dette utstyret.
- Du må ikke bruke dette produktet eller annet tilgjengelig ekstrautstyr hvis du ikke først har lest og forstått disse instruksjonene og eventuelt tilleggsmateriale, for eksempel bruksanvisninger, servicehåndbøker eller instruksjonsdokumenter som følger med dette produktet eller ekstrautstyr.

**ADVARSEL!****Risiko for alvorlig personskade**

Feil bruk kan føre til farlige situasjoner.

- Skal ikke brukes i trapper eller i rulletrapper.
- Stå ikke på dette produktet.
- Utvis forsiktighet når du går i skrå/glatte bakker og på ujevnt underlag.
- Unngå å gå mot hindringer, både forover og bakover.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Ikke bruk produktet til å transportere en person.
- Sørg for at ingen klær, som f.eks. lange skjørt, setter seg fast i hjulene.

**FORSIKTIG!****Skaderisiko**

Ubalansert eller tung belastning kan føre til velt.

- Ikke heng noen form for belastning, for eksempel poser, fra kjørehåndtakene eller håndskruer.
- Bare bær belastninger med det angitte utstyret, for eksempel kurv eller brett. Ikke overskrid utstyrets maksimale belastning.
- Den totale belastningen, inkludert vekten til brukeren og eventuell ekstra belastning, må ikke overskride maksimal brukervekt.
- Se kapittelet *7 Tekniske Data, side 160* for informasjon om maksimal brukervekt og last informasjon.

**FORSIKTIG!  
Skaderisiko**

Uoriginale eller uegnede deler kan gå ut over produktets virkemåte og sikkerhet.

- Bruk bare originale deler til det aktuelle produktet.
- På grunn av regionale forskjeller må du se etter tilgjengelig ekstrautstyr i den lokale Invacare-katalogen eller -nettstedet, eller du kan kontakte din lokale Invacare-representant. Se adresser nederst i dette dokumentet.

**FORSIKTIG!  
Risiko for førstegradsforbrenning**

Produktkomponentene kan bli varmet opp hvis produktet utsettes for høye temperaturer (over 41 °C).

- Vær forsiktig hvis produktet utsettes for høye temperaturer, for eksempel direkte sollys.


**VIKTIG!**

Det er fare for skade på grunn av slitasje, for eksempel korrosjon.

- Ikke bruk produktet under vann, f.eks. i bassenger.
- Ikke bruk produktet i varme områder som badstuer.
- Produktet må ikke oppbevares i våte eller fuktige omgivelser.

## 2.2 Merking og symboler på produktet

### Identifikasjonsmerke

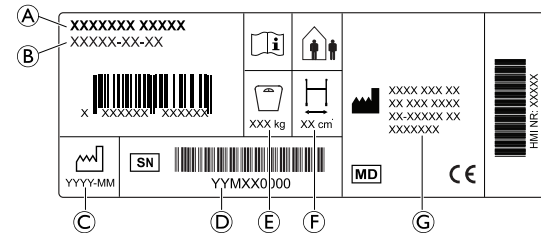


- Ⓐ Produktnavn
- Ⓑ Delenummer
- Ⓒ Produktionsdato
- Ⓓ Serienummer
- Ⓔ Maksimal brukervekt
- Ⓕ Maksimal bredde
- Ⓖ Produsentens adresse

### Symboler

	EU		Medisinsk utstyr
	Produsent		Les bruksanvisningen
	Produksjonsdato		Serienummer

Dolomite® Alpha

	Maksimal bredde		Maksimal brukervekt
	Innendørs/ utendørs bruk		



## 3 Produktoversikt

### 3.1 Produktbeskrivelse

Hjelpemiddel til å gå har fire hjul og er utstyrt med et sentralt sete som kan legges sammen for oppbevaring og transport. Svinghjulene er styrehjul. Drivhjulene har et bremsesystem som gir for å senke farten bremsing og for å låsing av hjulene. Hjelpemiddelet til å gå er tilgjengelig i forskjellige størrelser og kan utstyres med et bredt utvalg av tilbehør.

### 3.2 Tiltenkt bruk

Hjelpemiddelet til å gå er beregnet på å støtte en person under gange og kan også fungere som et hvilesete.

Hjelpemiddelet til å gå er egnet for innendørs og utendørs bruk på jevne underlag.

Den tiltenkte brukeren er en voksen med en maksimal brukervekt som er angitt på produktetiketten og i kapittel 7 *Tekniske Data*, side 160

### 3.3 Indikasjoner for bruk

#### Indikasjoner


Personer med nedsatt muskelstyrke og/eller balanseevne, som trenger ekstra støtte mens han/hun går. Brukerens gjenværende bevegelses- og kognitive funksjon må være tilstrekkelig til sikker bruk av et hjelpemiddel til å gå.

#### Kontraindikasjoner

Personer med alvorlige balansesykdommer eller funksjonelle persepsjonssykdommer.

1576161-D

## 3.4 Levert produkt

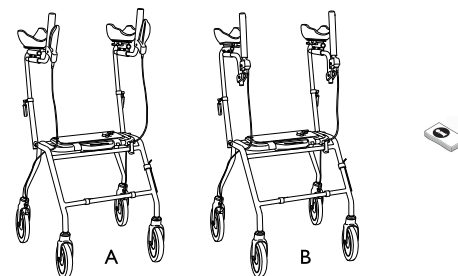

A: Alpha Basic

B: Alpha Advanced

- Ganghjelpemiddel, delvis ferdigmontert.
- Bruksanvisning

For montering, se kapittel 4.2 *Montering av ganghjelpemiddelet*, side 150

Tilbehør til ditt ganghjelpemiddel, er avhengig av konfigurasjon og kan være ulikt fra region til region.

### 3.5 Tilbehør

Forskjellige tilbehør, som en kurv/bag, er tilgjengelige for dette produktet og kan finnes i landspecifikke salgsdokumenter. Avhengig av konfigurasjonstilbehøret kan det hende at det er forhåndsmontert.

## 4 Bruk

### 4.1 Før bruk



#### FORSIKTIG!


#### Risiko for skade eller skade på eiendom

- Før bruk må den generelle funksjonaliteten til produktet verifiseres.
- Sjekk produktet for defekter før bruk.
- Bruk ikke et defekt produkt.


Invacare forutsetter at en individuell vurdering av brukeren har blitt foretatt av medisinsk fagpersonell for å fastslå pasientens risikonivå og behandlingsbehov. Leverandører og pleiere har vurdert at produktet gir den nødvendige støtte og at justeringene er egnet for brukeren. Ledsageren og brukeren har fått ordentlig opplært av helsepersonell om riktig og sikker bruk av produktet.

### 4.2 Montering av ganghjelpemiddelet

Alpha Basic

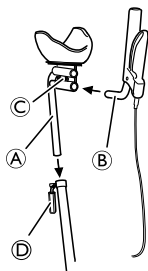


Alpha Advanced

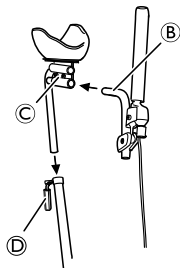

1. Plasser armstøttens rør (A) i rammerøret og sikre med spaken (D).
2. Plasser styrestangen (B) i armstøttens rør og sikre med skruene (C).
3. Gjenta prosedyren på den andre siden.

Armstøttens rør og styrestengen kan bli plassert i to ulike posisjoner, avhengig av ønsket høyde.

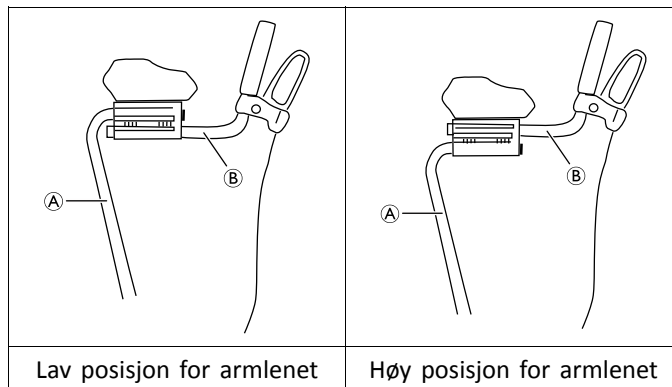

#### Lav posisjon:


1. Plasser armstøttens rør (A) i den øvre festeposisjonen.
2. Plasser styrestangen (B) i den lave festeposisjonen.

#### Høy posisjon:

1. Plasser armstøttens rør (A) i den øvre festeposisjonen.
2. Plasser styrestangen (B) i den øvre festeposisjonen.

### 4.3 Legge ganghjelpemiddelet sammen og folde det ut

#### Folde ut til bruksstilling

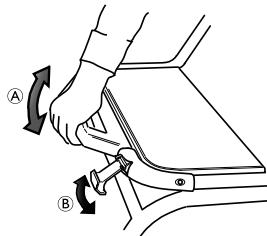

1. Fold ut ganghjelpemiddelet ved å trykke ned seterøret ved hjelp av håndtaket (A).




#### ADVARSEL!

– Før produktet brukes skal det alltid kontrolleres at sikkerhetslåsen (B) er i låst stilling. Dette indikeres av et hørbart "klikk".

#### Slå opp seteplaten



Du kan slå opp setet for å skape bedre plass når du skal gå og gi lettere tilkomst.

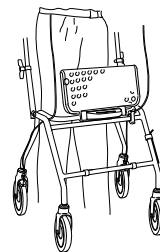

#### Legge sammen ganghjelpemiddelet


1. Følg anvisningene ovenfor i omvendt rekkefølge.

### 4.4 Justere armstøtten




#### ADVARSEL!


– Alle justeringer skal utføres av en tekniker.  
 – Før bruk må du forsikre deg om at spakene (A) peker nedover og er godt strammet etter justering av høyde og vinkel.

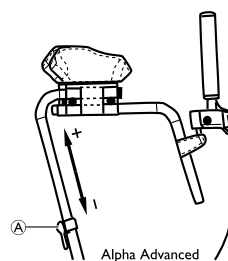

Alpha Advanced

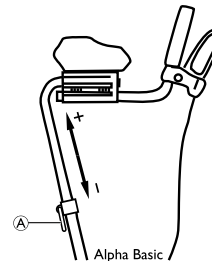

Alpha Basic

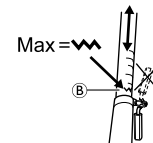

### Stille inn høyden

1. Løsne spaken Ⓐ.
2. Juster armstøtten til en passelig høyde.
3. Stram spaken.



#### ADVARSEL!


#### Fare for å falle

– Still ikke armstøtten over høyeste posisjon, angitt med merket Ⓑ på rørene.

### Stille inn vinkelen

1. Løsne spaken Ⓐ.
2. Juster vinkelen på håndtakene til en passende posisjon.


Forsikre deg om at håndtakene alltid er innenfor tillatt justeringsområde (maksimalt 20° innover).  
Vri ikke håndtakene utover.

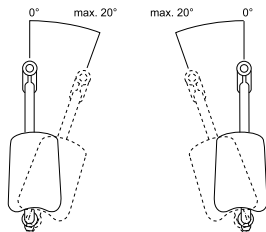


3. Stram spaken.

### Stille inn dybden og hellingsvinkelen

#### Alpha Basic

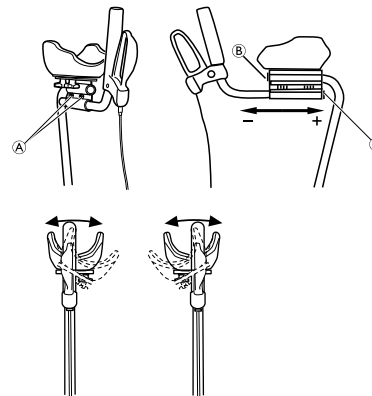


#### Alpha Advanced

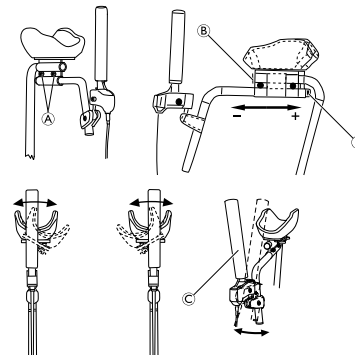

1. Løsne de to skruene (A) med unbrakonøkkelen som følger med.
2. Juster dybden på armstøtten til ønsket posisjon. Forsikre deg om at de svarte proppene (B) alltid er synlige.
3. Juster hellingsvinkelen til armstøttekoppen til ønsket posisjon.
4. Juster vinkelen på bremsehåndtaket til ønsket posisjon.
5. Stram skruene godt.


#### Rotere armstøttekoppene innover

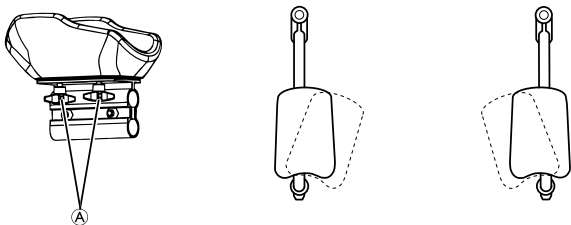

1. Løsne de to knottene (A).
2. Juster de to armstøttekoppene til ønsket bredde/vinkel.
3. Stram de to knottene (A).

#### 4.5 Stille inn bremsehåndtaket (Alpha Advanced)

Bremsehåndtaket kan justeres ytterligere for å velge håndstilling og funksjonsretning.

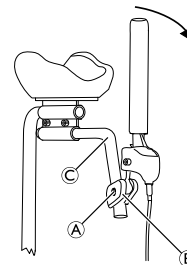

1. Løsne skruen (A) med unbrakonøkkelen som følger med.
2. Juster festeinnretningen (B) høydemessig og sideveis i ønsket posisjon.
3. Roter bremsen ved hjelp av kuleleddet til ønsket posisjon.
4. Stram skruen (A) igjen.

**i** Bremsen kan stilles inn med en større vinkel ved å vri røret (C) i tilknytning med dybdejusteringen, → *4.4 Justere armstøtten, side 151*


#### 4.6 Gå med hjelpemiddelet til å gå



##### ADVARSEL!


##### Risiko for å falle

– Vær oppmerksom dersom hjulene stopper mot en hindring, f.eks en kant.

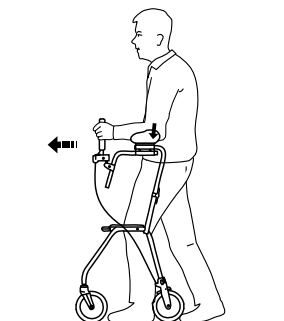

1. Sett hjelpemiddelet til å gå et lite stykke foran deg og gå et skritt mot den samtidig som du støtter deg på håndtakene.

#### 4.7 Å sette seg ned i en stol

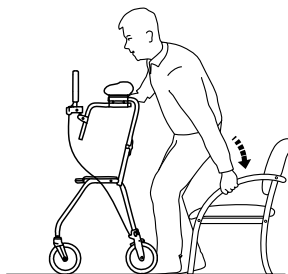

1. Stå foran stolen med hjelpemiddelet til å gå, baksiden av bena dine bør berøre stolen.
2. Lås begge håndbremsene på hjelpemiddelet til å gå.
3. Plasser hendene dine på armlenene til stolen, len deg litt forover og sett deg forsiktig ned.


#### 4.8 Reis deg opp i stående stilling



##### ADVARSEL!

##### Tippfare

– Bruk ikke hjelpemiddelet til å gå for å dra deg opp fra sittende stilling.

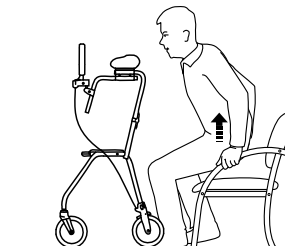

1. Plasser hjelpemiddel til å gå foran deg og lås begge håndbremsene.
2. Bruk armlenene på rullestolen som støtte, og reis deg forsiktig opp i stående stilling.
3. Så snart den er stabil i stående stilling, overfører du hendene til håndtakene på hjelpemiddelet til å gå.

## 4.9 Sitt på hjelpemiddelet til å gå



### ADVARSEL!

#### Risiko for å falle



- Sitt på hjelpemiddelet til å gå kun mens den står helt i ro.
- Før du setter deg ned, låser du begge bremsene i parkeringsstilling, og sørger for at hjelpemiddelet til å gå står stabilt.
- Sitt alltid på hjelpemiddelet til å gå fra baksiden. Ikke sett deg ned fra forsiden.
- Ikke sitt på hjelpemiddelet på hellende grunn.
- Ikke manøvrer hjelpemiddelet til å gå med føttene mens du sitter på det.

## 4.10 Aktivere bremsen

### Bremse under bruk

Alpha Basic

Alpha Advanced

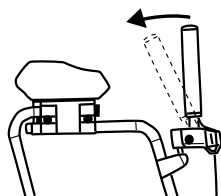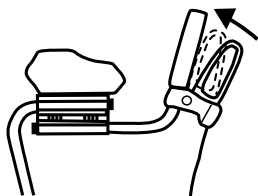

1. Trekk begge bremsehåndtakene (Alpha Basic) eller bremsespakene (Alpha Advanced) mot kroppen.

## Aktivere parkeringsbremsene





### VIKTIG!

- Forsikre deg om at begge bremsene er aktivert i parkeringsposisjon.

Alpha Basic


Alpha Advanced

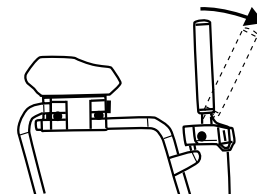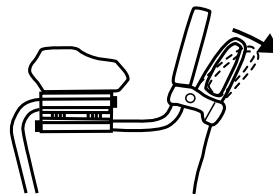

1. Skyv begge bremsehåndtakene (Alpha Basic) eller bremsespakene (Alpha Advanced) bort fra kroppen. Du hører et tydelig klikk når bremsen er i korrekt posisjon.
2. For å løse bremsene trekkes bremsehåndtakene (Alpha Basic) eller bremsespakene (Alpha Advanced) bakover.

### Justere bremseeffekten

Tilpass bremsekraften ved å justere bremsekabelen.

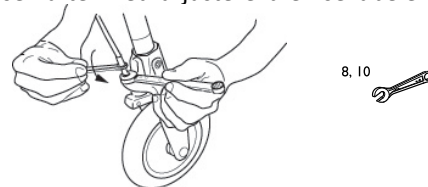

Egnet verktøy: 8 mm og 10 mm fastnøkkel (ikke inkludert).

1. Løsne låsemutteren og drei det sekskantede munnstykket mot klokken for å øke bremseeffekten. Avstanden mellom bremseklemmen og hjulet skal være 2 mm.
2. Stram låsemutteren igjen for å sikre den nye justeringen er festet.
3. Kontroller bremseeffekten ved å aktivere parkeringsbremsen og sjekke at hjulet ikke dreier.



**ADVARSEL!**

– Husk å stramme til låsemutrene etter justeringen.



## 5 Vedlikehold

### 5.1 Generell vedlikeholdsinformasjon



#### ADVARSEL! Skaderisiko

- Det bør utføres vedlikehold minst én gang i året.
- Bruk ikke et defekt produkt.
- Do not attempt repairs yourself. Kontakt leverandøren din for reparasjoner

### 5.2 Kontrollsjekkliste

Kontroller produktet regelmessig for å sikre god ytelse og sikkerhet.

- Kontroller at alle skruer og justeringsinnretninger er forsvarlig strammet.
- Kontroller at håndtakene er stramme.  
Hvis håndtakene er løse, skal ikke hjelpemiddelet til å gå brukes. Instruksjoner om hvordan du endrer håndtakene kan fås fra leverandør eller Invacare forhandler.
- Kontroller at bremsen virker.  
Hvis det er nødvendig å justere bremsene, se kapittel4 *Bruk, side 150*
- Inspiser rammen og de pålastede delene for sprekker.
- Kontroller med jevne mellomrom at hjulene er godt festet, og at de ikke viser tegn på slitasje eller skader.
- Kontroller at hjulene er fri for hår, lo og annet rusk.

## 5.3 Rengjøring og desinfisering

### 5.3.1 Generell sikkerhetsinformasjon



#### FORSIKTIG!

##### Fare for kontaminering

- Ta dine egne forholdsregler og bruk passende verneutstyr.



#### VIKTIG!

Feil væsker eller metoder kan skade eller ødelegge produktet.

- Alle rengjørings- og desinfeksjonsmidler må være av god kvalitet og kompatible med hverandre. I tillegg må de beskytte materialene de skal rengjøre.
- Bruk aldri etsende væsker (baser, syrer osv.) eller slipende rengjøringsmidler. Vi anbefaler et vanlig rengjøringsmiddel for husholdning som for eksempel oppvaskmiddel hvis ikke noe annet er spesifisert i rengjøringsanvisningene.
- Bruk aldri et løsemiddel (cellulosefjernere, aceton etc.) som forandrer plastens struktur eller får etikettene til å løsne.
- Pass alltid på at produktet er helt tørket før det tas i bruk igjen.



For rengjøring og desinfeksjon i kliniske omgivelser eller ved langvarig pleie, gjelder institusjonelle retningslinjer for hygiene.

### 5.3.2 Rengjøringshyppighet



#### **VIKTIG!**

Regelmessig rengjøring og desinfeksjon bidrar til problemfri bruk, lenger levetid og forhindrer kontaminering.

Rengjør og desinfiser produktet

- jevnlig mens det er i bruk,
- før og etter enhver serviceprosedyre,
- når det har vært i kontakt med enhver type kroppsvæske,
- før det brukes på en ny bruker.



Informasjon om anbefalte desinfeksjonsmidler og -metoder finner du på <https://vah-online.de/en/for-users>.

### 5.3.3 Rengjøringsanvisninger

Produktet kan vaskes i vaskemaskin eller for hånd.

Når du bruker en høytrykkspyler eller en vanlig vannstråle, ikke sikt strålen mot lagrene, dreneringshullene eller etikettene.

Maksimal rengjøringsstemperatur er 60 °C. Ikke bruk en damprenser.

1. Rengjør hjelpemiddelet til å gå med en fuktig klut og mild såpe.
2. Rengjør hjulene med en børste (ikke stålbørste).
3. Tørk produktet med en klut etter vask.

#### **Desinfisering**

- Tørk av alle lett tilgjengelige overflater med en klut og desinfeksjonsmiddel.

---

## 6 Etter bruk

---

### 6.1 Avfallshåndtering

Vi ber deg vise miljøansvar og levere dette produktet til en lokal gjenvinningsstasjon ved endt brukstid.

Demonter produktet og dets komponenter, slik at de ulike materialene kan sorteres og gjenvinnes hver for seg.

Kassering og gjenvinning av brukte produkter og emballasje må overholde lovene og forskriftene for avfallshåndtering i hvert land. Ytterligere informasjon får du hos det lokale renovasjonsselskapet.

### 6.2 Overhaling

Dette produktet er egnet for gjenbruk. Utfør følgende punkter når produktet skal overhales og overføres til en ny bruker:

- Kontroll
- Rengjøring og desinfisering


Detaljert informasjon finner du under *5 Vedlikehold, side 157* og i servicehåndboken for dette produktet.

Sørg for at bruksanvisningen overleveres sammen med produktet.

Hvis det oppdages skade eller feil, må du ikke bruke produktet på nytt.

## 7 Tekniske Data

### 7.1 Mål og vekt

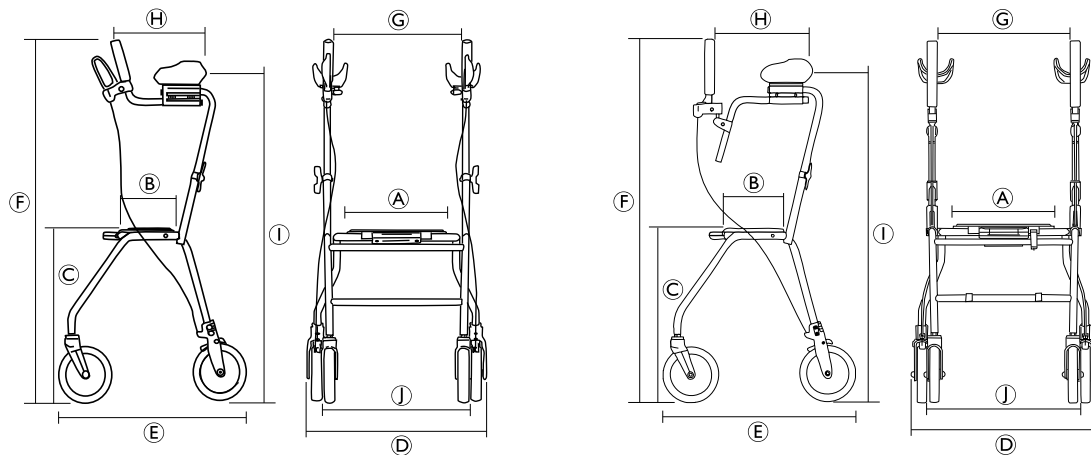

	Alpha Basic	Alpha Advanced
Setebredde (A)	360 mm	
Setedybde (B)	180 mm	
Setehøyde (C)	620 mm	
Total bredde (D)	650 mm	
Total dybde (E)	700 mm	
Total høyde (håndtakshøyde) (F)	1075–1310 mm	1165–1400 mm
Avstand mellom håndtakene (G)	430 mm	

	Alpha Basic	Alpha Advanced
Avstand mellom håndtak og nedre armstøtte ④	290–330 mm	310–360 mm
Armstøttehøyde ①	950–1220 mm	
Avstand mellom drivhjulene ①	510 mm	
Diameter svinghjul/bakhjul	200 mm	

Alle mål forutsetter en viss robusthet

	Alpha Basic	Alpha Advanced
Vekt <sup>15</sup>	11,3 kg	12,2 kg
Maks. brukervekt <sup>16</sup>	125 kg	

## 7.2 Materiale

Alpha Basic / Alpha Advanced	
Ramme	Stål belagt med polyesterpulver (PES)
Håndtaksstenger	Aluminium
Håndtak	Lukket syntetisk cellegummi
Hjul	Polypropylen (PP) med korder av termoplast-elastomer (TPE)
Plastdeler	Materiale i henhold til merking Polyamid (PA), polypropylen (PP), polyetylen (PE)
Skruer	Stål, rustbeskyttet (sinkbelagt)

15. Totalvekt uten tilleggsutstyr.

16. Vektgrensen omfatter vekten av brukeren i stående eller sittende stilling, og tilleggslast, f.eks innholdet i kurven.





## Invacare Distributors

### Belgium & Luxemburg:

Invacare nv  
Autobaan 22  
B-8210 Loppem  
Tel: (32) (0)50 83 10 10  
Fax: (32) (0)50 83 10 11  
belgium@invacare.com  
www.invacare.be

### Ireland:

Invacare Ireland Ltd,  
Unit 5 Seatown Business Campus  
Seatown Road, Swords, County Dublin  
Tel : (353) 1 810 7084  
Fax: (353) 1 810 7085  
ireland@invacare.com  
www.invacare.ie

### Schweiz / Suisse / Svizzera:

Invacare AG  
Benkenstrasse 260  
CH-4108 Witterswil  
Tel: (41) (0)61 487 70 80  
Fax: (41) (0)61 487 70 81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch

### Danmark:

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37  
DK-2605 Brøndby  
Tel: (45) (0)36 90 00 00  
Fax: (45) (0)36 90 00 01  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

### Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,  
Via dei Pini 62,  
I-36016 Thiene (VI)  
Tel: (39) 0445 38 00 59  
Fax: (39) 0445 38 00 34  
italia@invacare.com  
www.invacare.it

### Suomi:

Camp Mobility  
Patamäenkatu 5, 33900 Tampere  
Puhelin 09-35076310  
info@campmobility.fi  
www.campmobility.fi

### Deutschland:

Invacare GmbH,  
Alemannenstraße 10  
D-88316 Isny  
Tel: (49) (0)7562 700 0  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

### Nederland:

Invacare BV  
Galvanistraat 14-3  
NL-6716 AE Ede  
Tel: (31) (0)318 695 757  
Fax: (31) (0)318 695 758  
nederland@invacare.com  
www.invacare.nl

### Sverige:

Invacare AB  
Fagerstagatan 9  
S-163 53 Spånga  
Tel: (46) (0)8 761 70 90  
Fax: (46) (0)8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

### France:

Invacare Poirier SAS  
Route de St Roch  
F-37230 Fondettes  
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66  
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

### Österreich:

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
A-5310 Mondsee-Tiefgraben  
Tel: (43) 6232 5535 0  
Fax: (43) 6232 5535 4  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

### United Kingdom:

Invacare Limited  
Pencoed Technology Park, Pencoed  
Bridgend CF35 5AQ  
Tel: (44) (0) 1656 776 222  
Fax: (44) (0) 1656 776 220  
uk@invacare.com  
www.invacare.co.uk



Invacare Rea AB  
Växjövägen 303  
SE-343 71 Diö  
Sweden

1576161-D 2020-01-07



**Making Life's Experiences Possible®**

**Dolomite**



**Yes, you can.®**