


Løfteseil delt benstøtte


- U-SELE høy modell (Maxvekt 200 kg)

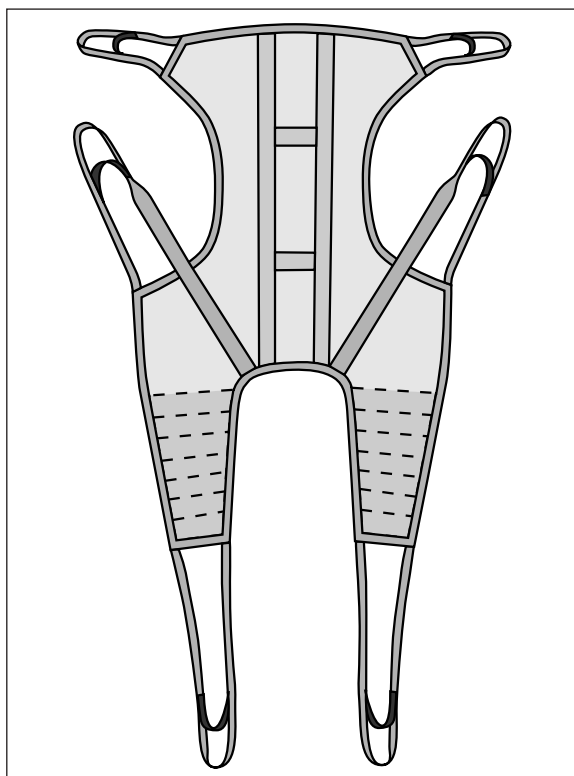

Plassering av løfteseil på en sittende person

Unngå utglidningsulykker – plasser løfteseilet riktig!

Ta tak i ryggdelens nedre kant på løfteseilet før du fører den ned bak pasientens rygg. Løfteseilets midtmarkering skal følge pasientens ryggrad. Ryggdelens nedre kant plasseres i midjehøyde.

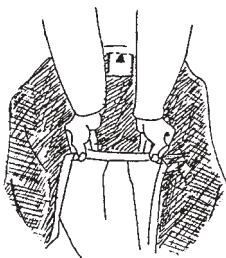

Plassering av benstøtten


Dersom pasienten er Strekk-spastisk – plasser benstøtten lengre ut mot knærne.

Er pasienten Tonus-svak – plasser benstøtten høyere opp på lårene for å gi bedre støtte og pasienten risikerer ikke å falle fremover.

Dobbel benstøtte


Plasser benstøtten dobbelt dersom pasienten er amputert eller synes det føles tryggere og bedre.

Viktig! Når benstøtten er koblet dobbelt, presses pasientens knær sammen slik at pasienten kan kjenne en separasjonssmerte. Følg med på pasientens ansiktsuttrykk eller spør hvordan det føles. Dersom pasienten er spastisk er det en risiko for at pasienten spretter ut av løfteseilet.

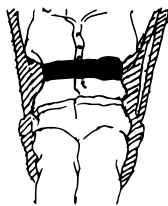

Kryssede benstøtter

Plasser løfteseilet med benstøttens løftebånd krysset gjennom hverandre, før de henges opp på løftebøylens kroker.

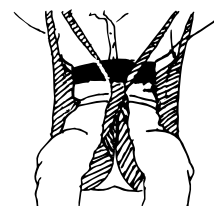


Separat kobling av benstøttene

Mer skånsomt mot pasientens underliv, og gjør det enklere å komme til for å gjøre rent.

OBS! Dra benstøtten ut fra grenen før pasienten løftes opp, ellers kan benstøtten skjære inn i underlivet.

Viktig! Bena går fra hverandre og hoftene roterer utover når benstøttene kobles separat, dette kan oppleves som ubehagelig for pasienten.

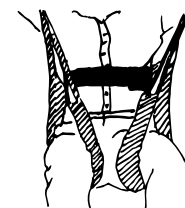

Tips – dersom det er tendens til utglidning


Prøv å plassere benstøtten høyt oppe på brukerens lår, eller velg et løfteseil der brukeren kan ha armene på løfteseilets utside. Velg eventuelt et materiale med høyere friksjon enn nylon, f.eks bomull eller et løfteseil som har liten skjæring mellom benstøtten. Kontroller at løfteselen er korrekt plassert og at den har riktig størrelse.

Plassering av løfteseil på en liggende pasient

Alternativ 1.

Rull sammen løfteseilet og legg det ved siden av pasienten. Rull pasienten over på seilet og plasser løfteseilet slik at midtmarkeringen følger ryggraden.


Ryggs nedre kant plasseres i nivå med midjen.

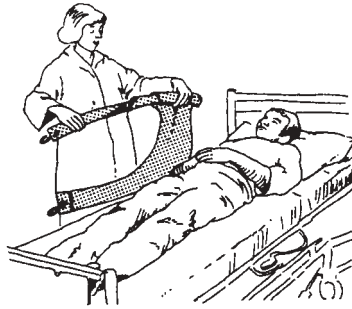


Alternativ 2.

Reis opp ryggstøtten bak pasienten. Plasser løfteseilet med benstøtten på hver side av pasienten, plasser den slik at midtmarkeringen følger ryggraden.

Ryggs nedre kant plasseres i nivå med midjen.

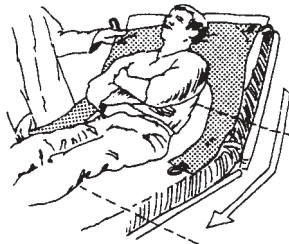

Gjør en arbeidsfordeling

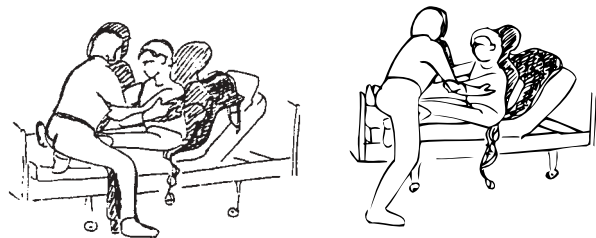


Når pasienten får hjelp til å lene seg fremover, er det lettere å dra løfteseilet ned bak pasientens rygg.

Ta bort løfteseilet etter gjennomført forflytning

Legg benstøtten under pasientens lår. Dra den forsiktig ut.


OBS! På grunn av lav absorberingsevne bør ikke løfteseil i polyester bli liggende igjen under pasienten etter at forflytningen er avsluttet.

Kroppens varme og kondens kan ikke suges opp, og pasientens underlag blir varmt og fuktig.

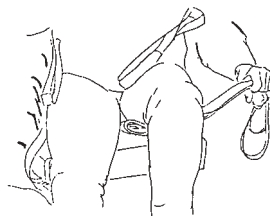

Unngå avkrokingsulykker – Bruk løftebøyle med avkrokingsbeskyttelse


OBS! Nye løfteseil med stive løftebånd kroker lettere av enn eldre løfteseler med mykere bånd.

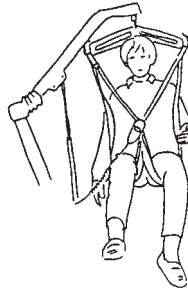

Individuelt tilpasset sittestilling

Ved å forlenge høyre benstøttes løftebånd økes vinkelen i pasientens hofte.

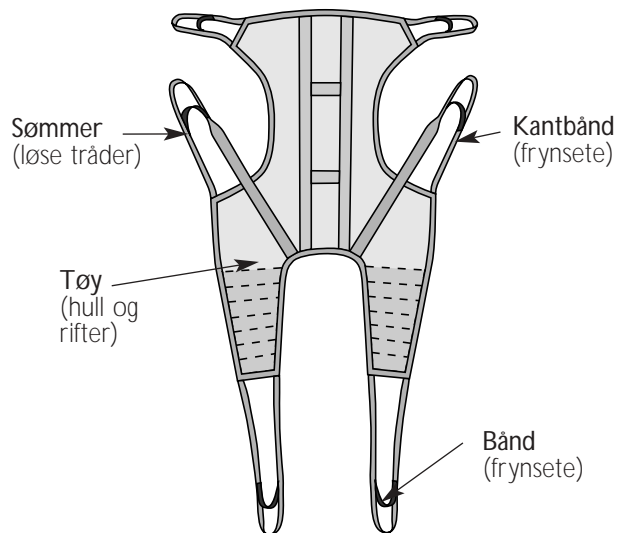


VIKTIG! Kontroller løfteseilet hver dag og spesielt etter vask! Følgende punkter er viktige:



Lag aldri et løfteseil – ødelagte løfteseil kasseres!
Polstrede løfteseil har kortere livslengde enn upolstrede. Følg vaskeanvisningen som finnes på løfteseilet.

Vaskeanvisning

Følgende vaskesymboler gjelder for våre løfteseil

-  - Polyester kan vaskes på 85° - har en lav absorberingsevne og tørker seint etter vask
-  - Tåler ikke klorbleking
-  - Løfteseilet skal ikke tørkes i tørketrommel

**Kontroller løfteseilet etter hver vask!
Ikke lag eller endre på et løfteseil!**

Testet og godkjent i henhold til EN10535 av DHI, Danmark



INVACARE® AS
Grensesvingen 9, Helsefyrt
Postboks 6230 Etterstad
0603 OSLO