

## 1. Type de moteur

- Robin (déplacement manuel)

## 2. Lieu souhaité de l'implantation

- Domicile     Collectivité

## 3. Les besoins et le type de transfert

- Rails droits (préconisés pour les transferts lit-fauteuil)
- Rails avec courbes [Attention installation sur plafond uniquement]
- Rails en traverses en H (préconisé pour un transfert à partir de n'importe quel point de la pièce)
- Autre montage à préciser (aiguillage, passage de porte ...) [Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre responsable régional Diffusion]



## 4. Type de fixation et nature du support

- Si fixation au plafond préciser la nature du plafond
  - Dalle béton *non recouvert d'une plaque d'isolant > à 8 cm*
  - Hourdis béton *non recouvert d'une plaque d'isolant > à 8 cm*
  - Charpente bois [attention possibilités de montages limitées et nécessite d'un accès facile aux combles – Non compatible avec la norme RT2012]
  - Faux plafond suspendu avec dalles amovibles [74cm maximum entre plafond béton et dalles amovibles]
  - Autre à préciser :  
[Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de notre service client]
- Si fixation aux murs préciser la nature du mur
  - Mur en parpaings *non recouvert d'une plaque d'isolant > à 8 cm*
  - Mur en briques *non recouvert d'une plaque d'isolant > à 8 cm*
- Si fixation aux murs et au sol (murs recouverts d'isolant ou cloisons non porteuses)  
[Attention le support doit pouvoir s'appuyer jusqu'au sol (Pas de baignoire ou placards...)]
  - Préciser la hauteur du plafond
  - Préciser la présence de plinthes

5. **Présence obligatoire d'une prise électrique à proximité du rail pour l'alimentation du chargeur**
  
6. **Faire un plan avec dimensions de la pièce à couvrir et l'implantation du rail souhaité**  
(Si plusieurs pièces à couvrir. Veuillez remplir une check list par pièce)

**Joindre des photos du plafond et des quatre murs ou une vidéo à 360° de la pièce à votre demande de devis. Afin de pouvoir déceler d'éventuelles impossibilités d'installation.**

**Si impossible préciser le motif**

#### **7. Installation**

- Par vos soins conformément au manuel d'installation

<https://www.invacare.fr/fr/leve-personnes-sangles/leve-personnes-sangles/leve-personnes-invacare-robin>

- Par des techniciens de la société Invacare
  - (Préciser le lieu de montage)



Le lieu de montage et la pièce devant recevoir le rail doivent être facilement accessible et disposer d'une alimentation électrique.