

Sitthöjdstabell Dahlia 30

Sitthöjd *	Sits vinkel	Tilt sits	Antal bussningar till gaskolv för sitsstift	Rygg vinkel	Antal bussningar till gaskolv för rygg	Drivhjul	Pos på drivhjul (STD)		Pos på drivhjul (Hög)		Gaffel 150		Länkhjuls position		Gaffel 110		Länkhjuls position		Position av broms infästning BAK
							1	3	5	6	NA	NA	1	2	3	100 (4")	1	2	
330 (13")	30°	30		30		16"	1		-	NA	NA	NA	3	100 (4")	2			3	
330 (13")	18°-(20")**	10	2	30		20"	-		6	NA	NA	NA	3	100 (4")	2			1	
350 (14")	30°	30		30		16"	3		-	NA	NA	NA	2	125 (5")	2			4	
350 (14")	24°-(28")**	20	1	20	1	20"	-		5	NA	NA	NA	2	125 (5")	2			1	
350 (14")	18°-(20")**	10	2	30		22"	-		6	NA	NA	NA	2	125 (5")	2			1	
380 (15")	30°	20	1	10	2	20"	1		-	NA	NA	NA	1	150/140 (6")	2			3	
400 (16")	30°	20	1	10	2	22"	1		-	NA	NA	NA	3	150/140 (6")	1			1	
400 (16")	30°	30		20	1	20"	3		-	NA	NA	NA	3	150/140 (6")	1			4	
430 (17")	30°	30		20	1	22"	3		-	4	150/140 (6")	1	1	150/140 (6")	1			2	
430 (17")	30°	20	1	10	2	24"	1		4	150/140 (6")	1	1	150/140 (6")	1				2	
450 (18")	30°	30		20	1	24"	3		-	2	150/140 (6")	1	1	200 (8")	1			2	
450 (18")	30°	30		30		16"	4		2	150/140 (6")	1	1	200 (8")	1				4	
480 (19")	30°	30		30		16"	2		-	2	200 (8")	1	NA	NA	NA				4
500 (20")	30°	30		30		20"	4		-	2	200 (8")	1	NA	NA	NA				4

* Mått från golv till sitsplatta (dyna ej inkluderad)

Sitthöjdstabell Dahlia 45

Sitthöjd *	Sits vinkel	Tilt sits	Tilt block (en per sida)	Rygg vinkel	Antal bussningar till gaskolv för rygg	Drivhjul	Pos på drivhjul (STD)		Pos på drivhjul (Hög)		Gaffel 150		Länkhjuls position		Gaffel 110		Länkhjuls position		Position av broms infästning BAK
							1	3	5	6	NA	NA	1	2	3	100 (4")	1	2	
350 (14")	45°	45		30		16"	1		-	NA	NA	NA	3	100 (4")	2			3	
350 (14")	39°	30	Yes	30		20"	-		6	NA	NA	NA	3	100 (4")	2			1	
380 (15")	45°	45		30		16"	3		-	NA	NA	NA	2	125 (5")	2			4	
380 (15")	45°	45		10	2	20"	-		5	NA	NA	NA	2	125 (5")	2			1	
380 (15")	39°	30	Yes	30		22"	-		6	NA	NA	NA	2	125 (5")	2			1	
400 (16")	45°	45		30		20"	1		-	NA	NA	NA	1	150/140 (6")	2			3	
430 (17")	45°	45		30		22"	1		-	NA	NA	NA	3	150/140 (6")	1			1	
430 (17")	45°	45		30		20"	3		-	NA	NA	NA	3	150/140 (6")	1			4	
450 (18")	45°	45		30		22"	3		4	150/140 (6")	1	1	150/140 (6")	1				2	
450 (18")	45°	45		30		24"	1		-	4	150/140 (6")	1	1	150/140 (6")	1			2	
480 (19")	45°	45		30		24"	3		-	2	150/140 (6")	1	1	200 (8")	1			2	
480 (19")	45°	45		30		16"	4		-	2	150/140 (6")	1	1	200 (8")	1			4	
500 (20")	45°	45		30		16"	2		-	1	200 (8")	1	NA	NA	NA				4

** = Mått inom parantes fungerar inte i alla positioner