

Support hémiplégique Dynamique

La solution modulaire pour le coude,
l'avant-bras et les mains



 **Bodypoint**[®]
STRENGTHEN YOUR POSITION

SUPPORT BREVETÉ ET RÉGLABLE

Le support hémiplégique dynamique développé cliniquement, est breveté et ajustable, offrant une solution d'intervention et de prévention pour le membre supérieur à la suite d'une blessure ou d'un événement neurologique. Il offre trois points de soutien : au niveau du coude, de l'avant-bras et de la main afin de prévenir les contractures, les douleurs et les subluxations de l'épaule. Les coussins de forme unique facilitent une position fonctionnelle et neutre de l'avant-bras et de la main.

Réglable selon les besoins de l'utilisateur

- Le support palmaire et le coussin de l'avant-bras sont réglables pour s'adapter à la longueur du bras de l'utilisateur.
- L'ensemble du support palmaire peut pivoter vers l'intérieur et vers l'extérieur pour s'adapter à un positionnement spécifique de la main et du poignet.




3 points de contact cruciaux

Le support hémiplégique dynamique peut être rapidement réglé en fonction des besoins de l'utilisateur :

1. Coudière
2. Coussin d'avant-bras
3. Support palmaire


MOUVEMENT DYNAMIQUE

Le mécanisme de pivot placé sous la coudière permet une rotation de 60°, stimulant la proprioception et augmentant la force et l'amplitude des mouvements. La position peut également être verrouillée par paliers de 5° afin de trouver la position de repos idéale pour l'utilisateur.

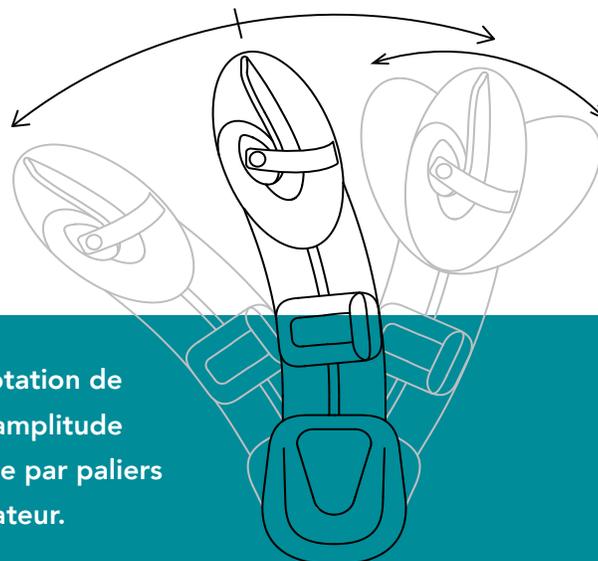


Support palmaire unique et flexible

- La conception du bloc palmaire dynamique permet aux doigts de fléchir, tout en encourageant la main à revenir à une position normale une fois que la tension musculaire s'est relâchée.
- Le pouce repose confortablement sur la partie surélevée, dans une position de repos naturelle.
- La sangle rembourrée passe sur les articulations du métacarpe et de la phalange pour maintenir la main de l'utilisateur dans une position sûre et confortable.
- Ajuster l'angle du poignet en fonction de la position du client.

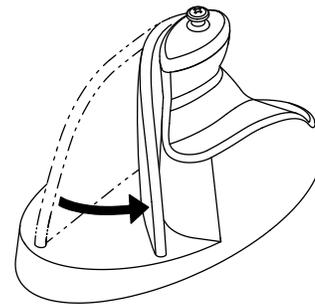

Positionnement optimal de l'épaule

- Le support de bras modulaire peut être ajusté pour s'adapter à un large éventail d'utilisateurs.
- La mousse souple et durable assure une bonne répartition de la pression et prévient la subluxation.
- Un positionnement correct réduit considérablement la tension exercée sur les muscles de l'épaule et fournit des informations proprioceptives.

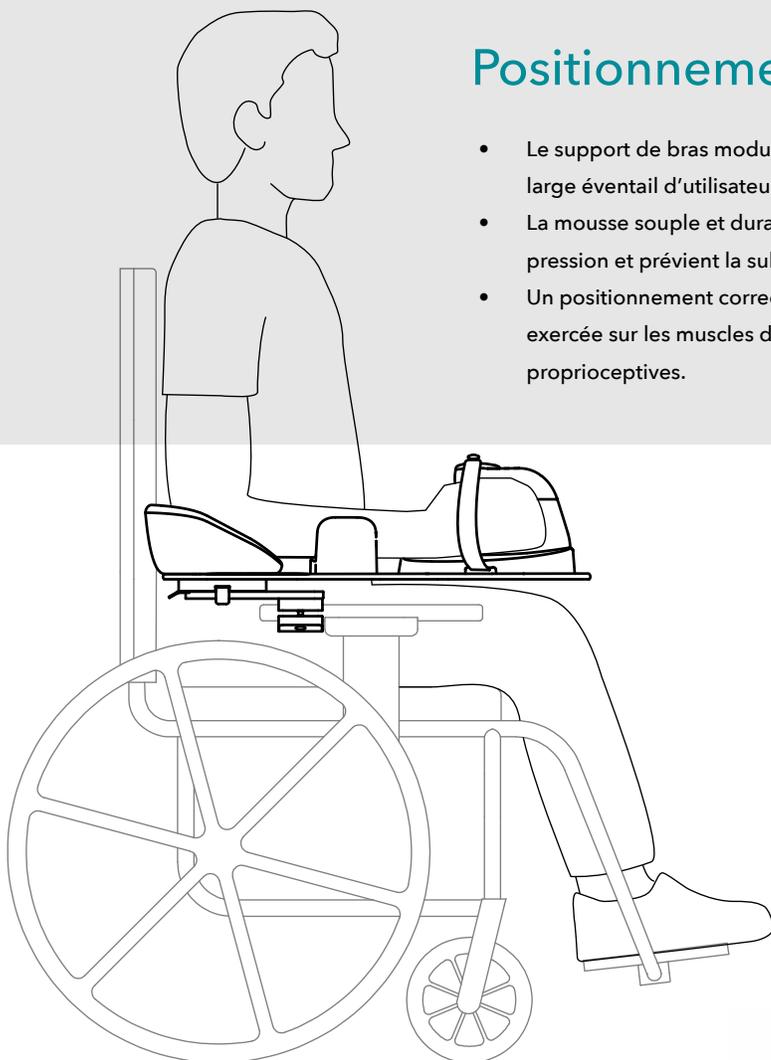

Coussin d'avant-bras

- Le coussin de l'avant-bras est réglable en profondeur et en angle pour assurer un contact et un positionnement adéquats.
- Le coussin de l'avant-bras peut être retourné (rotation de 180°) afin de soutenir la partie médiale ou latérale de l'avant-bras.

FONCTION DE DÉVERROUILLAGE RAPIDE

- Mécanisme unique de éverrouillage rapide
- Retrait facile pour les transferts
- Des fixations fermes et bien placées
- Attache solide, testée en terme de résistance



Commande en 3 étapes


- 1ère étape :** Indiquez quel bras est impacté : gauche ou droit
- 2e étape :** Sélectionnez la taille du support palmaire : petit ou grand
Mesurez la longueur maximale du majeur : Petit (8.5 cm-10.5 cm) ou grand (10.5 cm-12 cm)
- 3e étape :** Choisissez le type d'adaptateur d'accoudoir requis : Tubulaire ou plat
Deux tailles de pinces de fixation pour les tubes 19mm, 22mm et 25mm.



Au coeur du support hémiplégique dynamique se trouve le désir de développer une solution facile à utiliser et adaptée à chaque morphologie, qui réduirait considérablement le risque de dysfonctionnement à long terme du membre supérieur et favoriserait l'activité fonctionnelle. Le support hémiplégique peut être utilisé immédiatement après la blessure pour des résultats cliniques optimaux.

En outre, le mécanisme de pivotement permet une amplitude de mouvement active et le mécanisme de dégagement rapide permet de retirer facilement l'accoudoir du fauteuil roulant pour des transferts plus sûrs et plus faciles.

Avec le choix de pinces de fixation pour les tubes ronds de 19 mm, 22 mm et 25 mm (3/4", 7/8" et 1"), ou un adaptateur plus universel qui s'adapte à divers accoudoirs plats, le support hémiplégique peut se fixer à la plupart des accoudoirs réglables en hauteur.

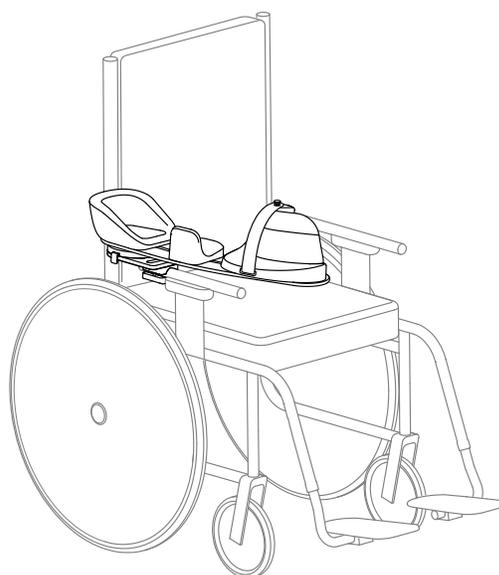

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France
Tel : + 33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2024 Bodypoint, Inc. Tous droits réservés. BMM343 2022.4

 **Bodypoint**[®]
STRENGTHEN YOUR POSITION