

Säkerhetsmeddelande

Invacare Robin lyft

Date: 13-juni-2025


Ref. Invacare: FSN_02_2025_Robin hoist_suspension base grooved pins

Ref. Infarmed: 1323/2025

Viktig information

För våra användares säkerhet vill Invacare uppmärksamma er på denna viktiga information.

Efter kännedom om en incident relaterad till Invacare Robin-lyft och upphängningsbasens räfflade pinnar har Invacare identifierat att i ett begränsat antal Invacare Robin-lyftar har de räfflade pinnarna börjat glida ut något från upphängningsbasen under användning. Vänligen se bilden nedan:

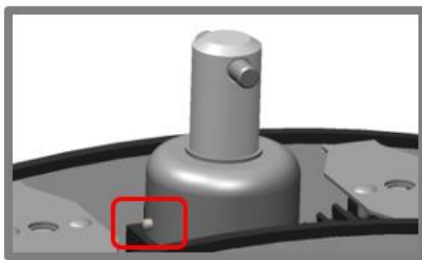

Invacare Robin-lyften har genomgått rigorösa tester och uppfyller fullt ut standarden ISO 10535, inklusive samtliga belastningstestkrav för säkerhet och tillförlitlighet.


Trots att inga personskador har inträffat och sannolikheten för att felet ska uppstå är låg, kan det – i det osannolika fallet att båda pinnarna lossnar från upphängningsbasen – leda till allvarliga skador. Därför vill Invacare informera användare om vikten av regelbunden inspektion av dessa komponenter.

För närvarande nämns inte inspektion av de räfflade pinnarna i kontrollistan för regelbunden besiktning som ingår i Robin-lyftens servicemanualen.

Invacare har därför beslutat att förbättra kontrollistan för regelbunden besiktning genom att införa en tydlig beskrivning av en ytterligare kontrollpunkt: kontroll av de räfflade pinnarnas infästning vid regelbundet underhåll – båda pinnarna ska vara helt isatta i upphängningsbasen.

Bilder som visar korrekt position för de räfflade pinnarna bifogas nedan:

2.13 Check the grooved pins – both pins must be totally inserted in the suspension base.

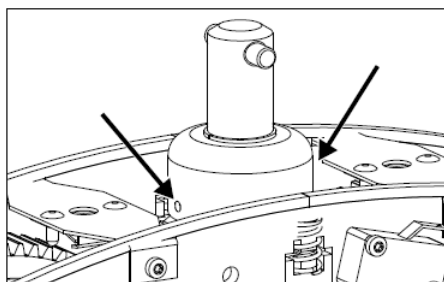

2.13 Kontrollera de räfflade pinnarna – båda pinnarna måste vara helt isatta i upphängningsbasen.

Som bilaga till detta säkerhetsmeddelande finns ett tillägg (artikelnummer 60148577) att infoga i Robin-lyftens servicehandbok, som visar ovan nämnda uppdatering.

Vilka åtgärder krävs?

Vårdgivaren ska informera alla berörda användare om innehållet i detta säkerhetsmeddelande

Detta **tillägg ska förvaras tillsammans** med den aktuella servicehandboken för Robin-lyften.

Den uppdaterade kontrollistan för regelbunden besiktning ska alltid utgöra grunden för att utföra det regelbundna underhållet av enheten.

Varför kontaktas ni?

Denna information är relevant för alla användare av Invacare Robin-lyften (oavsett serienummer), och enligt våra register har ni fått en eller flera Invacare Robin-lyftar.

Vänligen säkerställ att informationen i detta meddelande görs tillgänglig för all relevant personal inom er organisation och/eller kundkrets, samt att medvetenheten upprätthålls under en lämplig period.

Invacare bekräftar att berörda myndigheter har informerats om detta säkerhetsmeddelande.

Vi tackar för Er omedelbara uppmärksamhet i denna viktiga fråga, vi uppskattar Ert samarbete.

Kontakt

Om ni har några frågor angående detta säkerhetsmeddelande, eller om ni behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

Invacare AB

E-post: tillbud@invacare.com

Tel.: 08-761 70 90 växel