

Enhet nr: M _____

Leverantör: _____



Ulrich Alber GmbH
Vor dem Weissen Stein 21
72461 Albstadt
Telefon 07432/2006-0
Telefax 07432/2006-299

Arbete

Markera

Kommentar

Köregenskaper

- Kontrollera däckens profildjup
- Kontrollera drivringarnas ytskikt och byt ut om skadat
- Kontrollera att hjulen avaktiveras då de inte används
- Kontrollera att körprogram kan väljas på hjulen (ej M15)
- Kontrollera att körprogram kan väljas med fjärrkontroll (tillbehör)
- Kontrollera drivringssensorn
- Kontrollera att hjulen inte är skeva och generella köregenskaper
- Generell rengöring och underhåll. Efter rengöring låt produkten torka i rum eller på plats med god ventilation

Batteripaketet

- Rengör kontakter
- Kontrollera låsning
- Kontrollera LED displayen (batteriindikeringen)

Laddaren

- Kontrollera att höljet inte är skadat eller har sprickor
- Kontrollera kablage (isolering, kontakter)
- Funktionstest

Slutkontroll

- Kontrollera generell funktion av hela systemet med brukare i
- Kontrollera montering av tippskydden
- Kontrollera monteringsatser
- Kontrollera parkeringsbromsarna
- Kontrollera lufttryck i däcken vid behov
- Kontrollera länkhjulens lodinställning, följ den manuella rullstolstillverkarens instruktioner

Dokumentation

- Byt ut etiketten "Teknisk säkerhetskontroll" på produkten
- Märk etiketten med en vattenfast filtpenna.
- Skriv in datum i fältet för nästa kontroll (24 månaders intervall)

Tekniska säkerhetskontroller av e-fix skall endast utföras av person med ändamålsenlig relevant teknisk bakgrund.

