

Hurtigguide for SoftCloud™ Top




Yes, you can.®

Viktig: SoftCloud Top er en overmadrass, som *ikke* må brukes uten en egnet undermadrass.

Kom i gang:

1. Rull ut madrassen og plasser SoftCloud Top oppå en egnet madrass.
2. Plasser pumpen på sengens gavl i fotenden.
3. Benytt kabelfestene langs siden av madrassen og koble til strømkabelen.
4. Fest slangen fra madrassen til pumpen – til du hører et klikk.
5. Åpne dekselet i hodeenden og kontroller at CPR-ventilen er helt lukket.

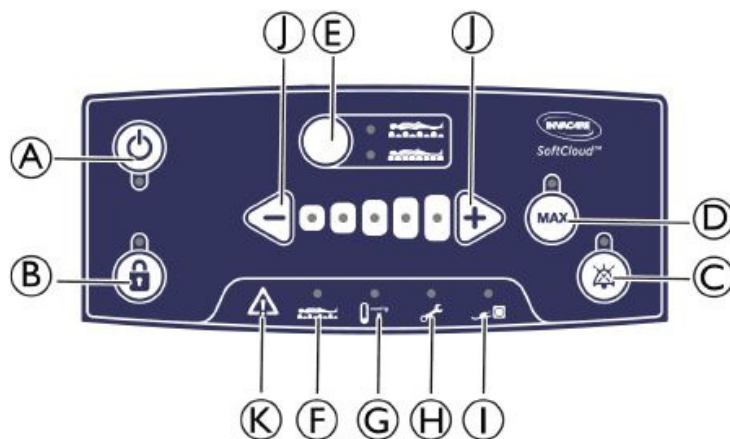

Bruk av kontrollpanelet:

A) Av-/på-knapp

Skrur av og på systemet. Hold knappen inne i 3-5 sekunder. Madrassen fylles på ca. 30 min. Et akustisk signal høres når pasienten legges på madrassen.

B) Lås-/lås opp-knapp samt barnesikring

Holdes inne i 5 sekunder for å låse/lås opp pumpens innstillinger. Etter at systemet låst/låst opp høres et akustisk signal.

C) "Alarm Mute"-knapp og indikator for oppstartsfeil

Ved å trykke på knappen slås den hørbare alarmen av. Alarmen går igjen etter ca. 20 min. LED-indikatoren lyser permanent ved oppstartsfeil.

D) Pleiefunksjon / Knapp for maksimalt trykk

Holdes inne i 3 sekunder for oppblåsing til maksimalt trykk i forbindelse med stell og forflytning. For å deaktivere maksimalt trykk, hold knappen inne igjen i 3 sek. Hvis maksimaltrykk ikke deaktiveres, går systemet automatisk tilbake til forrige innstilling etter 30 min.

E) Velg mellom vekseltrykk eller statisk trykk

Trykk for å velge *alternierende* modus (der cellene vekselvis blåses opp og tømmes) eller *statisk* modus (der cellene forblir oppblåste). Statisk modus kan velges for pasienter med mye smerter og/eller alvorlig syke pasienter. **MERK!** Frekvensen på reposisjonering av pasient må økes ved bruk av statisk modus.

F) Feilindikator for vekseltrykktilstand

LED-indikatoren lyser og en akustisk alarm avgis for å varsle om feil i vekseltrykkfunksjonen.

G) Indikator for lavt trykk

LED-indikatoren lyser og en akustisk alarm avgis for å varsle om at trykket i madrassen er for lavt.

H) Indikator for service

LED-indikatoren lyser og en akustisk alarm avgis for å varsle om at pumpen har behov for service.

I) Indikator for strømsvikt/-brudd

LED-indikatoren lyser og en akustisk alarm avgis for å varsle om at pumpen mangler strøm.

J) Komfortinnstilling (hard/myk)

Bruk piltastene (+/-) for å justere trykket til et nivå som er behagelig for pasienten. Vent 20-25 min og undersøk om pasienten er komfortabel. Sjekk også at beboeren *ikke* bunner madrassen. Dette må gjøres hver gang trykket i madrassen justeres.

K) Advarselsindikator

Angir en alarm/varsel for produktet.






Kontroll av korrekt tryknivå:

Før hånden langs bunnen av madrassen, både under setet på pasienten samt under en celle som *ikke* er oppblåst. Pasientens sete må **ikke** kjøles!

OBS! Husk også å repositionere pasienten regelmessig, ut i fra individuelle behov, selv om beboeren ligger på en dynamisk madrass.

Feilsøking

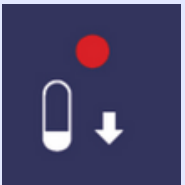SoftCloud™-systemet har fire forskjellige hørbare varselsignaler og en indikator for service, som kan gjenkjennes ved følgende fem symboler:

Advarsel	Årsak	Løsning
	Feil ved oppstart ("Alarm mute"-knapp)	<ol style="list-style-type: none">1. Tilbakestill advarselen - slå av strømmen og trykk på "Alarm mute"-knappen.2. Kontroller at håndtaket sitter godt fast i pumpen. Sjekk at HLR-stroppen er festet riktig/ikke lekker.3. Sjekk at alle luftslinger på innsiden av madrassen er godt festet.4. Sjekk alle celler, rør og slanger for luftlekkasje.5. Kontroller at luftfilteret er riktig plassert og at det er rent.6. Slå på strømmen.
	Feil i vekseltrykks-tilstand (ingen veksel)	<ol style="list-style-type: none">1. Tilbakestill advarselen - slå av strømmen og trykk på knappen "Alarm dempet".2. Koble fra luftslingene for å redusere trykket - koble dem til igjen når trykket har falt.3. Start systemet på nytt med av-/på-knappen. Systemet starter automatisk i statisk modus og bytter til alternerende modus når driftstrykket er nådd.4. Tilbakestill de personlige innstillingene.
	Trykket er for lavt	<ol style="list-style-type: none">1. Tilbakestill advarselen - slå av strømmen og trykk på "Alarm mute"-knappen.2. Kontroller at håndtaket sitter godt fast i pumpen. Sjekk at HLR-stroppen er festet riktig/ikke lekker.3. Sjekk at alle luftslinger på innsiden av madrassen er godt festet.4. Sjekk alle celler, rør og slanger for luftlekkasje.5. Kontroller at luftfilteret er riktig plassert og at det er rent.6. Slå på strømmen.
	Behov for service	<ol style="list-style-type: none">1. Tilbakestill advarselen - slå av strømmen og trykk på "Alarm mute"-knappen.2. Ta kontakt med Invacare vedrørende service. Det er ingen risiko med henhold til fortsatt bruk, selv om LED-indikatoren lyser.
	Strømsvikt	<ol style="list-style-type: none">1. Tilbakestill advarselen - slå av strømmen og trykk på "Alarm mute"-knappen.2. Sjekk at strømkabelen sitter godt i stikkkontakten og pumpen, og kontroller at strømmen er slått på.3. Kontroller kontrollenhetens sikring (1 AMP) Sikringen kan frigjøres ved å trykke inn en skrutrekker og vri den.

Merk!

SoftCloud™-filteret skal skiftes én gang i året samt når pumpen skal benyttes av ny pasient.

For ytterligere informasjon om bruk og betjening, vennligst se produktets brukermanual eller kontakt oss på 22 57 95 00 / norway@invacare.com.