

INVACARE SOFT TILT 3

QUICK GUIDE




- ⚠ Soft Tilt 3 är konstruerad för SB755, NordBed Ultra och NordBed Optimo 85 cm och 90 cm..
- ⚠ Soft Tilt 3 får endast användas av personal som har fått utbildning i dess användning.
- ⚠ Vid användning av Soft Tilt 3 ska alltid hänsyn tas till användarens upplevelse.
- 👤 Innan Soft Tilt 3 används ska manualen läsas noggrant och säkerhetsanvisningarna följas.



ALLMÄN INFORMATION: STYRBOX


SLÅ PÅ Tryck på ON/OFF i 3 sekunder = Displayen tänds och visar 3 linjer.	
STÄNG AV Återställ systemet. Tryck sedan på ON/OFF i 3 sekunder = Systemet och displayen stängs av.	
ÅTERSTÄLLNING Tryck 1 gång på ON/OFF = Systemet går till horisontalläge och displayen visar 3 linjer.	
NÖDLÄGE Tryck på Nödläge = Positionen stoppas. Släpp Nödläge-knappen och tryck 1 gång på ON/OFF = Systemet går till horisontalläge och visar 3 linjer.	

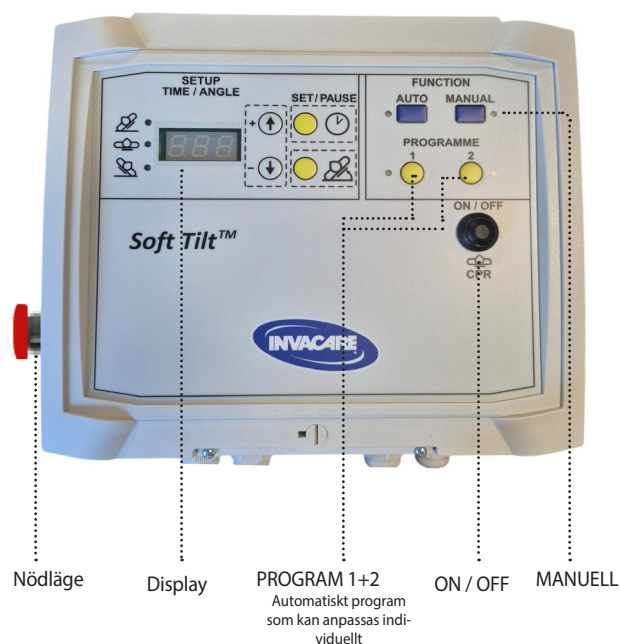

MANUELL ANVÄNDNING: HANDKONTROLL

AKTIVERA Tryck på MANUAL i 3 sekunder = Grönt ljus och displayen visar 2x0.	
AVAKTIVERA Tryck 1 gång på ON/OFF = Systemet går till horisontalläge, stängs av och displayen visar 3 linjer.	

Observera! Under drift kan vinkeln avläsas på styrenhetens display.

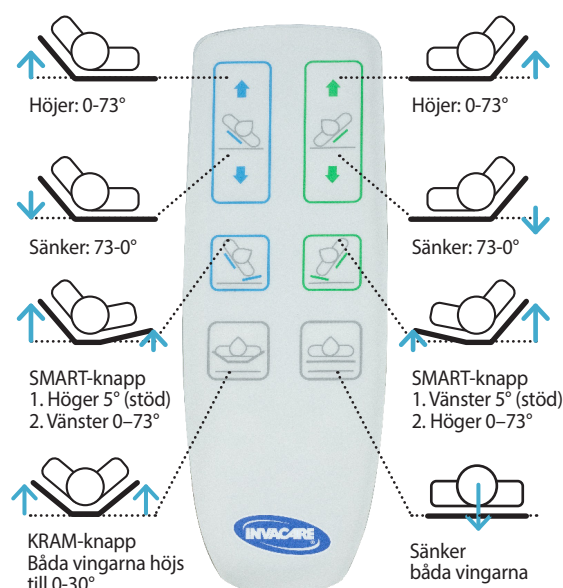

+ KRAM OCH VAGGA


Genom att höja båda vingarna samtidigt kan du uppnå en lugnande kram- och vagningsposition. Tryck på den grönt markerade knappen för att höja båda vingarna samtidigt. Tryck på den gula knappen för att sänka båda vingarna samtidigt och förbli i manuellt läge.



Funktionen får **ENDAST** användas av utbildad personal.



Det finns risk för klämskador om båda vingarna höjs samtidigt.

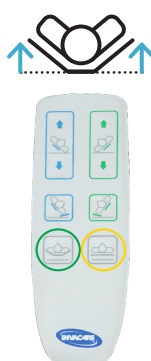

Tryck för att aktivera

+ SMART-KNAPP FÖR FÖRFLYTTNING OCH HANTERING

Använd SMART-knappen vid förflyttning och hantering från horisontalläge till ena sidan eller från sida till sida. Lyftet sker med stöd från motsatt sida.



Vid användning av Soft Tilt 3 ska alltid hänsyn tas till användarens upplevelse.





AUTOMATISK ANVÄNDNING: STYRBOX

Systemet kan ställas in för automatisk drift med den förprogrammerade blå AUTO-knappen eller de gula programmerbara knapparna PROGRAM 1 (P1) eller PROGRAM 2 (P2).

Funktion AUTO: Fabriksinställt program. Kan inte ändras. Ändrar position var halvtimme utan stöd.

PROGRAM 1 (P1): Tom vid leverans. Kan programmeras individuellt av särskilt utbildad personal.


PROGRAM 2 (P2): Tom vid leverans. Kan programmeras individuellt av särskilt utbildad personal.

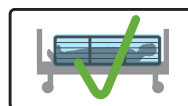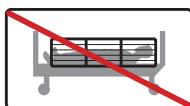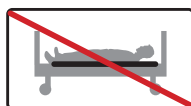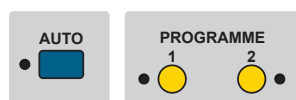

STARTA INDIVIDUELLT INSTÄLLT AUTOPROGRAM (P1/P2)

Tryck på P1 eller P2 i 3 sekunder = Dioden tänds och det valda programmet startar och visas på displayen.


Exempel på start av P1:

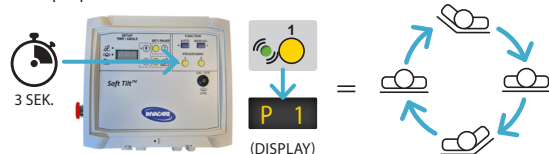

Observera! När programmet har startat kan antalet minuter till nästa positionsändring avläsas på displayen.


STOPPA INDIVIDUELLT INSTÄLLT AUTOPROGRAM (P1 / P2)

Tryck 1 gång på ON/OFF = Programmet stoppas och båda vingarna går till horisontalläge.

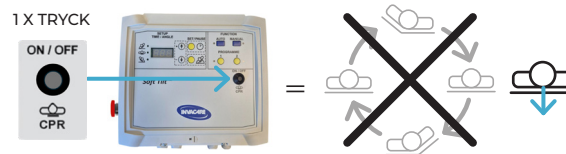

II PAUSFUNKTION

Tryck på den gula SET-knappen i 3 sekunder = programmet pausas, vingarna går till horisontalläge och manuellt läge aktiveras.

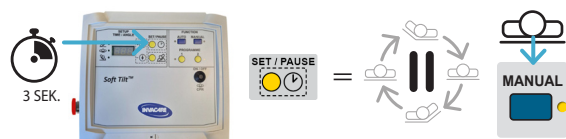


I pausfunktionen startar Soft Tilt 3 om det aktiverade programmet efter 30 minuters inaktivitet.

STARTA OM AUTOPROGRAM

Växla från pausfunktionen tillbaka till automatiskt program:

Tryck på den gula SET-knappen i 3 sekunder = Programmet startar igen.

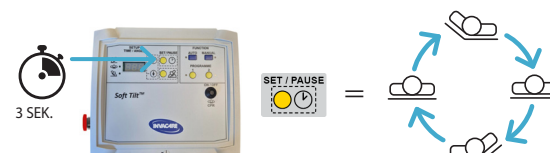

Invacare A/S
Sdr Ringvej 37,
2605 Brøndby
Danmark



Careturner A/S
Silovej 16
2690 Karlslunde,
Denmark