



Yes, you can.



Küschall Compact som godkjent sete i bil

Gjør reisen trygg og komfortabel ved å tilpasse din **Küschall Compact (både FF og SA)** som et godkjent bilsete i ditt kjøretøy. Küschall Compact er testet og godkjent i henhold til **ISO 7176-19**-standarden, og er derfor et pålitelig valg for bruk som sete i bil. Imidlertid er det viktig å være oppmerksom på spesifikke hensyn **ved bestilling for å sikre overholdelse av reglene for bilsete.**

For at Küschall Compact skal kunne benyttes som sete i bil er det viktig at du forsikrer deg om at:

- Stolens **rygghøyde** er **40 cm** eller høyere.
- Stolens **setebredde** er **40 cm** eller bredere.
- Stolen er utstyrt med **fastmonterte kjørehåndtak** med **feste** for nakke-/hodestøtte.
- Ved bestilling er det viktig at stolen settes opp med **transportsett** i konfigurasjonen. Stolen vil da bli merket med et klistremerke som bekrefter at stolen er levert godkjent brukt som sete i bil.





Küschall Compact som godkjent sete i bil

Küschall Compact i bil med påmontert drivaggregat fra Alber:

Både Alber E-fix og E-motion er godkjent og kollisjonstestet montert på Küschall Compact 2.0-stolene.

Sitteputer:

Küschall Compact er godkjent for bruk i bil med ulike seteputer, som FloTech Lite, Matrx Libra, Classic Visco, Contour Visco NG og Vicair O2-serien.

Advarsel!

Selv med riktig festing av rullestolen og etterfølgelse av reglene, er det viktig å være oppmerksom på potensiell fare for passasjerene ved en kollisjon eller bråstopp. Invacare anbefaler sterkt å **overføre brukeren til et bilsete** og sikre dem med setebeltet.

Vi gjør oppmørsom på at enhver endring som gjøres på stolen eller dennes konstruksjon vil kunne påvirke rullestolens egnethet som sete i bil. Er du i tvil - ta kontakt med Invacare for råd og veiledning!

Küschall Compact gir en sertifisert og tilpasningsdyktig løsning for de som søker mobilitet og uavhengighet. For ytterligere informasjon og assistanse, vennligst kontakt din lokale Invacare-representant eller leverandør.



Yes, you can.®

