

# Gebruikers instructie

## Invacare® Platinum Mobile

### Platinum Mobile


Model nr.: I

Serie nr.:

Datum van Service:

aantal uren op de Unit:

### Uitleg van de iconen

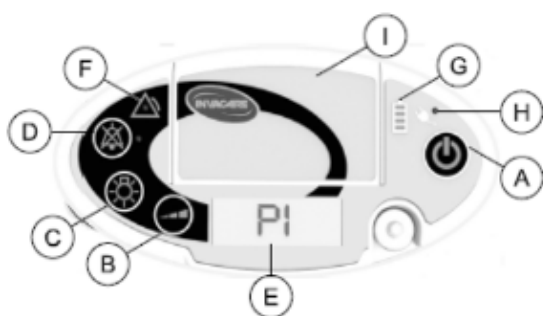

### Gebruik van de Platinum Mobile :

1. Open het klepje van het accuvak en plaats de accu in het daarvoor bestemde vak.



2. Sluit de wisselstroomadapter aan op de invoerstroomconnector van de externe voeding B. Steek het netsnoer in het stopcontact.



3. Verbind de neuscanule met de zuurstofuitlaatpoort op uw concentrator C. Zuurstof wordt alleen afgegeven terwijl u via de neuscanule op dit apparaat ademhaalt.



- A Aan/uit-knop  
Druk hier een seconde op om de concentrator in of uit te schakelen.
- B Flowselectieknop  
Druk hierop om de pulserende zuurstofflow af te stellen op de voor u voorgeschreven instelling.
- C Knop voor achtergrondverlichting  
Druk hier eenmaal op om het scherm gedurende 5 seconden te verlichten.
- D Geluiddempingsknop  
Druk hierop om de piepton voor zowel alarmeren als status te dempen.
- E Scherm  
Geeft informatie over de gebruiksstatus van de concentrator.
- F Alarmlampje  
Het gele lampje in het midden van het driehoekige symbool brandt om abnormale bedrijfsomstandigheden aan te geven.
- G Accumeter  
Geeft de accucapaciteit van de accu(s) aan.
- H Externe-voedingslampje  
Het oranje lampje naast het stekkersymbool brandt wanneer een externe voedingsbron wordt aangesloten op de concentrator.
- I Klepje van het accuvak

**Gebruik van de Platinum Mobile vervolg :**

4. Schakel de concentrator in door op de aan/uit-knop D te drukken totdat de lampjes op het bedieningspaneel branden.

De concentrator kan nu ingezet worden en gelijktijdig zal ook de accu opgeladen worden



5. Stel de pulsflowinstelling in op de door uw zorgverlener voorgeschreven waarde. De pulsflowinstelling kunt u wijzigen door op de flowselectieknop E te drukken. Leg de neuscanule over uw oren en plaats de vertakkingen in uw neus volgens de instructies van uw zorgverlener.

**Onderhoud:**

- Onderhoud mag alleen gepleegd worden door Invacare of aangewezen distributeur.
- Reinig de kast met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel
- Verwissel het filter indien een ander persoon de concentrator gebruikt , zie afbeelding hieronder )

**Veiligheid:**

- GEBRUIK GEEN ZUURSTOF BIJ OPEN VUUR OF SIGARETTEN.
- GEBRUIK GEEN olie, vetten of andere smeermiddelen in de buurt van dit product.
- Gebruik de concentrator niet in combinatie met accessoires ontworpen door andere fabrikanten
- Plaats de concentrator met de compressor in een goed geventileerde ruimte om uitval te voorkomen.
- Plaats de concentrator altijd rechtop in het gebruik.

Uw leverancier van uw zuurstofstelsysteem is: