

Tillykke med din nye el-scooter



Yes, you can.®





«
Forrige side



»
Næste side

Tillykke med din nye el-scooter

Vi er glade for, at du har valgt en el-scooter fra Invacare, som vi ved, vil gøre din køreoplevelse til ren glæde og fornøjelse.

På en el-scooter fra Invacare er hver detalje nøje og omhyggeligt skabt for at sikre, at du oplever høj komfort og køreglæde.

Vores el-scootere er mere end bare transport. Hver eneste detalje er skabt med passion og dedikation skabt, for at give dig det allerbedste.

Fra det øjeblik du tager din el-scooter i brug, vil du mærke kvaliteten, komforten og den frihed det fører med sig, og som vores motto siger:

Making Life's Experience Possible.

Tak, fordi du valgte en el-scooter fra Invacare.

Indholdsfortegnelse

Side 01	Vedligeholdelse
Side 02	Dæktryk
Side 04	Batterier
Side 06	Vejhjælp
Side 07	Forsikring
Side 09	Inspiration
Side 11	Noter



Vedligeholdelse

En el-scooter kører på vedligeholdelsesfrie gel-batterier. Du skal dagligt lade batterierne op, og de bør udskiftes, når ydelsen begynder at falde.

Når vejret er koldt, yder batteriet også mindre. Det er derfor bedst at opbevare el-scooteren indendørs.

Du skal ligeledes være opmærksom på, at skifte dæk efter behov. Hvis el-scooteren opbevares udendørs, er det en god idé at dække den med et garageovertræk, så den skånes for vejr og vind.

Dæktryk

Et korrekt dæktryk er vigtigt af flere grunde. Det forbedrer sikkerheden, ved at give bedre køretøjskontrol, øger ydeevnen og forlænger dit dæks levetid samtidig med, at det reducerer slid og forbedrer kørekomforten.

- Kør aldrig med for lavt dæktryk. Det kan give skader på dækket.
- Det anbefalede dæktryk kan ses på siden af dækket, men ligger typisk på ca. 3 bar.



Batterier

Det anbefales at anvende en oplader leveret af Invacare, så er du sikker på, at den passer til batterierne og har indbygget beskyttelse mod overladning.

- Nye batterier vil have deres fulde kapacitet efter at have gennemgået ca. 10-20 opladningscykluser.
- Batterierne bør oplades dagligt.
- Når batteriindikatoren har været nede i det røde interval, skal batterierne oplades i mindst 16 timer, uden at tage hensyn til, at indikatoren viser 100%
- Et nyt batteri kan oplades op til 100% ved 25°C.
- Står el-scooteren udenfor om natten, og ændrer temperaturen sig til 0°C, så falder batterikapaciteten automatisk til ca. 90%.

Yderligere oplysninger finder du i din brugsanvisning og/eller quickguide.



Yes, you can.



Vejhjælp

Det er en god idé, at tegne abonnement på vejhjælp så du kan få hjælp, hvis uheldet er ude, og din el-scooter bliver beskadiget, punkterer eller løber tør for strøm, mens du er på farten.

Der findes flere forskellige aktører, der tilbyder vejhjælp til el-scootere, fx

- Falck
- Dansk Autohjælp
- DK Vejhjælp



Forsikring

Din el-scooter er som udgangspunkt dækket mod tyveri, brand- og vandskader af din indboforsikring.

Det er derfor ikke nødvendigt at tegne en særskilt forsikring til el-scooteren.

Vi anbefaler dog altid, at du forhører dig hos dit forsikringselskab, når du anskaffer dig en el-scooter. Husk at gøre forsikringselskabet opmærksom på, at der er tale om en el-scooter og ikke en EU-knallert eller et andet benzindrevet køretøj.

Dit forsikringselskab vil formentlig spørge til serienummer på el-scooteren, og muligvis ønsker de også at kende el-scooterens listepris (faktuelle værdi).

Serienummer/ SN:

Listepris:





Hoftesele



Bagdmonteret kurv



Opticharge lader



Rollatorholder



Frontmonteret kurv



Garageovertræk



Kopholder



Sædeovertræk




Rygmonteret taske



Tilbehør

Find inspiration i vores webshop, hvor du kan opleve et dedikeret fokus på at sikre, at selv vores mest grundlæggende produkter i sortimentet opretholder vores standarder. Vi værdsætter vigtigheden af pålidelige og grundlæggende produkter til din dagligdag, og derfor stræber vi altid efter at tilbyde de produkter, der gør en positiv forskel for dig og din hverdagslivsstil. [Scan QR koden og gå på opdagelse.](#)

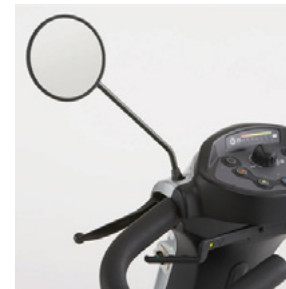

Sidespejl



Stokkeholder



[invacare-shop.dk](https://www.invacare-shop.dk)

Scan QR koden



Forrige side



Hjem

God fornøjelse



Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark

Scan QR koden
for seneste
version

