

AKOESTISCHE SIGNALLEN UITZETTEN LEO BIJ ACCU BIJNA LEEG



AKOESTISCHE SIGNALEN UITZETTEN LEO BIJ ACCU BIJNA LEEG



4

- Laat de knoppen los om de instelling te veranderen, hierbij zal de laatste LED gaan knipperen.
 - Om de instelling te behouden, houd de knoppen ingedrukt en wacht tot 5 seconden voorbij zijn.
- In beide gevallen zal hierna de normale accu indicatie weergegeven worden*