


# AKOESTISCHE SIGNALEN ORION & COMET BIJ ACHTERUITRIJDEN UITZETTEN (LCD)



De installatiepagina van Buzzer Volume (Zoemervolume) licht na twee seconden op.

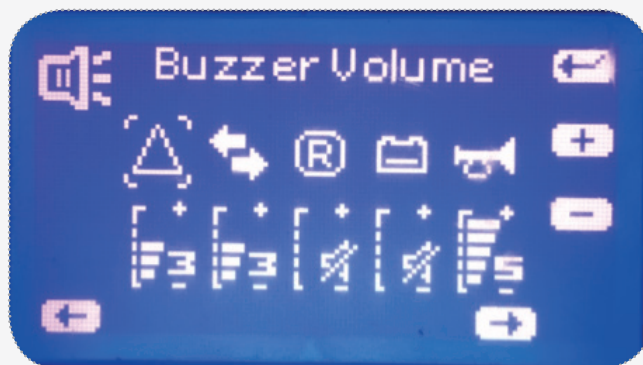

# AKOESTISCHE SIGNALEN BIJ ACHTERUITRIJDEN UITZETTEN (LCD)


4

Druk de knop voor de rechter richtingaanwijzer twee keer in om bij het icoon  van het achteruitrijden uit te komen.



5

Met de schildpad en lichtknop kan het volume omhoog en omlaag worden aangepast

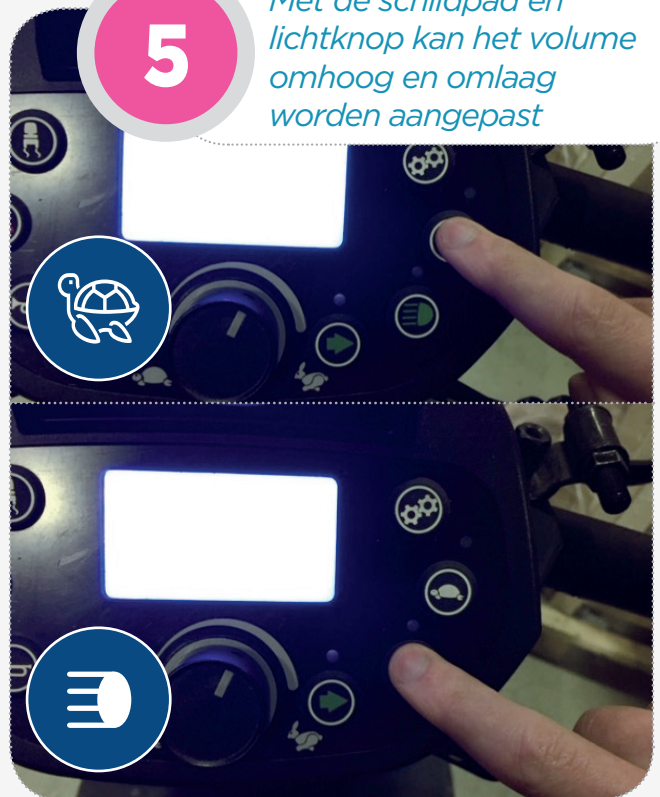

6

Druk op de verstelmodustoets om op te slaan en de volgende installatiepagina te openen. Na deze nog twee keer in te drukken gaat u uit het wijzigingsmenu.

