

AKOESTISCHE SIGNALEN ORION & COMET BIJ ACHTERUITRIJDEN UITZETTEN (LED)



1

Schakel de bediening uit.



2

Houd de beide richtingaanwijzers ingedrukt.



3

Schakel de bediening in.



4

Laat binnen 10 seconden de beide richtingaanwijzer knoppen weer los. Het branden van de laatste LED geeft de installatiemodus aan



Yes, you can.®

AKOESTISCHE SIGNALEN ORION & COMET BIJ ACHTERUITRIJDEN UITZETTEN (LED)

5

Met het drukken op de lichtknop kan het volume worden aangepast.



AKOESTISCHE SIGNALEN ORION & COMET BIJ ACHTERUITRIJDEN UITZETTEN (LED)

6

Houd beide richtingaanwijzers ingedrukt om de instellingen op te slaan of wacht 10 seconden zonder een toets aan te raken. De normale accu indicatie zal hierna weergegeven worden

