



Okxygenkonsentratorer

www.invacare.no



Din leverandør av oksygenkonsentratorer og fyllesystem for flasker

Invacare er totalleverandør av tekniske hjelpemidler, og har lang erfaring med å levere kvalitetsprodukter til hjemmepleie, institusjoner og sykehus i Norge. Vårt mål er å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne med å gjenopprette og opprettholde en aktiv livsstil under slagordet «**Making Life's Experiences Possible**». Dette oppnår vi ved å ha gode produkter og faglig dyktige ansatte som engasjerer seg for å finne den beste løsningen for hver enkelt kunde og sluttbruker.

I Norge har vi lang erfaring med å levere oksygenhjelpemidler til sykehus og sykehjem. I Europa og USA er Invacare en ledende leverandør av konsentratorer og fyllesystem for oksygenflasker.

Innholdsfortegnelse

Fra og med 1. juni 2022 er Invacare leverandør av produkter og tilbehør i følgende poster



Delområde 3

Platinum® 9

Platinum 9 er en konsentrator til brukere med høyt oksygenbehov, med kapasitet inntil 9 l per minutt

4 - 5



Delområde 7

Homefill® II

Homefill II komprimerer enkelt og sikkert oksygen fra en Invacare-konsentrator inn i oksygenflaskene. HomeFill II-systemet gir brukeren økt frihet og selvstendighet ved at man selv kan fylle sine bærbare oksygenflasker

6 - 9



Delområde 10

Tilbehør og reservedeler

Her vil du finne varianter av flasker, nesekateter, forlengerslanger, vesker med mer

10 - 11



Yes, you can.


Dine kontaktpersoner



Produkttekniske spørsmål

Erik Sandbæk er produksjef for oksygenhjelpemidler, er kontaktpersonen mellom Sykehusinnkjøp og Invacare, og ansvarlig for salg og oppfølging av sykehus.


Erik Sandbæk - Produksjef

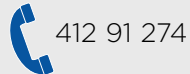

Produkttekniske spørsmål

Svein Hansen har teknisk bakgrunn med elektromedisinsk samtykke og har lang erfaring fra hjelpemiddelbransjen. Han er spesialist på teknisk opplæring av helsepersonell og er lokalisert i Bodø.



Svein Hansen - Salgstekniker

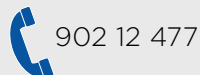

Tilbud

Karianne Nyrud Jansen er salgssjef og ansvarlig for salg til sykehus. Hun har lang erfaring og kan hjelpe deg med tilbud.



Karianne Nyrud Jansen - Salgssjef Region Øst

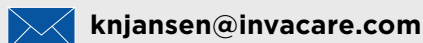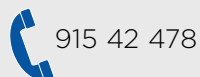

Ordre og teknisk support

Rachida Laagar er kundeservicekontakt for sykehus og vil bistå med ordre, og oppfølging av vareleveranser.

Kundeservice sykehus

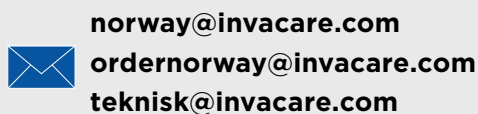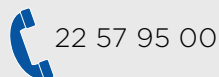

Bestilling

Via elektronisk varekatalog. Du kan også ta kontakt med oss, så sender vi deg mer informasjon.

www.invacare.no



Invacare®

Platinum® 9

Økonomisk konsentrator
med høy kapasitet



Yes, you can.

Platinum 9 er en pålitelig konsentrator til brukere med høyt oksygenbehov. **Platinum 9** er en **HomeFill**-kompatibel konsentrator med kapasitet opp til 9 l per minutt.

Samtidig som man optimaliserer oksygenkonsentrasjonen, minimerer **Platinum 9** kostnadene forbundet med vedlikehold og levering av oksygen. Takket være en rekke integrerte alarmer gir konsentratoren brukeren mulighet til å bli hjemme, komfortabelt og sikkert.

Egenskaper



Sikker strømforbindelse



Enkel tilgang ved bytte av filter



HomeFill-tilkobling

Gode egenskaper og pålitelighet kombinert med høy brukervennlighet




Invacare **Platinum 9** er kraftig, pålitelig og brukervennlig. Med 9 liters oksygenkapasitet med 87-95,6 % renhet, er **Platinum 9** utviklet for pasienter med høyt oksygenbehov. Med det integrerte håndtaket og svinghjulene er konsentratoren enkel å manøvrere. **Platinum 9** er enkel i bruk og ivaretar brukerens sikkerhet.

Tekniske data

	Dybde	Bredde	Høyde	Vekt	Strømforbruk	Flow
Platinum 9	365 mm	467 mm	670 mm	24 kg	475 W	1 - 9 l/min
	Outlet pressure	Lydnivå	Oksygenrenhet	Altitude	ISO Compliant	
Platinum 9	62 kPa	< 47 dB(A)	87-96%	Up to 1230m	ISO8359, AMD1	



SensO₂-System

O ₂ -konsentrasjon	
	høyere enn 85% - grønt lys - Normal
	mellom 73% og 85% - gult lys - Sjekk filter og flow-nivå
	lavere enn 73% - rødt lys - Kontakt servicetekniker

Se www.invacare.no eller trykk her for brukermanual og mer informasjon om produktet.



Hovedprodukt

Art. nr. helseforetak

1577755

Konsentrator Platinum 9 inkl. ekstra kabinettfilter

Art. nr. kommune

IRC9LXO2AWQ-SCAN

Beskrivelse

Konsentrator Platinum 9

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo



Yes, you can.



Invacare®

HomeFill® II

Frihet til å puste hvor enn du er



Yes, you can.

Invacare **HomeFill II**-systemet gjør det mulig for brukeren å selv fylle sine bærbare oksygenflasker.

Ved å få oksygentilførsel via flasker kan brukeren fremdeles være aktiv og uavhengig, vel vitende om at man selv kan etterfylle flaskene i hjemmet etter behov.



Fyllesystem for institusjon eller hjemmebruk

Invacare **HomeFill II** revolusjonerer portabelt oksygenutstyr ved at brukeren selv kan fylle flasker i sitt eget hjem eller på en institusjon. **HomeFill II** består av en kompressor som enkelt og sikkert komprimerer oksygen fra en Invacare-konsentrator inn i oksygenflaskene. Brukeren kan bevege seg fritt med ubegrenset tilgang til oksygen samtidig som man sparer leveransekostnadene med tilkjørt oksygen.

Ta den med hvor enn du går

Når flasken er fylt kan brukeren plassere den i en spesialdesignet veske eller ryggsekk og ta den med seg. Fordelen med **HomeFill II** er at den er flyttbar og enkelt kan transporteres når man besøker venner, familie eller når man drar på ferie.

Enkel å justere og fylle på for å passe brukerens behov

Regulatoren på flasken kan justeres fra 0,25 til 6 som tilsvarer foreskrevet dosering LPM (liter per minutt). Brukeren får rett mengde oksygen mer effektivt enn tidligere*. **Oxy-Lock**™ er et enkelt og sikkert hurtigkoblingssystem som gjør påfyllingen enkel å utføre – sett på kompressoren, tilslutt flasken og påfyllingen starter. Etter ca 2 timer slår påfyllingen seg av automatisk. Dette gjør det sikkert å bruke og minimaliserer risikoen for å forkludre fyllingen.



Egenskaper



Det er enkelt å reise med det mobile systemet.



Kombiner med **Platinum 9** for høy flow-pasienter.



Oksygenflasker med spareventil for lang varighet

Lettvektsflasker i aluminium med integrert spareventil og regulator.



Betjeningspanel

En av/på bryter og lys som indikerer status på fyllingen.



OxyLock

Et brukervennlig fyllesystem som sikrer en rask, sikker og enkel tilkobling til **HomeFill II**-flasken.



Integrert spareventil

Med beskyttelseshette og manometer.



Utvalg flasker

Ulike flasker for å tilfredsstille alle pasientbehov. Flasker med kontinuerlig flow og med spareventil er tilgjengelig i flere størrelser.



Innebygd oksygensensor

En innebygd oksygensensor kontrollerer fylleprosessen og garanterer > 90 % renhet i flasken og høy oksygenkonsentrasjon til brukeren.

Tekniske data

	Dybde	Bredde	Høyde	Vekt	Charger	Strømforbruk	Oksygenrenhet
HomeFill II	400 mm	515 mm	380 mm	15 kg	230 V, 50 Hz	175 W	> 90%

Se www.invacare.no eller trykk her for brukermanual og mer informasjon om produktet.



Tekniske data: Flasker

Flaske med spareventil, varighet i timer og minutter

Spareventil innstilling	1	2	3	4	5	Kontinuerlig flow (2 l/min)	Fylletid
1 liter flaske	9:20	5:55	4:30	3:35	3:00	1:20	1:20
1.7 liter flaske	14:20	9:05	6:55	5:35	4:40	2:05	2:05

Flaske med kontinuerlig flow, varighet i timer og minutter

Flow	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	2.5	3	4	5	6	Fylletid
1.7 liter flaske	16	8	5:20	4	2:40	2	1:30	1:20	1	00:50	00:40	2:05

Systemkrav

Invacare **HomeFill II** kan kun kobles til en Invacare oksygenkonsentrator (se relevant Invacare-brosjyre).

Referanser

CHEST 2002: Refillable Oxygen Cylinders May Be an Alternative for Ambulatory Oxygen Therapy in CPOD. *Antoine Cuvelier, Jean-François Nuir, Nadia Chakroun, Jérôme Aboab, Gabriella Onea & Daniel Benhamou.*

Respiratory Care 2003: A Clinical Comparison of Portable Oxygen Systems: Continuous Flow Compressed Gas VS HF Cyl. *J Lewarski.*

McCoy & Bliss: Evaluation of the **HomeFill II** Oxygen System During Activities of Daily Living; *Robert McCoy & Peter Bliss - December 2001.*

CPLF 2008: Efficacy of gaseous oxygen cylinders filled with a compressor: *C. Molano, I Huet, H. Aouina, C. Viacroze, JF Muir, A. Cuvelier (Antidir).*

ERS 2009: **HomeFill II** oxygen concentrator system - "better for your patient and your pocket" *Phyllis Murphie, Stuart Little, Jane Gysin, Paul Rafferty. Respiratory Medicine, Dumfries and Galloway, Dumfries, Dumfries and Galloway, United Kingdom.*

ERS 2009: A comparison of four portable oxygen devices on exercise performance in adult COPD patients who become hypoxaemic on activity; *Lynn McDonnell, Louise Ellis, Rexford Muza, Jimstan Periselneris, Leyla Osman, Andrew Grieve, Eleanor Main, Craig Davidson - Guy's & St Thomas' London UK.*

Hovedprodukt

Art. nr. helseforetak	Beskrivelse
1637438	Homefill II (Inkl. vår 5 L konsentrator PerfectO2V, stativ og to oksygenflasker)
Art. nr. kommune	Beskrivelse
IOH200AW-SCAN	Homefill II

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo



Yes, you can.



Invacare® | **Tilbehør oksygenprodukter**



Yes, you can.



Fukteflaske til Platinum 9

Art. nr.: 1509582



Flowregulator for lav flow 0-0,75 LPM

Art. nr.: IRCPF16AW



Lås til flowregulator

Art. nr. 1580295



Check O₂ Plus oksygenmåler

Måler oksygenkonsentrasjon, flow og utslippstrykk på alle typer konsentratorer.

Art. nr.: IRC450



Oksygenflasker

Art. nr.:	Beskrivelse
1510861-HF2PCE6	Oksygenflaske 1.0 l m/ spareventil
1543038-HF2RE9ES	Oksygenflaske 1.7 l kont. flow m/lukkeventil
1510864-HF2PCE9	Oksygenflaske 1.7 l oksygen m/spareventil



Bærbar veske

Oksygenflasken kan bæres over skulderen i en veske.

Art. nr.: 1 liter 1514281
Art. nr.: 1,7 liter HF2PC9BAG



Ryggsekk til oksygenflaske

Praktisk ryggsekk som passer til alle våre oksygenflasker.

Art. nr.: 1543057

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo



Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Telefon: +47 22 57 95 00
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2022 Invacare International Sàrl. All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig av form er forbudt uten tillatelse fra Invacare International Sàrl.

Respi - NO - 06/2022



Yes, you can.