



Yes, you can.



Kom i gang med din nye
e-fix E35/36!

TAKK - OG GRATULERER!

Først og fremst: Gratulerer med å ha tatt et godt valg!

Når du velger et drivaggregat fra Alber, velger du også optimal komfort, bunnsolid kvalitet, økt frihet og uante muligheter! Med et elektrisk drivaggregat påkoblet rullestolen får du ekstra krefter (når du trenger det), økt rekkevidde, og ikke minst får du muligheten til å sanke nye og spennende opplevelser enten på egenhånd – eller sammen med de du er glad i.

Alber er markedsleder internasjonalt på brukervennlige og praktiske drivaggregat til manuelle rullestoler, og vi i Invacare er stolte av å kunne levere disse kvalitetsproduktene i Norge. Vi håper denne guiden kan gi deg en best mulig start med ditt nye drivaggregat, og at du på en enklere måte kommer i gang med ditt nye Alber-produkt.

Takk for at du valgte oss! Og gratulerer igjen med et godt valg.



Få en god start!

For å komme best mulig i gang med din nye e-fix E35/36, anbefaler vi deg å ta en titt på de generelle sikkerhetsinstruksjonene under:

- Les brukermanualen og følg sikkerhetsinstruksjonene før første gangs bruk.
- Husk å overholde og respektere maksimal personvekt for produktet. Maksimal brukervekt for e-fix E35 er 120 kg. Maksimalbrukervekt for e-fix E36 er 160 kg.
- Ikke bruk rullestolen og drivaggregatet i brattere terreng enn det det er ment for.
- Prøvekjør alltid i et åpent område og i god avstand fra potensielle faresoner som trapper, vann og høye kanter/hindringer.
- Kjør kun med lav hastighet mot og over hindringer.
- Start og stopp rolig og kontrollert i spesielt oppover- og nedoverbakker. Unngå rykkvise styrebevegelser.
- E-fix skal alltid brukes på en rullestol som er utstyrt med to parkeringsbremseser og et sett med tippesikringer.
- Se til at både din fysiske og psykiske helsetilstand gjør deg i stand til å bruke et elektrisk drivaggregat



Se video av
e-fix



Last ned
brukermanual

TA AV DRIVHJULENE

For å ta av drivhjulet, begynn med å dytte tippesikringene ned i gulvet slik at du får drivhjulet opp fra underlaget.

Sørg for at dekselet på drivhjulet er i «**grønn**» posisjon. Bruk den ene hånden til å presse inn knappen midt på drivhjulet, og den andre til å trekke hjulet utover.




TA PÅ DRIVHJULENE

Når drivhjulet skal på igjen, sørg også her for å bruke tippesikringene for å få drivhjulet opp fra underlaget. Hold inne utløserknappen midt på hjulet for å montere hjulet.

Legg merke til at den ene koblingen går til ledningsnett, mens den andre er selve hjulbolten (se bilde til høyre).

Når hjulet er på igjen, sjekk at hjulet er festet ordentlig ved å bevege hjulet lett frem og tilbake.

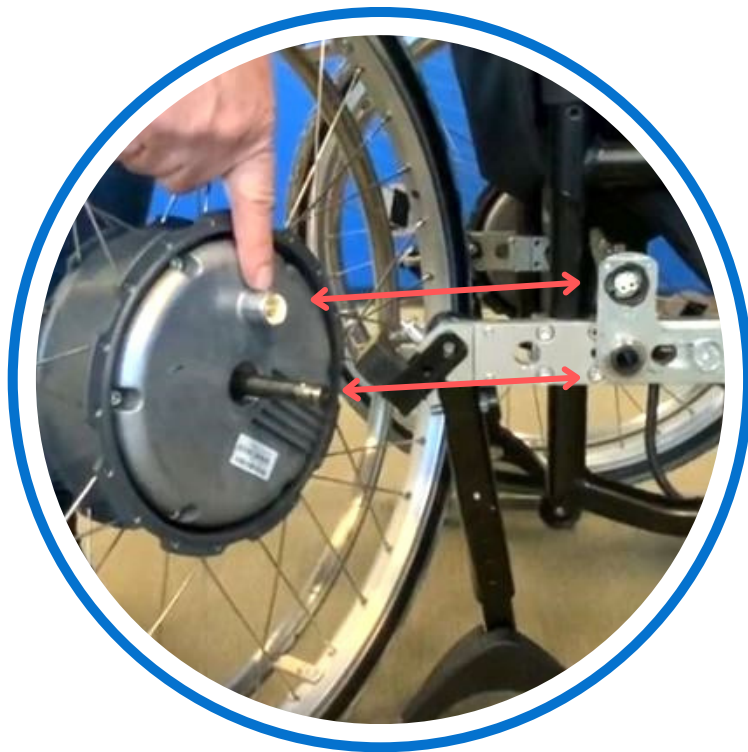

FRIKOBLING AV DRIVHJULENE

For å frikoble hjulene, vri på dekselet til du hører et “klikk” og fargen endrer seg fra **grønn** til **rød**. Rød betyr at hjulet er frikoblet, og at du kan kjøre rullestolen manuelt.

Husk å vri dekselet tilbake til grønn når du ønsker å bruke e-fix.

BRUK OG LADING AV BATTERIPAKKEN

For å montere batteripakken, plasser nedre del av batteripakken inn i batteriholderen, og klikk deretter den øvre og resterende delen på plass. Et tydelig «klikk» indikerer at batteriet er ordentlig på plass. **For å ta batteripakken ut,** trekk håndtaket på batteripakken oppover og ta ut batteriet.



Vi anbefaler å lade batteriet etter hver gangs bruk

– slik at du alltid er klar for en ny kjøretur. Bruk kun den medfølgende Alber-laderen. Batteristatus kan du se på displayet øverst på batteripakken (se bilde). Den praktiske magnetkabelen sørger for en enkel og sikker kobling mellom batteriet og styreboksen. *Batteriet er utstyrt med to ulike kontaktpunkter, der det ene brukes til å koble til kabelen fra styreboksen, og det andre brukes til lading.*



BRUK OG TILKOBLING AV STYREBOKSEN

Begynn med å koble styreboksen til batteriet. Dette gjøres enkelt ved hjelp av den praktiske magnetpluggen (se bilde til høyre). *Vær obs på at kabelen ikke blir liggende å gnisse mot hjulet.*

Når styreboksen og batteriet er koblet sammen, trykk på av/på-knappen øverst på styreboksen (1) og vent noen sekunder.

Beveg joysticken fremover for å kjøre fremover, og til siden om du skal kjøre eller svinge mot henholdsvis høyre eller venstre. Farten justeres enkelt ved å vri på det lille grå hjulet til høyre på styreboksen (2). Fart justeres også etter hvor mye man skyver på joysticken.



TRANSPORT OG REISE

Transport av e-fix i bil

1. Ta av drivhjulene som beskrevet tidligere i denne guiden
2. Koble fra og ta av styreboksen.
3. Dersom e-fix er montert på en kryssrammestol kan du deretter ta tak i setet på rullestolen, og slå sammen rullestolen – mens e-fix-batteriet fortsatt sitter på.
4. Fest de enkelte delene så de blir liggende trygt og i ro i bilen.

Transport av e-fix på fly

Lithium-ion-batteriet og -teknologien til e-fix er godkjent for flytransport. *Husk likevel å kontakte flyselskapet du skal reise med i god tid før avreise, og husk også å medbringe flysertifikatet for ditt drivaggregat.*



Les mer og last ned flysertifikat her

