



Yes, you can.®



Kom i gang med din nye
viaGo V24!

TAKK - OG GRATULERER!

Først og fremst: Gratulerer med å ha tatt et godt valg!

Når du velger et drivaggregat fra Alber, velger du også optimal komfort, bunnsolid kvalitet, økt frihet og uante muligheter! Med et elektrisk drivaggregat påkoblet rullestolen får du og ledsageren din ekstra krefter, økt rekkevidde, og ikke minst får dere muligheten til å sanke nye og spennende opplevelser sammen!

Alber er markedsleder internasjonalt på brukervennlige og praktiske drivaggregat til manuelle rullestoler, og vi i Invacare er stolte av å kunne levere disse kvalitetsproduktene i Norge. Vi håper denne guiden kan gi deg en best mulig start med ditt nye drivaggregat, og at du på en enklere måte kommer i gang med ditt nye Alber-produkt.

Takk for at du valgte oss! Og gratulerer igjen med et godt valg.




Få en god start!

For å komme best mulig i gang med din nye viaGo V24, anbefaler vi deg å ta en titt på de generelle sikkerhetsinstruksjonene under:

- Les brukermanualen og følg sikkerhetsinstruksjonene før første gangs bruk.
- Husk å overholde og respektere maksimal personvekt for produktet. Maksimal brukervekt for viaGo er 150 kg.
- Påse at du kjører i passende hastighet mot og over hindringer, samt i rett vinkel i forhold til hinderet.
- Siden viaGo *ikke* har egen bremsefunksjon, må rullestolen være utstyrt med bremses, helst to trommelbremses, for ledsagere som ikke er i stand til å stoppe rullestolen i alle kjøresituasjoner.
- Det anbefales på det sterkeste å ha tippesikringer på rullestolen. I bakker som er brattere enn 4,5 grader (8 %) er tippesikringer pålagt.
- Ikke bruk rullestolen og drivaggregatet i brattere terreng enn det det er ment for.
- Prøvekjør alltid i et åpent område og i god avstand fra potensielle faresoner som trapper, vann og høye kanter/hindringer.
- Se til at både din fysiske og psykiske helsetilstand gjør deg i stand til å bruke et elektrisk drivaggregat



Se video av
viaGo V24

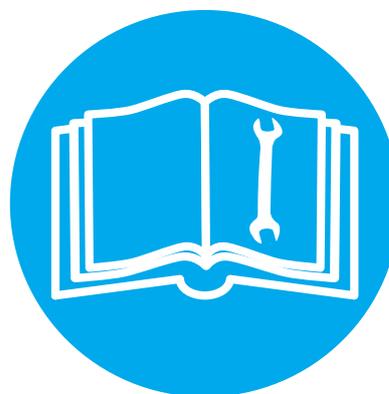

Last ned
brukermanual

FESTE KONTROLLENHETEN

For å feste kontrollenheten:

1. Kontroller at viaGO er slått av
2. Plasser kontrollenheten i holderen fra høyre i en vinkel (ca. 45°) og trykk den deretter ned til venstre.

For å ta kontrollenheten av:

1. Kontroller at viaGo er slått av
2. Løft kontrollenheten til venstre og ta den ut til høyre.



BRUK AV KONTROLLENHETEN

De ulike knappene:

Kontrollenheten til viaGo har en av/på-knapp (1), +/- knapper for å justere hastigheten (2), en knapp for å aktivere fremdriften (3) og 5 lysdioder som viser hastighet (4).

Når du trykker på av/på-knappen, lyser den grønt når den er klar til bruk.

Maksimal hastighet justeres med +/- knappene, og vises via de hvite, blinkende LED-lampene.

Merk: Ved feil- eller advarselmeldinger lyser av/på-knappen rødt eller gult, og de hvite LED-lampene blinker. Følg da anvisningene i bruksanvisningen.



TILKOBLING AV KJØREENHETEN

For å koble til kjøreenheten:

1. Sørg for at parkeringsbremsene på rullestolen er på for å sikre at stolen står i ro ved montering.
2. Hold drivenheten i håndtaket, rull den opp til holderen bakfra, løft den deretter (ca. 45°) til drivenheten glir inn i holderen, og senk den ned mot underlaget.
3. Kontroller at drivenheten sitter godt fast i holderen før bruk.



BRUK AV KJØREENHETEN

Når du skal ta i bruk viaGo:

1. Slå på viaGo ved hjelp av av/på-knappen på kontrollenheten. Hold knappen inne i minst 1 sekund. Knappen vil da lyse grønt.
2. Trykk på den grå knappen til venstre på kontrollenheten for å aktivere kjørefunksjonen.
3. Juster maksimal hastighet fra 1,5 til 5,5 km/t ved hjelp av +/- knappene.

Vær oppmerksom på følgende: ViaGo hjelper deg **ikke** med å styre eller bremse! Når du stopper eller starter i oppoverbakke, må du sikre rullestolen med bremsene på rullestolen! For å slå av assistansen fra viaGo umiddelbart, slipp assistanseknappen til venstre eller trykk på av/på-knappen.



FRAKOBLING AV KJØREENHETEN

Når du skal koble fra viaGo:

1. Sørg for at parkeringsbremsene på rullestolen er på for å sikre at stolen står i ro ved demontering.
2. Slå av viaGo ved å holde inne av/på-knappen på kontrollenheten.
3. Ta tak i håndtaket og løft drivenheten oppover (ca. 45°) og “hekt av” kjøreenheten ved å løfte den opp og bakover.
4. Plasser kjøreenheten på et trygt og smart sted for å unngå skade og slitasje ved transport eller oppbevaring. Sett kontrollenheten i holderen på kjøreenheten.

Vær obs på at kjøreenheten kan være varm ved demontering!

Merk at det også er mulig å løfte viaGo litt opp og ut, i de tilfellene der man ønsker å trille stolen uten at viaGo er nedi underlaget.



TRYGG LADING OG OPPBEVARING

Ved lading:

1. Kontroller at viaGo er slått av.
2. Åpne dekselet for ladekontaktpunktet på kjøreenheten.
3. Sett støpselet til laderen inn i ladekontaktpunktet.

Anbefalt lading er etter hver bruk. Bruk kun den medfølgende Alber-laderen! Husk å lukke dekselet til ladepunktet etter endt lading.

Oppbevar kontrollenheten trygt og sikkert på den tiltenkte plasseringen på selve kjøreenheten (se bilde).



REISE OG TRANSPORT

Transport av viaGO V24 i bil

Den hendige størrelsen og den lave egenvekten til viaGO gjør den enkel å ta med seg i bil. ViaGo kan til og med sitte på rullestolen - selv når stolen slås sammen!

Transport av drivaggregat på fly

Lithium-ion-batteriet og -teknologien til viaGo er godkjent for flytransport. *Husk likevel å kontakte flyselskapet du skal reise med i god tid før avreise, og husk også å medbringe flysertifikatet for ditt drivaggregat.*

Les mer og last ned ditt flysertifikat her

