

Enhandsbroms, One hands brake, Die Einhandbremse, Commande de freinage à une main

- SV** OBS! Enhandsbroms får endast användas i kombination med medföljande handtag eller HP-handtag.
- GB** N.B. One-hand brake may only be used in combination with accompanying HP- or handle.
- DE** Bitte beachten Sie, dass die Einhandbremse nur zusammen mit dem beige-fügten Handgriff oder einem HP-Handgriff angewendet werden darf.
- FR** Attention! La commande de freinage à une main ne doit être utilisée qu'en combinaison avec la poignée jointe, sans poignée de frein, ou poignée pour hémiplégique.

Handtag/Handle/Handgriff
DOLOMITE MELODY L, M, SOPRANO
 Art no 13585-L, 13585-R
DOLOMITE MELODY S
 Art no 13586-L, 13586-R
 HP-handtag/-handle/-handgriffe
 Art no12641

Monteringsanvisning Assembly instruction Montageanleitung Instructions de montage

SV Parkeringsbroms på höger sida ska aktiveras.
GB The parking brake on the right side shall be activated.
DE Die Feststellbremse auf der rechten Seite wird aktiviert.
FR Le frein de stationnement sur le côté droit doit être actionné.

1
DOLOMITE MELODY DOLOMITE SOPRANO

SV Visar montering på höger sida.
GB Shows assembly on the right side.
DE Zeigt die Montage auf der rechten Seite.
FR Indique le montage sur le côté droit.

x 1
2

Torx-nyckel
 Torx-key
 Torx-schlüssel
 Clé six-pans
 T 27

Vänster+Höger
 Left+Right
 Linke+Rechte
 Gauche+droit

x 2
3

SV Enhandsbroms höger sida - vänster bromsstång bort.
GB One-hand brake right side - left brake bar removed.
DE Einhandbremse rechts Seite - linke Bremsstange weg.
FR Commande de freinage à une main côté droit - barre de frein gauche enlevée.

x 1
4

SV Höger sida
GB Right side
DE Rechte Seite
FR Côté droit

4
5

SV Höger sida
GB Right side
DE Rechte Seite
FR Côté droit

6a
6b
6