

Monteringsinstruktion Knäpolstring m skumstoppling

Artnr: SP1671373 och SP1671374

1. Lokalisera skruv f knästoppling



2. Skruva bort skruven



3. Ta bort knästopningen genom att lyfta den smala änden och sedan föra knästopningen innåt



4. Ta bort knästopningen



5. Montera knäpolstring m skum genom att placera det stora hålet på dynan på metallbussningen på benstödet



Hål för att skruva fast knäpolstring

6. Styr knäpolstringen i pilens riktning så mkt det går, ska ta stopp. Dynan kommer kunnas vridas



7. Dynan skruvas fast i benstödet på samma sätt som orginalstopningen satt fast. Kan vara svårt att lokalisera hålet på dynan, se punkt 5. Fördelaktigt att använda en lampa för att se bättre.

