
BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR INGEBRUIKNAME

CHECKLIST VOOR DE INSTRUCTIE VAN DE GEBRUIKER

Deze checklist is een richtlijn voor Alber dealers om rolstoelgebruikers te instrueren over algemene veiligheidsvoorschriften en gedetailleerde informatie over het omgaan met het product. Op de volgende pagina staat een checklist om je te ondersteunen in het geven van een uitgebreide, gedetailleerde briefing. Deze checklist is bedoeld als gids voor een stap-voor-stap introductie aan de gebruiker van het Alber product. Deze instructie is onderdeel van de ingebruikname van dit medische hulpmiddel. Het is belangrijk om de gebruiker te informeren over veiligheidsgerelateerde onderwerpen en om het gebruik van het Alber product in detail uit te leggen.

Na de uitleg raden wij aan een korte testrit met de gebruiker uit te voeren. Er moet speciale aandacht worden besteed aan mogelijk gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan bij gebruik van dit product. Neem de tijd voor dit belangrijke onderdeel van de ingebruikname van dit Alber product.

Instructies mogen alleen worden gegeven door getrainde medewerkers. Alber accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door instructie die is gegeven door een niet-getrainde medewerker.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees en bekijk, voorafgaand aan het eerste gebruik, de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies goed door.
- Gebruik de SMOOV one alleen wanneer je in goede lichamelijke en mentale conditie bent.
- Maximale obstakelhoogte, maximaal gebruikersgewicht, maximale hellingcapaciteit van de SMOOV one en de rolstoel moeten in acht worden genomen.
- Benader en neem obstakels alleen met een passende snelheid en in de juiste hoek ten opzichte van het obstakel.
- Deactiveer de ondersteuning voorafgaand aan het gebruik van de hoepels om te remmen. Verminder vaart bij bochten. Voorzichtig: Risico van omvallen!
- Vermijd trappen, afgronden, waterpartijen en andere gevaarlijke gebieden!
- Check voorafgaand aan gebruik of de accu en de bedieningsunit opgeladen zijn. Controleer dat de brackets stevig vastzitten aan de rolstoel en dat zij niet missen of losgetrild zijn.
- Schakel de SMOOV one uit tijdens transport in een auto, koppel deze los van de rolstoel en zet goed vast.
- Verplaats mensen alleen in de stoel wanneer de SMOOV one is uitgeschakeld of afgekoppeld en de remmen van de rolstoel zijn geactiveerd.
- De SMOOV one mag alleen gebruikt worden op een rolstoel. Deze rolstoel moet zijn uitgerust met 2 parkeerremmen en een paar anti-tippers.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door door Alber gekwalificeerde monteurs.

CHECKLIST VOOR DE INSTRUCTIE VAN DE GEBRUIKER

Deze vakjes dienen bij de demonstratie te worden afgevinkt door de afleveraar

Informeert over mogelijke gevaren	Ga veilig op pad: informeer de gebruiker over de algemene veiligheidsvoorschriften (zie voorpagina).
Leg de display en signalen van de aandrijfunite en de bedieningsunit uit	<ol style="list-style-type: none">1. Aan/uitknop van de aandrijving licht groen op wanneer deze klaar is voor gebruik.2. Een kort akoestisch signaal bevestigt dat het systeem aan/uit staat.3. Vijf witte LEDs op de aandrijfunite geven de huidige laadstatus van de accu van de aandrijfunite weer.4. Vijf witte LEDs op de bedieningsunit geven de huidige laadstatus van de accu van de aandrijfunite weer. De gekleurde LED geeft informatie over de laadstatus van de accu van de bedieningsunit.5. Deze LEDs knipperen in het geval van foutmeldingen of waarschuwingen. Raadpleeg dan de gebruikshandleiding of de mobility app voor meer informatie.
Leg uit hoe de aandrijfunite aangekoppeld moet worden	<ol style="list-style-type: none">1. Activeer de parkeerremmen van de rolstoel. Dit zorgt ervoor dat de rolstoel niet wegrijdt.2. Alleen voor opvouwbare rolstoelen: Plaats de adapteras. Waarschuwing: De rode markering aan de linker- en rechterkant van de adapteras mogen niet meer zichtbaar zijn na het plaatsen!3. Rol de aandrijfunite over de grond naar de achterzijde en dan richting de bracket en laat deze vastklikken in de bracket. Waarschuwing: Til de aandrijfunite niet op achter de rolstoel - Risico op omvallen!4. Controleer dat de aandrijfunite stevig vastzit in de bracket door de behuizing aan de bovenzijde enigszins te bewegen.
Leg uit hoe de bedieningsunit aangekoppeld moet worden	<ol style="list-style-type: none">1. Plaats de bedieningsunit uitsluitend in de bracket wanneer deze uitstaat en klik vast.2. Controleer dat de bedieningsunit stevig vastzit door de behuizing wat te bewegen.
Leg uit hoe de aandrijfunite aangezet moet worden	Zet de aandrijfunite aan door de aan/uitknop aan de bovenzijde in te drukken en ca. 2 seconden vast te houden. De aan/uitknop licht groen op. De laadstatus van de accu wordt aangegeven door vijf witte LEDs.
Leg uit hoe de bedieningsunit aangezet moet worden	Zet de bedieningsunit aan door op de snelheidsknop in te drukken en ca. 2 seconden vast te houden. De bluetooth connectie met de aandrijfunite wordt automatisch gemaakt. Tijdens dit proces kan er een LED op de bedieningsunit blauw knipperen. Wanneer de connectie actief is geeft een gekleurde LED de acculaadstatus van de bedieningsunit aan. De vijf witte LEDs geven de acculaadstatus van de aandrijfunite weer. Waarschuwing: De SMOOV one is nu klaar voor gebruik!
Leg uit hoe de SMOOV one te gebruiken	<ol style="list-style-type: none">1. Door de snelheidsknop naar voren te draaien versnelt de aandrijfunite. Naar achteren draaien vertraagt de ondersteuning. Let op: als de bedieningsunit aan de linkerzijde van de rolstoel is gemonteerd moeten de settings worden aangepast in de SMOOV Mobility App.2. Druk kort op de snelheidsknop om de ondersteuning direct uit te schakelen. Waarschuwing: Schakel de ondersteuning uit voor een obstakel of helling en in gevaarlijk gebied.3. Zoals gebruikelijk bij een handbewogen rolstoel, moeten de hoepels van de rolstoel worden gebruikt voor remmen en sturen. Waarschuwing: De SMOOV one ondersteunt niet bij sturen of remmen!4. Wanneer de aandrijfunite uit positie staat, wordt dit aangegeven door een knipperend middelste LED. Waarschuwing: De aandrijfondersteuning kan dan niet geactiveerd worden!

CHECKLIST VOOR DE INSTRUCTIE VAN DE GEBRUIKER

Deze vakjes dienen bij de demonstratie te worden afgevinkt door de afleveraar

	<p>5. Schakel bij aflopende hellingen de ondersteuning uit door op de snelheidsknop te drukken. Waarschuwing: De aandrijving biedt geen ondersteuning bij remmen. De hoepels moeten worden gebruikt om te remmen.</p> <p>6. Bij het weggrijden op hellingen dient de rolstoel op de parkeerremmen, vervolgens met de grijpbanden weggrijden en de rijondersteuning inschakelen met behulp van de draaiknop. Waarschuwing: Er is geen ondersteuning mogelijk wanneer het aandrijf wiel gedraaid is. De SMOOV one heeft geen terugrolvertraging!</p> <p>7. Probeer sturen en remmen tot stand op diverse manieren uit op een open, vlak gebied. Oefen het navigeren op hellingen met een helper indien nodig. Deactiveer de ondersteuning bij het afgaan van een helling.</p>
Leg het afkoppelen van de bedieningsunit uit	<p>1. Activeer de parkeerremmen. Dit voorkomt dat de rolstoel weggrijdt.</p> <p>2. Zet de bedieningsunit uit, druk op de knop onderaan de bracket en koppel de bedieningsunit af. Berg de bedieningsunit veilig op. Ongewild aanzetten moet worden voorkomen.</p>
Leg het afkoppelen van de aandrijfunite uit	<p>1. Activeer de parkeerremmen. Dit voorkomt dat de rolstoel weggrijdt.</p> <p>2. Trek de hendel op de aandrijfunite omhoog en ontkoppel de aandrijfunite van de bracket.</p> <p>3. Rol de aandrijfunite over de grond naar de voorzijde van de rolstoel. Waarschuwing: Til de aandrijfunite niet op vanachter de rolstoel - Risico op omvallen!</p> <p>4. Uitsluitend voor opvouwbare rolstoelen: Druk de adapteras samen en verwijder deze.</p> <p>5. Berg de aandrijfunite veilig op. Waarschuwing: De unit kan heet zijn!</p>
Leg uit hoe de aandrijfunite en de bedieningsunit opgeladen moeten worden	<p>1. Schakel de bedieningsunit en de aandrijfunite uit.</p> <p>2. Stop de lader in het stopcontact en plaats de magnetische plug in het oplaadpunt.</p> <p>3. De witte LEDs op de aandrijfunite geven aan dat het laadproces loopt en wat de laadstatus is. Het is uitsluitend toegestaan om de aandrijfunite op te laden met de bij de SMOOV one meegeleverde oplader.</p> <p>4. De bedieningsunit kan worden geladen via het laadpunt boven het rode lampje van de aandrijfunite middels de meegeleverde USB-C kabel. De bedieningsunit kan ook worden opgeladen via een externe lader met max. 5 volt en max 1,5 ampere. Waarschuwing: Na het opladen dient het laadpunt op de aandrijf/bedieningsunit weer afgesloten te worden!</p>
Leg de Mobility App uit	<p>De Mobility App dient eerst verbonden te worden met de smartphone. Deze connectie is te maken via het connect icoontje in de rechterbovenhoek van de app. Zodra de connectie is gemaakt, kunnen individuele functies worden gekozen via het menu icoontje in de linkerbovenhoek. De SMOOV Mobility App biedt een aantal functies en uitbreidingen. Bijvoorbeeld, het rode lampje op de SMOOV one uitschakelen, aanpassingen aan de SMOOV one zoals linkshandige bediening of uitbreidingen voor de SMOOV one zijn mogelijk via de SMOOV Mobily App. Waarschuwing: Er zijn settings mogelijk die de reguliere eigenschappen aanzienlijk actiever maken. Controleer na een wijziging in settings altijd eerst (in een veilige omgeving) dat de rolstoel nog steeds veilig bestuurd en geremd kan worden!</p>
