

---

## BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR INGEBRUIKNAME

---

### CHECKLIST VOOR DE INSTRUCTIE VAN DE GEBRUIKER

Deze checklist is een richtlijn voor Alber dealers om rolstoelgebruikers te instrueren over algemene veiligheidsvoorschriften en gedetailleerde informatie over het omgaan met het product. Op de volgende pagina staat een checklist om je te ondersteunen in het geven van een uitgebreide, gedetailleerde briefing. Deze checklist is bedoeld als gids voor een stap-voor-stap introductie aan de gebruiker van het Alber product. Deze instructie is onderdeel van de gebruiksaanwijzing van dit medische hulpmiddel. Het is belangrijk om de gebruiker te informeren over veiligheidsgerelateerde onderwerpen en om het gebruik van het Alber product in detail uit te leggen.

Na de uitleg raden wij aan een korte testrit met de gebruiker uit te voeren. Er moet speciale aandacht worden besteed aan mogelijk gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan bij gebruik van dit product. Neem de tijd voor dit belangrijke onderdeel van de gebruiksaanwijzing van dit Alber product.

Instructies mogen alleen worden gegeven door getrainde medewerkers. Alber accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door instructie die is gegeven door een niet-getrainde medewerker.

### ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees en bekijk, voorafgaand aan het eerste gebruik, de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies goed door.
- Gebruik de e-fix alleen wanneer je in goede lichamelijke en mentale conditie bent.
- Controleer de kritische obstakelhoogte en tip-over limiet van de achteras van de rolstoel (voor details, zie de gebruikshandleiding van de rolstoelfabrikant).
- Maximale obstakelhoogte, maximaal gebruikersgewicht, maximale hellingcapaciteit van de e-fix en de rolstoel moeten in acht worden genomen.
- Benader en neem obstakels alleen met een lage snelheid. Neem obstakels achterstevoren indien nodig. Indien noodzakelijk, vraag om hulp en verwijder de anti-tippers voor korte tijd.
- Start en stop uitermate langzaam op opgaande en afgaande hellingen.
- Vermijd schokkerige stuurbewegingen.
- Vermijd trappen, afgronden, waterpartijen en andere gevaarlijke gebieden!
- (Ver)plaats mensen alleen in de stoel wanneer de wielen en de bedieningsunit uitgeschakeld zijn en de remmen van de rolstoel zijn geactiveerd.
- Check dat de bedieningsunit correct geplaatst is op de onderarm lengte van de rolstoelgebruiker en pas aan indien nodig.
- Zet afzonderlijke onderdelen vast tijdens transport in de auto.
- De e-fix mag alleen worden gebruikt op een rolstoel. Deze rolstoel moet zijn uitgerust met 2 parkeerremmen en een paar anti-tippers.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door door Alber gekwalificeerde monteurs.

# CHECKLIST VOOR DE INSTRUCTIE VAN DE GEBRUIKER

Deze vakjes dienen bij de demonstratie te worden afgevinkt door de afleveraar

<b>Informeer over mogelijke gevaren</b>	Ga veilig op pad: informeer de gebruiker over de algemene veiligheidsvoorschriften (zie voorpagina).
<b>AANDRIJFWIELEN</b>	
<b>De wielen aan - en afkoppelen</b>	Draai de cover naar de groene positie. Druk op de releaseknop en haal het wiel eraf met de knop niet ingedrukt. Druk op de releaseknop om het wiel te bevestigen, plaats de quick-release as, zorg dat het wiel in lijn staat met het laadpunt en druk het erin. Zorg ervoor dat de wielen correct vast zitten.
<b>In- en uitschakelen demonstreren</b>	Draai de cover van de groene naar de rode positie. Let op: Het wiel gaat in vrijloop - demonstreer op vlakke ondergrond.
<b>ANTI-TIPPERS (optie, verplicht voor veiligheid)</b>	
<b>Correct gebruik van de quickpins</b>	Raak de quickpins niet kwijt. Zorg ervoor dat de bouten van de pinnen correct vergrendeld zijn (schudtest).
<b>De anti-tippers aan- en afkoppelen</b>	Druk de bevestiging altijd zo ver mogelijk in de geleiders. Zorg ervoor dat de anti-tippers voldoende veiligheidsafstand hebben tot de wielen. Verwissel links en rechts niet (zie label). Wieltjes moeten vrij kunnen draaien (ca. 1,5 cm afstand tot de vloer).
<b>ACCU</b>	
<b>Het laden van de accu uitleggen</b>	Leg de oplader uit, plaats de laadplug. Laad op na ieder gebruik. Gebruik hiervoor alleen de geschikte Alber lader.
<b>De accu bevestigen</b>	Plaats de accu eerst in de bodem van de houder en klik dan de bovenkant op zijn plek (kleine "klik") en controleer dat hij stevig vast zit.
<b>De accu loskoppelen</b>	Trek de hendel op de accu naar boven en verwijder de accu.
<b>BEDIENINGSUNIT</b>	
<b>De bedieningsunit bevestigen</b>	Plaats de onderkant met beleid in de juiste hoek.
<b>De bedieningsunit verbinden</b>	Plug de verbindingsstekker rustig in de accu.
<b>Kabel moet niet tegen het wiel schuren</b>	Leg de route van de kabels uit. Plaats tijdens transport de magnetische verbindingsstekker op de bracket van de bedieningsunit.
<b>Leg de knoppen en de display uit</b>	Aan/uitknop, snelheidscontroller, accuindicatie, toeter, startonderbreker.
<b>Leg de functie van de wegzwenkbare arm uit (indien aanwezig)</b>	Zorg ervoor dat deze correct vastzit en beweegt.
<b>De begeleidersbediening herbevestigen (inden aanwezig)</b>	Leg de route van de kabels uit. Een adapterkabel is aanbevolen.

# CHECKLIST VOOR DE INSTRUCTIE VAN DE GEBRUIKER

Deze vakjes dienen bij de demonstratie te worden afgevinkt door de afleveraar

---

## TESTRIT

---

### **Aanzetten**

Druk op de knop, maak joystick los, leg de display uit.

---

### **De parkeerrem van de rolstoel afhalen**

Leg de handmatige parkeerrem uit.

---

### **De snelheid bepalen**

Uitsluitend stilstaand uitleggen!

---

### **De joystick gebruiken**

Altijd oefenen met een lage snelheid en in een vrije ruimte!

---

### **Verwijs naar de veiligheidsinstructies in de gebruikshandleiding**

---