
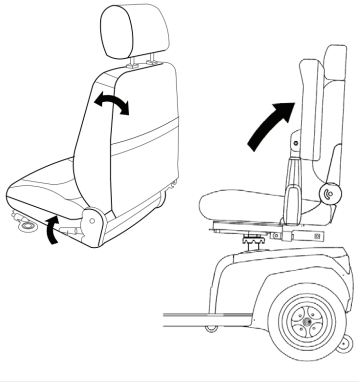
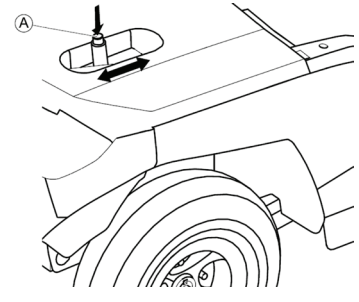
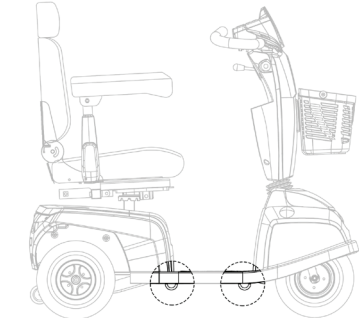
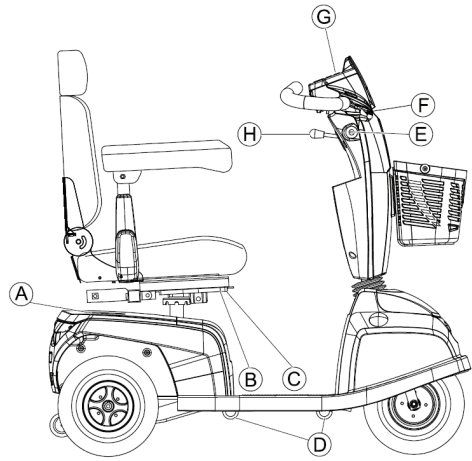


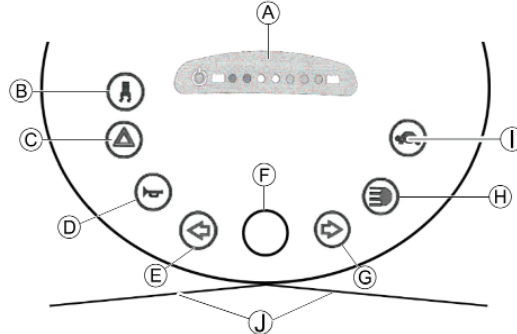

Yes, you can.®

Quick betjeningsvejledning for Invacare Orion Metro el-scooter

	Indstilling af sædeenheden <p>Med håndtaget i venstre side kan rygvinklen justeres frem/tilbage.</p> <p>Med håndtagene under sædet, kan sædet justere frem/tilbage, det kan roteres og afmonteres.</p> <p>Armlænen er opklappelige og justerbar i vinkel og bredde.</p> <p>Nakkestøtte kan justeres i højden.</p>
	Frikobling af motor <p>Frikoblingen af motoren sidder bagpå scooteren i højre side.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sluk for el-scooteren (nøgleafbryder).2. Tryk på den røde knap i toppen (A) på frikoblingshåndtaget.3. Skub udkoblingsarmen fremad. Motoren er nu koblet ud og el-scooteren kan skubbes med håndkraft.
	Transport af el-scooteren <p>El-scooteren kan transporteres i bil, med tog og fly uden begrænsninger.</p> <p>Før transport af el-scooteren skal det sikres, at motoren er koblet til, styreboksen er slukket og den er forsvarlig forankret/fastspændt i de dertil indrettede forankringspunkter.</p> <p>Se efter punkterne der er mærket med symbolet for forankringspunkter.</p>

	El-scooterens komponenter <p>A: Frikoblingshåndtag B: Sæde frem/tilbage (under sædet i højre side) C: Sæde drej og afmonter (under sædet i venstre side) D: Forankringspunkter ifm. transport E: Nøgleafbryder (tænd/sluk) F: Bremsenhåndtag (højre hånd) G: Betjeningspanel H: Greb til justering af ratstammens vinkel</p>
	Betjeningspanelet <p>A: Batterikapacitet og status B: Tænd/sluk for hastighedsreduktion (sænkning af hastighed i kurver) C: Advarselslamper D: Horn E: Venstre blinklys F: Hastighedsregulatorknop G: Højre blinklys H: Lys I: Kørsel med reduceret hastighed J: Speeder</p>

Dette er en kortfattet produktvejledning. For yderligere information om indstilling og betjening af **Invacare Orion Metro**, se venligst brugermanualen. Brugermanualen medfølger altid el-scooteren ved levering og kan ligesom øvrig dokumentation downloades på Invacares hjemmeside: www.invacare.dk