



Ossigeno senza compromessi

Il nuovo elegante concentratore di ossigeno *Invacare Perfecto₂* è progettato per soddisfare le richieste del paziente e del fornitore nel sempre più esigente mercato delle apparecchiature per la respirazione. Le ultime innovazioni nel campo del consumo energetico e della rumorosità sono evidenti nei minori costi di funzionamento e nel maggior comfort per il paziente. Il nuovo design si inserisce con discrezione nell'ambiente del paziente rispettando nel contempo prescrizioni fino a 5 litri al minuto. **Perfecto₂** combinato con il sistema **HomeFill® II*** è, in relazione alla sua durata complessiva, la soluzione a più basso costo nell'ambito delle apparecchiature per la respirazione.

*Per maggiori informazioni su **HomeFill II**, contattare Invacare.

Trusted Solutions, Passionate People





Performance silenziosa come un sussurro

Compatto e silenzioso, il nuovo elegante *Invacare Perfecto₂* può essere facilmente inserito nell'ambiente domestico. Nuove tecnologie hanno consentito di ridurre il suono del compressore rendendolo quasi impercettibile. Potrai vivere serenamente nel tuo ambiente familiare nella consapevolezza di ricevere ossigeno ininterrottamente.

Basso consumo energetico

Secondo la richiesta di emissione, intelligenti software regolano il sistema di pressione interno per un basso consumo energetico. Per un uso standard ciò equivale a 20 Watt/ora addizionali con un ulteriore risparmio sotto il già basso consumo medio di 300 Watt. Con il minimo consumo energetico garantito da *Perfecto₂*, Invacare fa da pioniere nella perfetta commistione fra tecnologia del risparmio e prestazioni di alto livello.

Affidabilità senza compromessi

Senza dover rigenerare il compressore per almeno cinque anni, hai la serenità di sapere che riceverai l'ossigeno che ti serve ogni volta che ne avrai bisogno. Grazie

alle ultime innovazioni nell'ambito della tecnologia e dei materiali forati, *Perfecto₂* è, in rapporto alla sua durata complessiva, il concentratore d'ossigeno per uso domestico a più basso costo.

Optional e Accessori



Affidabile rifornimento di ossigeno

Nessun compromesso: il compressore nella versione completa non necessita di alcuna manutenzione per cinque anni



Risparmio energetico

Rispetta l'ambiente grazie ad un software che riduce i consumi di energia



Facile da mantenere in efficienza

Apertura posteriore per mantenere l'efficienza del filtro



SensO₂ assicura al paziente un'alta purezza di ossigeno

Optional e Accessori



Design pensato per l'utente

Portabottiglia comodo da raggiungere e facile da monitorare. Pannello di controllo facilmente accessibile



Soluzione completa

Il concentratore portatile **XPO₂** con il concentratore stazionario **Perfecto₂** offrono una soluzione completa per la gestione delle patologie respiratorie.



Compatibile con il sistema HomeFill









Il vantaggio di riempire a casa le bombole trasportabili. (Modello: IOH200AW)









Flussometro pediatrico (optional)

Per pazienti caratterizzati da basso flusso da 50cc a 750 cc / min. (Modello: 1514913)

Dati Tecnici:

							
	305 mm	380 mm	585 mm	20,5 kg	230 V, 50 Hz	280 W @ ≤ 3 l/min max. 300 W	0.5 - 5 l/min

					
	87 - 96%	34.5kPa ± 10%	<37 dB (A)	Fino a 2500m	ISO8359, MDD

Sistema SensO₂

Concentrazione di ossigeno



sopra l'85%
- luce verde -

Normale

Concentrazione di ossigeno



tra il 73% e l'85%
- luce gialla -

Controllare il filtro e il livello di flusso



sotto il 73%
- luce rossa -

Contattare il servizio assistenza

Manutenzione

Per la revisione periodica consultare il nostro manuale d'uso.

Allarmi e sicurezza

- Allarme di perdita di potenza
- Interruttore salvavita
- Monitoraggio purezza dell'ossigeno SensO₂
- Valvole di sicurezza del compressore
- Autospegnimento del dispositivo ad alte temperature
- Rilevatori dei livelli di pressione
- Allarme in caso di decremento del flusso

Invacare Mecc San s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
Thiene (VI) - Italy
Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it

© 2015 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

Perfecto - IT - 10/2015



Yes, you can.®