



Alber® | **e-motion**®

Extrakraft till rullstolen



En manuell rullstol gör det möjligt att ta sig fram och främjar aktivitet. För de flesta rullstolsanvändare är det emellertid ofta omöjligt att få tillgång till alla områden i vardagen – även med tillräcklig fysisk styrka. Sluttningar, trottoarkanter, trösklar utgör ofta oöverstigliga hinder. **Alber e-motion M25** hjälper till att upprätthålla och till och med utöka möjligheterna till en aktiv livsstil och ger samtidigt en rad olika terapeutiska fördelar.



Ökad personlig frihet

Det räcker med ett lätt tag mot drivringarna för att aktivera elmotorerna som hjälper till med rullstolens framdrivning. **Alber e-motion** är som bäst då när man ska ta sig upp för backar eller när man kör långa sträckor. Litiumjonbatterierna ger maximal räckvidd och följaktligen ökar oberoendet för **e-motion**-användaren.

Rörelsesensorernas känslighet kan ställas in oberoende av varandra för vänster eller höger hjul. Användaren kan ansluta sina hjul till **e-motion** Mobility App. Denna App ger smarta funktioner i sitt grundutförande. Kvarvarande batterikapacitet, och fyra olika körprogram som några exempel. Utöver dessa gratisfunktioner så finns det betalfunktioner såsom återrullsfördröjning, farthållare (Se även DuoDrive) och ökad hastighet. Detta sammantaget ökar flexibiliteten ytterligare med **e-motion**.

Terapeutiska fördelar

Många personer upplever armsmärta och förslitningar efter långvarig användning av en manuell rullstol. **e-motion** hjälper till att förebygga sådana problem genom att minska belastningen på muskler och leder samtidigt som den sporrar till att röra sig.



Portabel och mångsidig

Tack vare Quick Release-systemet kan **e-motion** tas bort från rullstolen på nolltid. Med en vikt på endast 7,8 kg per hjul är **e-motion** ett av de lättaste aktiva drivanordningarna på marknaden. **e-motion** kan monteras på nästan vilken manuell rullstol som helst. Allt som krävs för att kunna installera **e-motion** är att man monterar några små fästen. Befintliga manuella hjul kan bytas ut mot e-motion-drivhjulet, vilket gör att rullstolen även i fortsättningen kan användas helt manuellt om man önskar.

Egenskaper



e-motion klar för transport

De kompakta och lätta komponenterna är enkla att transportera.



Drivring

Hjulen aktiveras då man tar tag om drivringarna. Hjulets känsligheten kan ställas in i 7 olika nivåer.



Batterier

Litiumjonbatterierna ger mycket bra räckvidd och lång livslängd. På/av-knappen fungerar som en laddningskontakt och har magnetisk anslutning.



Drivhjul

Lätta att lossa från rullstolen och finns i dimensionerna 22", 24" och 25".



Batteriladdare

Automatisk laddare med laddningsindikator och automatisk anpassning till nätspänningen.

Tillbehör



DuoDrive (Ingen eftermontering möjlig)

Med DuoDrive-kontrollenheten i driftläget kan e-motion enkelt växlas mellan traditionell körning där navmotorerna hjälper till att föra rullstolen framåt, eller Cruise-kontroll (Farthållare). Cruise-kontroll aktiveras genom att man för vridhjulet på kontrollenheten framåt. Med vridhjulet så ställer man in önskad hastighet. Vid stillastående så kan man välja och växla mellan körprofil 1 och 2 (Likt funktionen på ECS-fjärrkontroll).



ECS-fjärrkontroll

Visar batteriernas laddningsnivå och gör att **e-motion** kan slås på och av från sittande position. Erbjuder två körprofiler och aktiverar återrullsfördröjningen.



Tippskydd

Med uppställningsfunktion. Justerbara i höjd, vinkel och längd.



Hållare till ECS Fjärrkontroll

Med magnetisk låsmekanism.



Drivringsalternativ

Till **e-motion M25** finns det flera drivringsalternativ som alltid ger ett perfekt grepp, rostfritt, tetra, CarboLife Curve L, Quadro med Tetra-Gripp-beläggning.



Däckalternativ

Till **e-motion M25** finns det flera olika däck att välja mellan, Rightrun Marathon Plus ProSpeed tillverkat av massiv PU & Airless.

e-motion Mobility App

Tack vare den senaste Bluetooth-tekniken kan **e-motion M25** anslutas till alla vanliga smartphones. Detta möjliggör en mängd olika extrafunktioner och möjligheter som avsevärt ökar nyttan och användningsområdet för **e-motion**.

Funktionerna i e-motion M25 Mobility App är indelade i tre olika åtkomstområden:


- Professionell Sektion för fackmän – för specialiserade återförsäljare eller terapeuter (kostnadsfri)
- Körparametrarna för e-motion kan ställas in individuellt för varje rullstolsanvändare

Grundfunktion (kostnadsfri)

- Välj mellan fyra olika körprofiler
- Visning av batteristatus, hastighet och körsträcka
- Registrering och hantering av turer med hjälp av GPS-spårning
- Automatisk urladdning av batterier vid lagerhållning eller vid flygresor
- Visning av felmeddelanden med tips och lösningar

Mobility Plus-paketet

Mobility Plus-paketet (Betalfunktioner) ger åtkomst till en mängd olika extrafunktioner som erbjuder ännu fler fördelar med e-motion

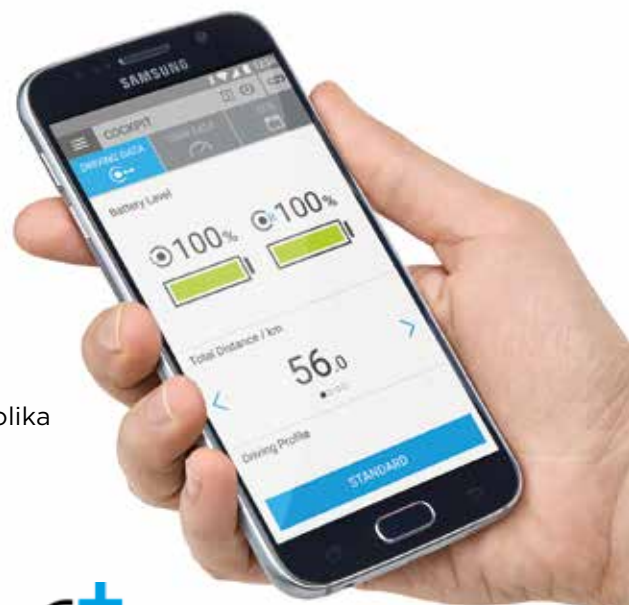

Hastighet
Ökar maxhastigheten från 6 km/h till 8,5 km/h



Fjärrkontroll
Fjärrstyrning av rullstolen när användaren inte sitter i den



Dragräknare
Räknar antalet drag som användaren tar under en registrerad tur



ECS
Tillhandahåller alla funktioner på ECS-fjärrkontrollen



easyNavi
Ger förslag på rutter utan hinder



Farthållare
Ger en konstant hastighet efter att systemet aktiverats via drivringarna



Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, såsom t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Hastighet	Körsträcka	Motoreffekt	Vikt	Max Brukarvikt
e-motion	 6 km/h 8,5 km/h tillval med Mobility Plus-paketet	 25 km (enligt ISO 7176)	 2 x 80 W	 15,6 kg (ett hjul: 7,8 kg)	 22" 125kg 24" & 25" 150 kg



Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden

