

Anvendelse af ledsagerstyring (IDC) sammen med LiNX REM400 / REM500.

IDC-ledsagerstyring & LiNX REM400 / REM500 med eksternt joystick

Det er muligt at tænde styresystemet (stolen) direkte på ledsagerstyringen (1)
=> Ledsagerstyringen er klar til at køre el-kørestolen.

Alternativt er det muligt at tænde styresystemet (stolen) på LiNX REM400 (2) / REM500 (3) og derefter skifte over til IDC-ledsagerstyringen.

=> Ledsagerstyringen er klar til at køre el-kørestolen.

IDC-ledsagerstyring & LiNX REM500 uden eksternt joystick

Styresystemet (stolen) SKAL tændes på LiNX REM500 (3) og derefter skiftes over til IDC-ledsagerstyringen.

=> Ledsagerstyringen er klar til at køre el-kørestolen.

Bemærk!

Tændes styresystemet ved først at trykke på IDC-ledsagerstyringen (1), vil styresystemet melde "fejl". For at afhjælpe fejlen, sluk da styresystemet ved at trykke på IDC-ledsagerstyringen (1). Start efterfølgende systemet op ved at følge ovenstående vejledning for REM500 uden eksternt joystick.



IDC-ledsagerstyring



LiNX REM400



LiNX REM500

Yderligere information om indstilling og betjening af Invacares styrebokse til elektriske kørestole, se venligst brugermanualen. Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på Invacares hjemmeside: www.invacare.dk

Quickguide for Invacare intuitiv ledsagerstyring (IDC)




Opbygning af ledsagerstyringen

- 1 Indikator for bakgear aktiveret
- 2 Indikator for kørestolsbrugerstyring
- 3 Hastighedspotentiometer
- 4 Indikator for ledsagerstyring
- 5 Knap til ændring af styremetode (bruger/ledsager)
- 6 Til/Fra-indikator
- 7 Trykknop til valg af fremadgående gear/bakgear
- 8 Styrehåndtag
- 9 På undersiden: Knap til kørsel/nødstop




Sådan styrer du kørestolen med ledsagerstyringen

Den elektronik, der findes i håndtaget (1), registrerer de bevægelser, som ledsageren udfører med hånden. Et let tryk på håndtaget til venstre eller højre omsættes til en kørselskommando til drivhjulene, så at der kan køres gennem sving uden større kraftanstrengelser.

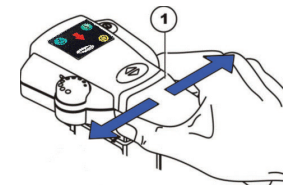

Hastighed

Jo mere du trykker på speederen, jo hurtigere kører el-kørestolen.

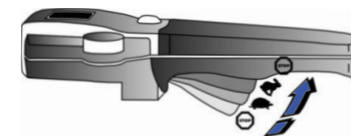

Bevægelsesretning

Ved kørsel fremad skal håndtaget bevæges i modsatte retning af den køreretning, man ønsker, kørestolen skal køre. Ved kørsel bagud følger el-kørestolen håndtagets bevægelser.

